



Hopla  
 Sprängskiss/Reservdelar  
 Exploded view/ Spareparts

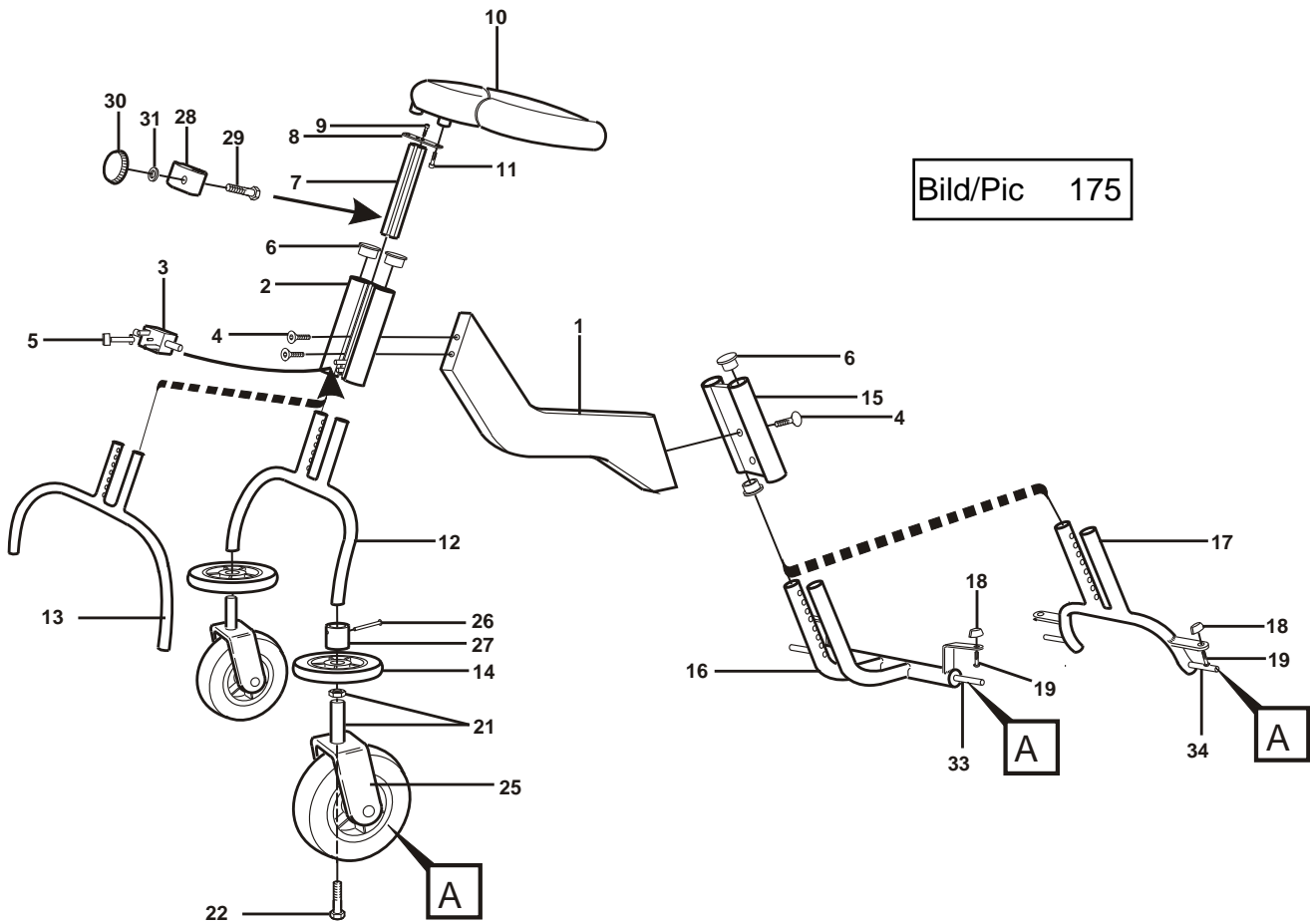

Bild/Pic 175

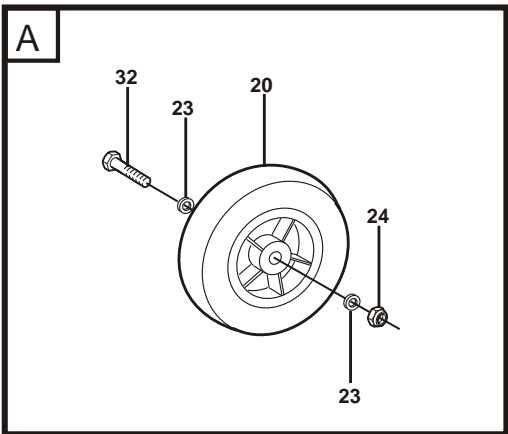


# RvS ALVEMA

## Hopla S/L

Reservdelar / Spare Parts

Utg/Issue	2005-01-12 Rev A	Typ av produkt	Type of product	
Bild/Pic	nr 175	Hopla S/L	Hopla S/L	
Pos	Art.nr:	Benämning:	Description:	Number
Fig	Part no:			Antal
1	675001-2000	mellandel gjuten	middlepart	1
2	375002-1000	främre profil svart	front fork black	1
3	275002-1000	låsning höjd gaffel fram/bak	locking device front/rear fork	2
4	7MF6S-8*20	skruv F6S M8*20 FZB	screw F6S M8*20 FZB	4
5	60201700	justeringsnyckel	adjustment key	1
6	7IKP-38*34	ändavslutn.	end cap	4
7	675002-4300	alu-profil fäste	aluminium profile	1
8	375002-4700	fäste	holder	1
9	7MC6S-8*20	skruv MC6S M8*20 FZB	screw MC6S M8*20 FZB	2
10	675002-4000	ring gjuten	supportring	1
11	7MC6S-6*20	skruv MC6S M6*20 FZB	screw MC6S M6*20 FZB	2
12	375003-3000	främre gaffel small gul	front fork small yellow	1
13	375004-3000	främre gaffel large gul	front fork large yellow	1
14	675002-7300	avvisarhjul 150 mm svart	wheel 150 mm black	2
15	375002-1500	bakre profil svart	rear profile black	1
16	375003-5000	bakre gaffel small gul	rear fork small yellow	1
17	375004-5000	bakre gaffel large gul	rear fork large yellow	1
18	7CT476-M6	vingvred 32*13 M6S	locking device 32*13 M6S	2
19	7 MRX -6*30	spårskruv RX M6*30 FZB	screw RX M6*30 FZB	2
20	675002-7100	hjul 125 mm gul/svart	wheel 125 mm yellow/black	4
21	675002-7900	kullager 8/35+mutter	ball bearing 8/35+bolt	2
22	7 M6S.8*45	skruv M6S M8*45 FZB	screw M6S M8*45 FZB	2
23	7BRB- 8,4*16	bricka BRB 8,4*17 FZB	washer BRB 8,4*17 FZB	11
24	7 locking M8L	låsmutter Din 985 M8 FZB	bolt Din 985 M8FZB	6
25	375002-7200	länkhjulsgaffel	front fork	2
26	7SK6SS-M6*6	stoppskruv SK6SS-M6*6	screw SK6SS-M6*6	2
27	375001-7300	stoppring	stop ring	2
28	675002-4400	AL-profil låsklack	alu profile	1
29	375004-9100	skruv 8*30	screw 8*30	1
30	720001-3100	ratt R 50*20/M8 svart	knob black	1
31	325002-1250	mellanring FZB	middle ring FZB	1
32	7M6S-8*60	skruv M6S M8*60 FZB	screw M6S M8*60 FZB	2
33	7MC6S-8*45	skruv MC6S M8*45 FZB	screw MC6S M8*45 FZB	2
34	7M6S-8*70	skruv M6S M8*70 FZB	screw M6S M8*70 FZB	2

Bild / Pic 176

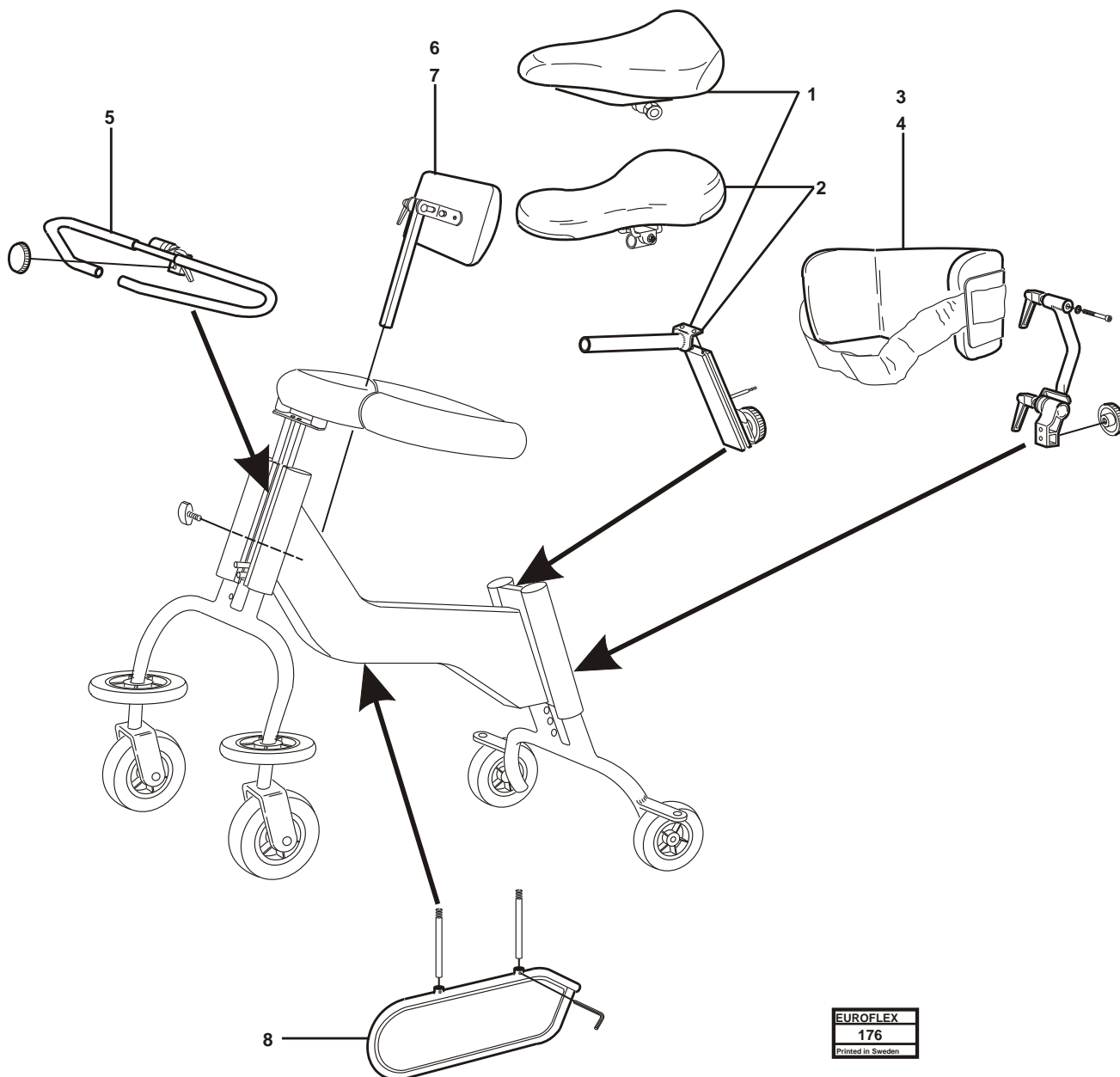

EUROFLEX  
176  
Printed in Sweden

# RvS ALVEMA

## Hopla S/L Tillbehör / Accessories

Utg/Issue	2005-01-12 Rev A	Typ av produkt	Type of product	
Bild/Pic	nr 176	Hopla S/L	S/L	
Pos	Art.nr:	Benämning:	Description:	Number
Fig	Part no:			Antal
1	6020 1100	cykel-sadel m. fäste	bicycle-saddle w.holder	1
2	6020 1105	banan-sadel m. fäste	banana-saddle w. holder	1
3	6020 1400	ryggstöd hxb 100x220	back rest wxh 100x220 w.h.	1
4	6020 1405	ryggstöd hxb 130x280	back rest wxh 130x280 w.h.	1
5	6020 1300	handbåge m. fäste	griptrail w. holder	1
6	6020 1200	magstöd bxh 120x120	stomach supp wxh 120x120 w.h.	1
7	6020 1205	magstöd bxh 130x230	stomach supp wxh 130x230 w.h.	1
8	6020 1500	bendelare m. fäste	leg divider w. holder	1