



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# PIXI

BÄCKENSELE · PELVIC HARNESS · BECKENGURT

## Bäckensele Pixi

Lägg bäckenselen på sitsen som bilden visar (bild 1). Drag det bredare bandet genom springan mellan rygg och sits. Träd bandet runt röret på sitsens undersida och fäst det med kardborrelåsningen. (bild 2). Fäst det tunnare bandet runt samma rör. (bild 3)



## Pelvic harness

Put the pelvic harness on seat as shown (pic. 1)  
Pull the broad strap through the gap between back and seat. Attach it around the bar under the seat and back to the velcro locking (pic 2)  
Attach the thinner strap around the same bar (pic.3)

## Beckengurt:

Legen Sie den Beckengurt, wie in Abb.1 gezeigt, auf die Sitzfläche.  
Führen Sie das breite Gurstück durch den Schlitz zwischen Rücken und Sitzfläche. Befestigen Sie den Gurt an dem Bogen unter dem Sitz und führen Sie das Gurtende zurück zum Klettverschluss. (Abb.2)

Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# PIXI

ANATOMISKT NACKSTÖD · HEAD SUPPORT · KOPFSTÜTZE

## Nackstöd Pixi

Markera kuddens höjd. Sprätta upp en slits i sidomarkeringen. Stick in banden genom dynan (bilden) och fäst på baksidan. Obs! gör slitsarna i dynan ca 4 cm längre nedåt eftersom kudden ligger lägre med fälld rygg.

## Head support

Mark the desired height. Cut a slide in the "buttonholes". Pull the straps through (see picture) and attach on the back side of cushion. OBS! make the slides 4 cm longer downwards. The head support has a lower position with tilted back rest.

## Kopfstütze

Markieren Sie die gewünschte Höhe. Schneiden Sie einen Schlitz in die präparierten "Knopflöcher". Führen Sie die Gurte durch die Schlitz (siehe Abb.) und befestigen Sie sie an der Kissen-Rückenseite.

**Achtung!** Machen Sie die Schlitz 4 cm länger nach unten, da die Kopfstütze eine niedrigere Position benötigt bei Verstellung des Rückenwinkels.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# PIXI

KORG · BASKET · KORB

## Korg Pixi

Träd korgens runda krokar runt bakre sitsröret (se bild)  
Spänn fast den främre bågen i hålen på respektive fällningsstag.

## Basket

Hook the basket round the rear frame. (see picture)  
Fasten the metal bar to the holes in the folding bars on each side.

## Korb

Befestigen Sie den Korb durch Einhaken am hinteren Rahmen. (siehe Abb.)  
Klicken Sie die vorderen Metallstangen des Korbes in die Löcher der Falt-Elemente, unter die Sitzeinheit.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# TRAX

SUFFLETT/REGNSKYDD · HOOD/RAIN COVER · WETTERDASCH/REGENVERDECK

## Sufflett och regnskydd:

Spänn ut suffletten och fäst den mot ramen (se bild 1)

Trä regnskyddet över fotstödet (se bild 2) och fäst det upptill i hållorna på suffletten (bild 3)

## Hood and rain cover:

Attach the hood to the frame as shown (pic. 1)

Pull the rain cover over the foot rest (pic. 2) and button it to the brackets on the hood (pic.3)

## Wetterdach und Regenverdeck

Befestigen Sie das Wetterdach am Rahmen, (Abb. 1).

Ziehen Sie das Regenverdeck über die Fuss-stütze (Abb.2) und verköpfen Sie es mit dem Regenverdach. (Abb.3)



Alvema AB

Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta

Telefon: 0472-431 30

Telefax: 0472-471 07

Alvema AB

P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden

Telephone: +46 471 431 30

Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB

Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden

Telefon: +46 472 431 30

Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# TRAX

NACKSTÖD · HEADREST · NACKENSTÜTZE

## Nackstöd

De vinklade nackstöden fästes med skruvar genom dyna och ryggplatta.  
Det anatomiska nackstödet med kardborreband sättes på lämplig höjd runt ryggen.

## Headrest

The 2-parted headrest is attached by screws through cushion and backrest.  
The anatomic headrest is placed on individual height around the back.

## Nackenstütze

Die 2-teilte Nackenstütze wird mit Schrauben durch Polster und Rückenlehne befestigt. Die anatomische Nackenstütze wird in geeigneter Höhe um die Rückenlehne herum befestigt.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR  
MAX · TRAX  
200C · 400C · PIXI  
SVANKSTÖD · LUMBAR SUPPORT · LENDENSTÜTZE

### Svankstöd

Svankstödet motverkar trötthet och ger barnet möjlighet till bättre uppresning. Placeras på lämplig höjd med hjälp av kardborrebandet mot ryggplattan. (bild 16)

### Lumbar support

The lumbar support counteracts fatigue and gives the child a chance to achieve better extension. Attach with velcro on the backrest plastic base at a suitable height. (f 16)

### Lendenstütze

Eine Lendenstütze wirkt Ermüdung entgegen und ermöglicht dem Kind ein besseres, aufrechtes Sitzen. Wird in geeigneter Höhe mit Hilfe des Klettverschlussbandes an der Rückenlehnenplatte angebracht (Abb. 16).



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# TRAX

ABDUKTIONSLOSS · ABDUCTOR · BEINTEILER

## Abduktionskloss

Skär upp slitsen i dynans framkant. Fäst abduktionsklossen genom dyna och sittplatta med snäpplåset på sitsens undersida.

## Abductor

To be attached through cushion and seat with the snap lock underneath the seat.

## Beinteiler

Wird durch das Polster und das Sitzkissen mit Hilfe des Schnappverschlusses auf der Unterseite des Sitzes befestigt.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR  
MAX · TRAX  
200C · 400C · PIXI  
VÄSTSELE · VEST HARNESS · WESTE

### Västsele

Västen fästes upptill genom att de långa banden fästes mot ryggens kardborreband.

Höftbältet träs igenom västens nedre del. (bild 14)

Bältet ska spännas åt fast för att undvika glidning i vagnen.

### Vest harness

The vest is attached to the back with two straps passed through the slots on the backrest and fixed with velcro.

Position the lapbelt through the broad loops on the vest waist.. (f 14)

Carefully tighten the belt to avoid sliding forward in the pushchair.

### Weste

Die Weste wird oben durch Befestigung der langen Bänder an den Klettverschlußbändern der Rückenlehne befestigt. Der Hüftgurt wird durch den unteren Teil der Weste gefädelt. (Abb. 14).

Der Gurt muß fest angezogen werden um Gleiten im Wagen zu verhindern.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# HOPLA

HANDBÅGE · GRIP RAIL · HANDBÜGEL

## Handbåge

Handbågen ger barnet en mer upprät hållning och styrförmåga i Hopla. Fästplattan fästes i bälringstolpen. (bild 1) Obs! Den lilla skruven måste lossas först. Vinklingen regleras med vredet på vänster sida. (bild 2)

## Grip rail

The grip rail gives the child a more upright position and an ability to steer Hopla. Attach to the trunk support ring mounting (f 1) Note! The little screw has to be removed first. The angle is adjusted by the handle on the left side. (f 2)

## Handbügel

Der Handbügel gibt dem Kind im Hopla eine aufrechtere Haltung und ein besseres Lenkvermögen. Die Befestigungsplatte wird am Rumpfbügel befestigt (Abb. 1). Achtung! Der kleine Schraub muß erst herausgeklopft werden. Die Neigung wird mit dem Griff auf der linken Seite eingestellt (Abb. 2).



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# HOPLA

SADEL · SADDLE · SATTEL

## Sadel

Trä sadeln på det horisontella röret, fäst med stoppskruven (bild 1).  
Placera fäströret i profilen- välj lämplig höjd- drag åt ratten. (bild 2)

## Saddle

Put the saddle on the metal bar, fix with the stop screw. (f 1)  
Fit the bracket in the profile, choose proper height, fix the knob. (f 2)

## Sattel

Den Sattel auf das horizontale Rohr schieben und mit der  
Stopschraube befestigen (Abb. 1).  
Das Befestigungsrohr im Profil anbringen, die geeignete Höhe wählen  
und das Handrad anziehen (Abb. 2).



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# HOPLA

HÖFTSTÖD · PELVIC SUPPORT · BECKENSTÜTZE

## Höftstöd


Fästskruven träs in i bakre profilen över sadelfästet. (bild 1). Ställ in lämplig höjd, drag åt ratten. Höftstödet vinklas med vredet på höger sida. (bild 2)

## Pelvic support

Attach the screw into the rear profile over the saddle bracket. (f 1)  
Adjust to suitable height, tighten the knob. The pelvic support is angled by the handle on the right side. (f 2)

## Beckenstütze

Die Befestigungsschraube in das hintere Profil über der Sattelbefestigung einschieben (Abb. 1). Die geeignete Höhe einstellen und das Handrad festziehen. Die Beckenstütze wird mit dem Griff auf der rechten Seite geneigt (Abb. 2).

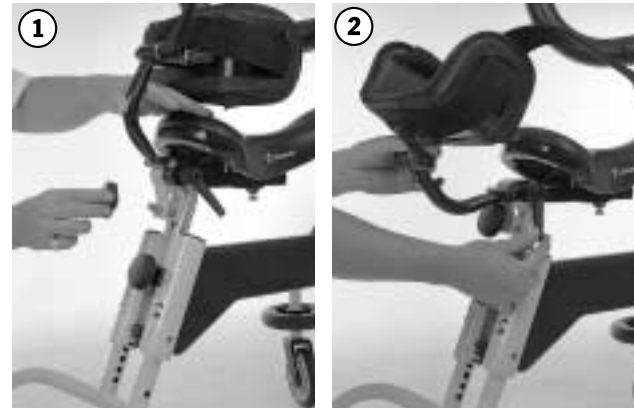

Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# HOPLA

MAGSTÖD · STOMACH SUPPORT · BAUCHSTÜTZE

## Magstöd

Magstödet placeras i hålet på ramens framkant. Vinkling och djup ställs in med vredet på höger sida.

## Stomach support

The stomach support is placed in the hole at the front of the frame. The angle and depth is adjusted by the handle at the right side.

## Bauchstütze

Die Bauchstütze in der Öffnung im Vorderteil des Rahmens anbringen. Neigung und Tiefe werden mit dem Griff auf der rechten Seite eingestellt.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# HOPLA

BENDELARE · LEG DIVIDER · BEINSPREIZER

## Bendelare


Fäströren skruvas in i hålen på undersidan av ramen. (bild 1)  
Plastskivan träs på med den runda sidan framåt och fästsruvarna dras åt med insexnyckel. (bild 2)

## Leg divider

The metal bars are screwed into the holes underneath the frame (f 1)  
The plastic board is attached with the rounded part forward and fixed in place by the Allen grub screws ( f 2)

## Beinspreizer

Die Befestigungsrohre in die Öffnungen auf der Unterseite des Rahmens einschrauben (Abb. 1). Die Kunststoffplatte mit der runden Seite nach vorne einführen und die Befestigungsschrauben mit dem Inbusschlüssel festziehen (Abb. 2).

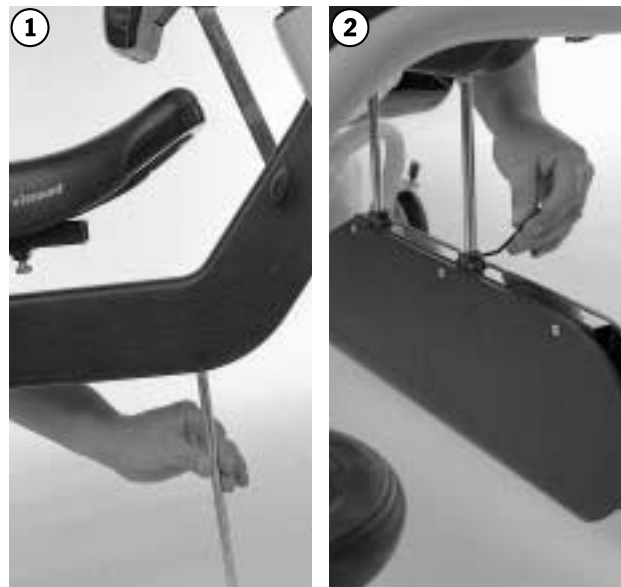

Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# HOPLA

PÅSKJUTSHANDTAG · ATTENDANTS HANDLE · SCHIEBEGRIFF

## Påskjutshandtag

Skruren lossas helt. Fästet placeras runt bakre ramen.  
Skruren drages åt hårt.

## Attendants handle

Loosen the screw completely. The bracket is placed around the frame.  
Tighten the screw fully.

## Schiebegriff

Die Schraube völlig lösen. Die Halterung um den hinteren Rahmen herum anbringen. Die Schraube fest anziehen.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# MAX

NACKSTÖD · HEADREST · NACKENSTÜTZE

## Nackstöd

Nackstödet fästes runt ryggen på lämplig höjd.

## Headrest

The headrest is attached around the backrest.

## Nackenstütze

Die Nackenstütze wird in geeigneter Höhe um die Rückenlehne herum befestigt.



Alvema AB

Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta

Telefon: 0472-431 30

Telefax: 0472-471 07

Alvema AB

P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden

Telephone: +46 471 431 30

Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB

Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden

Telefon: +46 472 431 30

Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR  
MAX · TRAX  
200C · 400C  
VÄSTSELE · VEST HARNESS · WESTE

### Västsele

Västens axelband regleras med kardborreband på ryggens baksida.  
Höftbältet träs in i västens nederkant. Bältet ska spännas åt fast för att undvika glidning framåt i vagnen.

### Vest harness

The shoulder straps of the vest are attached with velcro through the slots on the backrest.  
Position the lap belt through the broad loops on the vest waist.  
Tighten the belt carefully to avoid sliding forward in the pushchair.

### Weste

Die Schulterbänder der Weste werden mit den Klettverschlusßbändern auf der Rückseite der Rückenlehne eingestellt. Der Beckengurt wird am unteren Rand der Weste eingefädelt. Der Gurt muß fest angezogen werden um Nachvornrutschen im Wagen zu vermeiden.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR  
**MAX · TRAX**  
**200C · 400C**  
BÄCKENSELE · PELVIC HARNESS · BECKENGURT

### Bäckensele

Selen läggs på sitsen, banden fästs runt ryggen. De tunnare banden fästes likaså runt ryggen. Använd snäpplåsen när barnet placeras i vagnen.

### Pelvic harness

The harness is placed on the seat, straps attached over the thighs towards the back. The thinner straps fix around the back.

### Beckengurt

Legen Sie den Gurt auf den Sitz und ziehen Sie die Bänder um die Rückenlehne. Die schmaleren Bänder werden auch um die Rückenlehne gelegt. Benutzen Sie die Schnappverschlüsse, wenn Sie das Kind in den Wagen setzen.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

MAX · TRAX

200C · 400C · PIXI

SVANKSTÖD · LUMBAR SUPPORT · LENDENSTÜTZE

### Svankstöd

Svankstödet motverkar trötthet och ger barnet möjlighet till bättre sträckning. Fäst kardborrebandet på lämplig höjd.

### Lumbar support

The lumbar support counteracts fatigue and gives the child a chance to achieve better extension. Attach with velcro on the backrest plastic base at a suitable height.

### Lendenstütze

Die Lendenstütze wirkt Ermüdungen entgegen und gibt dem Kind die Möglichkeit zu besserer Streckung. Befestigen Sie das Klettverschlußband in geeigneter Höhe.



Alvema AB

Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta

Telefon: 0472-431 30

Telefax: 0472-471 07

Alvema AB

P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden

Telephone: +46 471 431 30

Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB

Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden

Telefon: +46 472 431 30

Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# MAX

SUFFLETT/REGNSKYDD · HOOD/RAIN COVER · WETTERDASCH/REGENVERDECK

### Sufflett och regnskydd:

Placera sufflettfastet runt armstödsröret. Spänn till med vredet (se bild 1). Reglera sufflettens vinkel med ratten (bild 2).

Träd regnskyddet över fotstödet. (se bild 3)

Fäst regnskyddets knappar i hållorna i suffletten. (se bild 4)



### Hood and Rain cover

Place the bracket around the arm support bar. Turn the handle (picture 1).

Adjust the angle with the black knob (picture 2)

Pull the cover over the foot rest. (pic. 3)

Attach it to the hood as shown (pic.4)



### Wetterdach und Regenverdeck:

Legen Sie die Klammer um den Führungsbogen. Drehen Sie den Griff (Abb.1). Stellen Sie jetzt den gewünschten Winkel mit Hilfe des schwarzen Knopfes ein.

Ziehen Sie das Regenverdeck über die Fuss-stütze (Abb. 2) und verknöpfen Sie es mit dem Wetterverdach (Abb 3).

Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# BUBBLE

SÄKERHETSÄLTE · SECURITY BELT · SICHERHEITSGURT

## Säkerhetsbälte

Träs över ryggen till lämplig höjd.

## Security belt

To be pulled over the back as shown in picture

## Sicherheitsgurt

Wird in geeigneter Höhe über die Rückenlehne gezogen.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# BUBBLE

HUVUDSTÖD · HEADREST · KOPFSTÜTZE

## Huvudstöd

Fästes med kardborreband runt ryggen.

## Head rest

To be attached by velcro around the back.

## Kopfstütze

Wird mit Klettverschußband um die Rückenlehne herum befestigt.



Alvema AB

Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta

Telefon: 0472-431 30

Telefax: 0472-471 07

Alvema AB

P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden

Telephone: +46 471 431 30

Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB

Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden

Telefon: +46 472 431 30

Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# BUBBLE

BÄCKENSELE · PELVIC HARNESS · BECKENGURT

## Bäckensele

Fästes med kardborrebanden runt ryggen. De tunnare banden fästes likaså runt ryggen. Använd snäpplåsen när barnet placeras, ställ in lämplig längd på banden.

## Pelvic harness

To be attached with velcro straps around the back. The thinner straps are also folded around the back.  
Use the buckles when placing the child in the chair. Adjust the ribbons to suitable length.

## Beckengurt

Wird mit Klettverschlußband um die Rückenlehne herum befestigt. Die schmalere Bänder werden auch um die Rückenlehne herum befestigt. Verwenden Sie die Schnappverschlüsse wenn Sie das Kind hineinsetzen und stellen Sie die Bänder in geeigneter Länge ein.



Alvema AB  
Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta  
Telefon: 0472-431 30  
Telefax: 0472-471 07

Alvema AB  
P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden  
Telephone: +46 471 431 30  
Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB  
Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden  
Telefon: +46 472 431 30  
Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# BUBBLE

KNÄKUDDE · KNEE PILLOW · KНИЕKISSEN

## Knäkudd

Fästes med kardborrebandet runt sitsen.

## Knee pillow

Attached with velcro around the seat.

## Kniekissen

Wird mit Klettverschußband um den Sitz herum befestigt.



Alvema AB

Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta

Telefon: 0472-431 30

Telefax: 0472-471 07

Alvema AB

P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden

Telephone: +46 471 431 30

Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB

Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden

Telefon: +46 472 431 30

Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# A200 CLASSIC

HANDBÅGE · GRIP RAIL · HANDBOGEN

## Handbåge

Fäst handbågen mot ramen som bilden visar.

## Grip rail

Attach the grip rail to the frame as shown on picture

## Handbogen

Befestigen Sie den Handbogen am Rahmen, wie in der Abbildung gezeigt.



Alvema AB

Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta

Telefon: 0472-431 30

Telefax: 0472-471 07

Alvema AB

P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden

Telephone: +46 471 431 30

Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB

Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden

Telefon: +46 472 431 30

Telefax: +46 472 471 07



TILLBEHÖR · ACCESSORIES · ZUBEHÖR

# A200 CLASSIC

SUFFLETT · RAIN HOOD · WETTERDACH

## Sufflett

Fäst suffletten mot ramen som bilden visar.

## Rain hood

Attach the hood to the frame as shown on picture.

## Wetterdach

Befestigen Sie das Wetterdach am Rahmen, wie in Abbildung.



Alvema AB

Postadress: Box 115, 342 22 Alvesta

Telefon: 0472-431 30

Telefax: 0472-471 07

Alvema AB

P.O. Box 115, SE-342 22 Alvesta, Sweden

Telephone: +46 471 431 30

Telefax: +46 472 471 07

Alvema AB

Box 115, SE-342 22 Alvesta, Schweden

Telefon: +46 472 431 30

Telefax: +46 472 471 07