
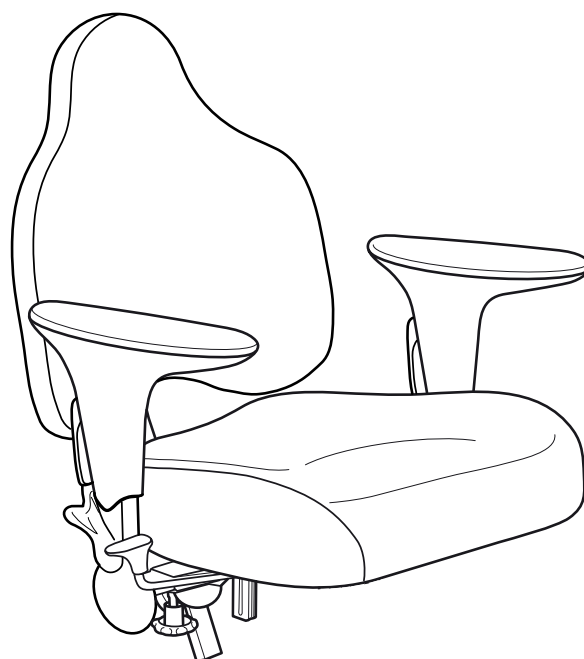


EUROFLEX[®]

Kontorstolsete

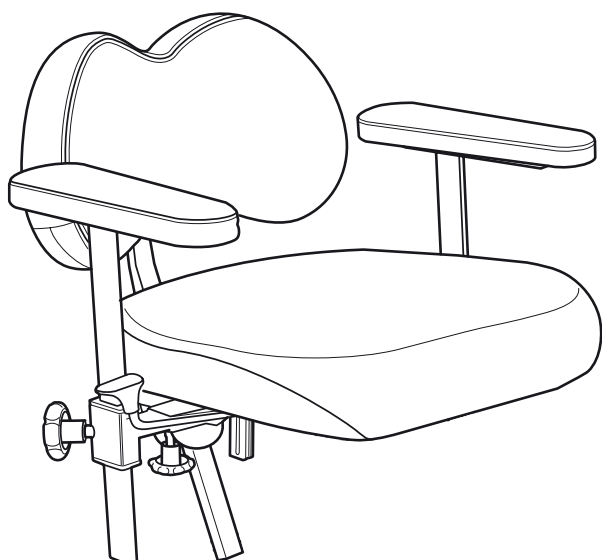

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse	2
Kontakt	2
Innledning	3
Montering	3
Klasse.....	3
Sikkerhetsforskrifter	3
Service/Garanti	4
Rengjøring	4
Funksjon	4
Oppbevaring	4
Merking	5
Oversikt	6
Ryggstøtte.....	7
Sete	8
Setevinkel/Setetilt	8-9
Armlene	10
Fotstøtte	11
Teknisk informasjon	12

Har du spørsmål eller behov for hjelp med produktet, ber vi deg i første omgang kontakte den lokale leverandøren (hjelpemiddelsentralen).



Eurovema AB

Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved
Sverige/Sweden/Schweden
Tel/Phone: +46 371 390 100


www.eurovema.se
info@eurovema.se

INNLEDNING

Vi gratulerer deg med valget av kontorstolsete! Vi håper du blir fornøyd med dette Euroflex-produktet fra Eurovema, som er konstruert og produsert i Gislaved i Sverige. Kontorstolsetet er konstruert med tanke på å oppfylle høye krav til ergonomi, sittekomfort og funksjon. Setet er beregnet for personer med nedsatt funksjonsevne, som sitter mye og lenge i stolen. Kontorstolen har en rekke justeringsmuligheter for å kunne tilpasses ethvert behov. Les bruksanvisningen nøye, slik at du får utnyttet alle mulighetene til setet.

MONTERING

- Åpne emballasjen og kontroller at det ikke har oppstått skader under transport.
- Kontorstolsetet leveres med ryggstøtten og utfellbare armlener umontert! Ryggstøtten og armlenene har stoppskruer for å hindre at de kan løsne ved justering til endeposisjonene. Krav iht. SS-EN1335.
- Monter armlenene og ryggstøtten som vist på bildet, og trekk til knottene (1).
- Monter medfølgende skruer (2 og 3).

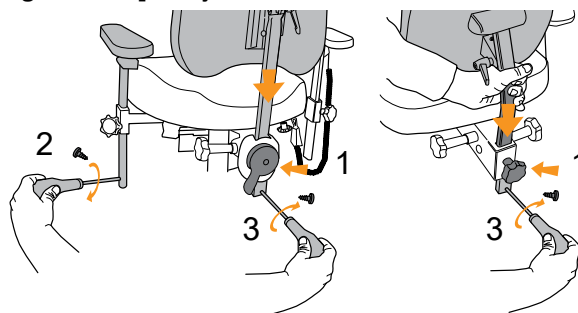

KLASSE

- Kontorstolsetet tilhører klasse 1 og er bare beregnet for innendørs bruk.
- Maks. brukervekt: 125 kg.
- Ved tilpasning for tyngre brukere, kontakt Eurovema.
- Levetid ti (10) år ved normal bruk.



Dette symbolet benyttes for å varsle om klemrisiko og situasjoner der vi peker på risiko.

SIKKERHETSREGLER

- Les nøye gjennom bruksanvisningen før stolen tas i bruk.
- Vær forsiktig ved manuell justering av setevinkel mens du sitter i stolen, da det kan gi fare for fall ut av stolen.
- Hvis du oppdager skader eller endringer i stolens funksjon, skal serviceinstansen (hjelpemiddelleverandøren) kontaktes straks.
- Vær nøye med å trekke til skruer, knotter og spaker ordentlig etter fullført justering.
- Pass på at ikke skruer eller deler på kontorstolsetet løsner og dermed utgjør en sikkerhetsrisiko. Kontakt i så fall serviceinstansen.
- Service, vedlikehold og andre tekniske tiltak skal bare utføres av personale som er autorisert av Eurovema.
- Kun originaldelar fra Eurovema skal brukes ved reparasjon.
- Stolen skal ikke utstyres med tilbehør eller komponenter som ikke er godkjent av Eurovema.
- Ikke overskrid angitt maks. brukervekt på stolen.
- Kontroller at stoppskruene er montert ved festet av armlenene og ryggstøtten. De forhindrer at armlener eller ryggstøtte kan løsne ved justering av endeposisjon. Krav i henhold til standard SS-EN1335.



Stol med regulerbar setetilt skal være i fastgjort stilling når man setter seg i eller går ut av stolen.

SERVICE/GARANTI

Hvis kontorstolsetet brukes mye, dvs. hver dag, bør det leveres til årlig service. Dette for å kontrollere at setets funksjon og sikkerhet blir ivaretatt gjennom hele levetiden. Ved behov for service kontaktes i første omgang den lokale hjelpemiddelsentralen.

Våre produkter har 2 års garanti for produksjonsfeil/skade. Unntak for trekk, hjul og batterier, som har 1 års garanti. Normal slitasje er ikke grunnlag for godkjent garanti. Vi anbefaler kundene våre å bruke produktet i henhold til bruksanvisningen.

Ved feil eller behov for service på produktet ber vi deg kontakte et autorisert verksted eller Eurovema. Eurovema forbeholder seg retten til endringer.

RENGJØRING

Tørk av flatene på kontorstolsetet med en klut som er lett fuktet med et mildt oppvaskmiddel. Stolen skal stå på et plant underlag mens den tørker. Setetrekket kan rengjøres med et av tøyvaskemidlene som finnes på markedet. Overtrekk kan vaskes i maskin på 60°.

FUNKSJON

Eventuelle løse skruer må trekkes til og slark i deler av stolen utbedres umiddelbart, da det kan påvirke sikkerheten. Kontakt din lokale hjelpemiddelsentral eller produsenten hvis du har spørsmål eller behov for hjelp.

Vær påpasselig med å alltid trekke til knotter og skruer etter at setet er justert.

OPPBEVARING

Kontorstolsetet skal oppbevares i et tørt og romtemperert miljø. Unngå at stolen utsettes for høy varme, sterk kulde og intensiv sol. Metallflater kan bli svært varme hvis de utsettes for solskinn. Ved sterk kjøling må stolen oppnå romtemperatur før bruk. Stolen skal heller ikke utsettes for vann, andre væsker eller kjemikalier.

ETIKETT

Etiketten på kontorstolen inneholder all viktig teknisk informasjon.

1. Produktnavn
2. Artikkelnummer
3. Serienummer
4. Produksjonsdato
5. Maks. brukervekt
6. CE-merking
7. Produsentens navn
8. Strekkode





CE-MERKING



Dette produkt er CE-merket i henhold til direktiv 93/42/EØF. Du finner CE-merket på etiketten. Testet og godkjent i henhold til direktiv EN1335-1, -2, -3 og EN-60601-1 og EN 60601-1-2.

OVERSIKT


- 1) Ryggstøtte
- 2) Armlene
- 3) Sete
- 4) Breddejustering armlene
- 5) Høydejustering sete
- 6) Høydejustering armlene
- 7) Høydejustering ryggstøtte
- 8) Ryggvinkling
- 9) Justering av setedybde/vinkel

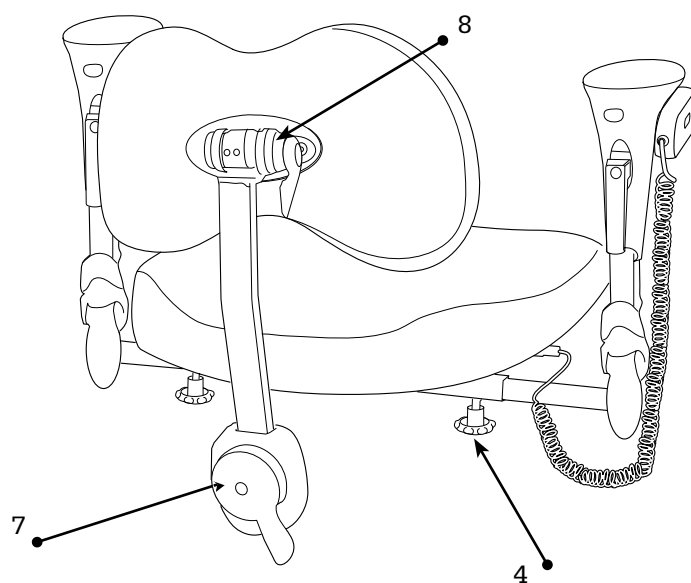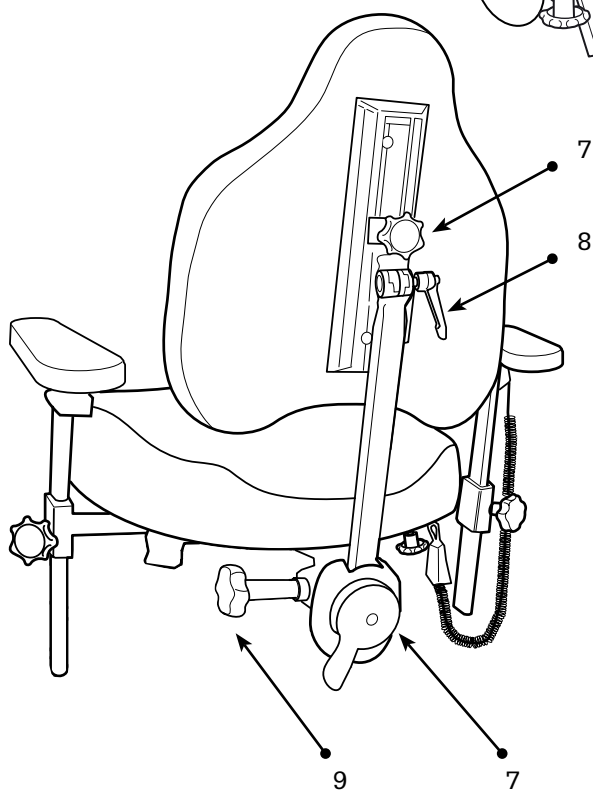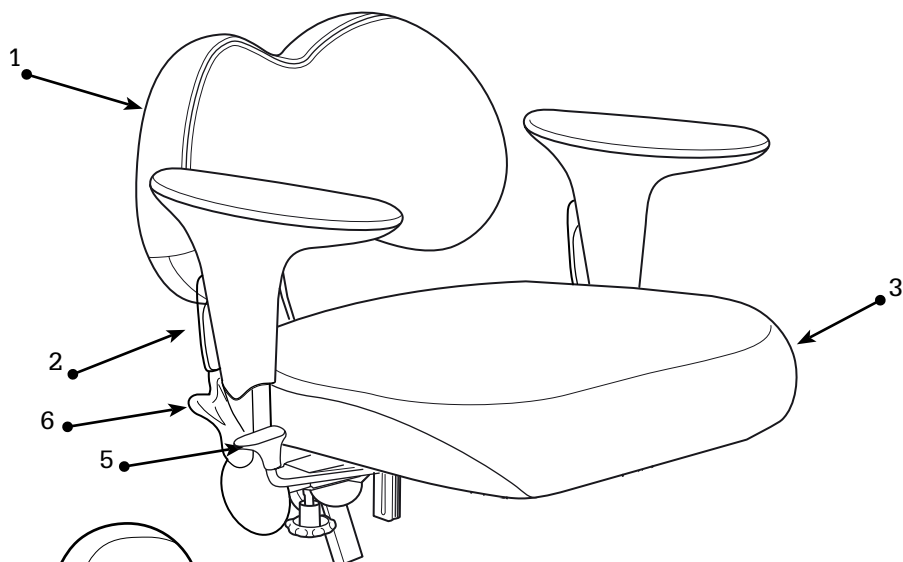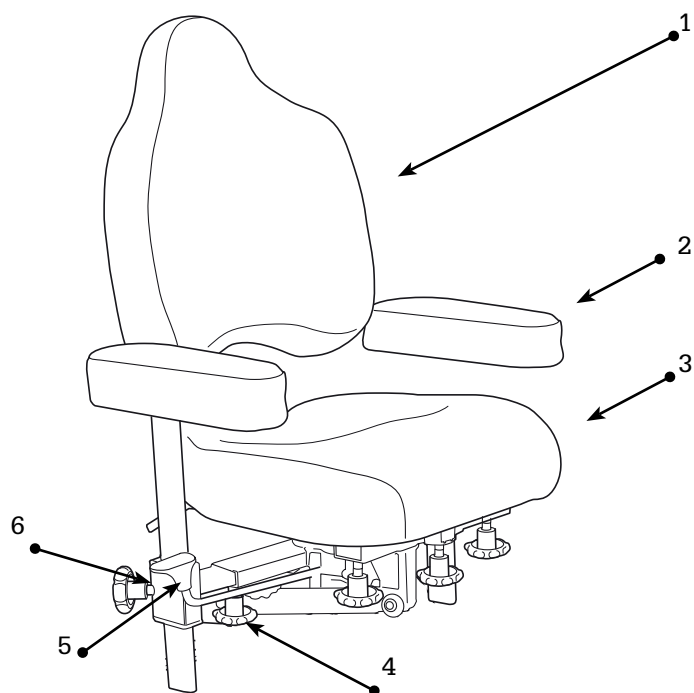

RYGGSTØTTE – INNSTILLINGER


VINKLING AV RYGGEN

Løsne på knotten/spaken (1). Still inn ønsket vinkel. Trekk til knotten/spaken.

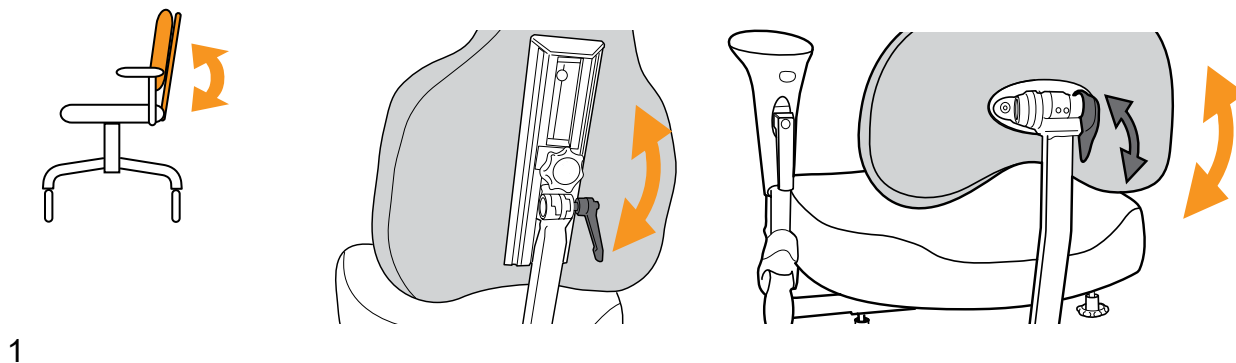


HØYDEINNSTILLING AV RYGGEN

Høydeinnstilling av ryggen: løsne rattet (2). Still inn ønsket høyde. Trekk til rattet.

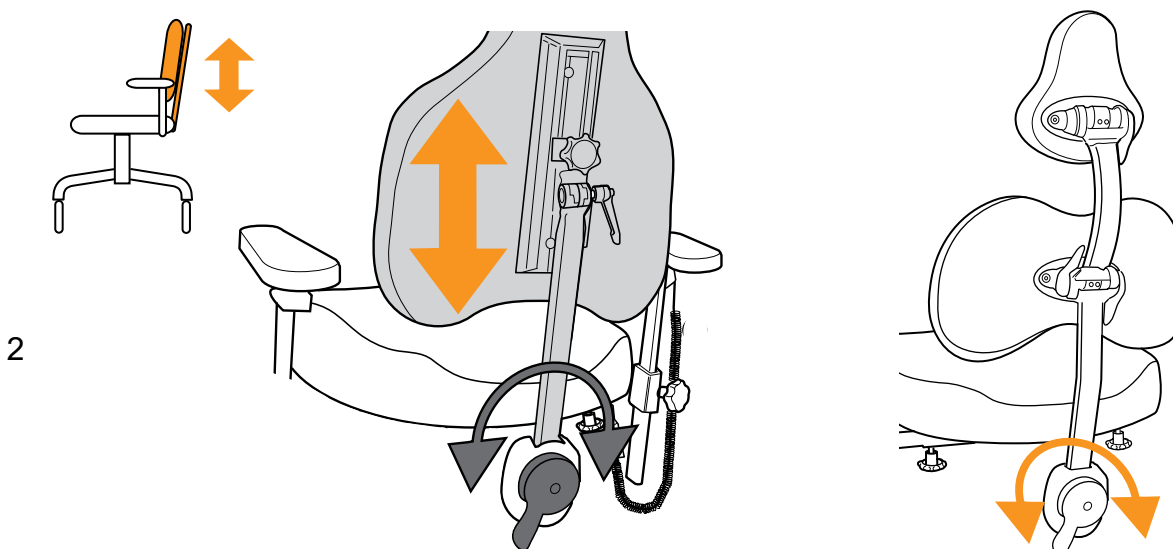


Løsne rattet/skruen (3). Still inn ønsket høyde. Trekk til rattet/skruen.

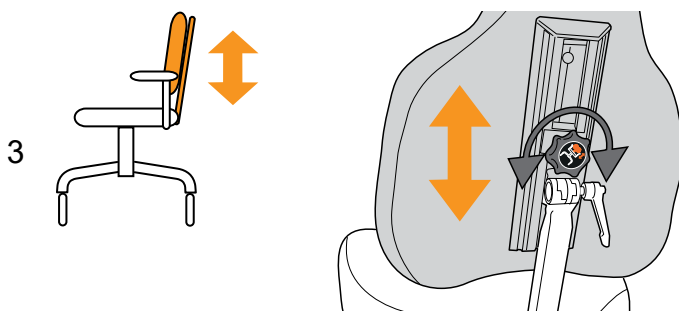


MØBELTREKK

Forma-setet har trekk med glidelås (4), slik at trekket enkelt kan tas av ved rengjøring.

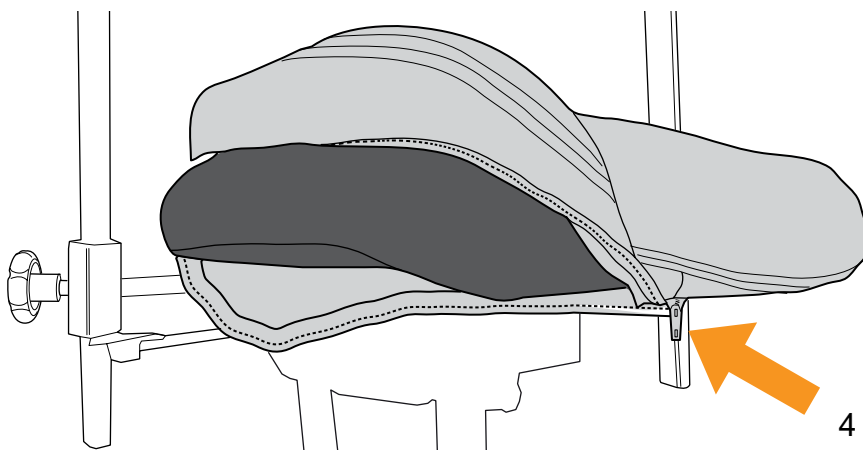


COXIT-SETE

Heving og senking av coxit-sete skjer individuelt med justeringsratt.

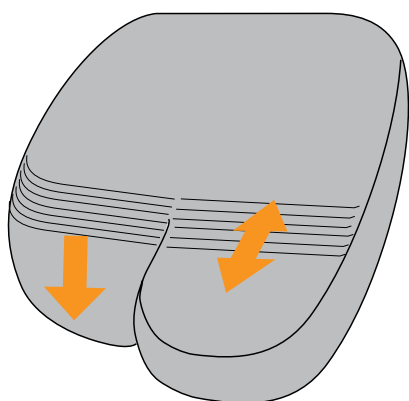

SITSVINKEL





För att justera sitsvinklingen av sitsen skruvas vredet (21) och justera in den vinkel man önskar (22) och skruva vredet till låst läge.

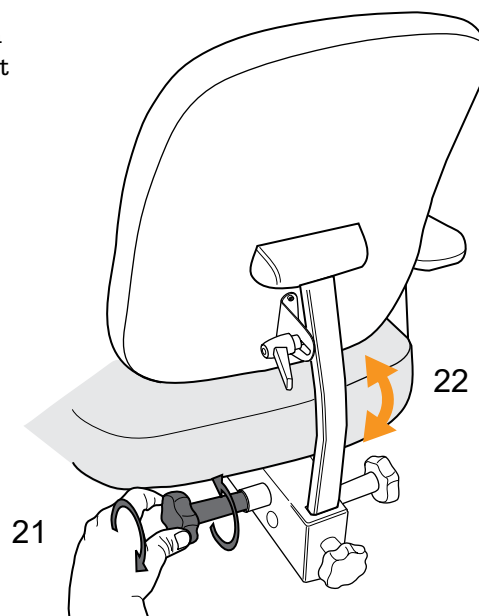

SETETILT/SETEVINKEL

Vinkelen kan justeres hvis du har elektrisk tilt (21), sveivetilt (22), gasstilt (23) eller vantskrue (24). Elektrisk tilt reguleres via betjeningspanel. Sveivetilt reguleres med ratt. Vantskrue reguleres med fastnøkkel.

Setevinklingen justeres med gassfjær (23). Spaken for justering av vinkling er plassert under et av armlenene. Spaken kan flyttes fra høyre til venstre side. Juster vinklingen av setet ved å trykke spaken oppover (23a), justere inn ønsket vinkel og deretter slippe spaken. Justering av tiltvinkel skjer ved hjelp av vantskruen (24).

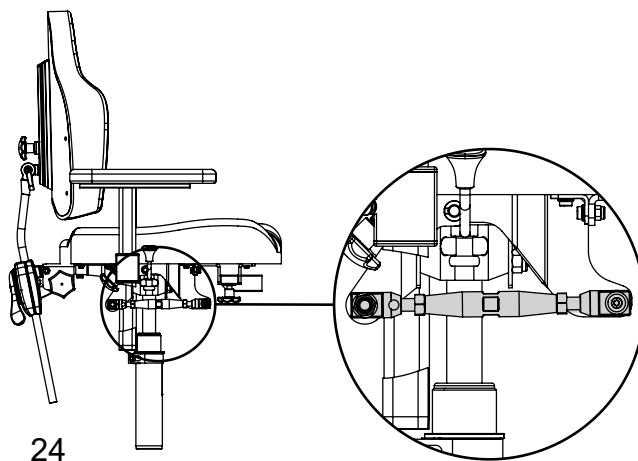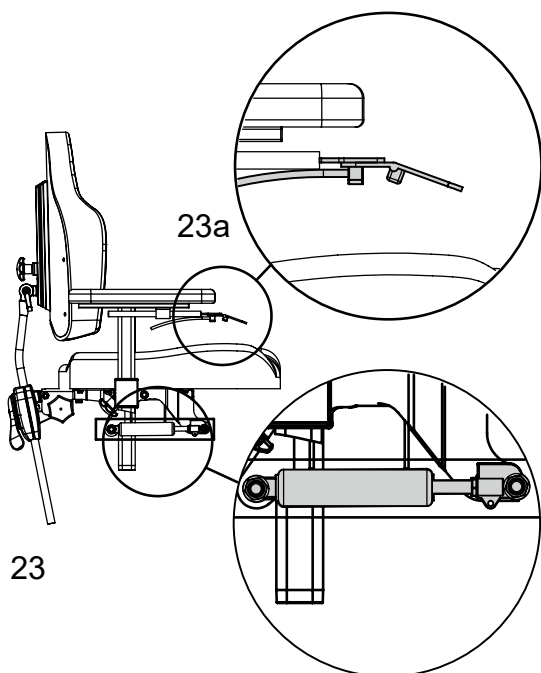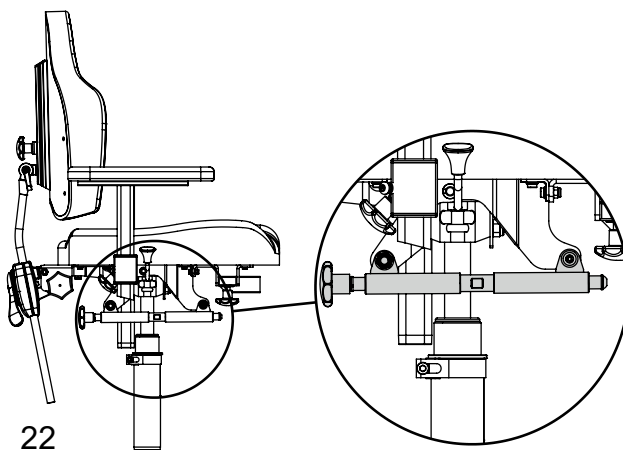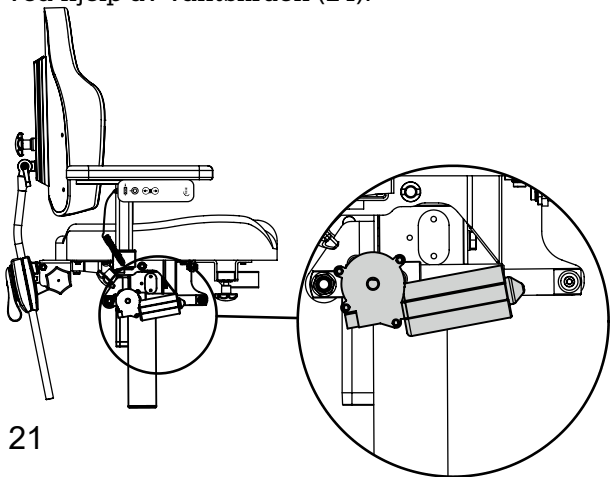


Juster vinklingen av setet ved å skru på knotten (21), justere inn ønsket vinkel (22) og deretter skru fast knotten til låst stilling.


ARMLENER – INNSTILLINGER

HØYDEJUSTERING

Løsne rattet (7) eller skruen (8) og still inn ønsket høyde.
Trekk til rattet/skruen.

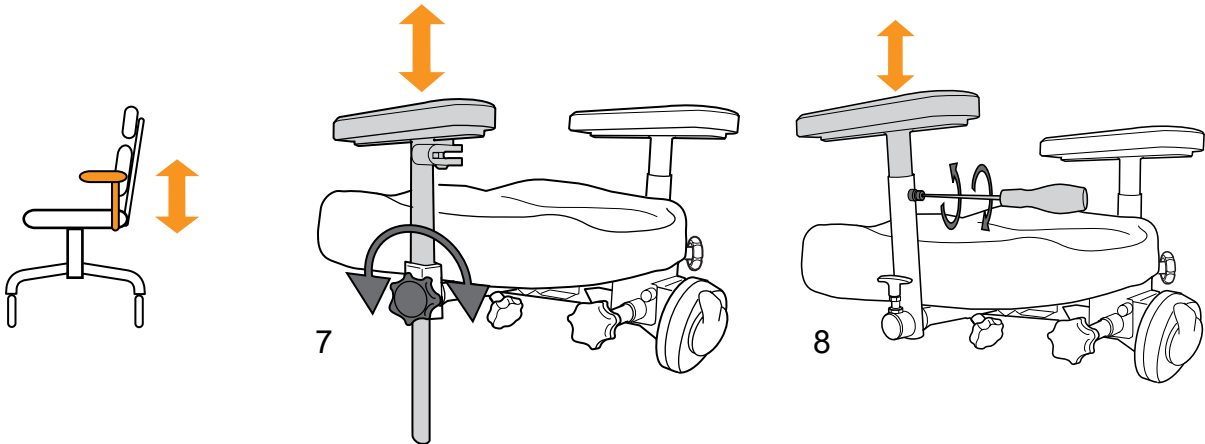


Dra ut spak (9) og still inn ønsket høyde.

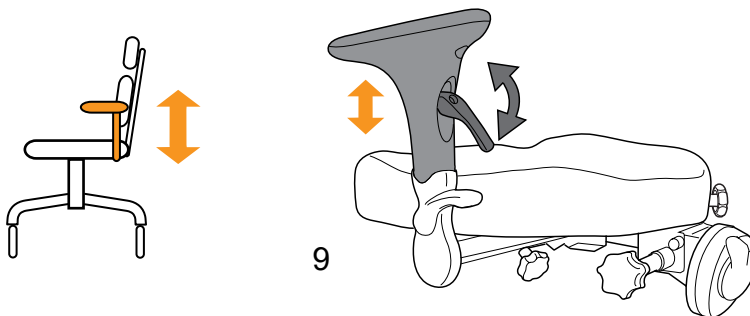


FELLBARE ARMLENER

Trykk/dra på knapp/spaken (10 alt. 11).

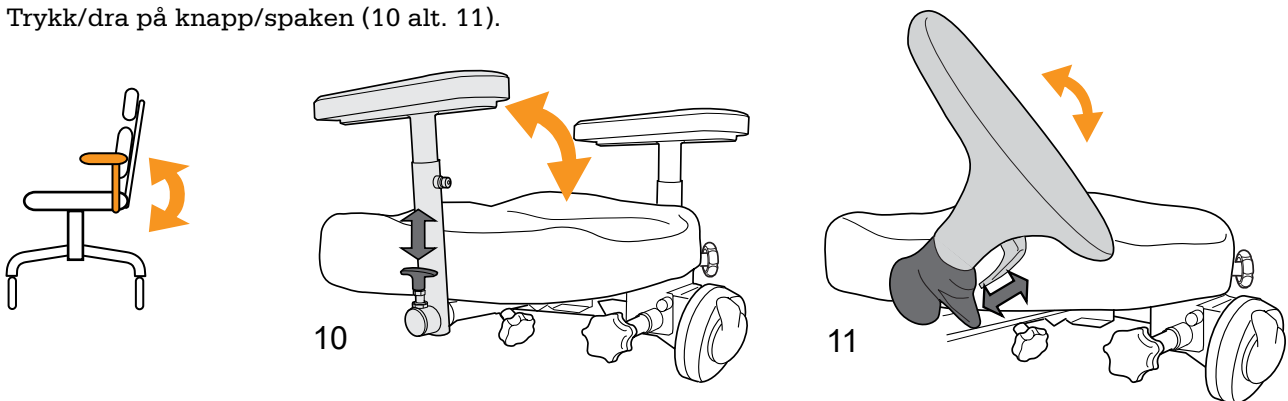


BREDDEJUSTERING ARMLENER

Skru på rattet (12) og still inn ønsket bredde.
Trekk til rattet.

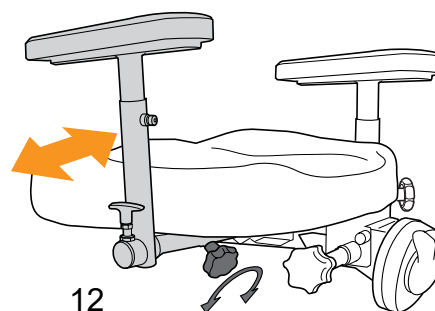


FOTSTØTTE

Det finnes to varianter av fotstøtten: hel (13) og delt (14). Tilgjengelig som ekstrautstyr.

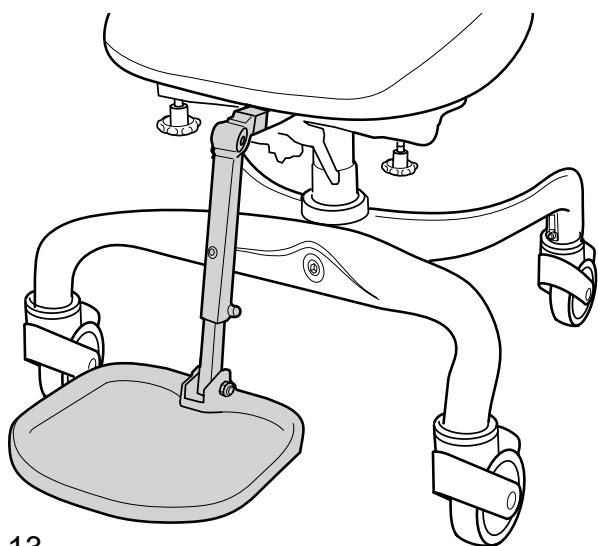


13

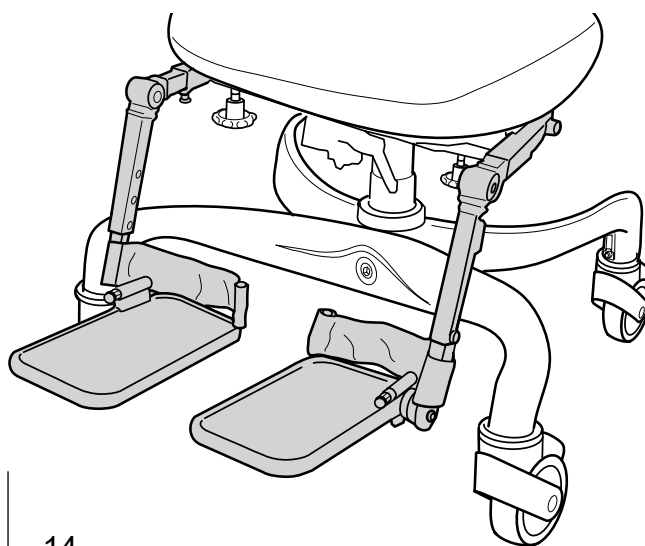


14

Innstillinger:
15) beinvinkel
16) høyde
17) vinkel på fotplaten


Innstillinger:
18) høyde
19) fotvinkel
20) fell opp

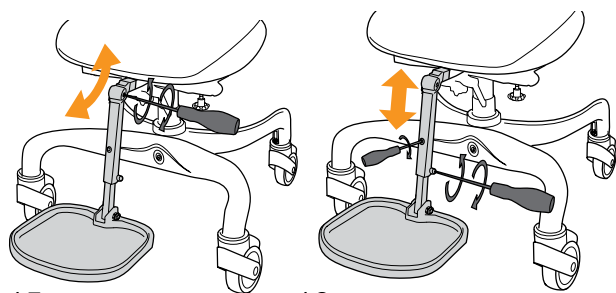


15

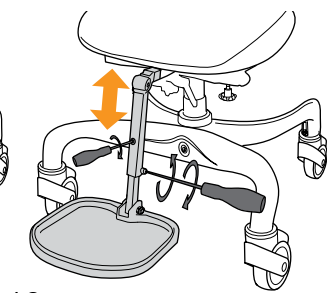


16

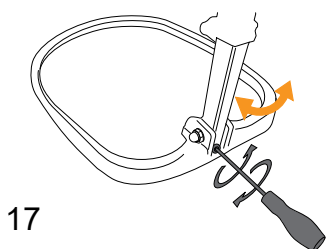


17

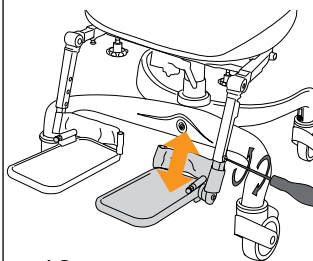

18

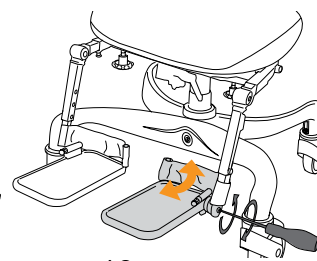

19

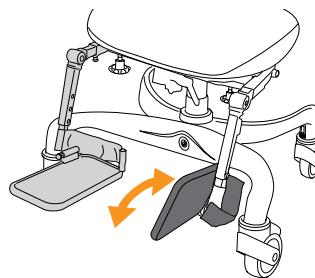

20

TEKNISK INFORMASJON

Forma

Data	Fakta
Fellbare armlener	
Faste armlener	
Sittebredde (mellom armlenene)	38–52 cm
Sittehøyde, gass (høyde til setets overside) trinnløst regulerbar	43,5–59,5 cm + 5 cm, 48,5–68,5 cm + 2 cm
Sittehøyde, el (høyde til setets overside) trinnløst regulerbar	49–74 cm + 3 cm. 41–58 cm + 2 cm
Sete (bredde x dybde)	40x40, 40x45, 45x45, 50x50 cm
Sete, Coxit, (bredde x dybde)	45x45, 50x50 cm
Sittedybde	40–59 cm
Tilt, vantskrue	14° foran. 19° bak
Tilt, sveiv	14° foran. 19° bak
Tilt, gassfjær	20° foran. 10° bak
Tilt, elektrisk	20° foran. 17° bak
Setevinkel	20–0°
Ryggstøtte, høyde	21–58 cm
Rygg, yttermål (bredde x høyde)	37x23 cm, 37x48, 37x46 cm
Stofftrekk	Svart Atlantic
Armlener, høyde	19–25 cm, regulerbare
Armlener, foldbare	19–25 cm, regulerbare
Armleneplate	31x8 cm

*Trinnløst regulerbar.

SitRite Barn

Data	Fakta
Fellbare armlener	
Faste armlener	
Sittebredde (mellom armlenene)	38–52 cm
Sittehøyde, gass (høyde til setets overside) trinnløst regulerbar	43,5–59,5 cm + 5 cm, 48,5–68,5 cm + 2 cm
Sittehøyde, el (høyde til setets overside) trinnløst regulerbar	49–74 cm + 3 cm. 41–58 cm + 2 cm
Sete (bredde x dybde)	40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50 cm
Sete, yttermål (bredde x dybde)	43x43, 43x48, 48x48, 48x53, 53x53 cm
Sittedybde	40–59 cm
Tilt, vantskrue	14° foran. 19° bak
Tilt, sveiv	14° foran. 19° bak
Tilt, gassfjær	20° foran. 10° bak
Tilt, elektrisk	20° foran. 17° bak
Setevinkel	20–0°
Ryggstøtte	høyde 37–62 cm
Rygg, yttermål (bredde x høyde)	37x43, 42x45, 47x47 cm
Stofftrekk	Svart Atlantic
Armlener, høyde	19–25 cm, regulerbare
Armlener, foldbare	19–25 cm, regulerbare
Armleneplate	31x8 cm

*Trinnløst regulerbar.

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

art.nr. BRU-80-100. Rev. 201510|5