

Bruksanvisning



modell N-679-30, N-479-30, N-579-30



Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse	2
Innledning	2
Kontaktopplysninger	2
Montering	3
Sikkerhetsregler	3
Oversikt	4
Ryggstøtte – sittedybde, vinkel.....	5
Ryggstøtte – høyde.....	5
Setehøyde.....	6
Armlener	
– høyde, bredde, felle bakover.....	7
Betjeningsboks	8
Beinstøtte – hel fotplate, delt	9
Kjøring	10
Service	11
Garanti.....	11
CE-merking	11
Rengjøring	11
Funksjon.....	11
Oppbevaring	11
Tekniske data.....	12
Feilsøking	12

INNLEDNING

Gratulerer med valg av sittesystem! Vi håper du blir fornøyd med dette Euroflex-produktet fra Eurovema AB, som er konstruert og produsert i Gislaved i Sverige. Produktet er konstruert med tanke på å oppfylle høye krav til ergonomi, sittekomfort og funksjon. Sittesystemet er beregnet for personer med nedsatt funksjonsevne, som sitter mye og lenge i stolen. Systemet har mange innstillingsmuligheter og kan derfor tilpasses ethvert behov. Les bruksanvisningen nøye så du får utnyttet alle mulighetene.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Har du spørsmål eller behov for hjelp med produktet, ber vi deg i første omgang kontakte den lokale leverandøren (hjelpemiddelsentralen).

Kontaktopplysninger til produsenten:

Eurovema AB
 Tlf.: +46 371 390 100
 Faks: +46 371 189 82
 E-post: info@eurovema.se
 Baldersvägen 38
 SE-332 35 Gislaved
 Sverige
www.eurovema.se

MONTERING

- Åpne emballasjen og kontroller at det ikke har oppstått skader under transport.
 - Kontroller også at leveransen stemmer overens med bestillingen.
- Stolen leveres med ryggstøtten umontert.

- Monter ryggstøtten som vist på bildet, og trekk til knottene (1 og 2).



SIKKERHETSREGLER

- Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk.
- Kontorstolen er beregnet for bruk på plane underlag i et normalt inneklima.
- Vær forsiktig ved manuell justering av setevinkel mens du sitter i stolen, da det kan medføre fare for fall ut av stolen.
- Hvis du oppdager skader eller endringer i stolens funksjon, skal serviceinstansen (hjelpemiddelleverandøren) kontaktes straks.
- Hvis stolen brukes mye, bør den med jevne mellomrom leveres til serviceinstansen for kontroll.
- Vær nøye med å trekke til skruer, knottene og spaker ordentlig etter fullført justering.
- Pass på at ikke skruer eller deler på stolen løsner, da det kan påvirke sikkerheten. Kontakt serviceinstans.
- Service og vedlikehold bør utføres av kvalifisert personale.
- Kun originaldelar fra Eurovema skal brukes ved reparasjon.
- Ikke overskrid angitt maks. brukervekt på stolen.
- Unngå kontakt med batterier som er skadet eller lekket. Tomme batterier skal leveres til gjenvinning.

OVERSIKT

- 1) betjeningsboks
- 2) styrespak
- 3) ladekontakt
- 4) sete
- 5) ryggstøtte
- 6) armlene
- 7) seteløfter – utløsermekanisme
- 8) fotstøtte – fotplate
- 9) parallellbeslag



RYGGSTØTTE – sittedybde

Bruk spaken (1) til å justere sittedybden med ryggstøtten. Still inn ønsket sittedybde ved å flytte ryggstøtten forover eller bakover. Sett spaken tilbake i opprinnelig stilling for å låse.

RYGGSTØTTE – vinkel

Bruk spaken (2) til å justere vinkelen på ryggstøtteplaten. Still inn ønsket vinkel og lås ved å sette spaken tilbake i opprinnelig stilling.

RYGGSTØTTE – høyde

Løsne knøttene (3) still inn ønsket høyde på ryggstøtten og trekk til knøttene.



SETETILT – manuell

Setevinklingen kan justeres fra -9° til 19° bakover. Trekk i spaken (5) for å justere vinkelen. Still inn ønsket sittevinkel.



FALLRISIKO!


OBS! Når spaken (1) løsnes, blir setevinklingen løs og setet kan fort falle forover hvis du sitter i stolen. Vær forsiktig ved justering!

SETEVINKEL – elektrisk

Hvis stolen er utstyrt med elektrisk setevinkling/tilt, aktiveres denne med betjeningsboksen. Trykk på knappen "6" på betjeningsboksen.

Shark

Velg setesymbol (6). Trykk på setesymbol (6) og velg tallet "2". Før deretter styrespaken (5) forover for å vinkle setet forover, og bakover for å vinkle setet bakover. Setevinklingen stopper automatisk når endeposisjonene nås. Du går tilbake til kjøremodus ved å trykke på knappen (2), slik at valgt kjøreprogram vises i displayet (4).

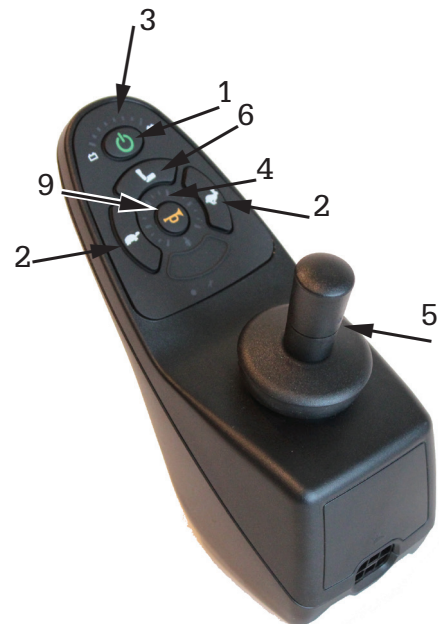

SHARK



ARMLENER – høyde og bredde

Løsne rattet (1) for å justere bredden mellom armlenene. Juster til ønsket bredde og trekk til rattet igjen. Følg samme fremgangsmåte for det andre armlenet. Juster høyden på armlenene ved å løsne spaken (2). Still inn ønsket høyde og trekk til spaken igjen.

ARMLENER – felle bakover

Hvis rullestolen er utstyrt med fellbare armlener, kan de felles bakover, for eksempel for å lette sideforflytninger og muligheten til å komme inntil et bord. Trykk spaken (3) ned i pilens retning for å felle bakover. Armlenet felles tilbake igjen ved å løfte det med hånden til opprett stilling, der det låses automatisk.



BETJENINGSBOKS – justering

Betjeningsboksens stilling kan justeres ved å løsne skruene 1, 2 og 3 med en 5 mm Unbrako-nøkkel. Løsne skrue 2 for å justere dybden og 1, 3 for å justere betjeningsboksens vinkel og høyde. Juster til ønsket stilling og trekk til skruene igjen. Betjeningsboksen kan også parallellforskyves til siden og bakover så den ikke er i veien når man for eksempel vil komme inntil et bord.



BEINSTØTTE – hel fotplate

Hvis stolen er utstyrt med hel fotplate, justeres høyden (1) ved å løsne skruene med en 5 mm Unbrako-nøkkel. Juster til ønsket stilling og trekk til skruene igjen. Og vinkelen ved å løsne spaken (2). Skru spaken (2) med klokken for å redusere vinkelen, mot klokken for å øke. Fotplaten kan også felles opp for å lette forflytning til og fra stolen.



SETEHØYDE

Start rullestolens elektronikk ved å trykke på knappen (1) på betjeningsboksen. Trykk deretter på knappen (6).

Shark

Tallet "1" begynner å lyse på knappen (6). Før deretter styrespaken (5) forover for å heve setet og bakover for å senke setet. Seteløfteren stopper automatisk når endeposisjonene nås. Du går tilbake til kjøremodus ved å trykke på knappen (2), slik at valgt kjøreprogram vises i displayet (4).

KJØRING

Sett deg behagelig til rette i stolen og la armen du skal manøvrere rullestolen med, hvile mot armlenet så hånden får et godt grep rundt styrespaken (5). Start rullestolens elektronikk ved å trykke på knappen (1) og vente et par sekunder til batteriindikatoren (3) har sluttet å blinke.

SHARK


Velg ønsket kjøreprogram (1, 2 eller 3) med knappene (2), hvor 3 er det raskeste.

Jo flere grønne lamper, desto forttere går stolen. Før styrespaken forsiktig i retningen du ønsker å kjøre, og rullestolen går dit. Jo lengre du flytter styrespaken, desto forttere går rullestolen. Slipp styrespaken, og rullestolen stopper umiddelbart. Denne rullestolen er kun beregnet for innendørs bruk og konstruert for å forsure opptil 3 cm høye hindringer. Hindringene bør passeres med forhjulene plassert parallelt med hindringen.



SKADERISIKO!

OBS! Sørg for rikelig med plass rundt rullestolen første gang du kjører den. Øv deg på å rygge, svinge og kjøre i forskjellige hastigheter, slik at du gjør deg kjent med hvordan rullestolen oppfører seg i ulike situasjoner. Vær forsiktig ved passering av hindringer som terskler og lignende.

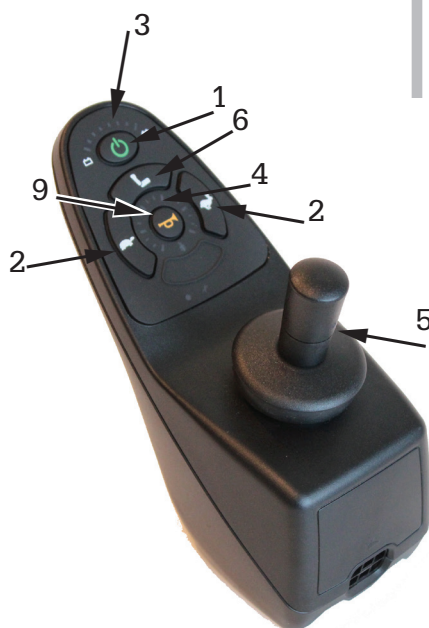

SHARK

SERVICE

Hvis rullestolen brukes mye, dvs. hver dag, bør den leveres til en årlig service. Dette for å kontrollere at rullestolens funksjon og sikkerhet blir ivarettatt gjennom hele levetiden. Ved behov for service kontaktes i første omgang den lokale hjelpemiddelsentralen.

GARANTI

Våre produkter har 2 års garanti for produksjonsfeil/skade. Unntak for trekk, hjul og batterier, som har 1 års garanti. Normal slitasje er ikke grunnlag for godkjent garanti. Vi anbefaler kundene våre å bruke produktet i henhold til bruksanvisningen.

CE-MERKING



Dette produktet er CE-merket i henhold til direktiv 93/42/EØF. CE-merket finnes på etiketten. Testet og godkjent i henhold til direktiv SS-EN 1335-1, -2 og -3. Branntestet i henhold til ISO7176-16.

RENGJØRING:

Tørk av flatene på rullestolen med en klut som er lett fuktet med et mildt oppvaskmiddel. Stolen skal stå på et plant underlag mens den tørker. Setetrekket kan rengjøres med et av tøyaskemidlene som finnes i handelen. Overtrekk kan vaskes i maskin på 60 grader.

FUNKSJON:

Eventuelle løse skruer skal trekkes til, og slark i deler av stolen eller endringer i kjøreegenskaper utbedres umiddelbart, da det kan påvirke sikkerheten. Kontakt din lokale hjelpemiddelsentral eller produsenten hvis du har spørsmål eller behov for hjelp. Vær påpasselig med å alltid trekke til knotter og skruer etter justeringer av setet.

OPPBEVARING:

Hvis rullestolen skal oppbevares over lengre tid uten å brukes (én måned eller mer), bør den oppbevares ved romtemperatur i et rent rom uten fukt. Batteriene bør lades ca. en gang i måneden for å unngå at de tømmes til et kritisk nivå hvor laderen ikke lenger starter ladingen.

TEKNISKE DATA

	Data
Klasse	A
ISO	122127
Elektronikk	Dynamic
Sete BxD	29x32, 32x36, 36x40, 40x40, 40x45 cm
Sete, yttermål BxD	32x35, 35x39, 39x43, 43x43, 48x48 cm
Setehøyde – kort utløsermekanisme, Miniflex	50–67 cm + 5 cm*
Setehøyde – kort utløsermekanisme, Reflex	48–65 cm + 5 cm*
Setehøyde – kort utløsermekanisme, Flexmobil	58–75 cm + 5 cm*
Setehøyde – lang utløsermekanisme, Miniflex	58–83 cm + 5 cm*
Setehøyde – lang utløsermekanisme, Reflex	58–83 cm + 5 cm*
Setehøyde – lang utløsermekanisme, Flexmobil	66–91 cm + 5 cm*
Setestørrelser, BxD	40x40, 45x45, 40x45, 50x50 cm
Setetilt, el., bakover-forover	–9 til +19°
Ryggstøtte, størrelse, BxH	30x37, 37x43 cm
Ryggstøtte, høyde fra sete	43–62 cm
Nakkestøtte, størrelse	25x8 cm
Trekk, farger	Svart. Black
Armlener, høyde	19–25 cm
Armlener, plate, størrelse	31x8 cm

*Trinnløst regulerbar.

FEILSØKING

Problem	Løsning
Rullestolen starter ikke	
Automatsikringen har løst ut	Kontroller automatsikringen – se håndbok
Batteriener er utladet	Lad batteriene – se håndbok
Slark i kabler	Kontakt hjelpemiddelsentralen
Batteriener vil ikke ta lading	
Automatsikringen har løst ut	Kontroller automatsikringen – se håndbok
Batteriener er helt utladet	Kontakt hjelpemiddelsentralen
Laderen er ødelagt	Kontakt hjelpemiddelsentralen
Batteriindikatoren faller raskt selv om batteriene er nyladet	
Batteriener begynner å bli dårlige	Kontakt hjelpemiddelsentralen
Feil i elektronikken	Kontakt hjelpemiddelsentralen
Statusdioden blinker på betjeningsboksen	
Elektronikken har startet når stolens bremses er frikoblet	Slå av og koble inn bremsene – se håndbok
Det har oppstått en feil på rullestolen	Kontakt hjelpemiddelsentralen
Rullestolen går langsomt	
Det er valgt feil kjøreprogram	Velg et raskere kjøreprogram – se håndbok
Rullestolen klarer ikke å kjøre eller passere hindringer	
Det er valgt et for langsomt kjøreprogram	Velg et raskere kjøreprogram – se håndbok

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.