


Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

NO

Bruksanvisning

Viktig, les før bruk!

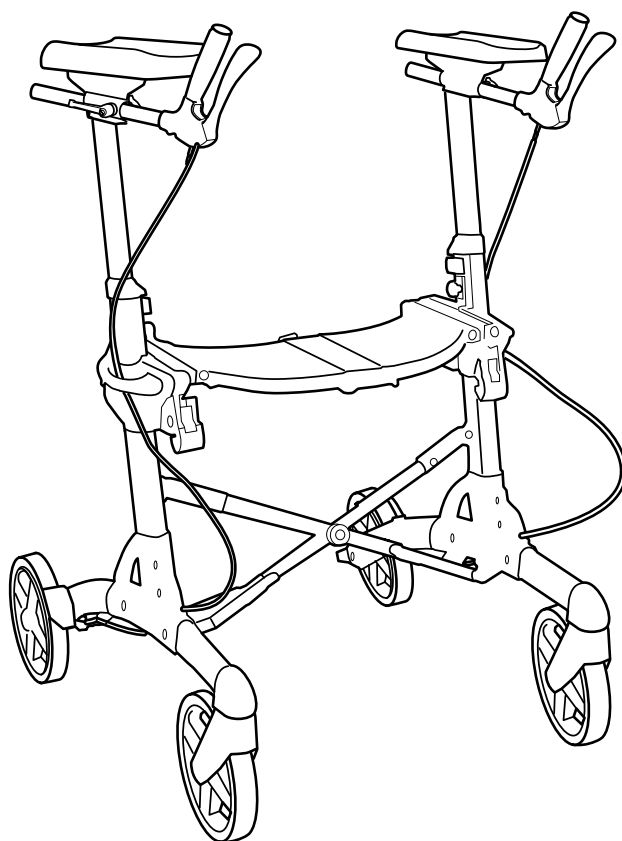

VOLARIS

RA

Gratulerer med din nye RA-rullator!

Volaris RA

Volaris RA vil gjøre hverdagen din enklere på mange måter. Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye for at du skal bli kjent med en nye rullatoren din. Riktig bruk og vedlikehold gir rullatoren høyere sikkerhet og lengre levetid.

RA-rullatoren hjelper deg med å forflytte deg mellom ulike steder, både i og utenfor hjemmet. Den skal kun brukes som gåstøtte. Du kan utstyre RA-rullatoren med en rekke ulike tilbehør for å tilpasse den til dine behov, din sikkerhet og din komfort.

Produsert i Sverige

RA er utviklet og produsert i Gislaved, Sverige. Den er laget av utvalgte materialer og komponenter som gjør den slitesterk, sikker og pålitelig. RA er 95 % gjenvinnbar.

Den oppfyller alle kravene i markedsstandardene SS-EN 1441, SS-EN 1985, SS-EN 12182 og ISO 11199-3:2005.

CE-merking

Dette produktet er CE-merket i henhold til direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr klasse I. CE-merket står på etiketten. For at CE-merkingen skal fortsette å være gyldig, skal ikke rullatoren tilpasses eller endres uten skriftlig godkjenning fra Eurovema.

Garanti

2 års generell garantitid som dekker material- og produksjonsfeil. 1 års garanti på slitedeler som hjul, bremsedeler og håndtak. Garantien forutsetter at produktet har blitt brukt på en forskriftsmessig måte. Vi anbefaler kundene våre å bruke produktet i henhold til bruksanvisningen.

Sikkerhetsforskrifter

RA-rullatoren skal kun brukes til det formålet den er tiltenkt. Den skal ikke utstyres med tilbehør eller komponenter som ikke er godkjente av Eurovema.



Bremsene på RA-rullatoren skal alltid være på når du setter deg og reiser deg.



Kjør aldri mens noen sitter på rullatorens sete!

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsforskrifter	s. 2	Rengjøring	s. 9
Garanti	s. 2	Rekondisjonering	s. 9
Produsert i Sverige	s. 2	Profildeksel	s. 9
Innhold	s. 3	Smøre vaieren	s. 10
Kontakt	s. 3	Feilsøking	s. 10
Justering av setet	s. 4	Tilbehør for din sikkerhet	s. 11–12
Justering av håndtakets høyde	s. 4	Tilbehør for din komfort	s. 13–15
Justering av håndtaket	s. 4–5	Tekniske data	s. 16
Armlenets posisjon og retning	s. 5	Tilbehør	s. 16
Felle ut	s. 6		
Legge sammen, foldesperre	s. 6		
Fast transportbånd	s. 6		
Slik bremser du	s. 7		
Justering av bremsen	s. 8		
Kjøretips – «komfortchassis»	s. 8		
Lær deg «sakseteknikken»	s. 8		
Vedlikehold	s. 9		

Kontakt (ev. lokal leverandør)

Har du spørsmål eller behov for hjelp med produktet, ber vi deg i første omgang kontakte den lokale leverandøren (hjelpemiddelsentralen).

Kontaktopplysninger til produsenten:

Eurovema AS

Post: Boks 53, 2021 Skedsmokorset, Besöksadress: Svennerudveien 34, Frogner


Telefon 46301939

framapost@eurovema.no, www.eurovema.no

Justering


Justere høyden på setet

Fjern ev. profildeksel (se side 9). Endre en side av gangen. Trekk ut knappen under setet. Løft samtidig opp eller trykk ned setet til ønsket høyde. Kjenn etter om knappen klikker tilbake, slik at setet er låst. Gjør det samme på den andre siden. Kontroller nøye at setet er plant før du bruker rullatoren. Trykk ned midtplaten på setet. Sett profildekselet i hakket på profilen både over og under setet (se side 9).

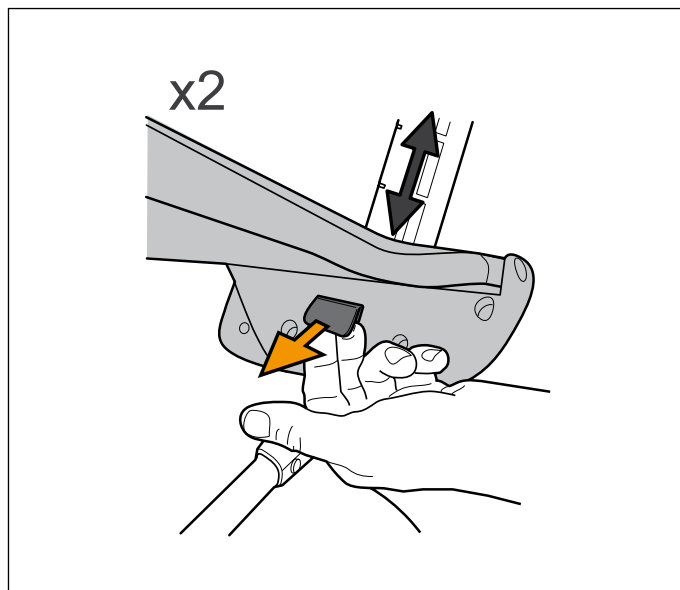


Håndtakshøyde

Håndtakshøyden er riktig når underarmen ligger komfortabelt i armstøttens pute, ca. 90 grader mellom over- og underarmen. Når du går med rullatoren, bør du gå uten å bøye deg fremover, ha rullatoren nær kroppen, holde ryggen rak og se fremover.

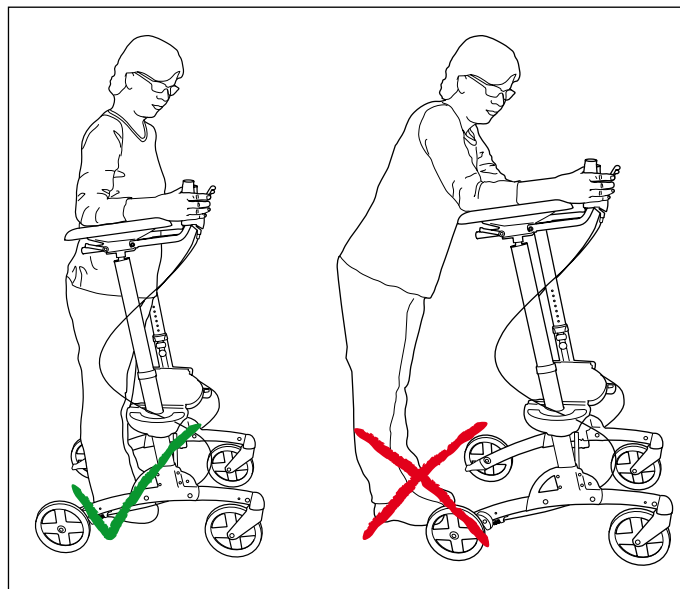

Justere høyden på håndtakene


Løsne på knappen. Ved å trekke ut knappen kan du endre høyden på håndtakene, se intervallene på side 16. Juster deretter høyden, kontroller at knappen «klikker tilbake» og stram rattet. Når du har brukt RA en stund, merker du selv om du vil gjøre ytterligere justeringer. Det skal være komfortabelt å gå med rullatoren. Mekanisk stopp for maksimal håndtakshøyde. Antall synlige hull utgjør markert høydeintervall.

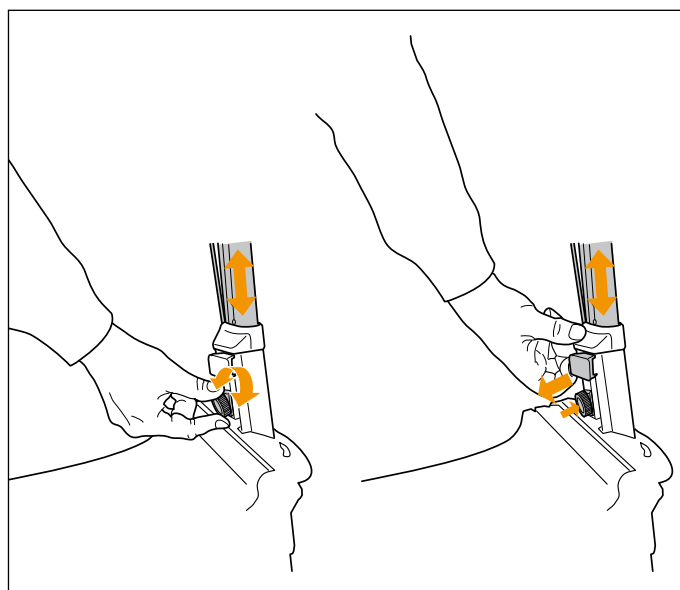

Justering


Juster håndtakets dybde og vinkel

Løsne spaken under armleneputen. Dra ut og vinkle bremsehåndtaket til ønsket posisjon.

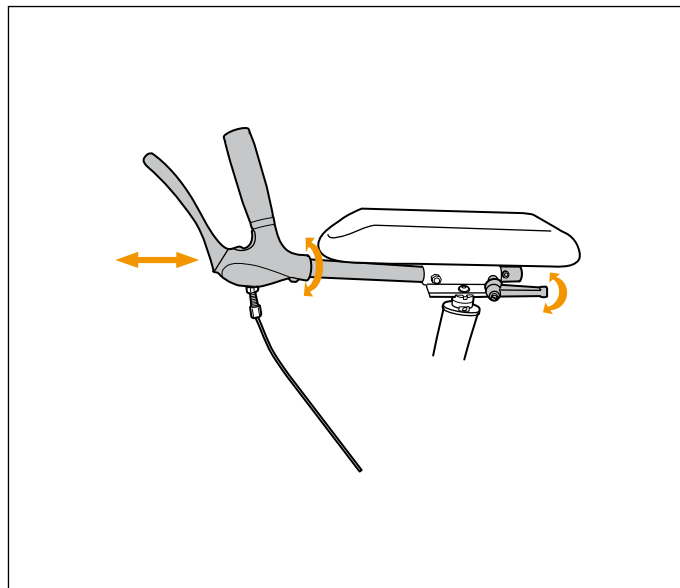


Armlenets posisjon

Armlenet kan justeres i dybden ved å løsne spaken under armleneputen. For å gjøre justeringen enklere kan håndtaket tas bort når spaken er løsnet. Fest skruene og juster håndtaket når det settes på plass igjen.

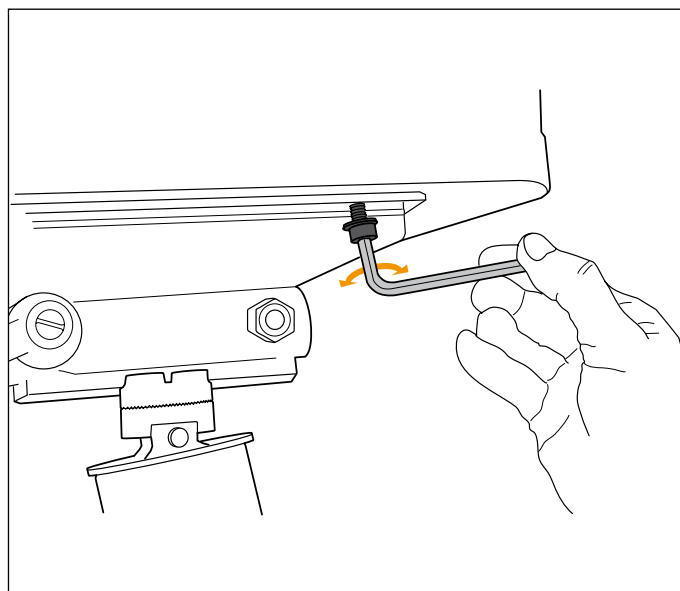

Armlenets retning


Armlenet (armlenepute inkl. håndtak) kan vris innover ved å løsne tannhjulet. Vri armlenet maks. 90 grader.

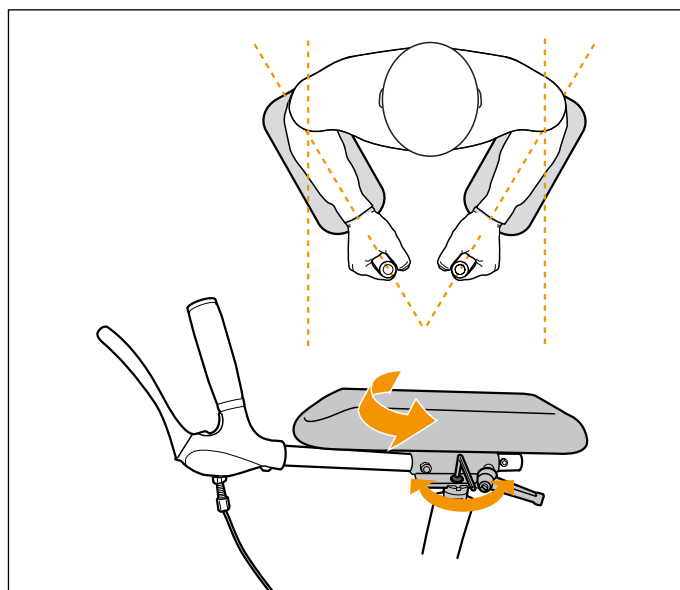

Å felle ut å felle sammen

Å felle ut


1. Ta tak med en hånd i det ene kjørhåndtaket og vipp Smart lett til samme side slik att hjulet løfter noen få centimeter.
2. Dra utover i det grå løftehåndtaket på den andre siden. En fjær hjelper til å felle ut Smart.
3. Trykk ned midtdelen på setet for å låse rullatoren i utfelt posisjon.

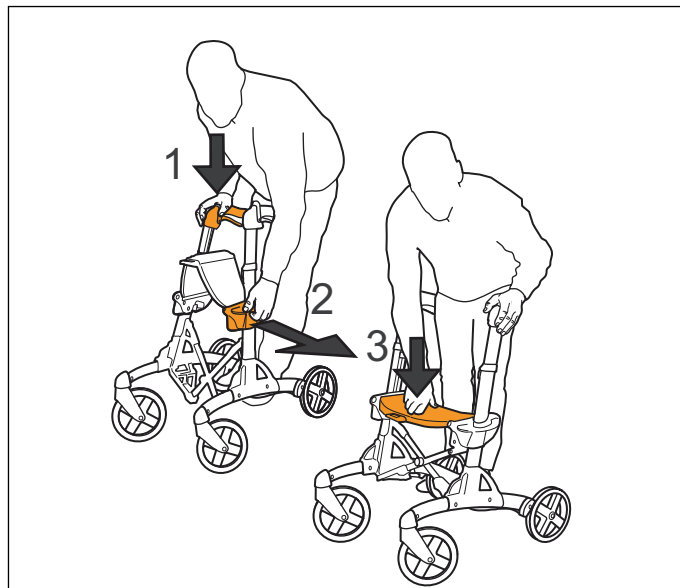

Å felle sammen


Er rullatoren utstyrt med folding låsen

1. Ta bort en eventuell kurv/veske.
2. Løft i båndet.
3. Trykk sammen Smart med håndtakene på siden.

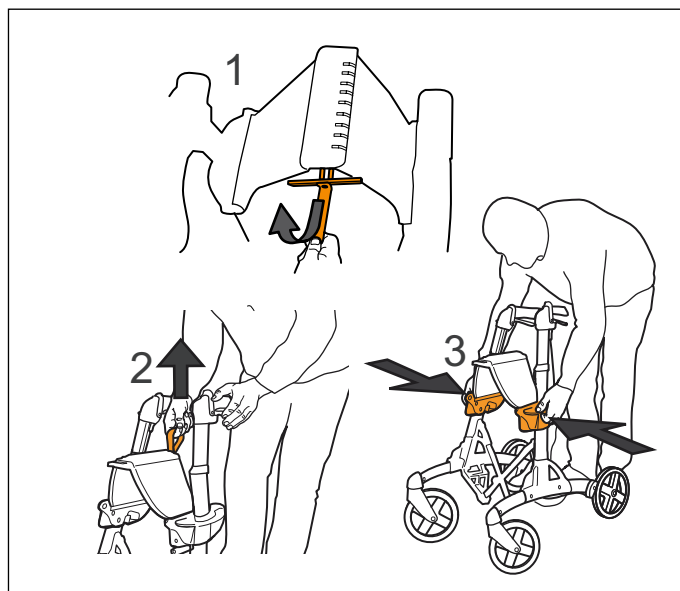

Fast transportsikring


Er rullatoren utstyrt med fast transportsikring, felles rullatoren sammen (se punkter over) og blir sikret med trykknappen på låsebåndet. Løsne knappen og rullatoren kan felles ut.

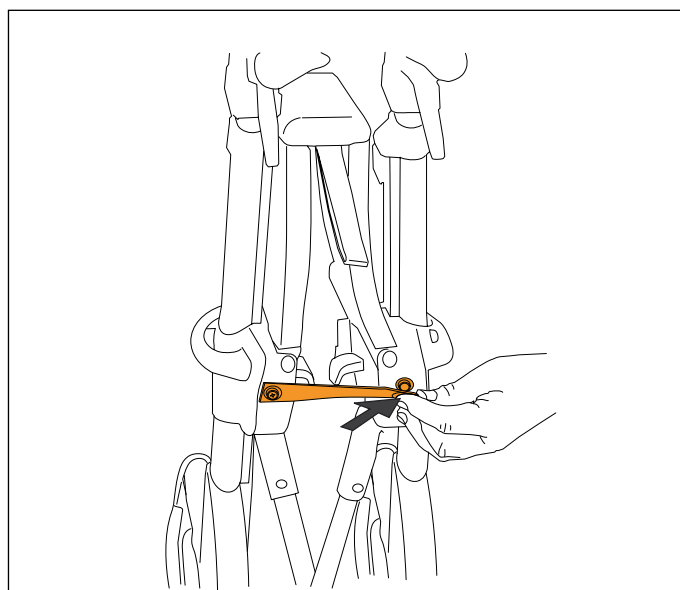

Slik bremses du trygt

Kjørebremsen

Bremsen aktiveres ved at bremsespaken foran håndgrepet trekkes innover mot håndgrepet.

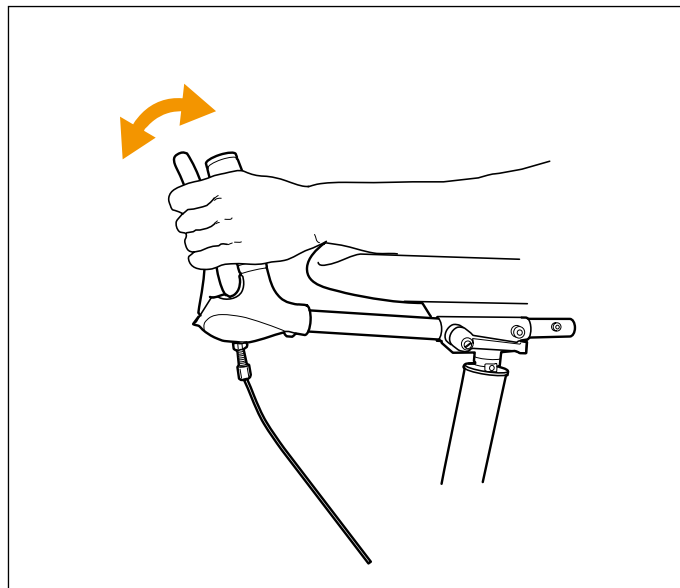


Parkeringsbremsen

Barkeringsbremsen aktiveres ved at bremsespaken trykkes utover til den automatisk låser seg.


Parkeringsbremsen skal ikke være låst når du justerer bremsen.

Parkeringsbremsen skal være aktivert når man sitter på setet.

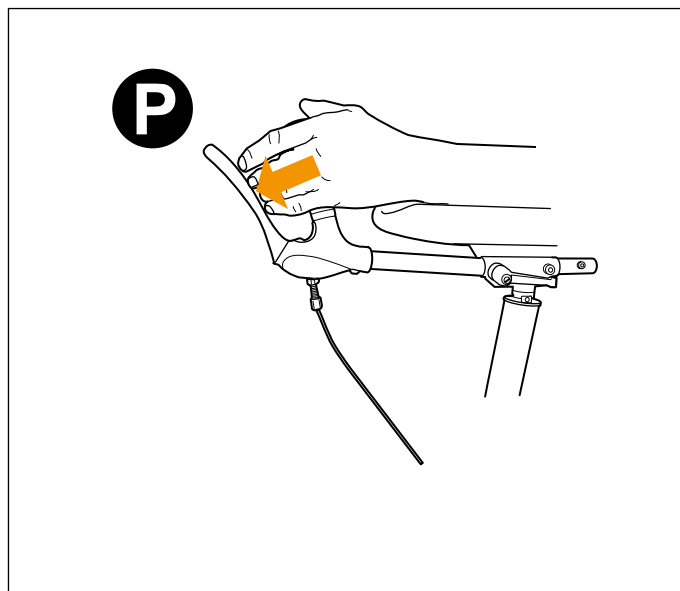

Frigjør parkeringsbremsen

Bremsen frigjøres ved å dra bremsespaken foran håndgrepet innover til et klikk høres og sperren løsner.

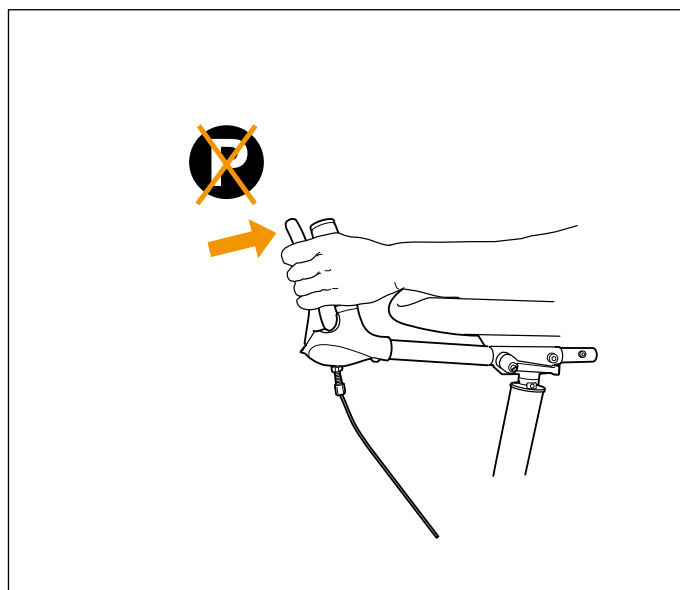


Kjøretips

Juster bremsen på RA slik at den fungerer som den skal.

Du kan stille bremsekraften ved å justere vaieren på undersiden av rammen og/eller ved bremsehåndtaket.

1. Frigjør/løsne parkeringsbremsen.
2. Løsne mutteren i midten med en 8 mm leddnøkkel.
3. Vri ut den lange, gjengede sekskantakselen hvis du ønsker økt bremsekraft. Vri inn den gjengede sekskantakselen hvis du vil redusere bremsekraften.
4. Stram mutteren i midten med en 8 mm leddnøkkel. Du bør justere bremsen slik at bremseklossen ligger 1–2 mm fra bremseflaten uten at den kommer borti. Hvis du justerer bremsen for hardt, blir det unødig tungt å aktivere parkeringsbremsen.

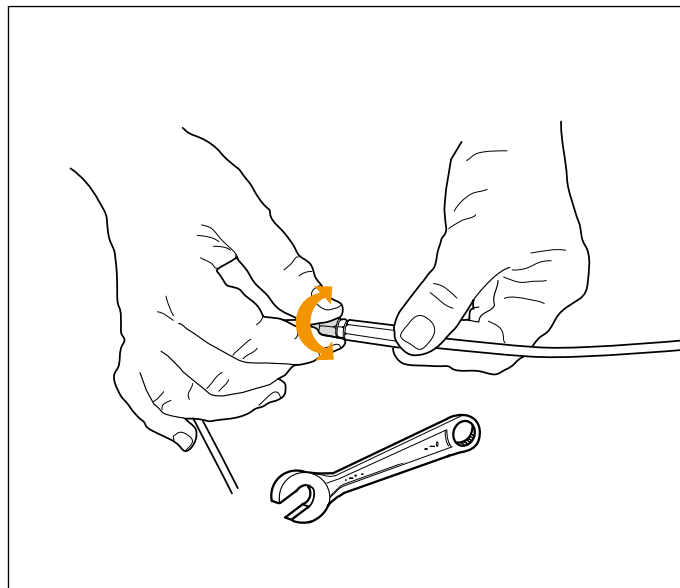


Komfortchassis

RA er utstyrt med Comfort Frame™, et «komfortchassis» som sørger for at det triller mykt over ujevnheter i veien. Når du trenger å komme deg over et større hinder eller komme opp på en fortauskant, kan du få hjelp av «vippehjelpen» som sitter ved bakhjulene. Trykk ned den ene pedalen samtidig som du løfter etter håndtakene.




Ikke løft etter setet når du vil over et hinder, for da klapper rullatoren sammen!

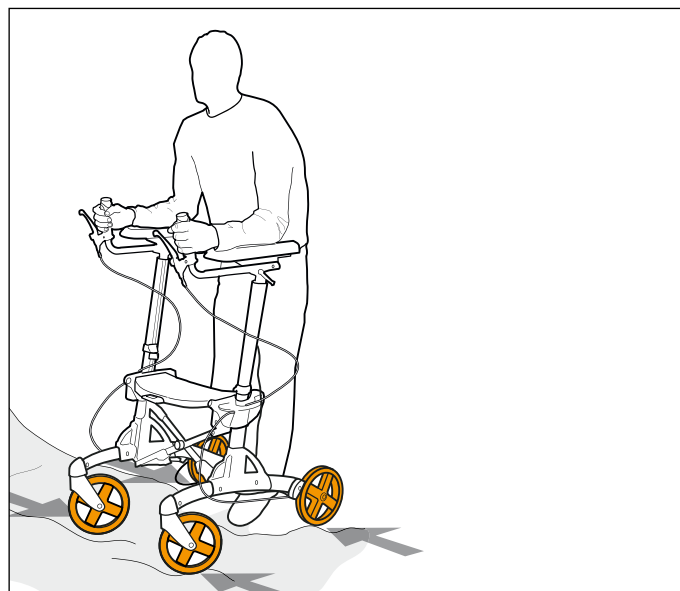

Lær deg «sakseteknikken»

Kjør på skrå frem mot hinderet. Brems på den ene siden. Vipp rullatoren litt bakover slik at forhjulene løftes, sving forhjulene opp over hinderet. Det er enkelt når du har lært deg det!

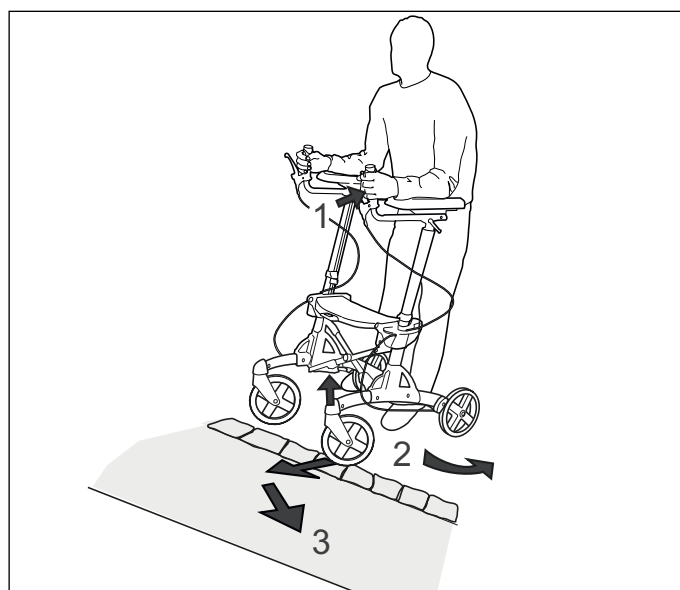


Vedlikehold

Rengjøring av rullatorer og tilbehør

Det lønner seg å vedlikeholde rullatoren skikkelig, da varer den lenger.

Tørk av smuss med en våt klut og et mildt rengjøringsmiddel. Vær nøye med at det ikke samler seg smuss mellom hjulene og bremseskoene, det kan påvirke bremseeffekten! Det går fint å spyle av rullatoren med en høytrykksspyler eller en hageslange, tørk tørt etterpå.

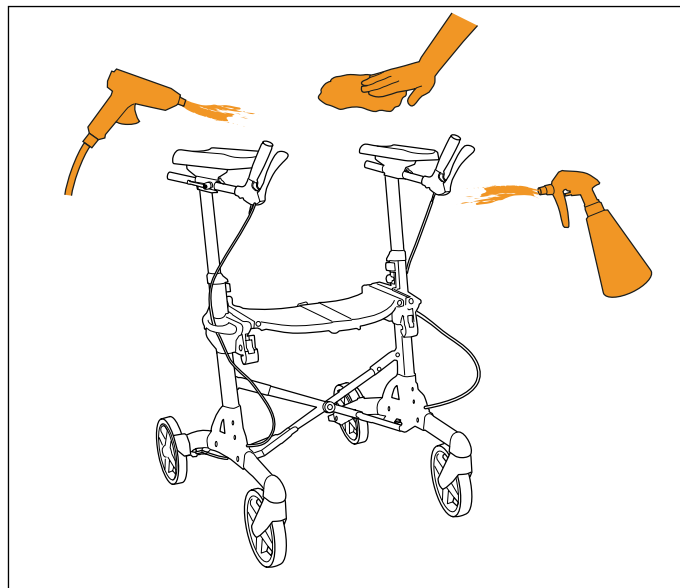


Rekondisjonering

Ved rekondisjonering i vaskeanlegg skal ikke rullatorens bremse være aktivert. Rullatoren skal kjøles ned til romtemperatur før den brukes og justeres.

Profildeksel


Profildekselet brukes for å unngå at noe setter seg fast. Følger med rullatoren. Bør sitte i alle synlige hakk, både over og under setet.

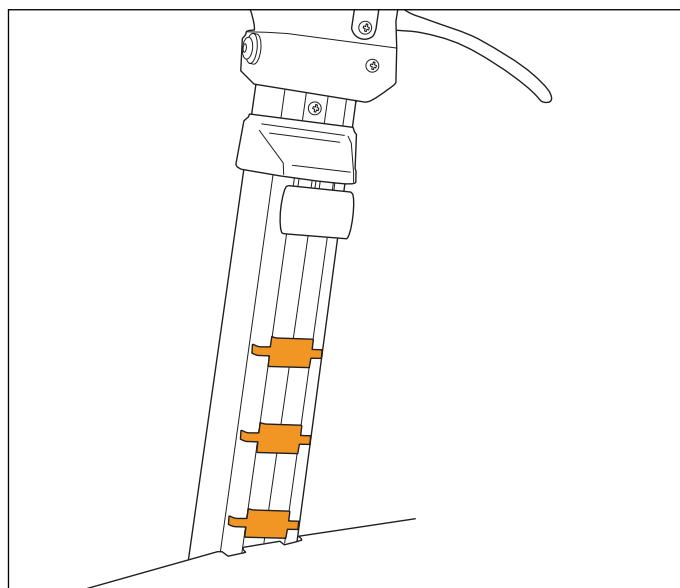

Vedlikehold

Smøre vaieren


Etter vask smører du bremsevaieren ved å påføre noen dråper olje ved håndtaket under rammen.

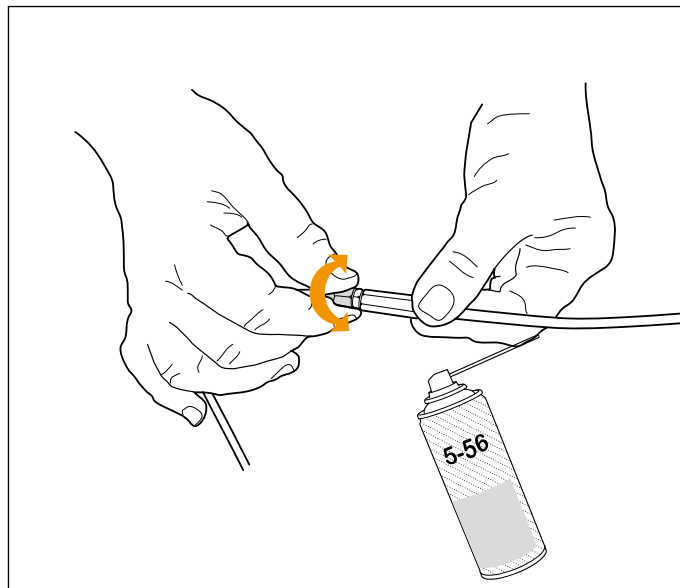

Feilsøking

Hvis rullatoren ved bruk drar til den ene siden, kontroller at hjulene snurrer like lett, og at hjulgaflene svinger lett. Kontroller at hjul og gafler er godt festet. Kontroller at ikke smuss eller skitt sitter fast mellom hjul og bremsesko.


Kontroller at bremsevaieren er festet i bremsearmen under rammen. Kontroller at fjæren ved bakhjulets bremsesko er hel. Kontroller at bremseskoen trykker like mye på begge sider ved bremsing. Juster vaieren, se side 8.

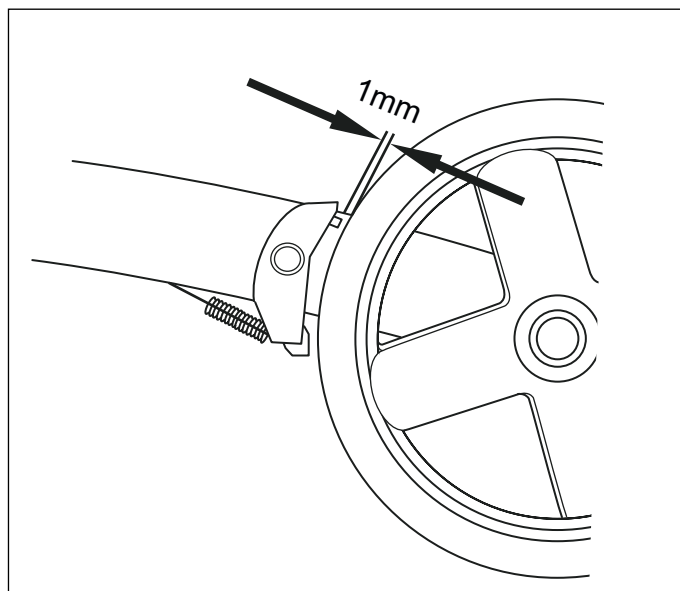

Tilbehør for din sikkerhet


Slepebrems

En brems med justerbar, kontinuerlig friksjon. Kan ettermonteres.

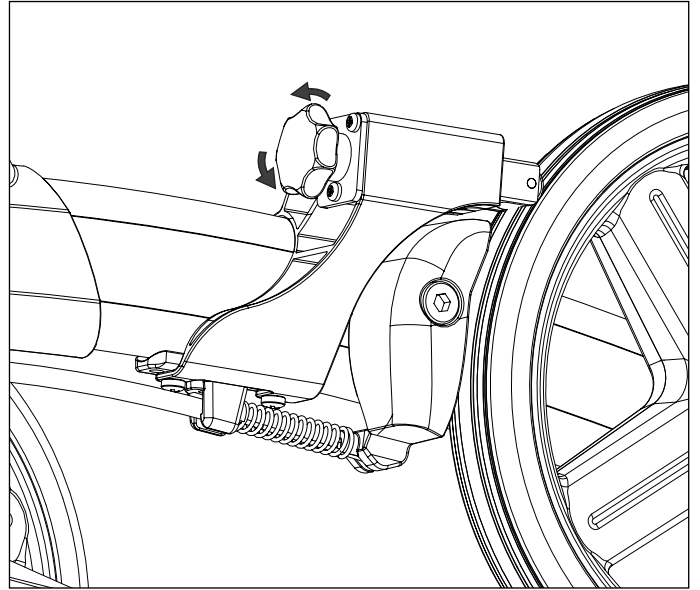

Belysning


Settes fast på kjørehåndtaksrøret med velcrobånd. Rødt lys bakover, hvit lys fremover. Batteridrevet. Lett å ta av, lett å bytte batteri.

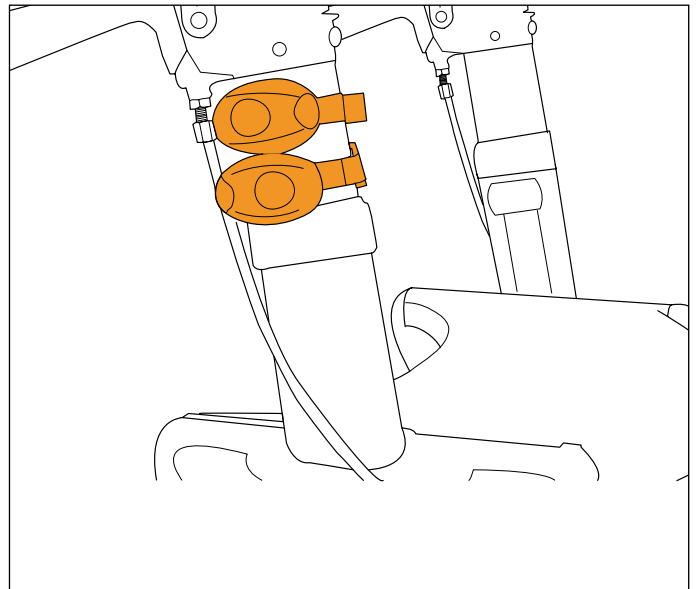

Tilbehør for din sikkerhet


Enhåndsbrems

Låser begge bakhjulene, aktiveres av enten kjørebremse eller parkeringsbremse.

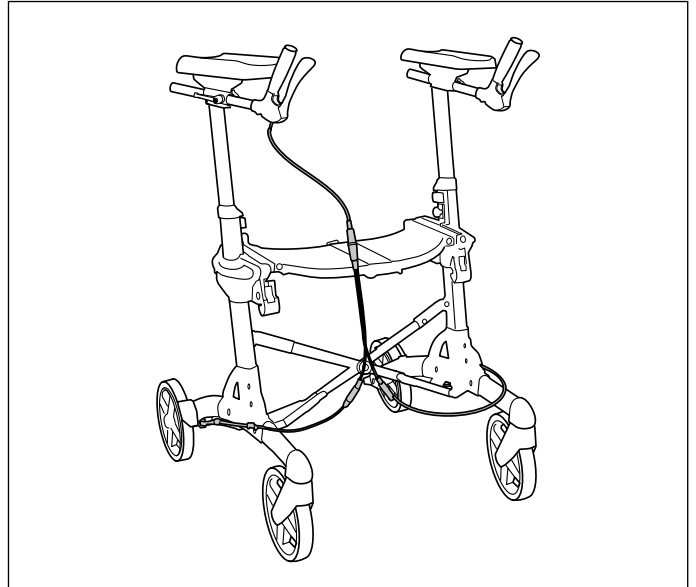


Holder for oksygenflaske

Kraftig stålholder som hektes på setet samt ett medfølgende feste. Lett å ta bort.

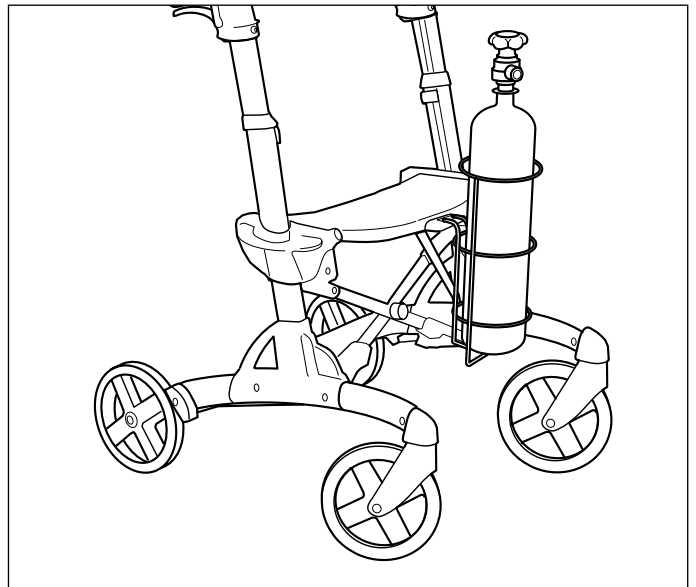

Intravenøsstativ


Drypposer skal helst henge mot midten av rullatoren. Husk at drypposer kan påvirke stabiliteten til rullatoren. Maksimal vekt 2,2 kg.

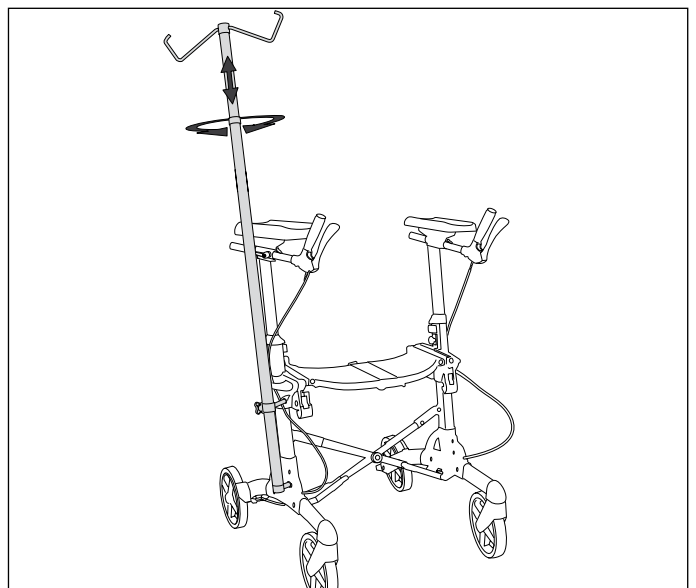

Tilbehør for din komfort


Krykkeholder/paraplyholder

To deler som skrues fast på forberedt plass. Holder stødig fast stakk, krykke eller paraply på plass.

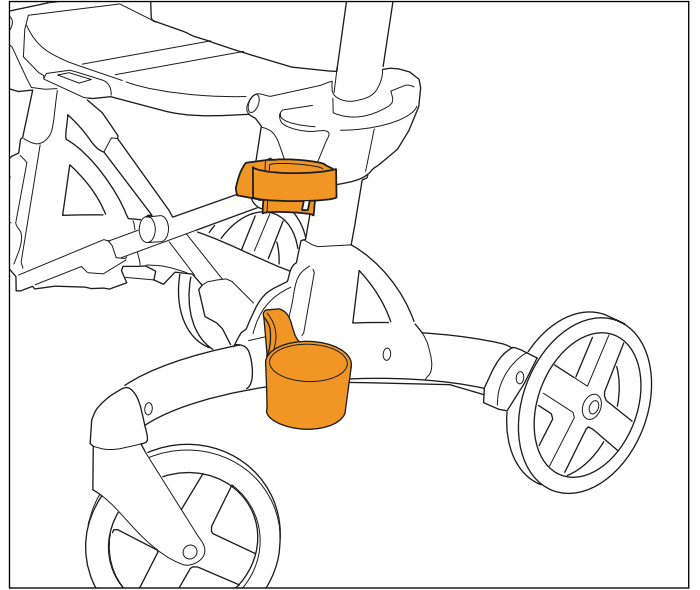

Flaskeholder


Holder i plastbelagt tråd for flaske/boks. Rommer 0,5 liters flasker og 33 cl bokser. Henges på håndtaket. Maksimal last: 0,6 kg.

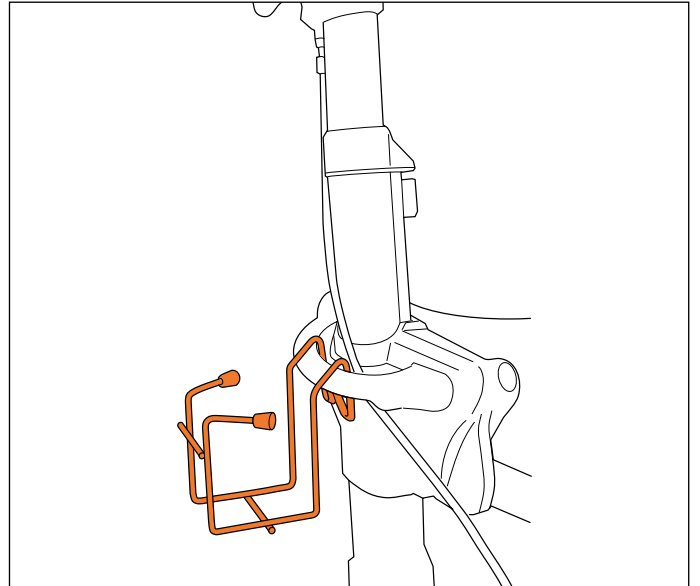

Tilbehør for din komfort


Transportbånd

Fest transportbåndet rundt rullatorens håndtak, da holdes rullatoren sammenfelt. Enkelt å montere.

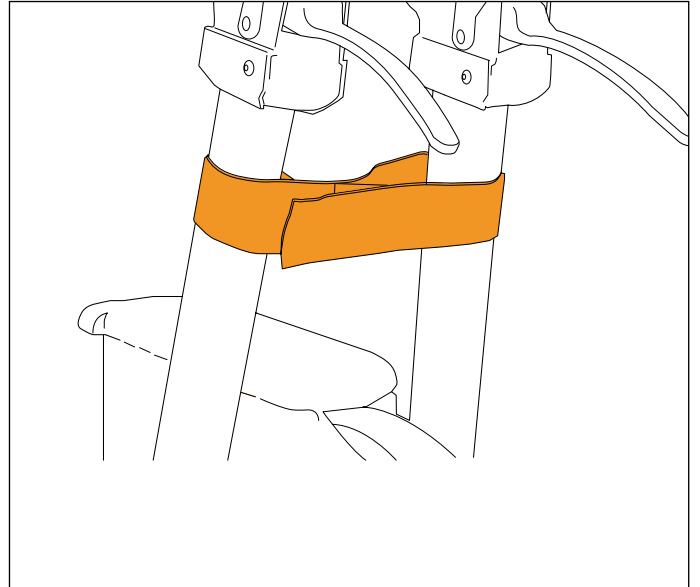


Tøyveske

En myk tøyveske i vevd nylon som kan sitte på også når rullatoren felles sammen. Lett å ta bort. Kan maskinvaskes. Maksimal last: 5 kg.

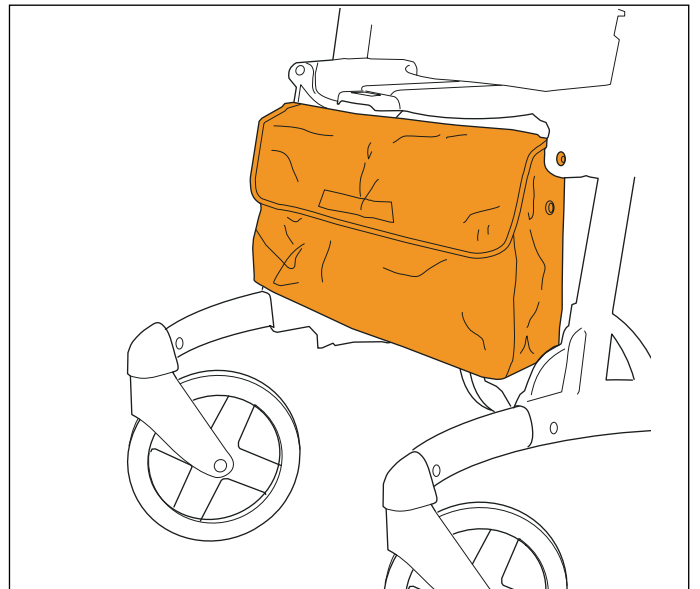

Metallkurv


En stødig kurv i metallnett. Hektes lett på S7 SMART. Med bærehåndtak. Maksimal last: 5 kg.

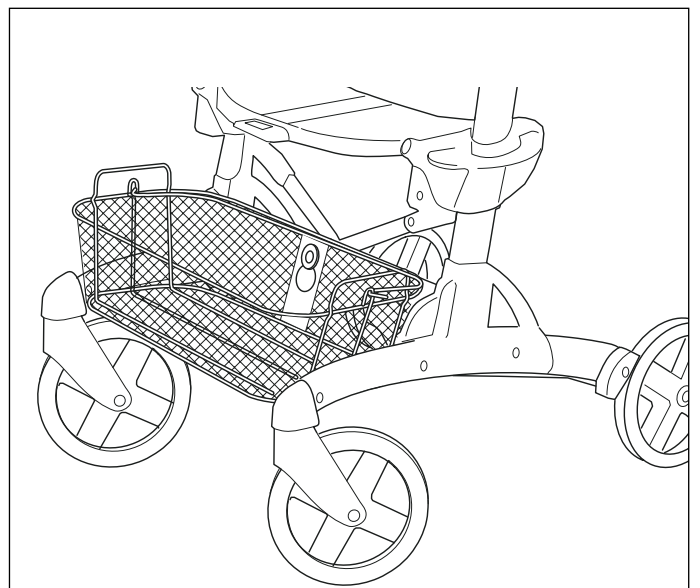

Tilbehør for din komfort


Brett

Brett i plast som settes over rullatorens sete.

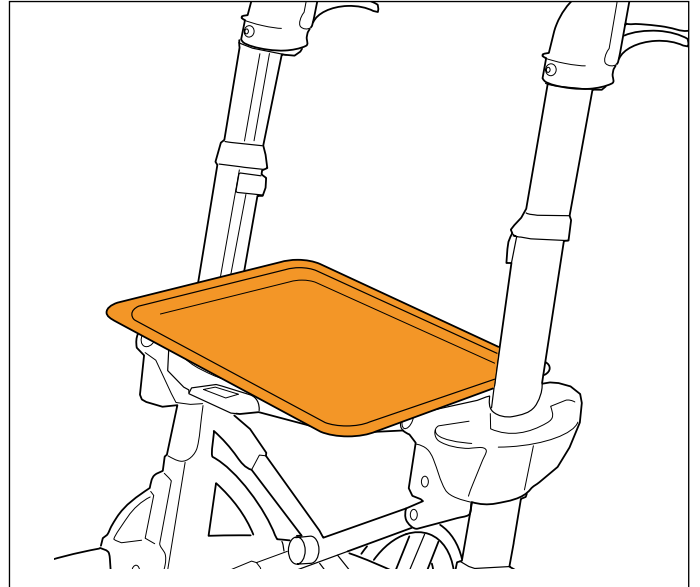


Tekstilkurv

Kurv laget med plastgavler og tekstilnett av nylon, rengjøres med oppvaskmiddel og varmt vann. Kurven kan monteres på alle Volaris S7 modeller. Tekstilkurven kan sitte på også når rullatoren felles sammen. Lett å ta bort. Maksimal last: 5 kg.

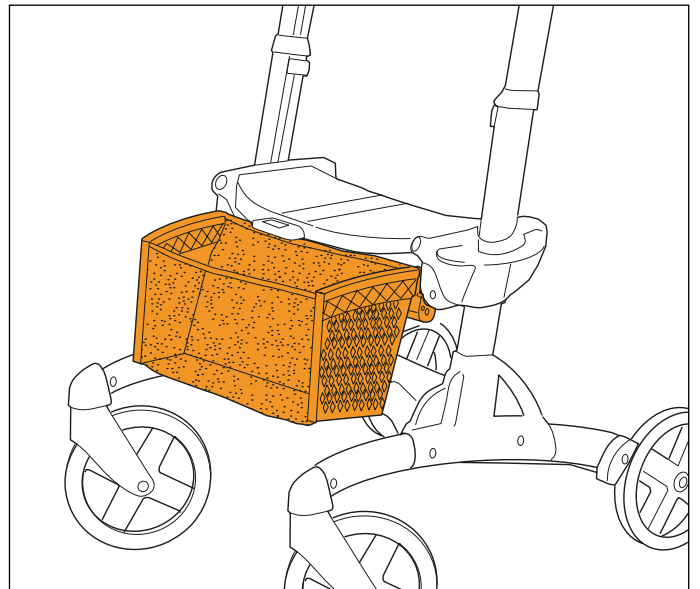


Myksete


Tre deler som gjør setet mykere og varmere. Kan være påmontert når man feller sammen rullatoren.

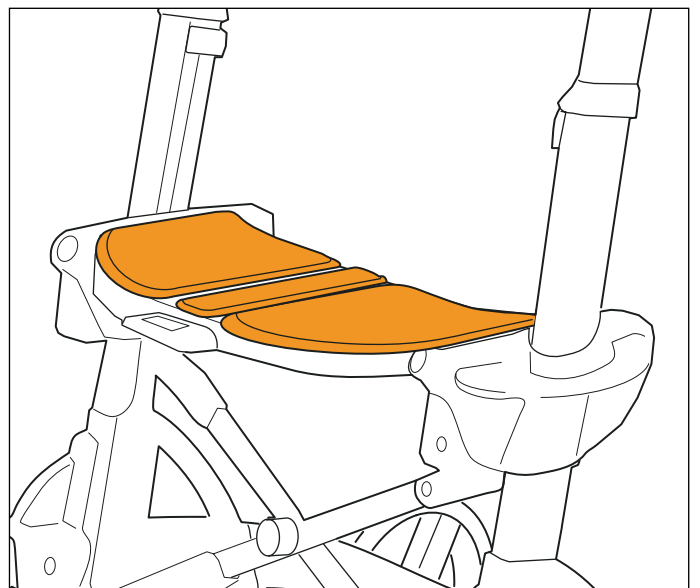

Tekniske data Størrelser og mål

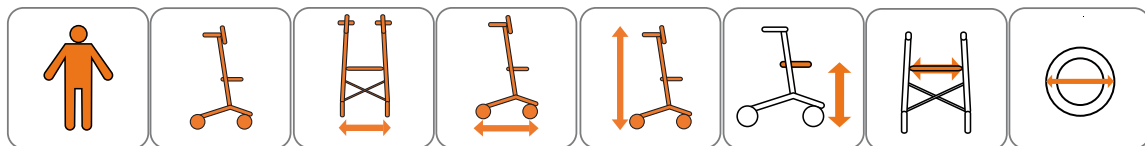

RA	125 kg	12 kg	64 cm	80 cm	100-125 cm	46-57 cm	47 cm	200x32 mm
RA low	125 kg	11,9 kg	64 cm	80 cm	88-114 cm	46-57 cm	47 cm	200x32 mm

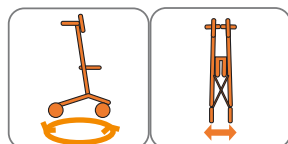

RA	180 cm	29 cm
RA low	180 kg	29 cm

Tilbehør for dine behov, din sikkerhet og komfort

	RA	RA low
Slepebrems	x	x
Belysning	x	x
Ryggbånd		
Stillbart ryggband		
Holder for oksygenflaske	x	x
Stokkholder	x	x
Flaskeholder	x	x
Paraply/ parasoll		
Transportbånd	x	x
Stoffveske	x	x
Trådkurv	x	x
Plate	x	x
Tekstilkurv	x	x
Mykt sete	x	x
Enhåndsbrems	x	x
Intravenøs-stativ	x	x

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Baldersvägen 38 | SE-332 35 Gislaved | Sverige
Tel. +46 (0)371 390 100 | www.eurovema.se | info@eurovema.se