

Rekondisjonerings skjema for Euroflex arbeidsstoler

Stoltype.....Serie nr.....

Bruker.....

For å oppnå full funksjon og sikkerhet bør produktet kontrolleres 1 gang per år, i henhold til rekondisjonerings skjemaet for Euroflex arbeidsstoler. Følg anvisningene på sidene 2-3 og kontroller følgende punkt på stolen.

- | | |
|---|--------------------------|
| Elektrisk utløsermekanisme / Gassfjær (funksjon, smøring) | <input type="checkbox"/> |
| Chassis (kontroller feste, rengjøring) | <input type="checkbox"/> |
| Hjul / Brems (rullemotstand, rengjøring) | <input type="checkbox"/> |
| Batteri / Kabler (kontroller tilstand og kontakter) | <input type="checkbox"/> |
| Lader (kontroller funksjon) | <input type="checkbox"/> |
| Trekk (rengjøring vask 60°) | <input type="checkbox"/> |
| Armlene (funksjon, rengjøring) | <input type="checkbox"/> |
| Ratt og brytere (lås, smøring) | <input type="checkbox"/> |
| Setekryss (undersøk med tanke på brudd, feste, funksjon) | <input type="checkbox"/> |
| Tilt (funksjon, feste, smøring) | <input type="checkbox"/> |
| Rygg- / Nakkestøtte (funksjon, rengjøring) | <input type="checkbox"/> |
| Benstøtte / Coxit (funksjon, rengjøring, smøring) | <input type="checkbox"/> |
| Kontroll av eventuelt ekstrautstyr (funksjon, rengjøring) | <input type="checkbox"/> |

OBS! Ved bytte av deler skal også tilhørende skrueforbindelser byttes og strammes til angitt moment. Se side 3 for tiltrekkingmoment.

Kontrollert den/...../.....

Kontrollert av.....

Underskrift.....

Rekondisjoneringsanvisninger for arbeidsstoler

Desinfisering: Bruk bare desinfeksjonsmidler som er godkjent av legemiddelverket

Elektrisk løfteinnretning og gassfjær

Elektrisk utløsermekanisme: Lytt etter ulyder. Hev setet til høyeste stilling, tørk av løftestolpen med klut og smør deretter løftestempelets glideflater med silikonspray eller tyntflytende olje. Kontroller at skruene (M8 x 4 stk.) som er plassert helt øverst og holder fast utløsermekanismen, er strammet til 24 Nm. Bruk nye skruer ved bytte av utløsermekanisme. *Gassfjær:* Kontroller at gassfjæren sitter fast oppe i setekrysset (M8 x 2 stk. bolter med nylonlås) og nede i chassiset (3 stk. skruer, se nedenfor). Smør glideflatene med silikon eller tynn olje.

Chassis

Kontroller at M10-boltene som holder fast chassishalvdelen, er strammet til 47 Nm. Bruk gjenge-lås Loctite 2700 og låseskive ved bytte av bolt. Kontroller også at løfteinnretningen er strammet ved festene til chassiset, med 1 stk. M8 og 2 stk. M6. Kontroller at bremsespaken, fotpedalen og fotringen er strammet. Test at bremsene låser skikkelig. Tørk av metallflatene.

Hjul og brems

Kontroller rullemotstanden og at hjulene ikke er defekte. Fjern eventuelle hårrester og annet som har satt seg fast i hjulakselen. Bytt defekte hjul ved behov, og stram skruen (4 stk. x M6), bruk Loctite 290 gjengelås. Hjulene kan tørkes av med en fuktig klut dyppet i mildt rengjøringsmiddel. Bruk nye skruer ved bytte av hjul, og test bremsene etterpå.

Batteri, kontrollboks og lader

Kontroller at batteriet sitter fast og ikke er skadet. Kontroller at alle kontakter og kabler er uskadet. Test funksjonene for håndkontrollen, vippebryteren eller styrespaken. Laderen skal lyse rødt når ladingen påbegynnes, og skal deretter veksle til grønt lys når batteriet er fulladet.

Rengjøring av sete, ryggstøtte og nakkestøtte

Et avtakbart, originalt stofftrekk samt belte og sele kan maskinvaskes ved 60 °C. Ved bruk av vanlig møbelvask eller skum skal følgende prosedyre følges:

1. Fjern løst smuss og støvsug deretter putene nøye.
2. Legg på et tynt lag med møbelskum på skitne flater og flekker. Gni lett med en myk børste, eller gni med en fuktig klut over hele flaten. Gjenta prosedyren til flekken er borte.
3. Tørk deretter med en ren, oppvridd klut dyppet i lunkent vann, og støvsug når alt har tørket.

Overtrekk og armstøtte i skinnimitasjon

Kunstskinn skal rengjøres med en mild såpeløsning og lunkent vann. Sterkere rengjøringsmiddel skal så langt som mulig unngås. Desinfisering: Bruk desinfiseringsmiddel beregnet for kunstskinn. Tørk av overflaten umiddelbart etterpå med en ren og fuktig klut.

Armlene i PUR

Rengjør produktet med en mild såpeløsning. Ikke bruk rengjøringsmiddel som inneholder klor eller slipe- og etsemidler, fordi dette kan skade overflaten. Bruk desinfiseringsmiddel beregnet for plast. Tørk av overflaten umiddelbart etterpå med en ren og fuktig klut.

Tilt med vaier eller sveiv

Tilt med vaier: Test funksjonen og juster ved behov. Bytt vaiernippelen ved bytte av vaier. Smør vaieren ved inngangen til alle vaierdeksler. Kontroller festet for stempelstanghodet og gasstiltstempelet. Bytt ut skrueforbindelsen ved behov. Skrueforbindelsen og stempelstanghodet skal alltid låses med Loctite 290. Tiltrekkingsmoment 5,7 Nm M5. Tilt med sveiv: Kontroller fester og smør akselen for sveiven.

Kontroll av setekrysset

Kontroller fester og at det ikke er slark i bevegelige deler, sprekker i sveisesømmer, samt at låsemutteren i tiltakselen er strammet. Smør bevegelige deler.

Rygg-, nakke- og armlene

Kontroller alle funksjoner, stram skruer og smør alle bevegelige deler inklusive gjenger for ratt og brytere. Kontroller overflate og trekk.

Tilbehør

Test funksjonen, stram skruer og smør alle bevegelige deler inklusive gjenger for ratt og brytere. Kontroller overflate og trekk.

Metallflater

Tørk av metallflater med fuktig klut. Bruk bare desinfeksjonsmidler som er godkjent av legemiddelverket og er i henhold til landspesifikke bestemmelser.

Tiltrekkingsmoment for ubehandlede, anoljede stålskrueforbindelser

M4 = 2,9 Nm

M5 = 5,7 Nm

M6 = 9,8 Nm

M8 = 24 Nm

M10 = 47 Nm