

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.



Servicehåndbok

- servicepunkt, tilpasninger, gjenbruk

Innholdsfortegnelse

Bytte av armlene	3
Bytte av armleneplater	3
Bytte av side på roteringsspaken – gass	4–5
Bytte av side på roteringsspaken – el	6–7
Bytte av ryggplate	8
Bytte av ryggstolpe	8
Bytte av rygg	9
Bytte av side for løftespak	10–11
Bytte av side for kontrollboks	12–13
Hjul – bytte foran (Flexbase)	14
Hjul – bytte bak (Flexbase)	14–15
Hjulbytte foran (Steel)	16
Hjulbytte bak (Steel)	17
Bytte av batteri	18–19
Sidebytte av brems (Flexbase)	20
Sidebytte av bremsespak (Steel)	21–22
Demontering av chassis – Steel	23
Demontering av chassis – Flexbase	23
Demontering av fotring – Steel	24
Demontering av fotring – Flexbase	24
Bytte av utløsermekanisme – el	25–26
Bytte av elektronikk	27
Bytte av gassfjær	28
Bytte av sete	29
Vaskeanvisning	30



BYTTE AV ARMLENE

Tidsforbruk: 1–2 minutter

1) Løsne stoppskruene med en stjerneskrutrekker.



2) Løsne rattet ved høydejusteringen og dra opp armlenet.



BYTTE AV ARMLENEPLATER

Tidsforbruk: 1–2 minutter

1) Løsne skruene i høydejusteringen med sekskantnøkkel nummer 5.



2) Løft opp høydejusteringen og fjern armleneplaten.



3) Skru fast høydejusteringen på den nye armleneplaten med sekskantnøkkel nummer 5. Skru godt fast.



BYTTE AV SIDE PÅ ROTE- RINGSSPAKEN – GASS

Tidsforbruk: 10 minutter

1) Løsne to skruer i chassiset med 6 mm sekskantnøkkel. Løft opp setet og legg det opp ned.




2) Bruk to 13 mm nøkler til å løsne de to gjennomgående skruene.




3) Fjern skruene.



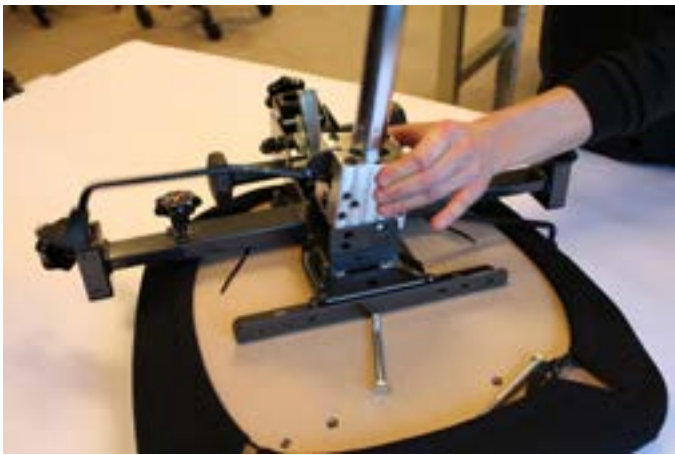

4) Løft opp roteringen og vri 90°

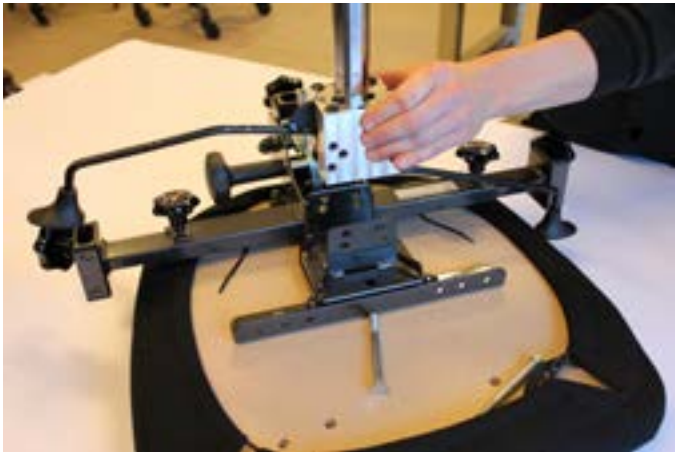

5) Monter deretter i omvendt rekkefølge. Pass på at stolsetet plasseres riktig i chassiset. Skru fast de to M8-skruene i chassiset med 35 Nm.



BYTTE AV SIDE PÅ ROTE- RINGSSPAKEN – EL

Tidsforbruk: 30 minutter


1) Legg en motkloss på ca. 15 mm under utløseren før du løsner skruene (klemrisiko). Løsne den øvre skruen med 5 mm nøkkel.



2) Løsne de to underste skruene i chassiset med 6 mm sekskantnøkler. Løft opp setet.



3) Løsne skruene på motsatt side. Bruk 13 mm nøkler, trekk til med 35 Nm.

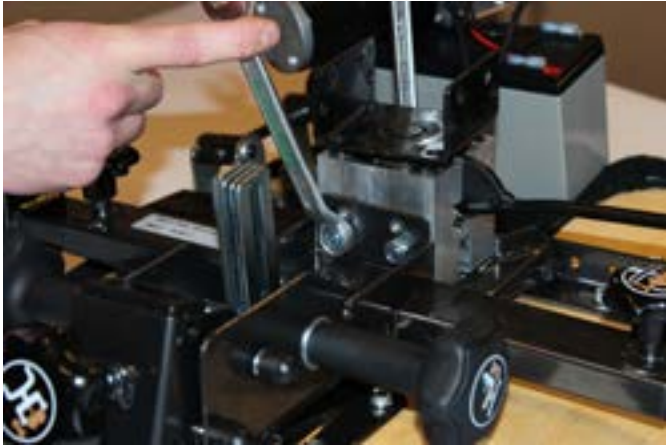

4) Løsne de to gjennomgående skruene og mutterne på den andre siden med en 13 mm nøkkel.



5) Løsne roteringsbakkene og bytt side. Monter i omvendt rekkefølge. Trekk til med 35 Nm.



BYTTE AV RYGGPLATE

Tidsforbruk: 0,5–2 minutter.

Kan gjøres uten verktøy.

1) Løsne det øverste rattet til du kan løfte opp ryggen.




2) Fjern ryggen. Sett på plass den nye ryggen og stram rattet.



BYTTE AV RYGGSTOLPE

Tidsforbruk: 1–3 minutter

1) For å løsne hele ryggstolpen skruer du først ut stoppskruen med en stjerneskrutrekker.

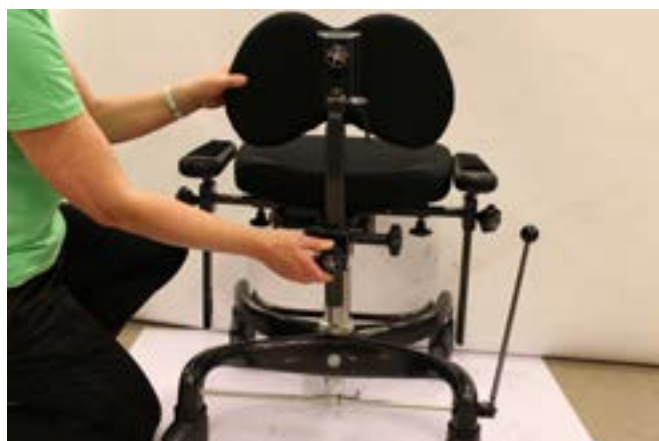

2) Løsne deretter det store rattet og dra opp ryggstolpen. Sett på plass den nye ryggstolpen, skru fast rattet og sett på plass stoppskruen.



BYTTE AV RYGG

Tidsforbruk: 1 minutt.

Kan gjøres uten verktøy.

1) Løsne på rattet for å bytte rygg.




2) Løft av ryggen og sett inn en ny.
Skru fast rattet når du har fått riktig høyde.



BYTTE AV SIDE FOR LØFTESPAK

Tidsforbruk: 10 minutter

1) Bruk to 13 mm nøkler og løsne de to gjennomgående skruene.

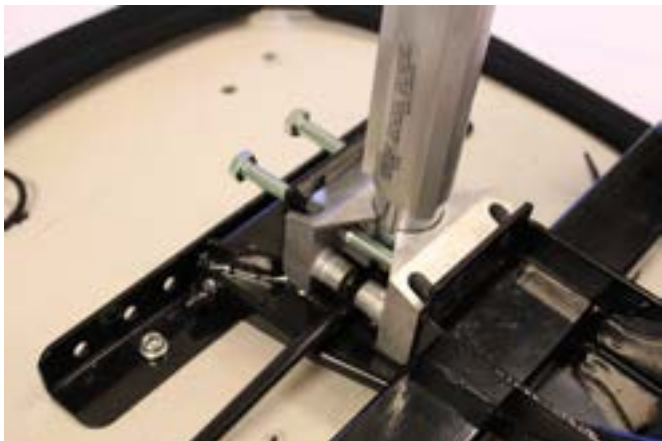

2) Trekk ut skruene.



3) Løft opp utløseren.




4) Løft opp klembakkene.



5) Løsne løftespaken.



6) Bytt side på løftespaken.

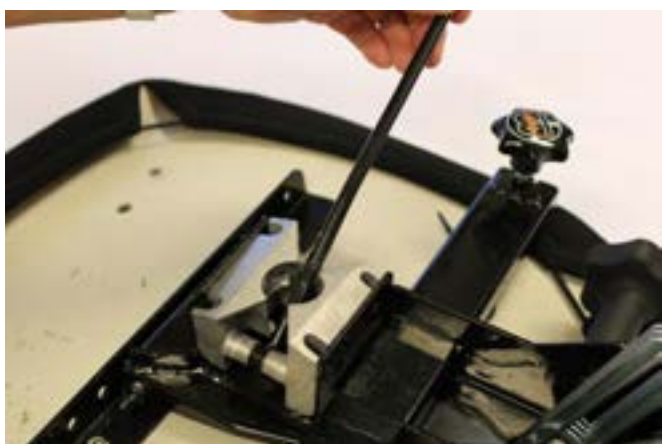

7) Sett klembakkene på plass igjen.



8) Sett på plass utløseren og trekk til alle skruer med 35 Nm.

BYTTE AV SIDE PÅ KONTROLLBOKS

Tidsforbruk: 15 minutter

1) Løsne stoppskruen på armlenet.



2) Løsne armlenet med rattet og løft det av.



3)




4) Fjern kontrollboksen.





5) Skru løs to skruer på undersidan av armlenet med 5 mm sekskantnøkkel.

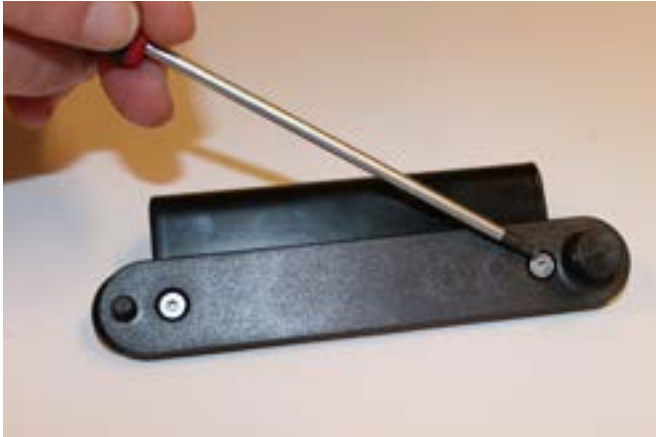

6) Løsne skruene fra metallplaten til utløseren med 2 mm sekskantnøkkel.



7) Snu magnetlisten og skru inn skruene med 2 mm sekskantnøkkel.



8) Bytt side på armlenet, sett skruene på plass igjen og skru dem skikkelig fast, alt i omvendt rekkefølge. Husk stoppskruen, som skrus fast med en stjerneskrutrekker.



HJUL – BYTTE FORAN FORMA

Tidsforbruk: 5 minutter

1) Løsne skruen i metallskiven med 5 mm sekskantnøkkel.



2) Løsne hjulet. Bytt hjul. Husk å lime skruen og trekk til med 35 Nm.



HJUL – BYTTE BAK FORMA

Tidsforbruk: 10 minutter

1) Løsne skruen i bremsespaken med sekskantnøkkel 5 mm og fjern bremsespaken og kulelåsen.



2) Løsne også seegerringen med en skrutrekker og fjern den.



3) Dra av plastskiven fra sekskantstangen.



4) Dra ut sekskantstangen fra chassiset.



5) Løsne skruen i metallskiven med 5 mm sekskantnøkkel.



6) Bytt hjul. Husk å lime skruen og trekk til med 35 Nm. Sett alt på plass i omvendt rekkefølge.



HJULBYTTE – FORAN STE- EL

Tidsforbruk: 2 minutter

1) Løsne skruen og mutteren med to fastnøkler nummer 13.




2) Trekk ut skruen og bytt hjul.
Gjør alt i omvendt rekkefølge og
skru til med 25 Nm.



HJULBYTTE – BAK STEEL

Tidsforbruk: 5 minutter

1) Løsne sporrytteren på bremsestangen.

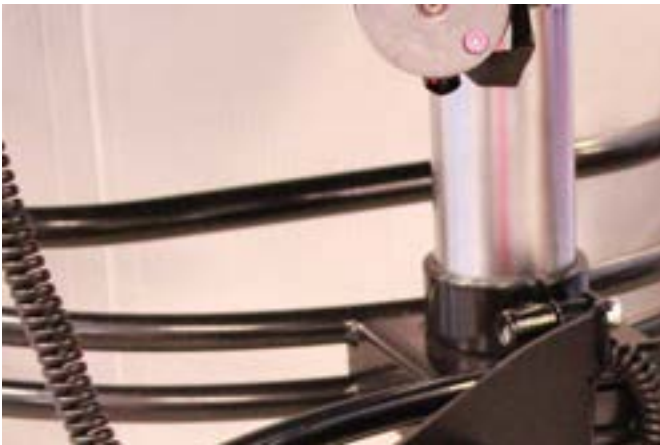

2) Dra ut bremsestangen fra chassiset.



3) Løsne skruen som holder fast hjulet, med sekskantnøkkel nummer 5.




4) Dra ut hjulet og monter i omvendt rekkefølge. Trekk til med 15 Nm.



BYTTE AV BATTERI

Tidsforbruk: 10 minutter


1) Klipp bort alle buntbånd og løsne kablene fra boksen.

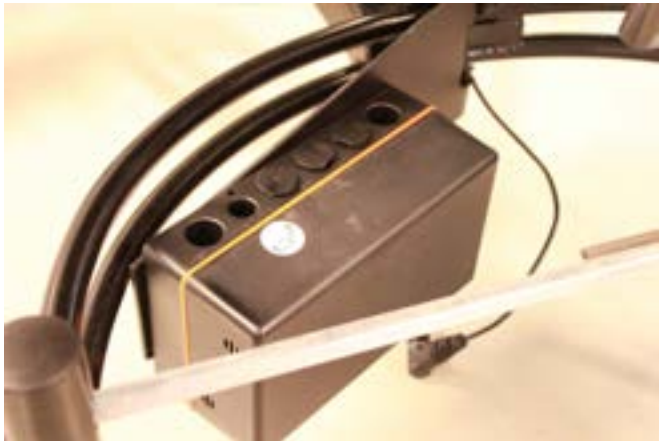

2)



3) Løsne de to skruene som holder utløseren og festeplaten på plass til boksen, med sekskantnøkkel nummer 6. Slipp utløseren ned mot bakken.

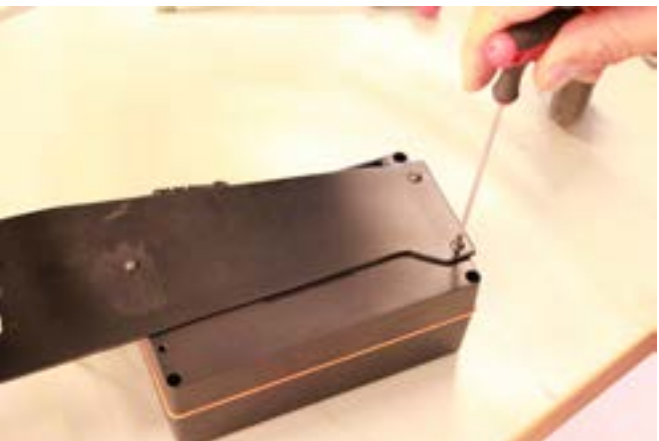

4) Løsne de tre skruene som holder platen på plass, med torx T20, og fjern platen.



5) Løsne de fire skruene med torx T15 og snu boksen.



6) Løft opp lokket.



7) Løsne samtlige kabelsko og fjern batteriene. Monter i omvendt rekkefølge. Trekk til utløseren med batteriplate med 35 Nm.



SIDEBYTTE AV SPAKBREMS

Tidsforbruk: 5–10 minutter

1) Ved bytte av bremsen fra høyre til venstre side skal stolen stå ubremset.

2) Løsne skruen i bremsespaken med 5 mm sekskantnøkkel.

3) Løsne seegerringen med en skrutrekker og fjern den.

4) Løsne plastskiven som var plassert innenfor seegerringen. Dra av skiven fra sekskantstangen.

5) Dra ut sekskantstangen og bytt side. Monter og skru i omvendt rekkefølge



SIDEBYTTE AV MIDTMON- TERT BREMSESPAK (STEEL)

Tidsforbruk: 5 minutter

1) Løsne på rattet.



2) Dra opp bremseespaken fra adap-
teren.



3) Bytt til den andre siden og gjør
alt i omvendt rekkefølge.



5) Sett i sekskantstangen på den andre siden og gjør alt i omvendt rekkefølge.



DEMONTERING AV STEL-CHASSIS

Tidsforbruk: 3–5 minutter

- 1) Løsne skruene med 6 mm sekskantnøkkel.



DEMONTERING AV FLEX-BASE-CHASSIS

Tidsforbruk: 5 minutter

- 1) Legg en motkloss på ca. 15 mm under utløseren før du løsner skruene (klemrisiko). Løsne den øvre skruen med 5 mm sekskantnøkkel.



- 2) Løsne de to nedre skruene med 6 mm sekskantnøkkel.



- 3) Løft opp utløseren.



DEMONTERING AV FO- TRING – STEEL

Tidsforbruk: 1–3 minutter

1) Fell opp fotringen.



2) Løsne skruen med 5 mm sekskantnøkkel på begge sider.



DEMONTERING AV FO- TRING – FLEXPBASE

Tidsforbruk: 1–3 minutter

1) Fell opp fotringen.



2) Løsne de fire skruene på undersiden med 5 mm sekskantnøkkel.



BYTTE AV UTLØSERMEKANISME – EL

Tidsforbruk: 25 minutter

1) Legg en motkloss på ca. 15 mm under utløseren før du løsner skruene (klemrisiko). Løsne den øvre skruen med 5 mm sekskantnøkkel.




2) Løsne de to underste skruene i chassiset med 6 mm sekskantnøkler. Løft opp setet.



3) Løsne kabelen til utløseren.



4) Løsne og fjern skruene.

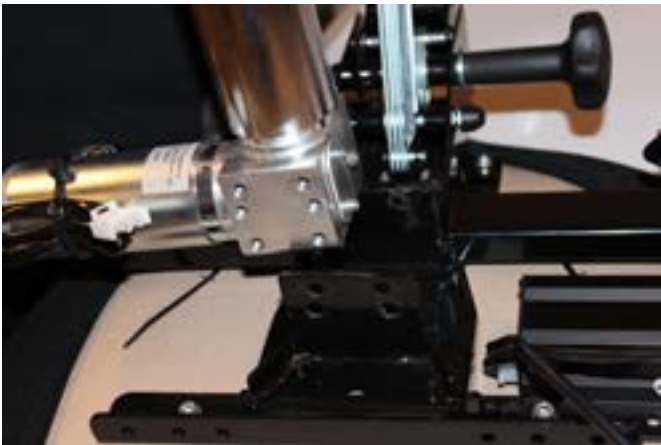

5) Løft av og bytt utløsermekanismen. Skru og sett på plass, alt i omvendt rekkefølge.

M6 15 Nm


M8 35 Nm



BYTTE AV ELEKTRONIKK

Tidsforbruk: 8 minutter


1) Klipp bort alle buntbånd og løsne kablene fra boksen.

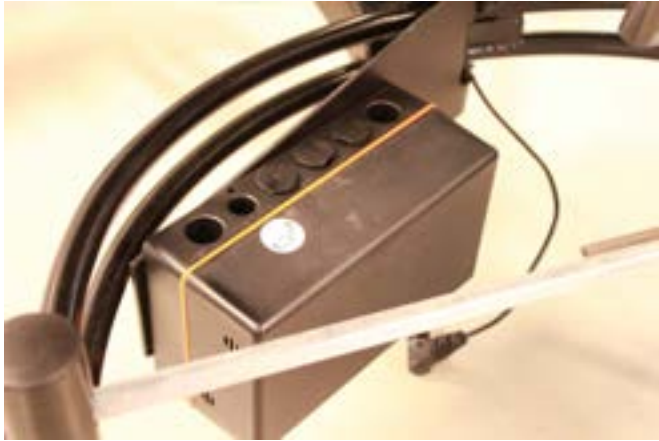

2)



3) Løsne de to skruene som holder utløseren og festeplaten på plass til boksen, med sekskantnøkkel nummer 6. Slipp utløseren ned mot bakken.

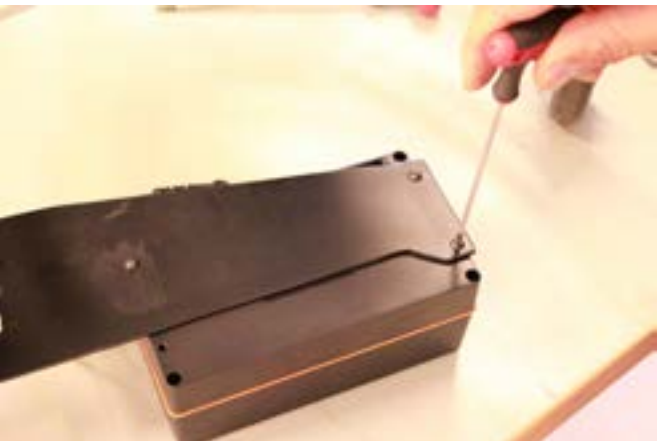

4) Løsne de tre skruene som holder platen på plass, med torx T20, og fjern platen. Monter i omvendt rekkefølge. Trekk til i chassiset med 35 Nm.



BYTTE AV GASSFJÆR

Tidsforbruk: 15 minutter


1) Løsne to skruer i chassiset med 6 mm sekskantnøkkel.



2) Løft opp setet.



3) Løsne de to gjennomgående skruene, hold en 13 mm sekskantnøkkel på mutteren og en på skruen og løsne.

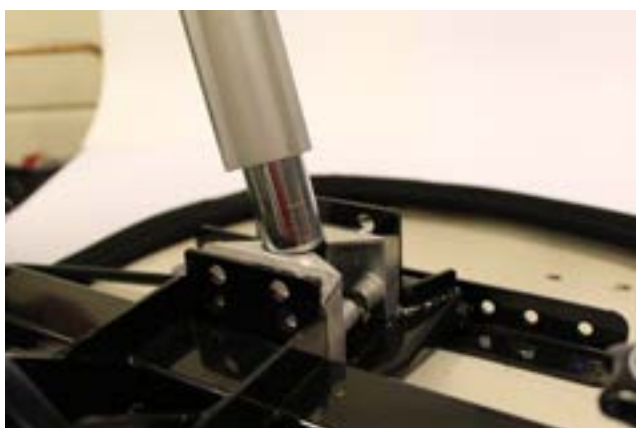

4) Løsne gassfjæren fra klem-bakken. Bytt og skru fast i omvendt rekkefølge. Trekk til med 35 Nm.

BYTTE AV SETE

Tidsforbruk: 5 minutter


1) Sete sett fra undersiden.




2) Løsne alle de 6 skruene under setet med 5 mm sekskantnøkkel. Løft av setet og bytt til nytt.



3) Skru fast alle de 6 skruene med 35 Nm.

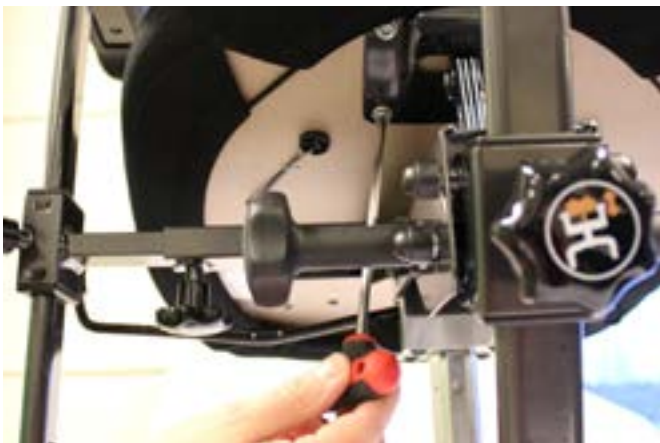

4) Pass på at alle skruene er skrudd til med 35 Nm.

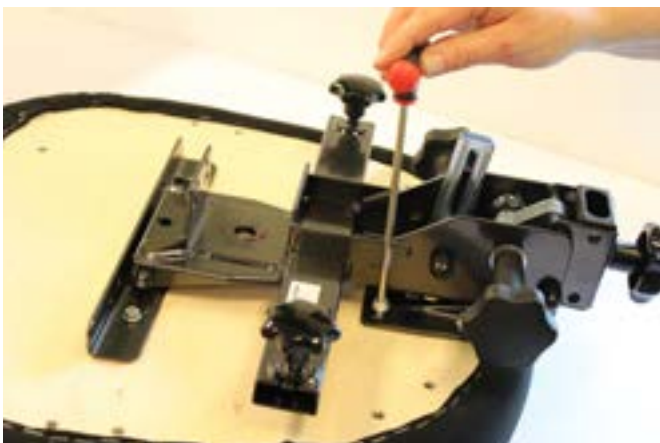



VASKEANVISNING

1) Alle produkter som er avtakbare, er merket med vaskeanvisning.



Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Eurovema AS
Post: Boks 53 | 2021 Skedsmokorset
Besøksadresse: Svennerudveien 34 | Frogner
Tel. 46301939
framapost@eurovema.no | www.eurovema.no

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved,
Sverige/Sweden /Schweden
Tel. +46 (0)371 390 100 | Fax. +46 (0)371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se