

INGLESE - cod.2220592 - 20-04-22



**ORMESA®**

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

**Trollino**

# Egnet for ethvert miljø



# Trollino

## Stabilitet, praktisk og komfort: alt i ett.

Trollino by Ormesa er et kompakt og lett **sittesystem for barn og tenåringer**, ideelt å bruke i alle miljøer.

Den er lett å håndtere takket være **det internasjonalt patenterte systemet** som gjør det mulig å **folde den sammen med én enkelt operasjon**. Når den foldes sammen, øker den ikke lengden, og opptar minimum plass.

Trollino har en **slitesterk og motstandsdyktig** struktur, som blir ivaretatt av det doble krysset plassert bak ryggstøtten og under setet som gir større stabilitet og komfort.

**Polstringen er laget med avanserte teknologiske materialer:** Den er ekstremt pustende, motstandsdyktig, lett vaskbar og brannhemmende. Den er tilgjengelig i fire farger: rød, blå, rosa og svart.

Takket være et bredt utvalg av tilgjengelige komponenter, dekker den enkelt alle behov.



Trollino er **CRASH TESTET** i henhold til **ISO 7176/19** og **ANSI RESNA WC/19** standarder.

PRODUKT  
MARKED **CE**

TROLLINO er en MEDISINSK ENHET SOM OVERHOLDER SIKKERHETSKRAV DEFINERT I FORORDNING (EU) 2017/745



# Praktisk og lett

## Den passer din dynamiske livsstil

**Trollino** har en folderamme i aluminium, malt med giftfrie epoksy pulver.

**Når den er foldet sammen forblir den kompakt:** Dette gjør at du kan **trille Trollino** på bakhjulene som en reisekoffert.

Den lave vekten og den enkle sammenleggingen gjør den enkel å løfte eller flytte: den er perfekt hvis du trenger å oppbevare den i bilen eller for å ta med på offentlig transport.

**Hjulene tilpasser seg alle typer terreng** og gir maksimal komfort for både for forelder og barn. Den er så hendig at **den kan skyves med én hånd.**

**Trollino** er den **ideelle løsningen** for familier som ofte reiser og som er ute etter **stabilitet, praktisk og komfort, alt i ett!**



# Smart trekk

## Trekk som puster og isolerer


Polstringen til Trollino har en myk elastisk struktur, **derfor er den ekstremt pustende i kontakt med huden**. Strukturen til stoffet skaper et "luftkammer" som tillater både **luftsirkulasjon, for maksimal pusteevne, og en effektiv naturlig termisk isolasjon**.

**Dobbeltlaget er en garanti for:**

- > **Hygiene:** Takket være den utmerkede pusteevnen reduserer den svette og bakteriedannelse.
- > **Vask:** til tross for at polstringen ikke kan tas av, tillater stoffsammensetningen enkel desinfisering og vask
- > **Hurtigtørkende.**
- > **Motstand:** Høy motstand mot slitasje. Teksturen med høy motstand opprettholder ytelsen selv ved høye belastninger (ISO 12947-test).
- > **Brannhemmende:** i henhold til EN 1021-1:2014 og EN 1021-2:2014.



**Velg din stil:** du kan velge mellom

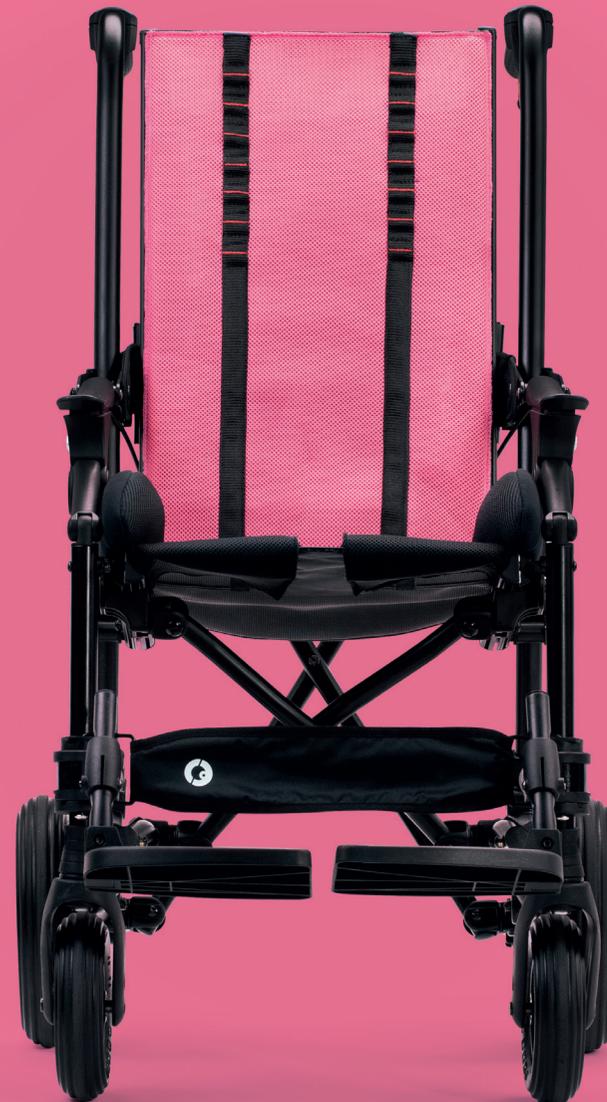

om 4 forskjellige farger



# Tekniske egenskaper og justeringer



## Ryggstøtte

Tilbakelent i tre stillinger. Enkel høydejustering ved å skyve, uten risiko for å miste skruen. Det er en pose på baksiden for å oppbevare manualen og den medfølgende skiftenøkkelen. Ryggkorset sikrer stabilitet, komfort og utholdenhet



## Sete

Ergonomisk og lett skråstilt sete for å hindre glidning av bekket og sikre større komfort. Justerbar i dybden ved å skyve og i bredden takket være den ekstra komponenten 958 polstrede bekkensidestøtter. Enkel justering uten risiko for å miste skruen. Krysset under sete sørger for stabilitet, komfort og utholdenhet.



## Håndtak

Skyvehåndtak med manuell brems og parkeringsbrems. Veldig gode håndtak for å håndtere vognen i ulike miljøer. Høydejustering med komponent 951.



## Benstøtte

justerbar i høyden.

## Fotstøtter

Vipp- og svingbare fotstøtter på linje med rammen uten belastning. Justering i tilt med komponent 956.

Leggstøttebåndet er også inkludert for å bidra til mer komfort.



## Hjul

med "Ormesa Design" originalprofil.

Solide, lette og terrengjul.

**Front solide svingbare hjul:** 7" (17 cm) diameter.

**Bakre solide hjul:** 10" (25 cm) diameter, med uavhengige trommelbrems.

**Fotpedal på begge bakhjul,** for å vippe vogn f.eks. over dørterskel eller fortauskant.



# Komponenter

## Viktigheten av et ergonomisk sete

For oss er **komfort og ergonomi essensielle verdier:** Trollino får brukerne til å føle seg trygge og veldig komfortable. Den gir mulighet til å tilby en optimal og stabil holdning under de mest forskjellige omstendigheter.

Fra ryggstøtten til setet, som går gjennom hodestøtten og kroppens sidestøtter, **er hvert element i Trollino justerbart på en enkel og intuitiv måte.** Videre, med sitt sett med tilleggskomponenter, tilbyr den mange muligheter for tilpasning og komfort.

Enkel å fikse og fjerne, hendig og holdbar, Trollinos komponenter er designet til minste detalj.

Det **internasjonale patenterte systemet lar deg folde den sammen med én enkelt operasjon,** selv med monterte komponenter. for å sikre en fullt ut tilfredsstillende brukeropplevelse.


# Komponenter



**835 Formet og omsluttende  
hodestøtte**  
justerbar i høyden.



**865 Polstret hodestøtte**  
justerbar i høyden.

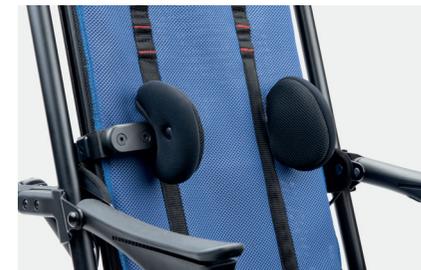


**838 Kroppssidestøtter**  
justerbar i høyde, bredde og rotasjon.  
Tilgjengelig i to størrelser.



**947 Bekkenbelte med variabel  
vinkel**  
Tilgjengelig i to størrelser.




**920 Firepunkts bekkenbelte**  
Tilgjengelig i to størrelser.

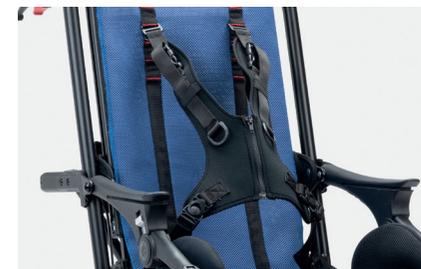

**853 Vest/sele med glidelås**  
Tilgjengelig i to størrelser.

# Komponenter

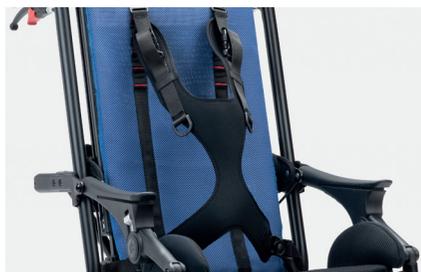

**853 slim firepunkts formet sele**



**834 Polstret abduksjonsblokk**  
avtakbar



**839 Håndtak foran**  
Justerbar i tilt. Lett å ta av for å slå sammen vognen.



**819 Baldakin**  
Forhøyet, med bag og liten bakrute. Det er ikke nødvendig å fjerne kalesjen, den kan lukkes med vognen!



**825 Regntrekk**  
For å feste på 819 kalesjen.  
**Ryggbeskyttelse Klut (825B)**  
tilgjengelig for bedre beskyttelse motvær og vind



**818 Termisk pose / trekk**

# Komponenter



**960 Hælstøtters**



**956 Fotstøtter justerbare i tilt**



**858 Handlekurv**



**812 Forhjuls retningslåser**



**844 Polstret side beskyttelsesdeksler**



**951 Høydejusterbar kjøre håndtak**

Det øker totalhøyden på maks. 7 cm/2,7 in (98-105 cm/38,5-41,3 in).



**891 Sett med 4 festekroker**

for forovervendt transport av barnevognen i motorkjøretøy (privat/biler, busser..). Se bruker- og vedlikeholdshåndboken som følger med hjelpemidlet.



# Trollino størrelser og vektor



**A:** 36 cm (14"). For forskjellig bredde (32 and 28 cm - 12,6" and 11") velg 958 polstrede bekkensidestøtter.


Gaia og historien hennes  
venter på deg på Ormesas  
offisielle nettside, sammen  
med andre hovedpersoner  
i vårt fantastiske globale  
fellesskap.





Ronda AS - Randabergveien 308, 4073 RANDABERG - Telefon 915 72071- mail: post@ronda.no - www.ronda.no

Norsk importør

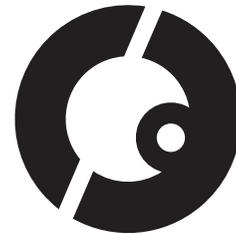

**En spesiell takk til familiene som deltok med entusiasme i prosjektet vårt. Det er takket være våre kunder og deres historier som vi finner energi og stimuli til utvikle seg dag for dag.**

**CE** i henhold til MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 13485 =

**Ormesa srl** - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

**www.ormesa.com**