

Valgt som foreleser av
den vitenskapelige
komiteen for:

ISS
2015
NASHVILLE

ISPRM
2017
BUENOS AIRES

ISS
2019
PITTSBURGH

LASS
2019
BUENOS AIRES



ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Eurovema

GRILLO





Et enkelt ganghjelpemiddel med uendelige muligheter.

Grillo er et ganghjelpemiddel som er utviklet for å fremme et naturlig gangmønster hos barn og voksne.

Grillos **patenterte høydejusteringssystem** gjør det trygt for bruker og enkelt for assistent å justere.

Grillo er tilgjengelig **med åpen eller lukket front**, På grunn av dens forskjellige justeringer og et bredt utvalg av tilgjengelige støtter, er den meget lett å tilpasse til hver enkelt brukers behov.

PRODUKT
MERKET 

GRILLO er et hjelpemiddel, som overholder MDR og sikkerhetskrav som er definert i dokument(EU) 2017/745



Ganghjelpemiddel med et optimalt tyngdepunkt

Grillo vokser sammen med deg

Med sin meget lette aluminiumsramme er **Grillo lett å skyve og manøvrere** for de med redusert motorikk og balanse, og kan enkelt foldes sammen for lagring og transport.

Den har et gassfjærsystem som muliggjør sikker og enkel justering av rammen. **Det optimale tyngdepunktet ved høydejustering** gjør at en Grillo, av bare en størrelse, kan tilpasse seg et barns vekst over lang tid.







Konfigurerbar for å tilpasses til ethvert behov

Åpen front



PT Konfigurasjon med bekkenstøtte, bryststøtte, håndtak og ergonomisk sal.

For brukere som trenger både
bekkenstøtte og bryststøtte. De
to uavhengige støttene tillater
fremoverbøyning av kroppen for å
lette gangfunksjonen.

SIZE
mini

SIZE
S

SIZE
M

SIZE
L

Lukket front



PT konfigurasjon med bekken- og bryststøtte og håndbøyle og ergonomisk sal.

For brukere som trenger både
bekken- og kroppsstøtte. De
to uavhengige støttene tillater
fremoverbøyning av overkroppen for
å lette gangfunksjonen.

SIZE
mini

SIZE
S

SIZE
M

SIZE
L

Uavhengige justerbar støtter for overkropp og bekken



Allsidigheten, tilpasningsevnen og ergonomien sørger for sikkerhet, stabilitet og støtte hele veien for brukeren mens dem står og går.

De støtter brukerens kropp uten å tvinge posisjonering eller bevegelse.

Designet og bygget for å gi samme **følelse av sikkerhet og støtte** som en forelder som støtter barnet sitt.

De anatomiske støttene er tilgjengelige i 4 størrelser, akkurat som rammene. For å møte de spesifikke behovene til en bruker, for eksempel en veldig høy og tynn person, **er det imidlertid bedre å bruke støtter av mindre størrelse enn rammen.**

Støtter størrelse S, rammestørrelse M



Nøyaktige, kontinuerlige justeringer

Alle justeringer gjøres ved hjelp av spaker eller justerbare sikkerhetshåndtak uten behov for verktøy. Dette muliggjør sikre og enkle justeringer og modifikasjoner, **selv under bruk**. Det gjør det også enkelt å legge til og fjerne utskiftbare støtter.



Vinkeljustering.



Omkrets og breddejustering.



Høydejustering (bekkenstørrelse L kan bare justeres med rammen).



Justering for-og bakover.





Gradert skala

Disse er tilstede på alle justerbare støtter, og gjør at en **bestemt stilling kan stilles inn eller gjenopprettes av terapeuten** etter å ha lagt sammen rammen, og dermed unngås risikoen for å justere hjelpemiddelet på en upassende måte.



Rask og enkel sammenlegging

Grillo kan legges sammen i en bevegelse for kompakt oppbevaring og enkel transport.

Ormesa designet hjul som passer til alle overflater

Bakhjul med:

- › **Ryggesperre:** som forhindrer bevegelse bakover.
 - › **Justerbar slepebrems:** 5 justeringsposisjoner for å redusere ganghastigheten
 - › **Kompatibel med håndbrems.**
 - › **Parkeringsbrems:** den betjenes enkelt av den røde pedalen. Nyttig for posisjonering av bruker og for transport.
-
- › **Svingbare hjul:** med retningssperre som forhindrer at forhjulene snur, fremmer stabilitet og lar brukeren fokusere utelukkende på fremdrift og ikke på styringskontroll.
 - › **Ved å snu hjulene er det mulig å gjøre en "ÅPEN" frontkonfigurasjon til en "LUKKET, konfigurasjon-og omvendt.**

Hjul dimensjoner:



front	15 cm	15 cm	17,5cm	17,5 cm
bak	20 cm	20 cm	25 cm	25 cm



Tillbehør



Multijusterbar hodestøtte

	Mini	S/M/L
Art.nr.	102999	102968
HMS-nr.	313286	313285



Bryststøtte

	Mini	S	M	L
Art.nr.	103638	103639	103640	103641
HMS-nr.	313316	313314	313315	313317



Bekkenstøtte

	Mini	S	M	L
Art.nr.	103634	103635	103636	103637
HMS-nr.	313289	313287	313288	313290



Ergonomisk sele

	Mini	S	M	L
Art.nr.	103631	103631	103632	103633
HMS-nr.	313283	313283	313282	313281



Justerbart håndbøyle

	Mini	S	M	L
Art.nr.	103622	103586	103587	103599
HMS-nr.	313273	313274	313272	313271



Armstøtter

	S/M hø	S/M ve	M/L hø	M/L ve
Art.nr.	103576hø	103576ve	103614hø	103614ve
HMS-nr.	313246	313247	313250	313251



Armstropp

	S	M/L
Art.nr.	103615	103616
HMS-nr.	313338	313339



Armstøtter for størrelse mini

	Mini/S	Mini/S
Art.nr.	103617hø	103617ve
HMS-nr.	313248	313249



Armstropp for størrelse mini

	Mini/S
Art.nr.	103629
HMS-nr.	313337



Ergonomiske håndtak

Art.nr.	102974
HMS-nr.	313303



Avtakbare håndtak

	Mini	S/M/L
Art.nr.	103618	103588



Korsryggstøtte

	S	M
Art.nr.	102792	102793
HMS-nr.	313312	313313

Tillbehør



Sammenleggbart sete

	S	M
Art.nr.	102778	102779
HMS-nr.	313309	313310



Nedfellbar sal

	Mini/S	M	L
Art.nr.	103601	103603	103604
HMS-nr.	313336	313335	313334



Ergonomisk sal

	Mini	S	M/L
Art.nr.	103648	103651	103652
HMS-nr.	313332	313333	313331



Ledsakerstang

	Mini/S/M/L hø	Mini/S/M/L ve
Art.nr.	103581	103643



Benskiller med stropper

	S	M	L
Art.nr.	102808	102809	102810
HMS-nr.	313258	313257	313256



Benskiller polstret

	Mini	S	M	L
Art.nr.	102961	102811	102812	102815
HMS-nr.	313261	313262	313260	313259



Vektstenger (ekstra lodd)

	S	M
Art.nr.	105604	105605
HMS-nr.	313320	313321



Bakhjul for breddejustering med parkeringsbremsepedaler

	M/L hø	M/L ve
Art.nr.	103656hø	103656ve
HMS-nr.	313252	313251



Grillo åpen og lukket front

størrelser og vekt

A: høyde bakken til bryststøtte
 B: høyde bakken til bekkenstøtten
 C: lengde stativ
 D: total bredde
 E: bredde på innerstøtter
 F: omkrets av støtter
 G: brukerhøyde
 Total vekt
 Maksimal belastning

mini

fra 51 til 75 cm
 fra 42 til 61 cm
 74,5 cm
 62 cm
 fra 19 til 25 cm
 fra 53 til 79 cm
 fra 75 til 95 cm
 15 kg
 35 kg

small



fra 66 til 100 cm
 fra 49 til 84 cm
 75 cm
 69 cm
 fra 19 til 25 cm
 fra 60 til 86 cm
 fra 90 til 135 cm
 19 kg
 45 kg

medium

fra 73 til 124 cm
 fra 54 til 100 cm
 91 cm
 76 cm
 fra 22 til 36 cm
 fra 74 til 120 cm
 fra 110 til 165 cm
 22,5 kg
 90 kg

large

fra 84 til 147 cm
 fra 63 til 120 cm
 111 cm
 80 cm
 fra 24 til 40 cm
 fra 81 til 140 cm
 fra 150 til 190 cm
 29,5 kg
 110 kg

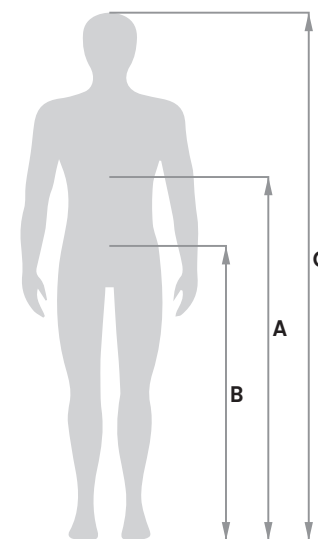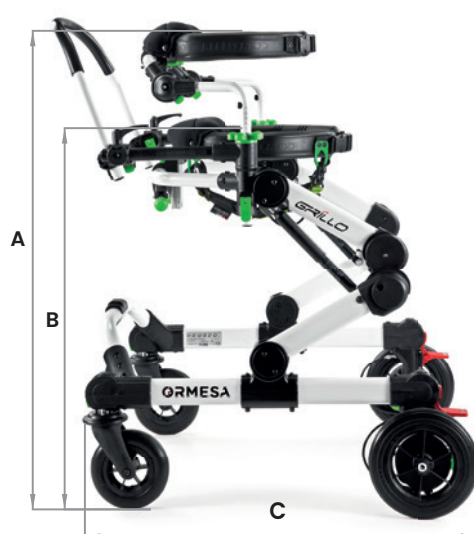

Forsikre deg om at tiltak A og B som er angitt i figuren ikke overstiger det foreslåtte området som er angitt for støttene.







Se filmen
om Grillo!



Til produktsiden

En spesiell takk til familiene som deltok med entusiasme i prosjektet vårt. Det er takket være våre kunder og deres historier at vi finner energi og stimuli som bidrar til å utvikle seg hver dag.

Tillverkare:

 som overholder MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 13485 =

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

Eurovema

Norsk importør: Eurovema Mobility AS