

Rekonditioneringsanvisning för Pixi

Börja med att göra rent vagnens chassi genom att tvätta med mildt rengöringsmedel eller i tvättkabinett (60 grader i 45 minuter). Låt vagnen torka ordentligt.

Klädsel:

- Dynorna kan rekonditioneras i 60°, centrifugeras och droptorkas.

Sits och rygg

- Kontrollera att sitsen och ryggen inte är skadade.

Ryggfällning

- Kontrollera att ryggfällningsjusteringen går lätt att justera upp och ner.
- Smörj med lite fett för att säkerställa att fällmomentet blir enkelt.

Hjulen

- Kontrollera att hjulen ej är skadade, att de rullar lätt och att inte kullagret låter illa.
- Smörj lager med ett par droppar tunnflytande olja.
- Vid behov ska du med en torr trasa torka bort smuts från hjulen.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller klor.
- Kontrollera och fyll däcken med luft (om vagnen är utrustad med lufthjul)
Luftryck max: Bakdäck: 35 PSI/250 kPa.
- Kontrollera och säkerställ att hjulskruvarna inte är lösa.
- Inspektera framgaffeln så att den inte har några skador.
- Vid behov att byte av hjul använd Loctite 270 för låsning av hjulmuttern.

Bromsar

- Säkerställ att bromsen sitter fast.
- Kontrollera att bromsen fungerar.

Handtag

- Kontrollera att höjdjustering av handtag går lätt att justera upp och ner.
- Kontrollera att handtagsgreppen inte är skadade.

Tillbehör: Sufflett

- Torka av med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
Upprepa proceduren vid envisa fläckar.
- Byt vid behov.

Tillbehör: Huvudstöd, Svankstöd, Sidostöd & Kilkudde

- Klädseln kan rekonditioneras i 60°, centrifugeras och droptorkas.

Tillbehör: Bäckensele, Midjebälte, Väst & H-sele

- Tillbehören kan tvättas i 60°, centrifugeras och droptorkas.

Slutkontroll

- Kontrollera att vagnen är stabil, att alla hjulen står stadigt och gör en provkörning.
-

Pixi modell: _____

Serienummer: _____

Service gjord av:

Namn: _____

Datum: _____

Signatur: _____