

Bedienungsanleitung (Deutsch)

EUROFLEX[®]

Arbeitsstuhl Basic



Eurovema

Inhalt

EINLEITUNG	3
KONTAKTDATEN	3
ANWENDERINFORMATIONEN.....	3
SERVICE UND GARANTIE	3
MONTAGE BEI LIEFERUNG	4
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	4
LISTE DER SYMBOLE	6
WARNUNG.....	7
MELDUNG VON UN- ODER ZWISCHENFÄLLEN.....	8
REINIGUNG	8
LAGERUNG.....	8
ETIKETT	9
CE-ZEICHEN.....	9
ÜBERSICHT ÜBER DIE KENNZEICHNUNGEN	10
ÜBERSICHT.....	11
ÜBERSICHT – CHASSIS	12
RÜCKENLEHNE – HÖHE	13
RÜCKENLEHNENNEIGUNG MANUELL.....	14
RÜCKENLEHNE – SITZTIEFE.....	15
ARMLEHNEN – EINSTELLUNGEN	16
SITZNEIGUNG.....	17
SITZHÖHE GAS UND ELEKTRISCH.....	18
BREMSE MIT BREMSHEBEL.....	19
LADUNG ALLGEMEIN	20
KENNZEICHNUNGEN AM LADEGERÄT.....	21
TECHNISCHE DATEN – LADEGERÄT	21
EUROVEMA ELEKTRONIK.....	22
TECHNISCHE DATEN – ELEKTRONIK	22
TECHNISCHE DATEN AKKU	22
AUSTAUSCH DES AKKUS	22
TECHNISCHE DATEN SITZSYSTEM.....	23
TECHNISCHE DATEN Chassis.....	23
TECHNISCHE DATEN	23
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	23
VERNICHTUNG.....	24

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl Ihres Arbeitsstuhls! Wir hoffen, dass Sie mit diesem Euroflex-Produkt von Eurovema, das im schwedischen Gislaved entwickelt und hergestellt wird, zufrieden sein werden. Der Arbeitsstuhl ist so konzipiert, dass er sehr hohen Ansprüche an Ergonomie, Sitzkomfort und Funktion erfüllt. Der Stuhl verfügt über eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, um ihn ganz nach Bedarf anpassen zu können. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um das volle Potenzial Ihres Stuhls ausschöpfen zu können. Eurovema behält sich das Recht auf Änderungen an dieser Gebrauchsanweisung und deren Inhalt vor.

KONTAKTDATEN

Hersteller 

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38 SE-332 35 Gislaved Schweden
Tel./Phone +46 371 390 100

www.eurovema.se

info@eurovema.se

ANWENDERINFORMATIONEN

- Der Arbeitsstuhl ist als medizintechnisches Produkt der Klasse 1 klassifiziert.
- Das Produkt ist für die Nutzung durch Personen bestimmt, die Hilfe beim Bewegen sowie bei der Ausübung sitzender Aktivitäten und Unterstützung beim Aufstehen vom Stuhl benötigen.
- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
- Es sind keine Kontraindikationen bekannt.
- Max. Anwendergewicht 150 kg.
- Wenden Sie sich bei einer Anpassung an schwerere Anwender:innen an Eurovema
- Lebenserwartung von zehn Jahren, wenn das Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung des Produkts verwendet wird.
- Das Produkt wird von Eurovema entwickelt sowie von Eurovema und von unabhängigen Prüfinstituten getestet. Eurovema ist dafür verantwortlich, dass das Produkt sicher in der Anwendung ist.



Dieses Symbol warnt vor potenziell risikoreichen Situationen.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

SERVICE UND GARANTIE

Wenn der Arbeitsstuhl täglich genutzt wird, sollte einmal jährlich eine Überprüfung erfolgen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Funktionen und die Sicherheit des Arbeitsstuhls während seiner gesamten Lebensdauer erhalten bleiben. Die erwartete Lebensdauer beträgt bei einer ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts gemäß unseren Anweisungen und Wartungsintervallen 10 Jahre. Wenn Service benötigt wird, wenden Sie sich bitte in erster Linie an das Hilfsmittelzentrum (Hjälpmedelscentralen).

Wir gewähren eine vierjährige Garantie auf die Metallstrukturen unserer Produkte sowie zwei Jahre auf die sonstigen Teile, mit Ausnahme der Polster, auf Räder und Batterien gewähren wir ein Jahr Garantie, sofern nicht anders vereinbart. Normaler Verschleiß ist kein Garantiefall. Wir empfehlen unseren Kunden, das Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung zu nutzen. Anweisungen zur Wartung und Überholung **finden Sie im Servicehandbuch.**

MONTAGE BEI LIEFERUNG

- Öffnen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass keine Transportschäden entstanden sind. Der Arbeitsstuhl wird mit unmontierter Rückenlehne geliefert.
- Die festen Armlehnen sind mit Anschlagsschrauben ausgestattet, die Rückenlehne verfügt über eine Anschlagkugel (2), die bei der Montage und Demontage hineingedrückt werden muss, um zu verhindern, dass sich die Rückenlehne löst, wenn sie in ihre Endposition eingestellt wird.
- Montieren Sie die Rückenlehne gemäß den Abbildungen und ziehen Sie den Feststellknopf (1) an.



SICHERHEITSVORSCHRIFTEN














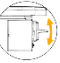









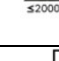
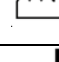









- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Stuhl in Betrieb nehmen.
- Der Arbeitsstuhl ist für den Einsatz auf einer ebenen Fläche bei einem normalen Raumklima vorgesehen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Sitzneigung des Stuhls manuell einstellen, da dies zu einem Sturz aus dem Stuhl führen kann.
- Werden Schäden oder Änderungen in der Funktion des Stuhls festgestellt, wenden Sie sich umgehend an die Servicestelle (Hilfsmittellieferanten).
- Wenn der Stuhl regelmäßig genutzt wird, sollte er regelmäßig von der Servicestelle überprüft werden.
- Achten Sie darauf, die Feststellknöpfe und Schrauben nach dem Einstellen ordnungsgemäß anzuziehen.
- Achten Sie darauf, ob sich Schrauben oder Komponenten lösen oder abfallen, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann. Wenden Sie sich unmittelbar an die Servicestelle.
- Wartung und Instandhaltung dürfen nur von Personal durchgeführt werden, das diesbezüglich entsprechend von Eurovema autorisiert wurde.
- Für die Reparatur dürfen nur Originalteile von Eurovema verwendet werden.

- Der Stuhl darf nur mit den von Eurovema zugelassenen Zubehörteilen oder Komponenten ausgestattet
- Das angegebene Anwendergewicht darf nicht überschritten werden.
- Prüfen Sie, ob die Anschlagsschrauben an den Armlehnen und die Anschlagkugel an der Rückenlehnenbefestigung montiert sind, damit sie sich beim Einstellen in die Endposition nicht lösen.
- Der Anwender darf während der Wartung keinesfalls im Sitz sitzen, mit Ausnahme des Austauschs von Armlehnen und Beinstützen, wenn sichergestellt werden kann, dass der Anwender nicht aus dem Stuhl fällt.

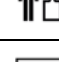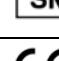

Stühle mit einer verstellbaren Sitzneigung müssen beim Hinsetzen auf den Stuhl oder beim Erheben vom Stuhl fixiert sein.

LISTE DER SYMBOLE

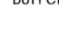 Warnhinweis	 Gebrauchsanleitung lesen
 Achtung – Quetschgefahr	 Sitzneigung
 Darf nicht gebügelt werden	 Rückenlehnenneigung
 Verträgt keine chemischen Flüssigkeiten, die stärker als Perchlorethylen sind	 Rückenlehnenhöhe
 Es darf kein Chlorbleichmittel verwendet werden	 Sitztiefe
 Darf nicht im Trockner getrocknet werden	 Armlehnenhöhe
 Maschinenwäsche bei 60 °C	 Elektrische Funktion des Bedienknopfes
 Vor Feuchtigkeit schützen	 Ladeausgang
 Vorsicht im Umgang walten lassen	 Eingang Steuerung
 Diese Seite nach oben	 Gesamtgewicht Stuhl + max. Anwendergewicht
 Zulässige Temperatur	 Anwendungsteil Typ B
 Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	
 Zulässige Höhe über NN	
 Herstellungsdatum	
 Hersteller	
 Nur für die Anwendung im Innenbereich	
 Maximales Anwendergewicht:	
 Seriennummer	
 Das CE-Zeichen zeigt die Einhaltung der europäischen Vorschriften an	
 Elektrische Bauteile sind in einer entsprechenden Recycling-Einrichtung zu entsorgen	
 Das Produkt ist ein Teil eines Recycling-Systems	
 Das Gewicht der Komponenten übersteigt 10 kg	
 Betriebszyklus	

WARNUNG



Ein Produkt, das eine Verschlechterung oder Veränderung der Leistung aufweist, muss sofort außer Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich unmittelbar an die Service-stelle (Hjälpmedelcentral) oder an Eurovema Mobility AB. Das Produkt darf erst verwendet werden, wenn es von einem autorisierten Techniker überprüft wurde.



Das Produkt darf nicht mit einem höheren Gewicht als dem angegebenen maximalen An-wendergewicht belastet werden, da dies zu einer Beschädigung von Bauteilen führen und Unfälle nach sich ziehen kann.



Vergewissern Sie sich beim Hinsetzen und Aufstehen, dass die Feststellbremse des Pro-dukts aktiviert ist, denn es besteht die Gefahr, dass das Produkt unbeabsichtigt wegrollt und dass Sie stürzen.



Änderungen am Produkt dürfen nur von einem autorisierten Techniker in Absprache mit dem verschreibenden Arzt vorgenommen werden. Wenn eine individuelle Anpassung erforderlich ist, wenden Sie sich an die Hilfsmittelzentrum (Hjälpmedelcentral) oder an Eurovema Mobility AB. Wenn das Produkt modifiziert wird, gilt das CE-Zeichen nicht mehr und Eurovema übernimmt keine Verantwortung mehr für das Produkt. Bei Modifi-kationen, die von einem autorisierten Techniker im Einvernehmen mit Eurovema vorge-nommen werden, wird das CE-Zeichen gegebenenfalls beibehalten.



Um das CE-Zeichen beizubehalten, dürfen Reparaturen und technische Wartungen nur von Personal durchgeführt werden, das von Eurovema Mobility AB entsprechend autori-siert wurde.



Das Produkt ist für die Verwendung durch die Person und für den Zweck, für den es ver-schrieben wurde, vorgesehen. Das Produkt ist auf diese Person eingestellt und diese Ein-stellungen dürfen ausschließlich von der Person, die das Produkt verschrieben hat, geän-dert werden. Soll der Stuhl von einem anderen Anwender übernommen werden, muss ein neuer Test durchgeführt werden.



Produkte mit elektrischen Sitzliften können in einigen Fällen eine Sitzhöhe erreichen, bei der der Anwender den Boden nicht mehr mit den Füßen erreichen kann, was zu einer Sturzgefahr führen kann, wenn der Anwender aus dieser Position aufsteht.



Die Bauteile und Elemente des Produkts müssen gemäß der Montageanleitung zusam-mengebaut werden, um sicherzustellen, dass sie sich nicht lösen. Alle Kabel sind mit Ka-belbindern zu fixieren.



Um das CE-Zeichen beizubehalten, darf das Produkt nicht mit anderen als den von Euro-vema Mobility AB zugelassenen Bauteilen oder Zubehörelementen ausgestattet werden.



Es dürfen nur die für das Produkt vorgesehenen elektrischen Bauteile an das Steuerungs-system des Produkts angeschlossen werden. Der Anschluss von Komponenten an das Steuerungssystem muss von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.



Zur Beibehaltung des CE-Zeichens und der Garantie dürfen nur Ladegeräte und Akkus, die für das Produkt bestimmt sind und von Eurovema Mobility AB geliefert werden, ver-wendet werden.



Produkte mit elektrischen Funktionen können durch Mobiltelefone oder andere HF-Kom-munikationsgeräte gestört werden.



Die Metalloberflächen des Produkts können bei starker Sonneneinstrahlung heiß werden. Wenn die Haut mit diesen Flächen in Kontakt kommt, kann es zu Verbrennungen kommen. Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum starkem Sonnenlicht aus.



Das Produkt ist mit vielen Kleinteilen und Schrauben ausgestattet, die, wenn sie gelöst werden, bei Kindern und Haustieren zum Erstickten führen können.



In einigen Konfigurationen ist das Produkt mit Kabeln und Drähten ausgestattet, die aufgrund ihrer Funktion nicht vollständig gesichert werden können. Dies kann für Kleinkinder ein Strangulationsrisiko darstellen.



Bei der Nutzung elektrischer Sitzfunktionen besteht Quetschgefahr für Kinder und Haustiere. Stellen Sie daher bei der Nutzung elektrischer Funktionen stets sicher, dass sich niemand anderes als der Anwender in unmittelbarer Nähe des Produkts befindet.



Bei Produkten mit elektrischen Bremsen ist es wichtig, dass der Akku nicht vollständig entladen wird, da die elektrische Bremse ansonsten nicht funktioniert. Wenn sich der Stuhl dann in der ungebremsten Position befindet, kann er beim Hinsetzen und Aufstehen wegrollen, wodurch Sturzgefahr besteht.

MELDUNG VON UN- ODER ZWISCHENFÄLLEN

Hersteller von Medizinprodukten in der EU sind verpflichtet, systematisch zu überwachen, wie sich die Produkte in der Praxis verhalten.

Dem CE-Zeichen sind Risikoanalysen und Tests vorausgegangen. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um die festgestellten Risiken so gering wie möglich zu halten. Sollte es dennoch zu Un- bzw. Zwischenfällen kommen, muss dies Eurovema Mobility AB und der zuständigen nationalen Behörde gemeldet werden.

REINIGUNG

Wischen Sie die Oberflächen des Arbeitsstuhls mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel (Geschirrspülmittel) ab. Positionieren Sie den Stuhl so, dass er fest steht, und setzen Sie die Bremsen an. Die Polsterung des Sitzes kann mit den auf dem Markt erhältlichen und für diesen Zweck vorgesehenen Polsterreinigungsmitteln gereinigt werden. Der Sitzbezug kann bei 60 °C in der Maschine gewaschen werden.



Bitte beachten Sie, dass die Reinigung auf einer offenen Fläche und fern von offenen Flammen erfolgen sollte.


LAGERUNG

Der Arbeitsstuhl sollte in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur gelagert werden. Setzen Sie ihn keiner großen Hitze, starken Kälte oder intensiven Sonneneinstrahlung aus. Metalloberflächen können bei Sonneneinstrahlung sehr heiß werden. Bei starker Kälte sollte der Stuhl vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur akklimatisieren. Der Stuhl darf zudem weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien ausgesetzt werden.

ETIKETT


Das Etikett am Produkt umfasst wichtige Informationen.

- 1) Produktbezeichnung
- 2) Artikelnummer
- 3) Seriennummer &UDI-PI
- 4) Strichcode
- 5) Max. Anwendergewicht
- 6) Medizintechnisches Produkt
- 7) CE-Zeichen
- 8) Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung durch
- 9) Herstellungsdatum
- 10) Name des Herstellers

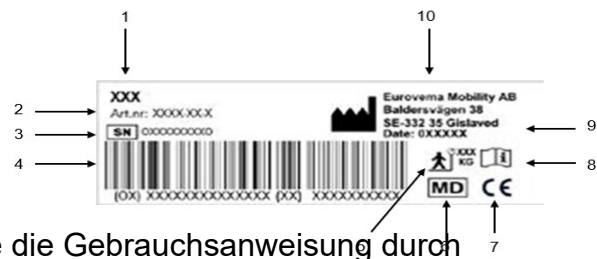

SEKUNDÄRES ETIKETT

- 1) Anwendungsteil Typ B
- 2) Intermittierende Funktion 1 / 18 Min.
- 3) Zulässige Raumtemperatur
- 4) Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
- 5) Nur für die Anwendung im Innenbereich
- 6) Zulässige Höhe über NN
- 7) Sichere Arbeitslast

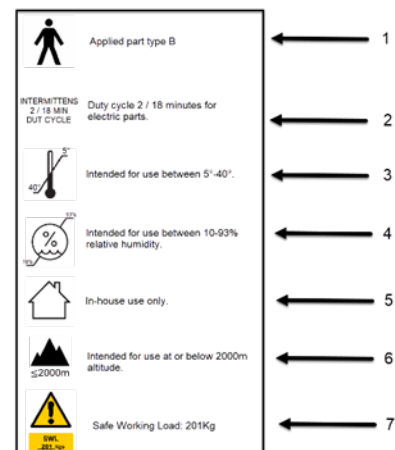

CE-ZEICHEN

Das Produkt trägt das CE-Zeichen gemäß der Medizinprodukteverordnung des Europäischen Parlaments – MDR 2017/745. Das CE-Zeichen ist auf dem Typenschild vermerkt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Norm.

EN1335-2:2018 Arbeitsstühle: Sicherheitsanforderungen

EN 60601-1-2:2006 Elektrische Geräte für medizinische Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die Sicherheit und die wesentliche Leistung.

EN 60601-1-2:2014 Elektrische Geräte für den medizinischen Einsatz – Teil 1 - 2: Allgemeine Anforderungen an die Sicherheit und die wesentliche Leistung – Ergänzende Norm für elektromagnetische Störungen.

SS-EN 1021-2:2014 Möbel – Beurteilung der Entflammbarkeit von Polstermöbeln – Teil 2: Zündquelle: Gasflamme, die einem brennenden Streichholz entspricht.

SS-EN 1021-1:2014 Möbel – Beurteilung der Entflammbarkeit von Polstermöbeln – Teil 1: Zündquelle: Glühende Zigaretten.

SS-EN ISO 21856:2022 Hilfsmittel – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren (ISO21856-2022)

SS-EN ISO 14971:2020 Risikomanagement für medizintechnische Produkte.

ÜBERSICHT ÜBER DIE KENNZEICHNUNGEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XXX
Art.nr: XXXX.XXX
SE-332 18 Glastved
Date: XXXXXX
MD CE

Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 28
SE-332 18 Glastved
Date: XXXXXX

Der Bezug ist maschinenwaschbar.

CE
SN
MD

SWL

INTERMITTENS
2 / 18 MIN
DUT CYCLE

⊗
P
⊗
⊗
60



Klemm-/Quetschfahren werden im Zusammenhang mit den Anweisungen für jede Funktion, bei der Quetschfahr besteht, angegeben. Dort, wo am Stuhl Quetschfahr besteht, sind entsprechende Kennzeichnungen angebracht.

ÜBERSICHT


- 1) Sitz
- 2) Rückenlehne
- 3) Armlehnen
- 4) Chassis
- 5) Sitzheber

Es sind alternative Sitzsysteme und Beinstützen erhältlich.



ÜBERSICHT – CHASSIS

- 1) Vorderräder
- 2) Arretierbare Räder
- 3) Feststellbremshebel
- 4) Chassis Basic
- 5) Bremshebel

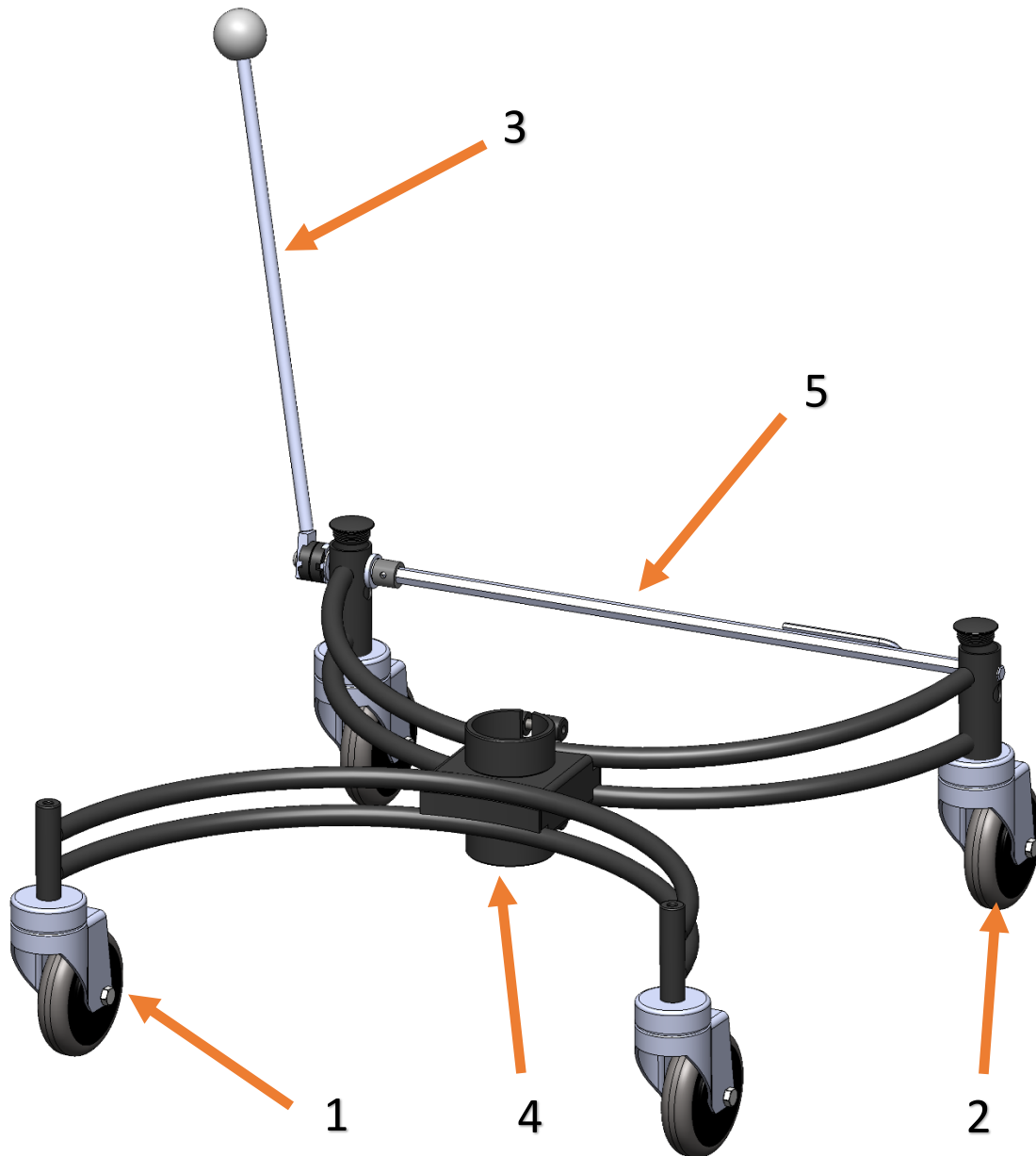

RÜCKENLEHNE – HÖHE

Die Rückenlehne ist mit einem Hebel in der Höhe verstellbar.

- 1) Lösen Sie den Hebel (1) ½ Umdrehung, indem Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- 2) Stellen Sie die gewünschte Höhe ein.
- 3) Arretieren Sie den Hebel, indem Sie ihn ½ Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.



RÜCKENLEHNENNEIGUNG MANUELL

Rückenlehnenneigung und das Rückenlehnenpolster sind individuell einstellbar.

Rückenlehnenneigung


- 1) Lösen Sie den Feststellknopf (1), um den gesamten Rückenlehnenmechanismus nach vorn oder nach hinten zu neigen.
- 2) Stellen Sie die gewünschte Neigung der Rückenlehne ein.
- 3) Ziehen Sie den Feststellknopf an.

Rückenlehnenpolster

- 4) Lösen Sie den Hebel, indem Sie ihn $\frac{1}{2}$ Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- 5) Stellen Sie die gewünschte Neigung des Rückenlehnenpolsters ein.
- 6) Arretieren Sie den Hebel, indem Sie ihn $\frac{1}{2}$ Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.



Gehen Sie vorsichtig vor – Quetschgefahr

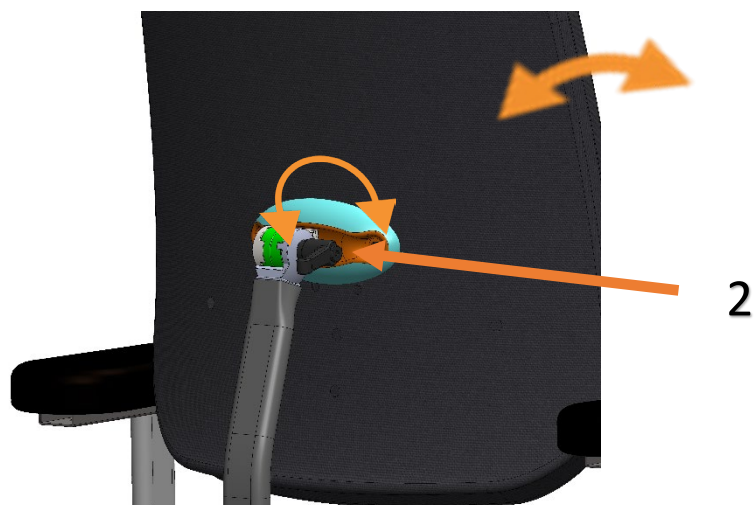

RÜCKENLEHNE – SITZTIEFE


Die Sitztiefe lässt sich mithilfe der Rückenlehne einstellen. Passen Sie die gewünschte Sitztiefe an, indem Sie den Rückenlehnenmechanismus vor- oder zurückbewegen. Die Feinjustierung erfolgt durch die Neigung des Rückenlehnenpolsters.

- 1) Lösen Sie den Sicherungshebel (1) einige Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn.
- 2) Neigen Sie den Rückenlehnenmechanismus nach hinten, um die Sitztiefe zu vergrößern.
- 3) Ziehen Sie den Feststellknopf an.
- 4) Nähere Angaben zur Feineinstellung mithilfe der Rückenlehnenpolsters finden Sie in den vorherigen Abschnitten.



ARMLEHNEN – EINSTELLUNGEN

- 1) Zur Höheneinstellung lösen Sie den Knopf **1** einige Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn und stellen die gewünschte Höhe ein.
- 2) Ziehen Sie den Knopf an.
- 3) Für die Breitereinstellung lösen Sie den Knopf **(2)** $\frac{1}{2}$ Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn und stellen die gewünschte Breite ein.
- 4) Ziehen Sie den Feststellknopf an.

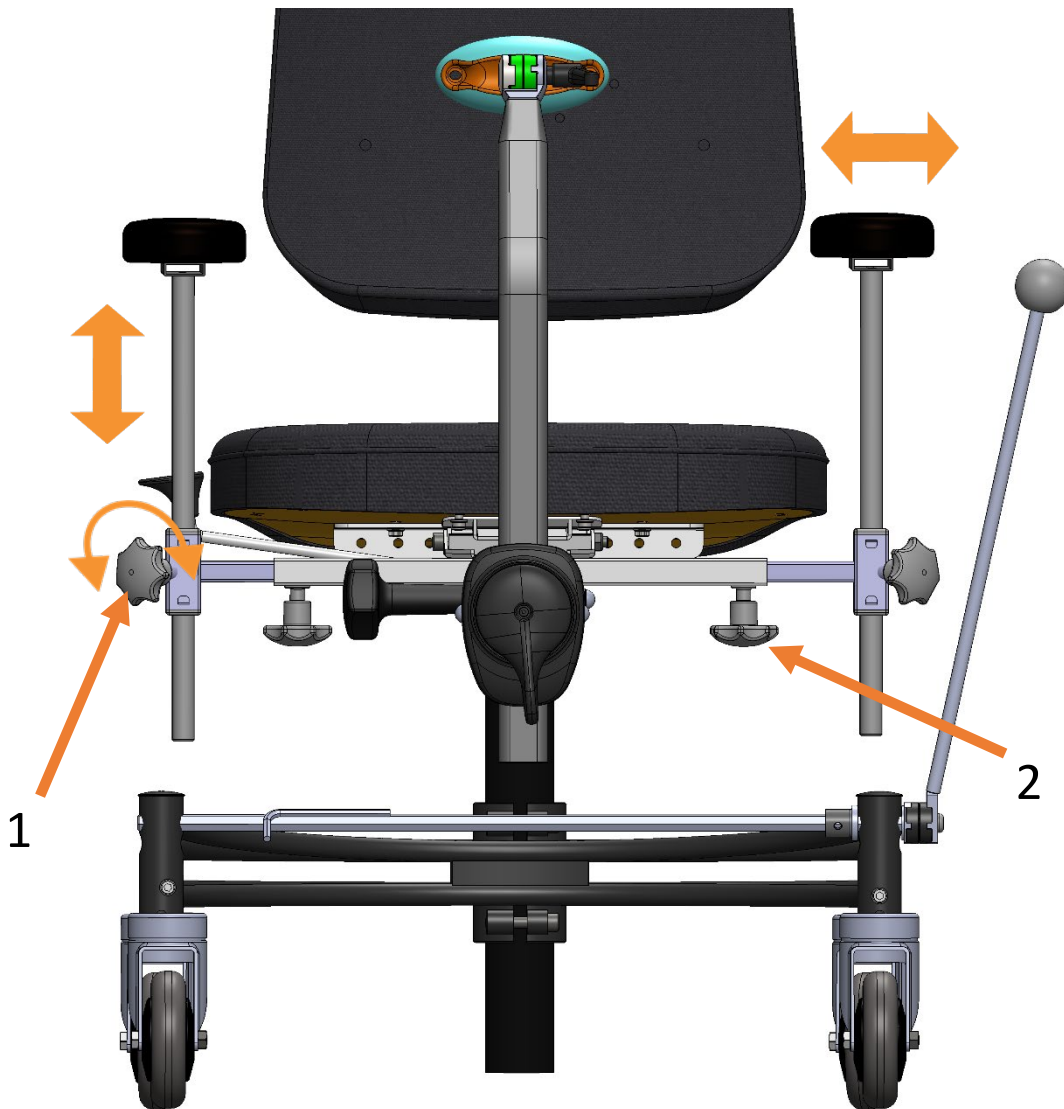

SITZNEIGUNG

- 1) Lösen Sie den Feststellknopf (1) einige Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn.
- 2) Neigen Sie den Sitz bis zur gewünschten Position.
- 3) Ziehen Sie den Feststellknopf an.



SITZHÖHE GAS UND ELEKTRISCH

Gas

1) Das Anheben oder Absenken der Sitzhöhe erfolgt, indem der Hebel (1) nach oben geführt wird. Zum Absenken wird der Sitz mit dem Körpergewicht heruntergedrückt, während der Hebel in der oberen Position gehalten wird.

2) Ist die gewünschte Höhe erreicht, wird der Hebel wieder losgelassen.

Elektrisch

Das elektrische Anheben des Sitzes erfolgt mit dem Wippschalter unter der Armlehne, siehe Bild. Zum Anheben des Sitzes drücken Sie den Wippschalter nach oben, zum Absenken drücken Sie ihn nach unten.



Seien Sie beim Absenken vorsichtig, damit beim Anheben des Sitzes niemand eingeklemmt wird. Wenn der Stuhl unter einem Tisch steht, können Hände, Beine gequetscht werden.



BREMSE MIT BREMSHEBEL

Bremse mit Bremshebel: Bewegen Sie zum Bremsen des Stuhls den Bremshebel nach vorn. Entsichern Sie die Bremse, indem Sie den Hebel wieder nach hinten bewegen.



Arretieren Sie den Stuhl stets mit der Bremse, bevor Sie sich hinsetzen oder aus dem Stuhl aufstehen.



LADUNG ALLGEMEIN

Um die volle Leistung des Akkus möglichst lange zu erhalten, ist es wichtig, dass er regelmäßig geladen wird. Der Richtwert bei einer durchschnittlichen Nutzung ist an jedem zweiten Tag. Laden Sie nach Möglichkeit tagsüber. Die Funktionen des Stuhls können während des Ladevorgangs nicht genutzt werden. Bei einer langfristigen Lagerung sollte der Akku einmal alle vier Wochen geladen werden, damit er nicht auf das kritische Niveau tiefenentladen wird, auf dem er vom Ladegerät nicht mehr geladen werden kann. Platzieren Sie den Stuhl während des Ladevorgangs so, dass sich der Ladestecker leicht anschließen und abziehen lässt.



Setzen Sie den Ladevorgang nicht über längere Zeit ohne Unterbrechung fort. Maximal vier Wochen am Stück. Belassen Sie zudem den Ladestecker nach Beendigung des Ladevorgangs nicht in der Ladebuchse des Stuhls.




Das tägliche Laden des Akkus Batterie ist besonders wichtig bei Stuhlkonfigurationen mit elektrischer Bremse, elektrischer Sitzneigung und elektrischer Rückenlehnenneigung, um sicherzustellen, um sicherzustellen, dass Sie stets sicher in das Produkt ein- und aussteigen können.

- 1) Der Stuhl muss geladen werden, wenn die LED 3 dauerhaft leuchtet, ohne dass eine Funktion angewendet wird. Die LED leuchtet auf, wenn die elektrische Funktion verwendet wird, und zeigt an, dass es Zeit zum Laden ist.
- 2) Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts 2 am Ausgang 1 des Stuhls an. Die LED am Ladegerät blinkt grün.
- 3) Schließen Sie das Ladegerät an den Netzstecker an der 220-V-Wandsteckdose an. Die LED am Ladegerät leuchtet nun durchgehend gelb.
- 4) Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED am Ladegerät wieder durchgehend grün.
- 5) Ziehen Sie das Ladegerät aus der Wandsteckdose und entfernen Sie dann den Ladestecker vom Stuhl.



LED-Anzeige

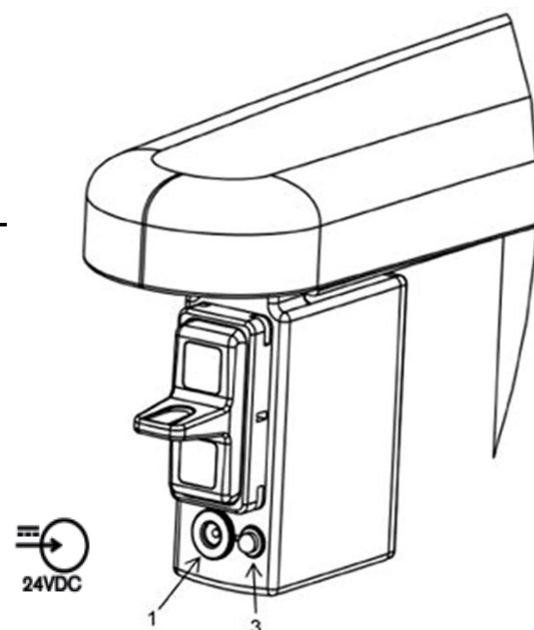

KENNZEICHNUNGEN AM LADEGERÄT

Lädt mit maximalem Strom



Spitzenladung Konstante Spannung Blinkt gelb



Voll geladen, Erhaltungsladung



Akku nicht angeschlossen Blinkt grün



Fehlercodes

2-maliges rotes Blinken, Akku ist mit falscher Polarität angeschlossen

3-maliges rotes Blinken, Ausgang des Ladeegeräts kurzgeschlossen

4-maliges rotes Blinken, Akkuspannung zu niedrig

5-maliges rotes Blinken, zu lange Ladedauer

6-maliges rotes Blinken, defekter Akku

LED aus Akkuspannung zu hoch



TECHNISCHE DATEN – LADEGERÄT

MASCOT 3743

Technische Daten	Fakten
Eingangsspannung	100-240 VAC 50-60 Hz
Eingangsstromstärke	Max 0,5 A
Ausgangsstrom	0,56 A
Ausgangsspannung	29,4 VDC max.
Betriebstemperatur	-25-+40 °C
Schutzkategorie	Klasse 2
Schutzklasse	IP 41

EUROVEMA ELEKTRONIK

TECHNISCHE DATEN – ELEKTRONIK

Technische Daten	Fakten
Eingangsspannung	24 V-40 V
Max. Stromausgang	14 A
Normale Betriebsspannung	21–28,5 V
Max. Motorstrom pro Motor	3,5 A
Verbrauch im Standby	200uA
Richtlinie	ROHS 2011/65/EC
Schutzkategorie	Klasse 2
Schutzklasse	IP1X
Arbeitstakt	Intermittierend EIN 2 Min. / AUS 18 Min.

TECHNISCHE DATEN AKKU

FGS20121A

Technische Daten	Fakten
Akku	2 x in Reihe geschaltet, 12 V 1,2 Ah
Akkutyp	AGM
Max. Entladungsstrom	18 A in 5 Sekunden
Betriebstemperatur Ladevorgang	-15 bis 40 °C
Betriebstemperatur Entladevorgang	-15 bis 50 °C

AUSTAUSCH DES AKKUS

Beim Akkuwechsel wird das gesamte Akkufach ausgetauscht. Siehe die Montageanleitung für den Akkuwechsel.



Reparaturen und andere Maßnahmen am Akku Batterie dürfen nur mit Genehmigung von Eurovema vorgenommen werden. Das Akkufach darf nicht geöffnet werden. Es dürfen nur Akkus verwendet werden, die von Eurovema zugelassen sind

TECHNISCHE DATEN SITZSYSTEM

Technische Daten	Fakten
Sitz (Breite x Tiefe)*	40x40, 40x43, 40x46, 43x43, 46x46, 49x51 cm
Breite des Sitzes zwischen den Armlehnen	40-59 cm
Sitztiefe	40-49cm
Höhe des Sitzes, Gas (Höhe bis zur Sitzunterseite)	40-55, 46-66 cm
Höhe des Sitzes, elektrisch (Höhe bis zur Sitzunterseite)	40-56, 45-70 cm
Sitzneigung	-20 bis 0°
Rückenlehne, Höhe, verstellbar*	37-44 cm
Rückenlehne Breite x Höhe	35x30, 35x44, 40x30, 40x44 cm
Rückenlehnenneigung	30°
Höhe der Armlehnen, verstellbar	0-26 cm
Armstützplatte	30x8x3 cm
Kleidung	Schwarz Atlantic

TECHNISCHE DATEN Chassis

Technische Daten	Fakten
Breite des Chassis	57cm
Länge des Chassis	61cm
Bremse	Am Chassis montiert
Raddurchmesser	100 mm, 150 mm

TECHNISCHE DATEN

Daten	Fakten
Klasse	Arbeitsstuhl – ISO 180903
Gewicht Elektrisch	31 kg
Gewicht Gas	23 kg
Benutzergewicht, max.	150 kg
Akku	24 V 1,2 Ah AGM
SWL	165 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Bedingungen	Temperatur	Luftfeuchtigkeit	Luftdruck
Normale Nutzung	5 °C - 40 °C	10 % - 93% RF	50 kPa - 106 kpa
Lagerung und Transport	-5 °C - 40 °C	10 % - 93% RF	50 kPa - 106 kpa

VERNICHTUNG

Produkte, die dauerhaft außer Betrieb genommen werden sollen, müssen zerlegt und die Altteile müssen umweltgerecht getrennt werden. Eine Anleitung zur Montage und Demontage finden Sie auf der Website im Abschnitt „Montageanleitung“. Weitere Explosionszeichnungen finden Sie im Abschnitt „Explosionszeichnungen“ auf der Website www.eurovema.se

Privatpersonen sollten sich für weitere Informationen an Eurovema wenden. In diesem Fall übernimmt Eurovema die Verantwortung für die Entsorgung.

Demontierte Komponenten sind gemäß der **nachstehenden Tabelle** zu sortieren.



Die Demontage des Produkts ist nicht ohne Risiko, es besteht die Gefahr von Quetschverletzungen und Verbrennungen durch unsachgemäße Handhabung. Die Demontage sollte von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden. P



Metall	Elektronik	Brennbar
Chassis	Steuerelektronik	Sitze
Sitzkreuz	Anschlussdosen	Rückenlehne
Rückenlehnenmechanismus	Handsteuerungen	Armlehnenpolster
Rückenlehnenmechanismus	Wippregler	Polsterbezüge
Armlehnenpfosten	Antrieb elektrisch	Kopfstützenpolster
Beinstützen	Sitzhebersäule elektrisch	Rumpfstützpolster
Befestigungselemente am Zubehör	Kabel	Sonstige Polster-elemente
Sitzheber Gas		

Akkus



Ausrangierte Blei-Säure-Akkus müssen an einer Recyclingstation entsorgt werden.