


Monteringsanvisning  
Bremsespak  
Justering/bytte av side



## Justering av bremsespak

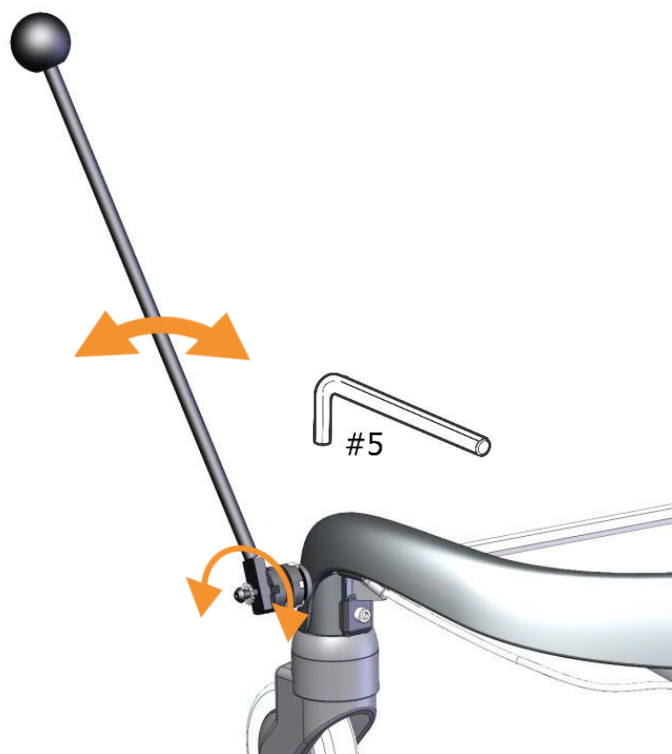

### Juster vinkelen på bremsespaken.

1. Løsne skruen ved spakens innfestingspunkt med en sekskantnøkkel på 5 mm. Løsne skruen bare noen omdreininger, tilstrekkelig til at vinkelen på spaken kan endres.
2. Stram til skruen ordentlig etter at justeringen er gjort
3. Prøvebrems stolen for å sjekke spakens posisjon og at den sitter godt fast.

### Flytt bremsespaken til den andre siden.

1. Løsne skruen helt.
2. Ta alle delene fra bremsestangen.
3. Løsne skruen og skivene på siden spaken skal monteres, og flytt dem til den andre siden, der spaken var montert før.
4. Monter spaken på den nye siden.

*Se monteringsanvisning for bremsespak.*