

# Monteringsanvisning

Bremsepak  
Sigma



## Montering/justering av bremsespak



Monter delene i rekkefølge som vist på bildet.

Juster bremsespakens posisjon og stram skruene med en sekskantnøkkel på 5 mm

For justering av vinkelen på spaken, løsne skruen noen omdreininger slik at kuleleddet frigjøres og vinkelen på spaken kan justeres.

For å montere spaken på den andre siden, løsne alle delene til spaken samt skruer og skiver på den andre siden. Flytt delene av spaken over til den andre siden, lås bremsestangen med skrue og skraver på den siden spaken ikke skal sitte på. Monter spaken og juster vinkelen før skruen strammes til.