


# Monteringsanvisning

Multirygg

Sigma



## Montering av multirygg

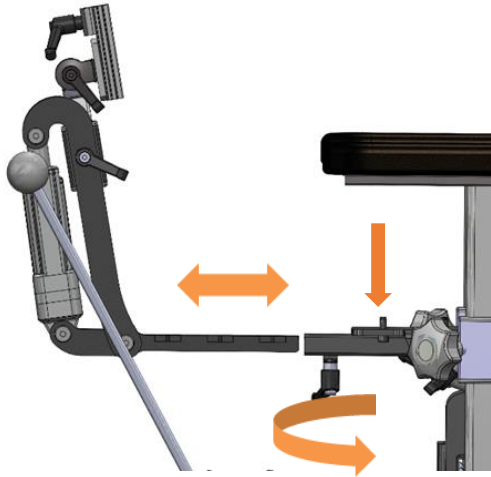

Løsne låsespaken eller alternativt, skru så mange omdreininger som nødvendig for å gjøre det mulig å skyve multiryggens nedre horisontale stolpe inn i festet på setekrysset, dra låsemekanismen på ryggstøtten oppover samtidig som multiryggen skyves inn. *Spakhåndtaket kan være erstattet med en M8-skrue, bruk da fastnøkkel nr. 13*

Stram til låsespaken/skruen når multiryggen er i ønsket stilling.