

ARBEIDSTOLER

Euroflex Sigma & Junior



Euroflex Sigma Bas



Sigma med setet SitRite er designet for å gi brukeren ekstra støtte og komfort. Med den stabile sittstillingen legger den til rette for økt utholdenhet og optimaliserer muligheten til å sitte lenge. Setesystemet er anatomisk utformet og gir store ergonomiske fordeler når det gjelder sittstilling og trykkfordeling. Sigma kommer standard med seterotasjon og fotbøyle som enkelt att skyves under sete.

Alle sitteinnstillinger kan utføres uten verktøy med ergonomisk utformede spaker. Elektriske sete-funksjoner er tilgjengelige som tilbehør. Sigma har ett stort tilbehørspogram. Chassi har hjul som ruller svært lett og har godt med plass mellom hjulene, noe som gjør det enkelt å sparke seg fram med stolen. Sigma kan utstyres med faste armlener, slik at de beholdes i horisontal stilling ved vipping av setet.

Fordelene ved SitRite er skjult under setets overflate, i de to ulike skummaterialene som har ulik tetthet. Den nedre, hardere skumdelen bidrar til å holde bekkenet i en god posisjon, mens den øvre, mykere skumdelen sørger for trykkfordeling ved å være tykkere under sittebenene enn under lårene. SitRite er et godt eksempel på hvordan formgivning og tetthet fungerer sammen for å skape bedre balanse, ryggjustering og kontroll over håndbevegelser. Alt for best mulig komfort og stabilitet.

Classic-ryggen har en buet form som støtter den nedre delen av ryggen. Trykket fordeles jevnt over ryggen. Classic er en aktiv rygg som gir stor bevegelsesfrihet for ulike aktiviteter.

Sigma har hjul som ruller svært lett og har godt med plass mellom hjulene, slik at det er enkelt å sparke seg fram med stolen. Standard er brems på bakhjul som reguleres med en bremsespak. Denne monteres enten ved høyre eller venstre bakhjul. Understellet kan oppdateres med et bremsehåndtak som monteres nærmere brukeren under setet, enten på høyre eller venstre side. Bremsehåndtaket har alternative hjul som tilbehør (dobbelthjul) der man kan velge å ha bremses på forhjulene, bakhjulene eller på alle fire hjulene.

Type funksjonsnedsettelse

lett moderat omfattende

inne ute barn voksen

SITTESYSTEM & CHASSI

Sittebredde (mellom armlener)	38-56 cm
Sittedybde	40-50 cm
Setetilt (med strøm, sveiv, strekkfisk og gass)	-14° till 14°
Ryggstøtتهøyde, justerbar	37-62 cm
Ryggvinkling	-23° till 17°
Armlenehøyde, justerbar**	0-26, 13-26 cm
Armleneplate	30x8x3, 30x8x5, 40x8x3, 40x8x5 cm
Chassi, bredde	58 cm
Chassi, lengde	60 cm
Totalvekt	36 kg
Brukervekt, maks.	160 kg
Brems	Understellsmontert/setemontert
Hjulstørrelse	100 mm

Produkt navn (unikt for hver artikkel som registreres)	Setebredde pute: (cm)	Setedybde pute: (cm)	Setehøyde: min-maks (cm)*	Ryggpute, bredde (cm)	Ryggpute, høyde (cm)	Leverandørens artnr	HMS-nr
Euroflex Sigma Bas Str 1	36	45	42-57,5	35	30	921-36-45	322688
Euroflex Sigma Bas Str 2	40	40	42-57,5	35	30	921-40-40	322689
Euroflex Sigma Bas Str 3	40	45	42-57,5	35	30	921-40-45	322690
Euroflex Sigma Bas Str 4	45	45	42-57,5	35	30	921-45-45	322691
Euroflex Sigma Bas Str 5	45	50	42-57,5	35	30	921-45-50	322692
Euroflex Sigma Bas Str 6	50	50	42-57,5	35	30	921-50-50	322693

* Avhengig av valg av gassfjær. Setehøyden kan også reguleres med elektrisk hevesøyle.

** Armlenene kan også fås i justerbar utgave. Armleneplaten kan også monteres på armlenestang med feste for fast montering av armlene når ryggen vinkles.

Det finnes 2 rotasjons muligheter til høyre og venstre 45 og 90 grader.



Tilbehør Euroflex Sigma Bas



Armlene fast

Art. nr. 224001-4011
HMS-Art.nr. 322430
fast I30 h3

Art. nr. 224001-4001
HMS-Art.nr. 177503
fast I30 h3 hreg

Art. nr. 224001-4008
HMS-Art.nr. 292895
fast I30 h5 hreg

Art. nr. 224002-4002
HMS-Art.nr. 322429
fast I40 h3

Art. nr. 224001-4002
HMS-Art.nr. 322431
fast I40 h5 hreg

Art. nr. 224001-4030
HMS-Art.nr. 322432
fast slingback I30 h3 hreg



Armlene nedfellbar

Art. nr. 269101-4007H
HMS-Art.nr. 322434
nedfellbar hø I30 h5

Art. nr. 269101-4005H
HMS-Art.nr. 143612
nedfellbar hø L40 h30

Art. nr. 269101-4006H
HMS-Art.nr. 322435
nedfellbar hø I40 h5

Art. nr. 269101-4001V
HMS-Art.nr. 248791
nedfellbar ve I30 h3

Art. nr. 269101-4007V
HMS-Art.nr. 322437
nedfellbar ve I30 h5

Art. nr. 269101-4005V
HMS-Art.nr. 143613
nedfellbar ve I40 h3

Art. nr. 269101-4006V
HMS-Art.nr. 322438
nedfellbar ve I40 h5

Art. nr. 269101-4001H
HMS-Art.nr. 248790
nedfellbar hø I30 h3



Benstøtte

Art. nr. 224001-2300V
HMS-Art.nr. 249432
hø I32-49 hreg

Art. nr. 224001-2400H
HMS-Art.nr. 322473
hø vreg hreg

Art. nr. 224001-2300H
HMS-Art.nr. 249431
ve I32-49 hreg

Art. nr. 224001-2400V
HMS-Art.nr. 322474
ve vreg hreg




Benstøtte

Art. nr. 274001-2003H
HMS-Art.nr. 066651
str1 fotplate delt kort hø vreg

Art. nr. 274001-2003V
HMS-Art.nr. 066652
str1 fotplate delt kort ve vreg

Art. nr. 274001-2103H
HMS-Art.nr. 018746
str2-3 fotplate delt lang hø vreg

Art. nr. 274001-2103V
HMS-Art.nr. 018747
str2-3 fotplate delt lang ve vreg

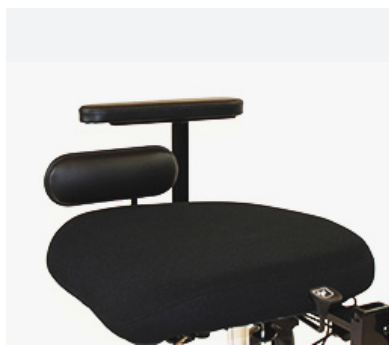

Sidestøtte lår

Art. nr. 274147-4500H
HMS-Art.nr. 167504
hø I32 dreg

Art. nr. 274047-4500H
HMS-Art.nr. 167502
hø I24 hreg dreg

Art. nr. 274047-4500V
HMS-Art.nr. 167503
ve I24 hreg dreg

Art. nr. 274147-4500V
HMS-Art.nr. 167505
ve I32 dreg



Sidestøtte rygg

Art. nr. 274001-4500H
HMS-Art.nr. 249446
utsving hø hreg

Art. nr. 274001-4500V
HMS-Art.nr. 249447
utsving ve hreg



Fotplate

Art. nr. 274001-2205
HMS-Art.nr. 322528
ekstra kort L28,5 B28,5

Art. nr. 224001-2036
HMS-Art.nr. 322534
komplett



Fotplate stor

Art. nr. 224001-2025
HMS-Art.nr. 322535
stor




Rygg

Art. nr. 224536-4550
HMS-Art.nr. 322602
f/Multirygg b47 h47

Art. nr. 224536-4245
HMS-Art.nr. 322603
inkl Profil f/Multirygg b42 h45

Art. nr. 224536-2732
HMS-Art.nr. 322604
inkl. profil f/Multirygg b30 h37

Art. nr. 224536-3640
HMS-Art.nr. 322606
inkl Profil f/Multirygg b34 h43

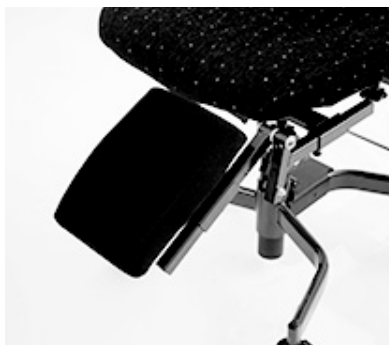

Amputasjonsbenstøtte

Art. nr. 224001-4100H
HMS-Art.nr. 216151
hø l25 b19

Art. nr. 224001-4100V
HMS-Art.nr. 216152
ve l25 b20



Belte stol

Art. nr. 224501-5000
HMS-Art.nr. 322468
feste f/montering av brystsele



Bremsepak

Art. nr. 224101-1230
HMS-Art.nr. 322498
f/Revmatismetillegg



Nakkestøtte

Art. nr. 299033-4701
HMS-Art.nr. 322567
enkel rygg classic sort atlantic



Trek rygg

Art. nr. 624355-6151
HMS-Art.nr. 249475
B42 H45

Art. nr. 625155-6151
HMS-Art.nr. 322614
b37 h43

Art. nr. 625255-6151
HMS-Art.nr. 322615
b42 h45

Art. nr. 624155-6151
HMS-Art.nr. 249474
B37 H43

Trek rygg

Art. nr. 624244-6151
HMS-Art.nr. 216163
B35 H44

Art. nr. 624444-6151
HMS-Art.nr. 322609
B40 H30

Art. nr. 624344-6151
HMS-Art.nr. 322610
B40 H44

Art. nr. 624255-6151
HMS-Art.nr. 249476
B47 H47

Art. nr. 625355-6151
HMS-Art.nr. 322611
b47 h47

Art. nr. 624144-6151
HMS-Art.nr. 322613
sv Atlantic B35 H30

Trek sete

Art. nr. 624255-3051
HMS-Art.nr. 249486
sb40 sd45

Art. nr. 624355-3051
HMS-Art.nr. 249487
sb45 sd45

Art. nr. 624555-3051
HMS-Art.nr. 249488
sb45 sd50

Art. nr. 624455-3051
HMS-Art.nr. 249489
sb50 sd50

Art. nr. 674356-3051
HMS-Art.nr. 249484
sb36 sd45

Art. nr. 624155-3051
HMS-Art.nr. 249485
sb 40 sd40



Euroflex Junior & Euroflex Junior LS



Euroflex Junior er utviklet for å gi barn/ungdom med nedsatt funksjonsevne muligheten til å ha en god sittestilling under alle hverdagens aktiviteter i skole eller barnehage, under måltider og lek. Et bredt utvalg av tilbehør og brukervennlige funksjonsinnstillinger gjør det enkelt å tilpasse stolen til hvert barns individuelle behov. Det todelte understellet får stolen til å stå stødig også på ujevne underlag. Stolen leveres med en nakkestøtte som er multijusterbar og svært omsluttende, og benstøtter som følger med når stolen brukes i ulike høyder.

Fordelene ved SitRite-setet er skjult under setets overflate, i de to ulike skummaterialene med ulik tetthet. Den nedre, hardere skumdelen bidrar til å holde bekkenet i en god posisjon, mens den øvre, mykere skumdelen sørger for trykkfordeling ved å være tykkere under sitteknutene enn under lårene. SitRite er et godt eksempel på hvordan formgivning og tetthet fungerer sammen for å skape bedre balanse, god komfort og stabilitet. Alt for best mulig komfort og stabilitet.

Ryggen på SitRite finnes i to utgaver: SitRite og SitRite LS (Lateral Support). SitRites rygg er ergonomisk formet og støtter en stor del av overkroppen uten å hindre armenes bevegelsesfrihet. Ryggen på SitRite LS er en mer omsluttende rygg med intrigerte sidestøtter som er justerbare i dybden. Den er utviklet blant annet for personer med muskelsvakhet i overkroppen som trenger mer støtte.

Euroflex Junior har hjul som ruller svært lett, og som følger gulvets ujevnheter. Den har godt med plass mellom hjulene, slik at det er enkelt å sparke seg fram med stolen. Den lett tilgjengelige og justerbare bremsen er ikke i veien for sideveis forflytning. Bakhjulsbrems er standard. Det todelte understellet får stolen til å stå stødig også på ujevne underlag.

Type funksjonsnedsettelse

lett moderat omfattende

inne ute barn voksen

SITTESYSTEM & CHASSI

* Justerbare armlener

Sittebredde (mellom armlener)	27-52 cm
Sittedybde	32-45 cm
Setetilt elektrisk og gassdrevet	-20° till 12°
Setetilt sveiv og strekkfisk	-20° till 16°
Høyde ryggstøtte, justerbar	37-54 cm
Ryggvinkling	30°
Ryggtrekk	Svart Atlantic
Høyde armlene, justerbart	0-26, 13-22* cm
Armleneplate	25x8x3, 25x8x5 cm
Nakkestøtte	Multi-justerbar
Chassi, bredde	52 cm
Chassi, lengde	55 cm
Totalvekt	23 kg
Brukervekt, maks.	80 kg
Brems	Understellsmontert
Hjulstørrelse	100 mm

Produktnavn (unikt for hver artikkel som registreres)	Setebredde pute: (cm)	Setedybde pute: (cm)	Setehøyde: min-maks (cm)	Ryggpute, bredde (cm)	Ryggpute, høyde (cm)	Leverandørens artnr	HMS-nr
Euroflex Junior lav Str 1	26	31	39-54	25	32	741-26-31	322664
Euroflex Junior lav Str 2	29	32	39-54	27	32	741-29-32	322665
Euroflex Junior lav Str 3	32	36	39-54	27	32	741-32-36	322666
Euroflex Junior lav Str 4	36	40	39-54	37	43	741-36-40	322667
Euroflex Junior lav Str 5	36	45	39-54	37	43	741-36-45	322668
Euroflex Junior lav Str 6	40	40	39-54	42	45	741-40-40	322669
Euroflex Junior høy Str 1	26	31	48-68	25	32	742-26-31	322670
Euroflex Junior høy Str 2	29	32	48-68	27	32	742-29-32	322671
Euroflex Junior høy Str 3	32	36	48-68	27	32	742-32-36	322672
Euroflex Junior høy Str 4	36	40	48-68	37	43	742-36-40	322673
Euroflex Junior høy Str 5	36	45	48-68	37	43	742-36-45	322674
Euroflex Junior høy Str 6	40	40	48-68	42	45	742-40-40	322675
Euroflex Junior LS Lav Str 1	26	31	39-54	25	32	751-26-31	322676
Euroflex Junior LS Lav Str 2	29	32	39-54	27	32	751-29-32	322677
Euroflex Junior LS Lav Str 3	32	36	39-54	27	32	751-32-36	322678
Euroflex Junior LS Lav Str 4	36	40	39-54	37	43	751-36-40	322679
Euroflex Junior LS Lav Str 5	36	45	39-54	37	43	751-36-45	322680
Euroflex Junior LS Lav Str 6	40	40	39-54	42	45	751-40-40	322681
Euroflex Junior LS Høy Str 1	26	31	48-68	25	32	752-26-31	322682
Euroflex Junior LS Høy Str 2	29	32	48-68	27	32	542-29-32	322683
Euroflex Junior LS Høy Str 3	32	36	48-68	27	32	752-32-36	322684
Euroflex Junior LS Høy Str 4	36	40	48-68	37	43	752-36-40	322685
Euroflex Junior LS Høy Str 5	36	45	48-68	37	43	752-36-45	322686
Euroflex Junior LS Høy Str 6	40	40	48-68	42	45	752-40-40	322687

Tilbehør Euroflex Junior



Amputasjonsbenstøtte

Art. nr. 224001-4100H
HMS-Art.nr. 216151
hø l25 b19

Art. nr. 224001-4100V
HMS-Art.nr. 216152
ve l25 b20



Belte stol

Art. nr. 224501-5000
HMS-Art.nr. 322468
feste f/montering av brystsele



Benstøtte

Art. nr. 274001-2003H
HMS-Art.nr. 066651
str1 fotplate delt kort hø vreg

Art. nr. 274001-2003V
HMS-Art.nr. 066652
str1 fotplate delt kort ve vreg

Art. nr. 274001-2103H
HMS-Art.nr. 018746
str2-3 fotplate delt lang hø vreg

Art. nr. 274001-2103V
HMS-Art.nr. 018747
str2-3 fotplate delt lang ve vreg



Bremsepak

Art. nr. 224101-1230
HMS-Art.nr. 322498
f/Revmatismetillegg



Fotplate


Art. nr. 274001-2205
HMS-Art.nr. 322528
ekstra kort L28,5 B28,5

Art. nr. 224001-2036
HMS-Art.nr. 322534
komplett



Fotplate stor

Art. nr. 224001-2025
HMS-Art.nr. 322535
stor

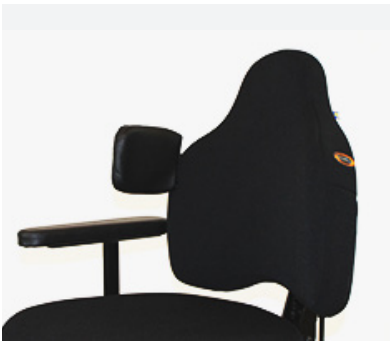

Sidestøtte rygg

Art. nr. 274001-4500H
249446
utsving høy hreg

274001-4500V
HMS-Art.nr. 249447
utsving ve hreg



Sidestøtte lår

Art. nr. 274147-4500H
HMS-Art.nr. 167504
høy I32 dreg

Art. nr. 274047-4500H
HMS-Art.nr. 167502
høy I24 hreg dreg

Art. nr. 274047-4500V
HMS-Art.nr. 167503
ve I24 hreg dreg

Art. nr. 274147-4500V
HMS-Art.nr. 167505
ve I32 dreg



Trekk rygg

Art. nr. 624355-6151
HMS-Art.nr. 249475
B42 H45

Art. nr. 625155-6151
HMS-Art.nr. 322614
b37 h43

Art. nr. 625255-6151
HMS-Art.nr. 322615
b42 h45

Art. nr. 624155-6151
HMS-Art.nr. 249474
B37 H43



Trekk rygg

Art. nr. 625055-6151
HMS-Art.nr. 322616
b30 h37

Art. nr. 674155-6151
HMS-Art.nr. 249473
b30 h37



Trekk sete

Art. nr. 674356-3051
HMS-Art.nr. 249484
sb36 sd45

Art. nr. 624155-3051
HMS-Art.nr. 249485
sb 40 sd40



Trekk sete

Art. nr. 674155-3051
HMS-Art.nr. 249481
sb29 sd32

Art. nr. 674255-3051
HMS-Art.nr. 249482
sb32 sd36

Art. nr. 674355-3051
HMS-Art.nr. 249483
sb36 sd40



Armleneplate

Art. nr. 634001-4005
HMS-Art.nr. 322451
mjuk forsterket l25 h5

Art. nr. 634003-4004
HMS-Art.nr. 322452
mjuk forsterket m/nylon bånd l25 h3

Art. nr. 634002-4004
HMS-Art.nr. 322453
mjuk l25 h3cm

Art. nr. 634001-4004
HMS-Art.nr. 322454
mjuk l25 h5



Rygg

Art. nr. 224536-4245
HMS-Art.nr. 322603
f/Multirygg b42 h45

Art. nr. 224536-2732
HMS-Art.nr. 322604
f/Multirygg b30 h37

Art. nr. 224536-3640
HMS-Art.nr. 322606
f/Multirygg b34 h43



Fotring

Art. nr. 284001-2020
HMS-Art.nr. 322536



Kjørehåndtak

Art. nr. 224001-2050
HMS-Art.nr. 216150



Eurovema

Baldersvägen 38 332 35 GISLAVED Sverige
Tel: 940 39 385 | firmapost@eurovema.no | eurovema.no