

Sjekkliste rekondisjonering rullator

Volaris-rullatorer er ment å kunne gjenbrukes i sin forventede levetid på 7 år.

Rengjøring

Rengjøring i vaskekabinett ved 60° i 45 min med ulåste bremses. Rullatoren må avkjøles til romtemperatur før justering og bruk. Manuell rengjøring med høytrykksspyler, alternativt vannslange eller kluter med et mildt rengjøringsmiddel med en pH-verdi mellom 7 og 12, f.eks. en såpeopløsning eller egnede rengjøringservietter uten slipemidler.

Overflatedesinfeksjonsmidler av godkjent kvalitet kan brukes. La det virke i 1–5 min og lufttørke.

Se rekondisjoneringsanvisningen for en detaljert beskrivelse av punktene nedenfor.

1. Hjul

Godkjent

Merknader

1.1	Slitebane		
1.2	Felg		
1.3	Hjulnav		
1.4	Hjulenes kulelager		
1.5	Hjulgafler, lagre.		
1.6	Hjulgafler, sprekker, skader		
	Hjulskruer skal skiftes ut med nye om de løsner		

2. Bremses

2.1	Bremsekloss, tilstand		
2.2	Bremseeffekt, justering		
2.3	Returfjær		
2.4	Vaiere		
2.5	Funksjonskontroll		

3. Kjørehåndtak

Godkjent

Merknader

3.1	Håndtaksgrep		
3.2	Høydejustering		
3.3	Aluminiumsprofiler		

4. Foldemekanisme

4.1	Aluminiumskryss		
4.2	Foldesperre		
4.3	Funksjonskontroll		

5. Sete

5.1	Høydejustering		
5.2	Tilstand		

6. Understell

6.1	Aluminiumsprofiler understell		
-----	-------------------------------	--	--

7. Ekstra kontroll Volaris RA

7.1	Armleneputer		
7.2	Kjørehåndtak		
7.3	Låseknotter/låseskruer.		

Rullatormodell: _____

Serienummer: _____

Rekondisjonering utført av:

Navn: _____

Dato: _____

Signatur: _____