

Checklista rekonditionering rollator

Volaris rollatorer är tänkta att återanvändas under sin förväntade livslängd 7år.

Rengöring

Rengöring i tvättkabinett, 60° i 45min med olåsta bromsar. Rollatorn måste svalna till rumstemperatur innan justering och användning. Manuell rengöring med högtryckstvätt alternativt vattenslang eller trasor med mildt rengöringsmedel pH värde 7–12 tex. tvållösning eller lämpliga rengöringsdukar utan slipmedel. Ytdesinfektion av godkänd kvalitet kan användas låt det verka 1–5 min och lufttorka.

Se rekonditioneringsanvisning för utförlig beskrivning av punkterna nedan.

1. Hjul

Godkänd

Anmärkning

1.1	Slitbana		
1.2	Fälg		
1.3	Hjulnav		
1.4	Hjulens kullager		
1.5	Hjulgafflar, lager.		
1.6	Hjulgafflar, sprickor, skador		
	Hjuls kruvar ska ersättas med nya om dom lossas		

2. Bromsar

2.1	Bromsklack, skick		
2.2	Bromsverkan, justering		
2.3	Returfjäder		
2.4	Vajrar		
2.5	Funktionskontroll		

3. Körhandtag

Godkänd

Anmärkning

3.1	Handtagsgrepp		
3.2	Höjdjustering		
3.3	Aluminiumprofiler		

4. Fällmekanism

4.1	Aluminiumkryss		
4.2	Fällspärr		
4.3	Funktionskontroll		

5. Sits

5.1	Höjdjustering		
5.2	Skick		

6. Chassi

6.1	Aluminiumprofiler chassi		
-----	--------------------------	--	--

7. Extra kontroll Volaris RA

7.1	Armstödsdynor		
7.2	Körhandtag		
7.3	Låsspakar/låsskruvar.		

Rollator modell: _____

Serienummer: _____

Rekonditionering utförd av:

Namn: _____

Datum: _____

Signatur: _____

Rev:20230223

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se