

Rekonditioneringsanvisning för Volaris rollatorer

Volaris rollatorer är tänkta att återanvändas under sin förväntade livslängd 7år.

Specialanpassade produkter får återställas under förutsättning att det görs av hjälpmedelstekniker med relevant produktkunskap och att modifierade delar byts till originaldelar. Om ny etikett behövs kontakta Eurovema och bifoga serienummer.

Rengöring

Rengöring i tvättkabinett, 60° i 45min med olåsta bromsar, rollatorn måste svalna till rumstemperatur innan justering och användning. Manuell rengöring med högtryckstvätt alternativt vattenslang eller trasor med mildt rengöringsmedel pH värde 7–12 tex. tvållösning eller lämpliga rengöringsdukar utan slipmedel. Desinfektionsmedel, använd endast medel som är godkänt av läkemedelsverket, låt verka 1-5min och lufttorka.

För mer detaljerade instruktioner gällande nedanstående punkter se servicemanual.

1.Hjul

1.1 Kontroll: hjulens gummibanor är i bra skick, och att dom är jämnt runda, inga platta områden.

1.2 Kontroll: fälgar hela, inga sprickor eller andra skador som kan påverka hållfasthet.

1.3 Kontroll: Rensa naven från hår och torka rent.

1.4 Kontroll: Hjulen ska snurrar lätt, inget oljud eller glapp axialt eller radially. Om hjulet glappar eller kärvar måste det bytas ut mot felfri originaldel.

1.5 Hjulgafflar: Kontrollera att inget glapp finns i radial och axial led. Om glapp prova att dra åt gaffelns mutter, dra inte åt muttern mer än att det inte finns glapp i axialled. Hjälper inte det så måste lagret bytas och ny låsmutter monteras.

1.6 Kontrollera: att hjulgafflarna är fria från skador som kan påverka hållfastheten.

Hjulens skruv och mutter ska alltid bytas till nya som är förbehandlade med gänglim om skruven lossas.

2. Bromsar

2.1 Kontrollera bromsklackens skick, om sliten byt ut den mot ny. Lossa bromsen med insexnyckel nr 5. Den gamla bromsklacken lossas med tång, den nya knackas i med hammare.

2.2 Kontrollera avstånd mellan bromsklack och däcket det ska var 1mm, spelet justeras med vajersträngarna som sitter monterad på ramprofilens undersida. Kontrollera att fästet för vajersträngarna sitter fast.

2.3 Kontrollera att retur fjädern är hel och att den returnerar bromsen som den ska, om trasig eller utmattad så byts den ut mot ny. För att byta fjädern lossas bromsen med insexnyckel nr 5.

2.4 Kontrollera: Vajrarnas skick, att höljen är oskadade och inga kraftiga/ onormala böjar finns. Om vajer går kärvt så byts den ut alternativt dras ur höljet och smörjs in med fett.

2.5 Kontrollera: Bromsen tar som den ska i körhandtagets alla höjdlägen och att den returnerar till obromsat läge. Om den inte returnerar ordentligt se punkt 2.3. Prova parkeringsbromsens funktion. Om bromsen har dålig verkan måste vajer nere vid bromsen se punkt 2.2 justeras, prova efter justering att båda hjulen har likvärdig bromsverkan.

3. Körhandtag

3.1 Om gummihandtagen är i dåligt skick byts dom ut mot nya, skär upp det gamla med kniv alternativt använd tryckluft för att lossa dom. Vid montering av nya rengör ytorna från fett/smuts före montering, använd tryckluft för att underlätta montering.

3.2 Prova att justera körhandtagens höjd i alla höjd steg.

3.3 Kontrollera att aluminiumprofilerna är felfria, om ej byts dom ut mot felfria profiler.

4. Fällmekanism

4.1 Kontroll att aluminiumprofilerna i krysset är raka och fria från skador, vid behov smörj leder med fett.

4.2 Prova att fällspärren låser/låser upp utan problem.

4.3 Prova att fälla ihop/ fälla ut rollatorn, om det går kärvt så måste alla profiler och ledpunkter kontrolleras och ledpunkterna smörjas.

5. Sits

- 5.1 Prova sitsen i alla höjdlägen.
- 5.2 Kontrollera att sitsen är fri från skador.

6. Ram

- 6.1 Kontrollera att aluminiumprofilerna här hela och oskadade, om skador som påverkar hållfasthet upptäcks skrotas rollator alternativt byt ut skadade delar.

7. Extra kontroll Volaris RA

- 7.1 Kontrollera att armstödsdynorna är hela och rena.
- 7.2 Kontrollera att körhandtagen är åtdragna.
- 7.3 Prova låsspakar/skruvar för justering av armstödsdynor och handtag, smörj gängor med fett.

8. Destruktion

Uttjänta rollatorer demonteras och källsorteras enligt tabellen nedan. I servicemanualen finns bilder som kan underlätta vid demontering.

Metall	Brännbart
Aluminiumprofiler	Körhandtag
Skruvar och muttrar	sitsar
Vairar	Hiul
Lager	Hjulgafflar
	Plastdetaljer från ramsidor och kryss

Anteckningar
