

Gebruiksaanwijzing, Nederlands

EUROFLEX[®]

Werkstoel HiLo SR



Eurovema

Inhoud

INLEIDING	3
CONTACTDETAILS	3
GEBRUIKERSINFORMATIE.....	3
SERVICE EN GARANTIE.....	3
BIJ LEVERING	4
VEILIGHEIDSREGELS.....	4
SYMBOOLTOETS	5
WAARSCHUWING	6
RAPPORTAGE VAN ONGEVALLLEN EN INCIDENTEN	7
REINIGING.....	7
OPSLAG	7
LABEL	8
CE-MARKERING	8
OVERZICHT - MARKERING	9
OVERZICHT - ZITTING.....	10
CHASSIS OVERZICHT	11
MONTAGE/VERWIJDERING ZITTING	12
RUGLEUNING - HOOGTE.....	13
RUGLEUNING - KANTELEN.....	14
ZITDIEPTE (RUGLEUNING)	15
ZITDIEPTE (RUGMECHANISME)	16
ARMLEUNING - HOOGTE.....	17
ARMSTEUN - BREEDTE.....	18
ZIJSTEUN.....	19
ZITTING KANTELEN	19
VOETPLAAT.....	20
ZITHOOGTE - ELEKTRISCH EN GAS.....	21
REM	22
HANDBEDIENING	23
OPLADEN - ALGEMEEN	24
TECHNISCHE GEGEVENS - OPLADER.....	25
TECHNISCHE GEGEVENS - ELEKTRONICA.....	25
TECHNISCHE GEGEVENS - BATTERIJ	25
VERVANGEN VAN DE BATTERIJ	25
TECHNISCHE GEGEVENS - ZITTINGSYSTEEM	26

TECHNISCHE GEGEVENS - CHASSIS.....	26
TECHNISCHE INFORMATIE.....	27
OMGEVING	27
VERNIETIGING	28

INLEIDING

Wij feliciteren u van harte met uw keuze voor een werkstoel! We hopen dat u tevreden zult zijn met dit Euroflex-product van Eurovema, dat is ontworpen en gebouwd in Gislaved, Zweden. De werkstoel is ontworpen om te voldoen aan zeer hoge eisen op het gebied van ergonomie, zitcomfort en functie. De stoel heeft veel verstelmogelijkheden waardoor hij aan iedere behoefte aangepast kan worden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door, zodat u gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van uw stoel. Eurovema behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze handleiding en de inhoud ervan.

CONTACTDETAILS

Fabrikant 

Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Zweden

Telefoon: +46 371 390 100 www.eurovema.se info@eurovema.se

GEbruikersINFORMATIE

- Deze werkstoel is geclassificeerd als een klasse 1 medisch apparaat.
- Het product is bedoeld om te worden gebruikt door mensen die hulp nodig hebben bij het verplaatsen of het uitvoeren van activiteiten terwijl ze zitten en ondersteuning nodig hebben om uit een stoel te komen.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Er zijn geen contra-indicaties bekend.
- Max. gewicht gebruiker 70 kg.
- Bij gebruik in overeenstemming met deze gebruikershandleiding is de verwachte levensduur van het product tien jaar.
- Het product is ontwikkeld en getest door Eurovema. Eurovema is ervoor verantwoordelijk dat het product veilig te gebruiken is.



Dit symbool waarschuwt voor situaties die risico's voor de gebruiker kunnen opleveren.



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

SERVICE EN GARANTIE

Als de werkstoel dagelijks wordt gebruikt, moet deze één keer per jaar ter inspectie worden opgestuurd. Dit is om te controleren of de functie en veiligheid van de stoel gedurende de gehele levensduur behouden blijven. De verwachte levensduur is 10 jaar bij gebruik in overeenstemming met onze instructies, aanbevolen onderhoudsintervallen en het beoogde

gebruik. Als uw stoel onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke technische hulpcentrum.

Voor alle metalen structuren geldt een garantie van twee jaar. Voor andere onderdelen geldt ook een garantie van twee jaar, behalve voor bekleding, wielen en accu's, die allemaal een garantie van een jaar hebben, tenzij anders overeengekomen. Normale slijtage valt niet onder de garantie. We raden onze klanten aan om het product te gebruiken in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Voor instructies met betrekking tot onderhoud en revisie, **zie de Servicehandleiding**.

BIJ LEVERING

- Open de verpakking en controleer of er geen schade is opgetreden tijdens het transport. De werkstoel wordt geleverd met alle onderdelen gemonteerd. Controleer of de rugleuning en armleuningen goed vastzitten. Controleer of de vergrendelingshendels van de stoel in de vergrendelde stand staan. Zie de instructies voor montage/verwijdering van de stoel op pagina 12.

VEILIGHEIDSREGELS

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de stoel gaat gebruiken.
- De werkstoel is bedoeld voor gebruik op een vlakke ondergrond in een normaal binnenklimaat.
- Wees voorzichtig bij het instellen van de handmatige zithoek terwijl u in de stoel zit, aangezien het risico bestaat dat u uit de stoel valt.
- Als u constateert dat de stoel schade heeft opgelopen of als u veranderingen in de werking constateert, neem dan onmiddellijk contact op met de serviceorganisatie (Technisch Hulpcentrum).
- Als de stoel regelmatig wordt gebruikt, moet deze routinematig ter inspectie naar de serviceorganisatie worden gestuurd.
- Zorg ervoor dat u de vergrendelknop en de schroeven goed vastdraait nadat u de aanpassingen hebt gemaakt.
- Let op schroeven of onderdelen die losraken of los passen, aangezien deze de veiligheid kunnen beïnvloeden. Neem onmiddellijk contact op met de serviceorganisatie.
- Service en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een door Eurovema geautoriseerde technicus.
- Er mogen uitsluitend originele onderdelen van Eurovema worden gebruikt.
- De stoel mag niet zijn uitgerust met andere accessoires of onderdelen dan die zijn goedgekeurd door Eurovema.
- Overschrijd het vermelde maximale gebruikersgewicht niet.
- Controleer of er aanslagschroeven aan de armleuningen zijn bevestigd en of er een aanslaglager in de bevestiging van de rugleuning zit. Deze stops voorkomen dat de armleuningen en rugleuning losraken wanneer ze in hun eindposities worden gezet.
- Onder geen enkele omstandigheid mag de gebruiker in de stoel zitten terwijl deze wordt onderhouden, behalve wanneer armleuningen en beensteunen worden vervangen en er maatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet uit de stoel valt.



Stoelen met verstelbare kanteling van de zitting moeten in de vaste stand staan en de rem moet worden aangetrokken wanneer de gebruiker in of uit de stoel stapt.

SYMBOOLTOETS

 Waarschuwing	 Lees gebruiksaanwijzing
 Waarschuwing, gevaar voor beknelling	 Kanteling zitting
 Niet strijken	 Verstelbare achterwaartse kanteling
 Gebruik geen oplosmiddelen voor chemisch reinigen die sterker zijn dan tetrachloorethyleen	 Hoogte achterkant
 Geen bleekmiddel gebruiken	 Zitdiepte
 Niet in de droger	 Hoogte armleuning
 Machinewas 60°	 Bedieningsknop, elektrische functie
 Beschermen tegen vloeistof	 Oplaadpoort
 Zorgvuldig behandelen	 Invoercontrole
 Deze kant omhoog	 Totaalgewicht stoel + max gewicht gebruiker
 Toegestane temperatuur	 Toegepast onderdeeltype B
 Toegestane relatieve vochtigheid	
 Toegestane hoogte boven zeeniveau	
 Fabricagedatum	
 Fabrikant	
 Uitsluitend voor gebruik binnenshuis	
 Maximaal gebruikersgewicht	
 Serienummer	
 CE-markering toont naleving van de Europese regelgeving	
 Elektrische componenten moeten worden verzonden voor speciale recycling	
 Het product maakt deel uit van een recyclingsysteem	
 Het gewicht van het onderdeel overschrijdt 10kg	
 Operatiecyclus	

WAARSCHUWING



Een product dat verminderde of veranderde prestaties vertoont, moet onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. Neem onmiddellijk contact op met de serviceorganisatie (Technisch Hulpcentrum) of Eurovema AB. Het product mag niet opnieuw worden gebruikt totdat het is geïnspecteerd door een bevoegde technicus.



Het product mag niet worden belast boven het aangegeven maximale gebruikersgewicht, omdat hierdoor onderdelen beschadigd kunnen raken, wat tot ongelukken kan leiden.



Controleer of de parkeerrem is geactiveerd bij het in of uit de stoel stappen. Als dit niet het geval is, bestaat het risico dat het product onbedoeld gaat rollen, waardoor u kunt vallen.



Wijzigingen aan het product mogen alleen worden aangebracht door een bevoegde technicus in overleg met de voorschrijver. Mocht een aanpassing op maat nodig zijn, neem dan contact op met een Technisch Hulpcentrum of Eurovema Mobility AB voor advies. Door wijzigingen aan het product vervalt de CE-markering en aanvaardt Eurovema geen enkele aansprakelijkheid meer. Door wijzigingen uitgevoerd door een bevoegde technicus in overleg met Eurovema kan de CE-markering geldig blijven.



Reparaties en technisch onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat is geautoriseerd door Eurovema Mobility AB, zodat de CE-markering geldig blijft.



Het product is bedoeld voor gebruik door de persoon en voor het doel waarvoor het is voorgeschreven. Het product is voor deze persoon geconfigureerd en de instellingen ervan mogen door niemand anders worden gewijzigd dan de persoon die het product heeft voorgeschreven. Als het product moet worden overgedragen aan een andere gebruiker, moet de stoel een nieuwe test ondergaan.



In bepaalde omstandigheden kan een product met een elektrische stoellift de stoel verhogen tot een hoogte die ertoe leidt dat de gebruiker de vloer niet met de voeten kan bereiken, waardoor het risico op een val ontstaat als de gebruiker probeert uit de stoel te komen vanuit deze positie.



De componenten en onderdelen van het product moeten worden gemonteerd in overeenstemming met de montage-instructies om ervoor te zorgen dat ze stevig vastzitten en niet losraken. Alle kabels moeten worden vastgezet met kabelbinders.



Om de geldigheid van de CE-markering te behouden, mag het product niet worden uitgerust met andere componenten of accessoires dan die zijn goedgekeurd door Eurovema Mobility AB.



Alleen elektrische componenten die specifiek bedoeld zijn voor gebruik met het product mogen op het besturingssysteem van het product worden aangesloten. Componenten moeten door een bevoegde technicus op het besturingssysteem worden aangesloten.



Om de geldigheid van de CE-markering te behouden en om naleving van de garantievoorwaarden te garanderen, mogen alleen opladers en batterijen worden gebruikt die specifiek voor het product zijn ontworpen en geleverd door Eurovema Mobility AB.



Een product met elektrische functies kan interferentie ondervinden van mobiele telefoons of andere RF-communicatieapparatuur.



De metalen oppervlakken van het product kunnen heet worden als ze worden blootgesteld aan direct zonlicht en u kunt brandwonden oplopen als uw huid ermee in contact komt. Stel het product niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.



Het product bevat veel kleine onderdelen en schroeven die, als ze loskomen, verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kinderen en huisdieren.



In bepaalde configuraties is het product uitgerust met kabels en draden die om functionele redenen niet volledig kunnen worden vastgezet en als gevolg daarvan een gevaar voor wurging voor kleine kinderen kunnen vormen.



Het gebruik van elektrische functies brengt gevaar voor beknelling voor kinderen en huisdieren met zich mee. Zorg er altijd voor dat niemand anders dan de gebruiker zich in de directe omgeving van het product bevindt wanneer elektrische functies worden gebruikt.

RAPPORTAGE VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

In de EU gevestigde fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn verplicht systematisch bij te houden hoe hun producten in de praktijk werken.

De toekenning van een CE-markering toont aan dat het product een reeks risicoanalyses en tests heeft ondergaan, waarbij maatregelen zijn genomen om de geïdentificeerde risico's zoveel mogelijk te minimaliseren. Als er ondanks alles toch ongevallen of incidenten plaatsvinden, moeten dergelijke gebeurtenissen worden gemeld aan Eurovema Mobility AB en de relevante nationale autoriteit.

REINIGING

De oppervlakken van werkstoelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek in combinatie met een mild reinigingsmiddel, bijv. afwasmiddel. Plaats de stoel op een stabiele ondergrond en activeer de rem. De stoelbekleding kan worden gereinigd met in de handel verkrijgbare bekledingsreinigers. Losse hoezen kunnen in de machine gewassen worden op 60°.



NB Het reinigen dient te gebeuren in een goed geventileerde ruimte en niet in de aanwezigheid van open vuur.


OPSLAG

De werkstoel moet in een droge omgeving bij kamertemperatuur worden opgeslagen. Houd de stoel uit de buurt van hoge temperaturen, intense kou en sterk zonlicht. Metalen oppervlakken kunnen zeer heet worden als ze worden blootgesteld aan zonlicht. In geval van hevige kou de stoel voor gebruik op kamertemperatuur laten komen. Stel de stoel bovendien niet bloot aan water, andere vloeistoffen of chemicaliën.

LABEL


Het etiket op het product bevat belangrijke informatie.

- 1) Productnaam
- 2) Onderdeelnummer
- 3) Serienummer UDI-PI
- 4) Barcode
- 5) Max. gewicht gebruiker
- 6) Medisch apparaat
- 7) CE-markering
- 8) Lees de handleiding voor gebruik
- 9) Fabricagedatum
- 10) Naam van de fabrikant

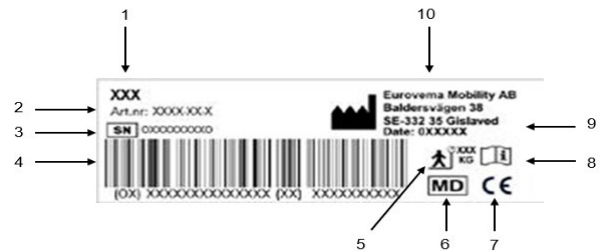

SECUNDAIR LABEL

- 1) Toegepast onderdeeltype B
- 2) Intermitterende functie 2 / 18 min
- 3) Toegestane kamertemperatuur
- 4) Toegestane relatieve vochtigheid
- 5) Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
- 6) Toegestane hoogte boven zeeniveau
- 7) Veilige werklust

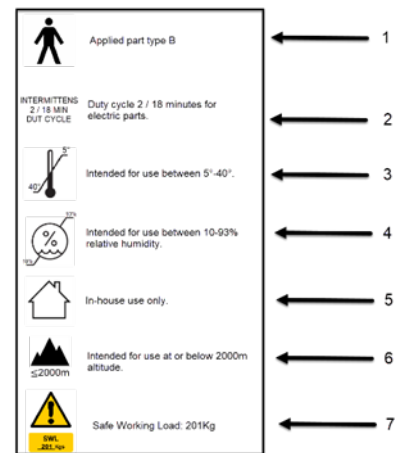

CE-MARKERING

Het product is CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Medical Devices Regulation (MDR 2017/745) van het Europees Parlement. De CE-markering staat op het label. Het product voldoet aan de vereisten van de volgende normen:

EN1335-2:2018 Kantoormeubelen. Kantoorstoele - Veiligheidseisen

EN 60601-1:2007 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties.

60601-1-2:2015 Medische elektrische toestellen - Deel 1-2: Algemene eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit.


SS-EN 1021-2:2014 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen - Deel 2: Ontstekingsbron: Equivalent van de lucifervlam.

SS-EN 1021-1:2014 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen - Deel 1: Ontstekingsbron: Smeulende sigaret.

SS-EN ISO 21856:2022 Hulpmiddelen – Algemene eisen en testmethoden

SS-EN ISO 14971:2020 Risicomanagement voor medische hulpmiddelen.


OVERZICHT - MARKERING

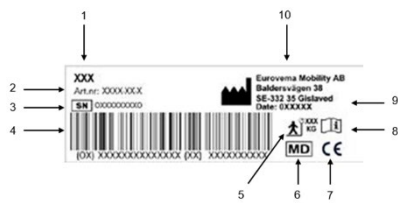

1: XXX
2: Art.nr: XXXX.XXX
3: SN
4: (0X) XXXXXXXXXX (0X) XXXXXXXXXX
5: MD
6: CE
7: 10
8: 9
9: 8

Losse hoezen kunnen in de machine gewassen worden.



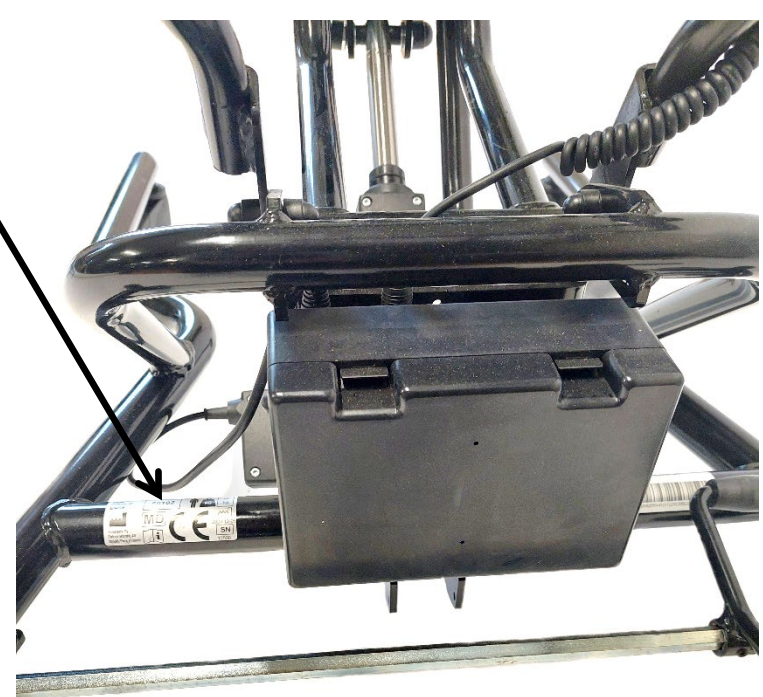





Verbrijzelingsrisico's worden gerapporteerd bij instructies voor elke functie waarbij een beknellingsrisico kan ontstaan. Op de stoel zijn markeringen aangebracht waar er gevaar voor beknelling bestaat.


OVERZICHT - ZITTING

- 1) Zitting
- 2) Rugleuning
- 3) Armleuning
- 4) Zijsteun
- 5) Voetsteun
- 6) Hendel
- 7) Kantelbediening
- 8) Rugleuning-mechanisme



CHASSIS OVERZICHT



- 1) Voorwielen met remkluwen
- 2) Achterwielen met centrale rem
- 3) Pedaal parkeerrem
- 4) Chassis
- 5) Motor zittinglift
- 6) Elektronica/batterij
- 7) Hefzuiger, gas

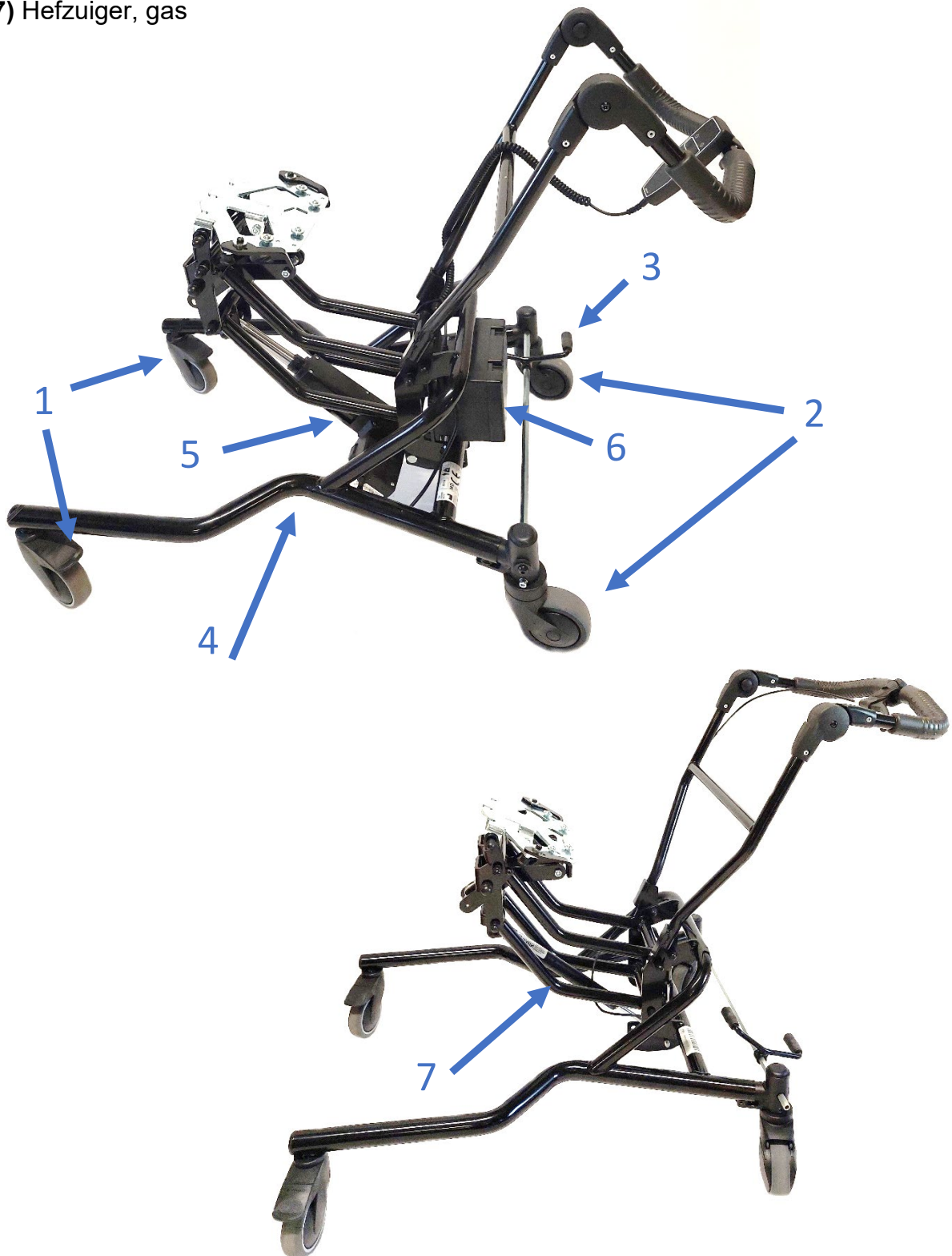

MONTAGE/VERWIJDERING ZITTING

De zitting is gemonteerd in een snelspanbevestiging en kan indien nodig eenvoudig worden gemonteerd/verwijderd.

- 1) Bij het monteren van de zitting moeten de vergrendelingshendels (1) naar achteren worden geschoven zoals aangegeven in de afbeelding.
- 2) Plaats de zitting vanaf de voorkant, zodat de adapterplaat onder de zitting in de afstandshouders (2) en de inkepingen in de voorste rand (3) grijpt.
- 3) Zodra de zitting op zijn plaats zit, duwt u beide vergrendelingshendels (1) naar achteren, controleert u of de snapsloten (4) zijn teruggeveerd en of de hendels zijn vergrendeld.

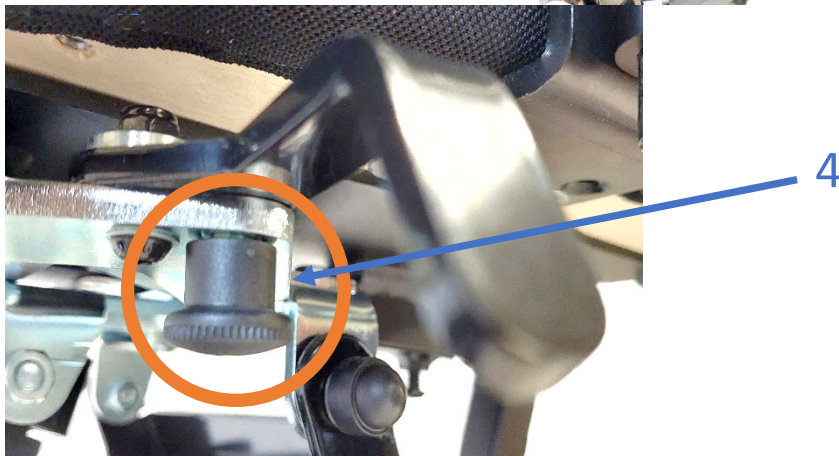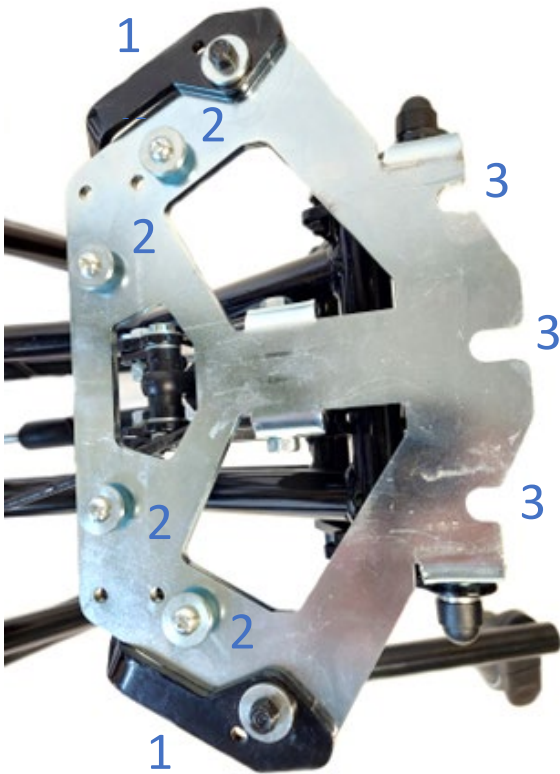


RUGLEUNING - HOOGTE

De hoogte van de rugleuning kan worden aangepast met behulp van een hendel.

- 1) Draai de schroef (1) los door deze ½ slag linksom te draaien.
- 2) Stel gewenste hoogte in.
- 3) Vergrendel de achterkant door de schroef rechtsom te draaien.

De rugsteun kan verder worden verhoogd met behulp van een stelschroef het aluminium profiel

- 1) Draai de schroef (2) los door deze ½ slag linksom te draaien.
- 2) Stel gewenste hoogte in.
- 3) Vergrendel de achterkant door de schroef rechtsom te draaien.

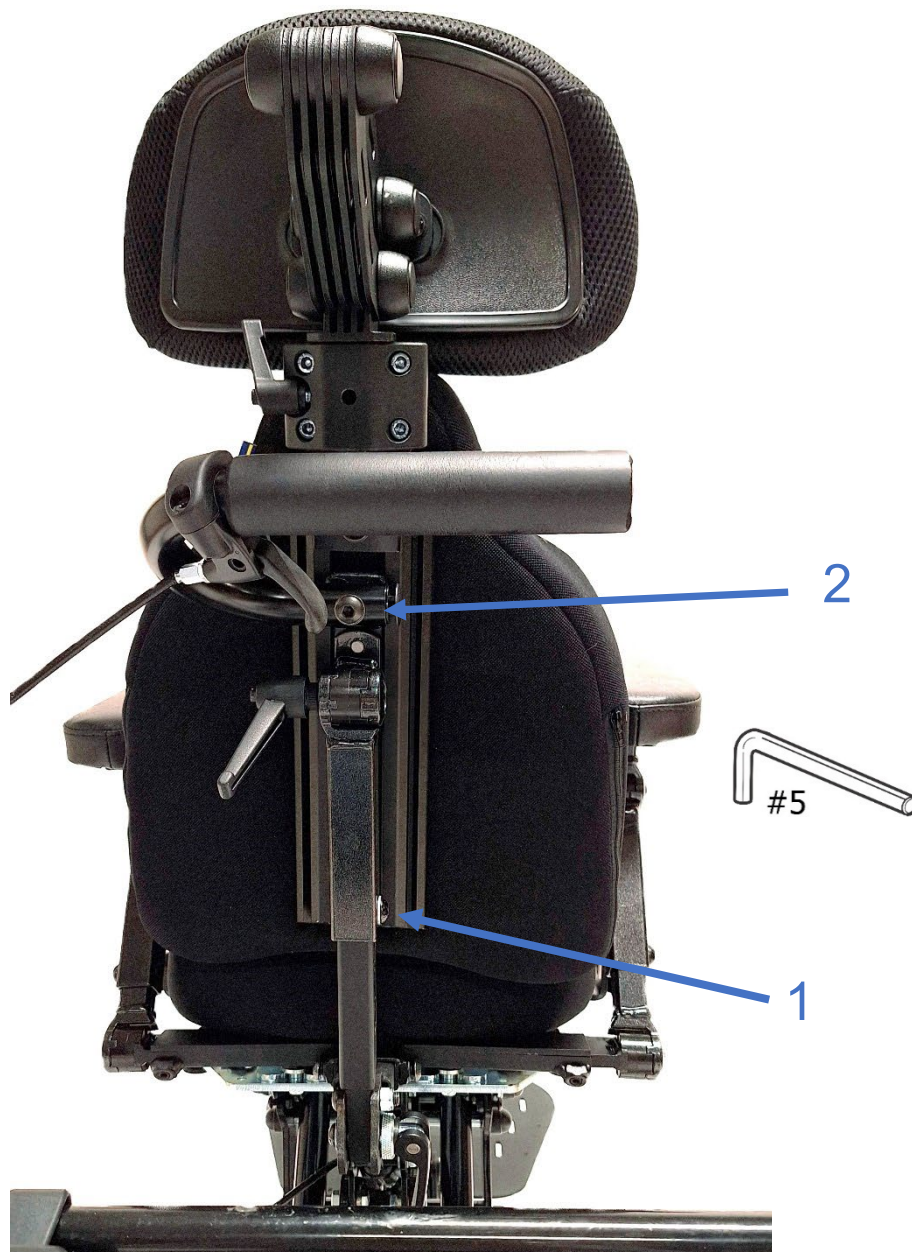

RUGLEUNING - KANTELEN

De rugleuning en het rugkussen zijn individueel verstelbaar.

Verstelbare achterwaartse kanteling

- 1) Klap de vergrendelingshendel (1) uit
- 2) Stel de gewenste rugkanteling in.
- 3) Klap de vergrendelingshendel (1) terug

Rugleuning kussen

- 1) Draai de hendel (2) los door deze één slag linksom te draaien.
- 2) Stel de gewenste hoek in op het kussen van de rugleuning.
- 3) Vergrendel de hendel door hem rechtsom te draaien.



Vergrendel het wiel. Let op, er bestaat gevaar voor beknelling



ZITDIEPTE (RUGLEUNING)

Zitdiepte kan worden versteld met behulp van de rugleuning. Stel de gewenste zitdiepte in door het rugleuningmechanisme naar achteren of naar voren te schuiven. De fijnafstelling gebeurt door het rugkussen te kantelen.

- 1) Klap de vergrendelingshendel (1) uit.
- 2) Kantel het rugmechanisme naar achteren om de zitdiepte te vergroten, kantel naar voren om de zitdiepte te verkleinen.
- 3) Klap de vergrendelingshendel (1) terug.
- 4) Om de zitdiepte nauwkeurig af te stellen, kantelt u (2) het rugkussen zoals beschreven in de instructie op de vorige pagina.



ZITDIEPTE (RUGMECHANISME)

De zitdiepte kan worden aangepast door het hele rugmechanisme naar voren/achteren te bewegen.

1) Draai de schroeven (1) aan elke kant van de rugleuning een paar slagen linksom los met een 5 mm inbussleutel.

2) Om de zitdiepte te verminderen, schuift u het rugmechanisme naar voren. Om de zitdiepte te vergroten, schuift u het mechanisme naar achteren.

3) Draai de schroeven volledig vast




ARMLEUNING - HOOGTE

OMHOOG


- 1) Draai de schroeven (1), (2), en (3) een paar slagen linksom los.
- 2) Kantel de kolom naar achteren bij schroef (1). Terwijl u dit doet, beweegt u het platform van de armsteun naar voren en omhoog tot de gewenste hoogte.
- 3) Draai schroeven (1) en (2) rechtsom vast
- 4) Pas de horizontale kanteling van het armsteunplatform aan en draai schroef (3) rechtsom vast

OMLAAG

- 1) Draai de schroeven (1), (2), en (3) een paar slagen linksom los
- 2) Kantel de kolom naar voren bij schroef (1). Terwijl u dit doet, beweegt u het platform van de armsteun naar achteren en omlaag tot de gewenste hoogte.
- 3) Draai schroeven (1) en (2) rechtsom vast
- 4) Pas de horizontale kanteling van het armsteunplatform aan en draai schroef (3) rechtsom vast

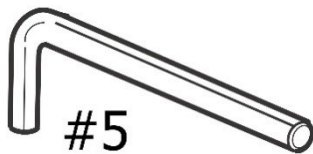


Waarschuwing - risico op letsel door pletten

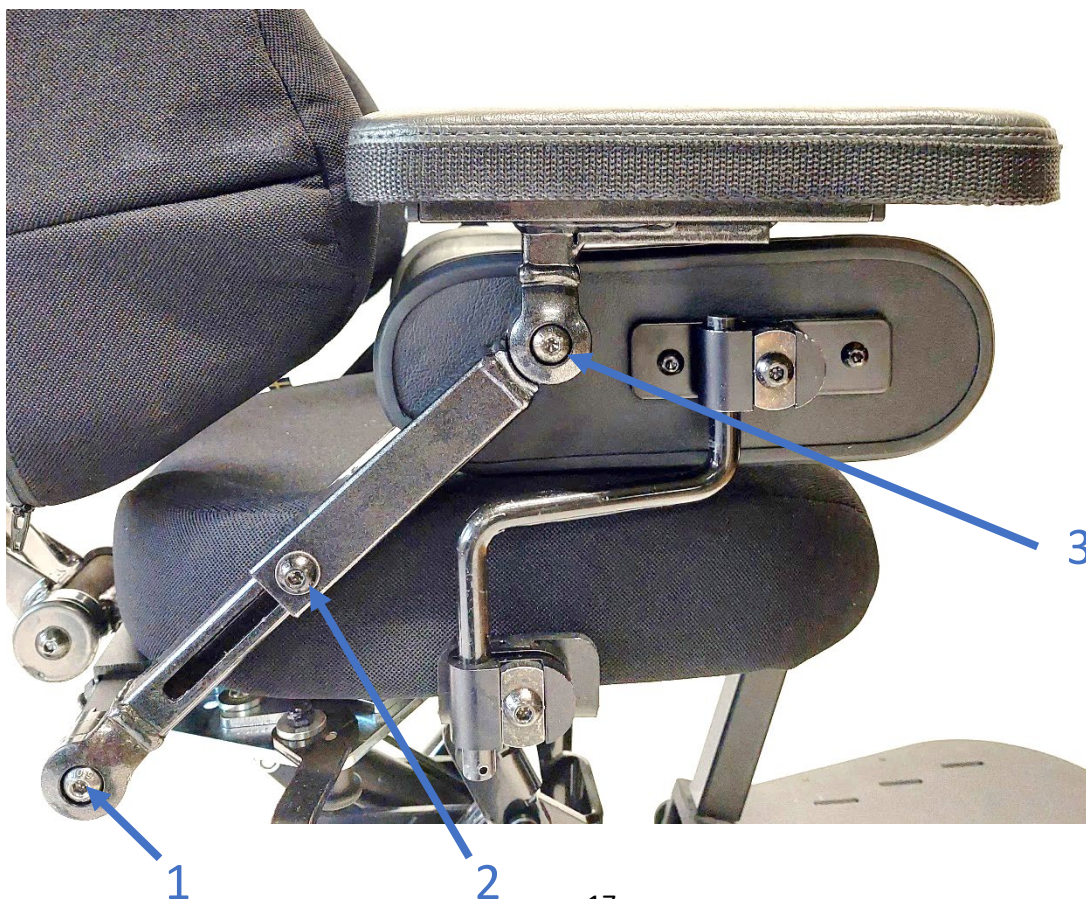

ARMSTEUN - BREEDTE


- 1) Draai de schroef (1) een paar slagen linksom los.
- 2) Stel de breedte in op de gewenste positie.
- 3) Draai de schroef rechtsom vast.

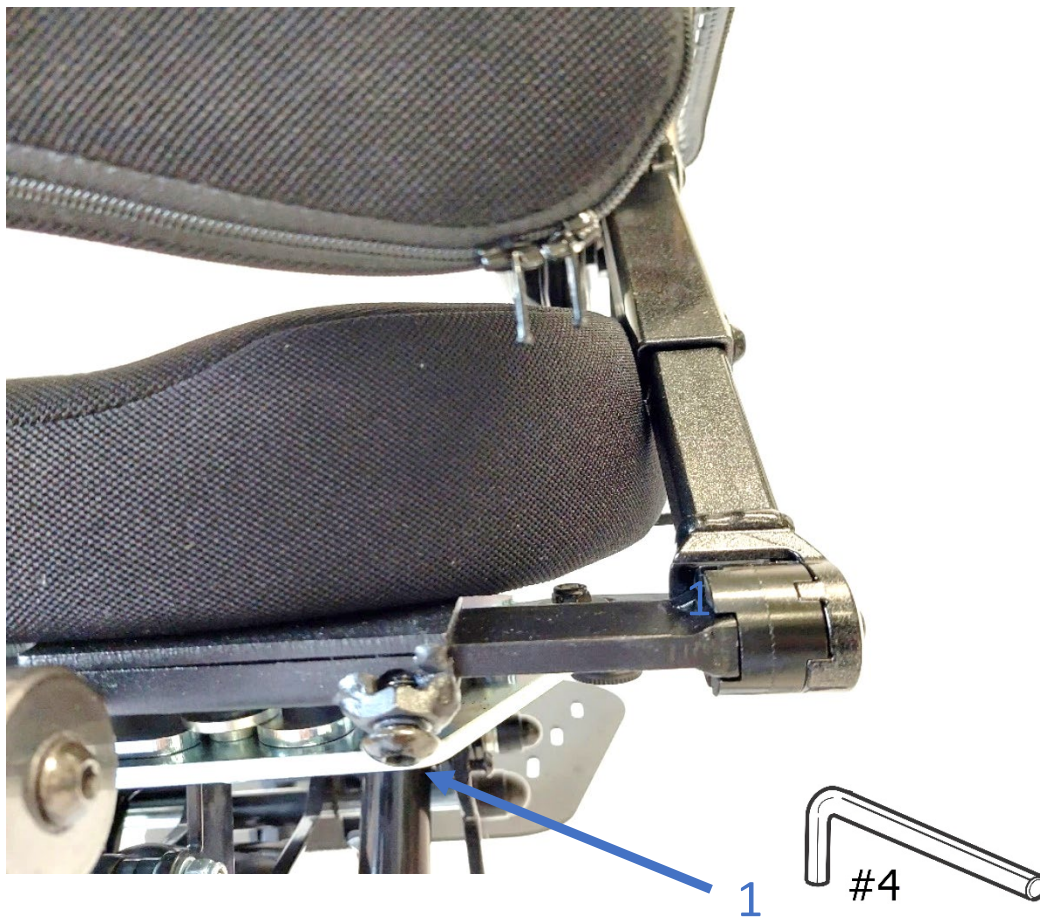

ZIJSTEUN


De zijsteun is verstelbaar in vier dimensies - breedte, hoogte, horizontale kanteling en diepte. Naast het verkleinen van de zitting breedte kan de zijsteun ook worden gebruikt om bekkenondersteuning te bieden door deze in de verste positie naar achteren in de stoel te zetten.

- 1) Draai de schroeven (1) en (2) een slag los.
- 2) Stel de gewenste positie in en draai de schroeven compleet vast.

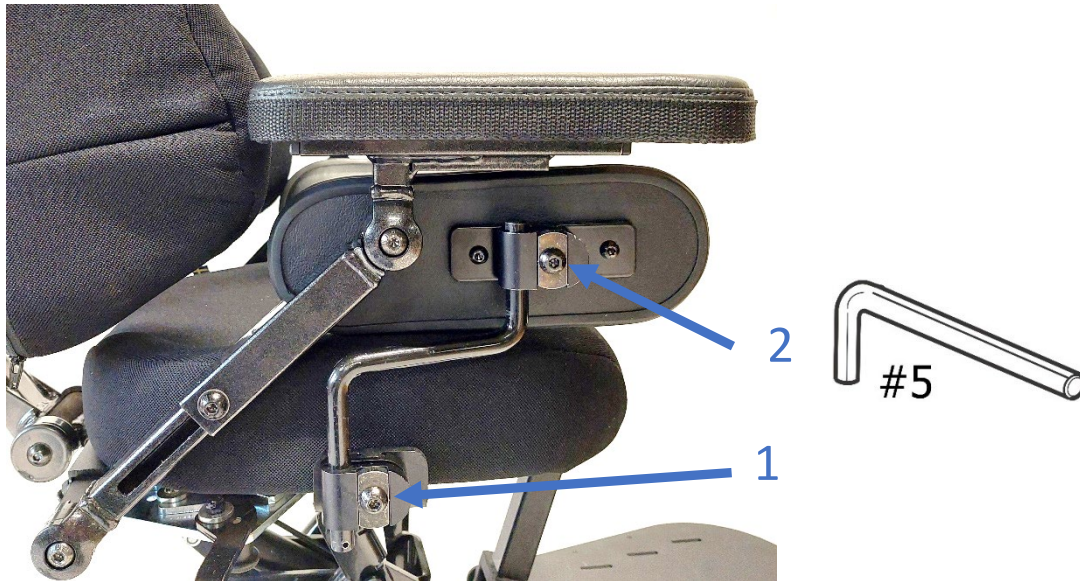

ZITTING KANTELEN

- 1) Druk op de bediening en houd deze ingedrukt (1).
- 2) Kantel de stoel naar de gewenste positie.

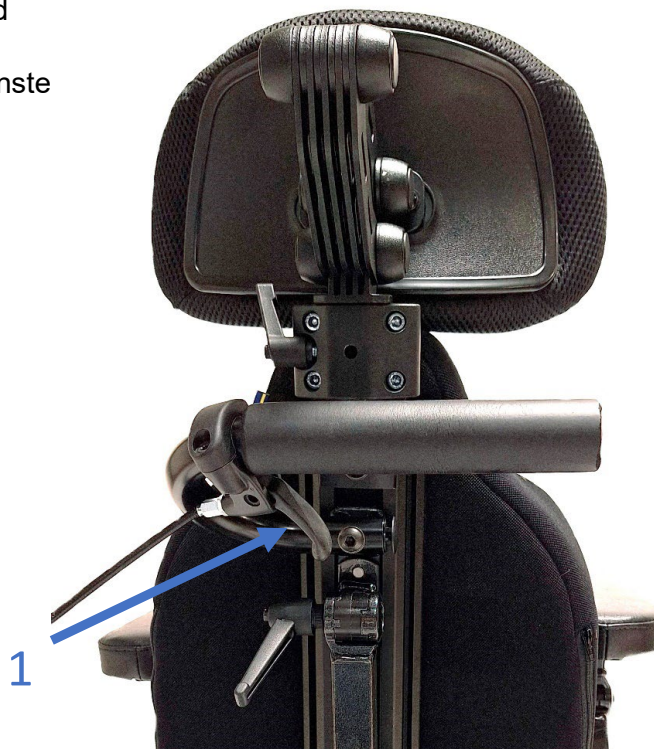


VOETPLAAT

De voetplaat is in hoogte en kanteling verstelbaar.

Pas de hoogte van de voetplaat aan door de schroeven (1) los te draaien. Draai de schroeven vast als de gewenste hoogte is bereikt.

Stel de kanteling van de voetplaat af door de schroef (2) los te draaien. Draai de schroef vast als de gewenste hoek is bereikt.

De hoek van de voetplaat zelf kan worden aangepast door de moeren los te draaien die de schroeven (3) op hun plaats houden. Draai deze met de klok mee om de voetplaat omhoog te kantelen, of tegen de klok in om omlaag te kantelen. Draai de moeren vast als de gewenste positie is bereikt.

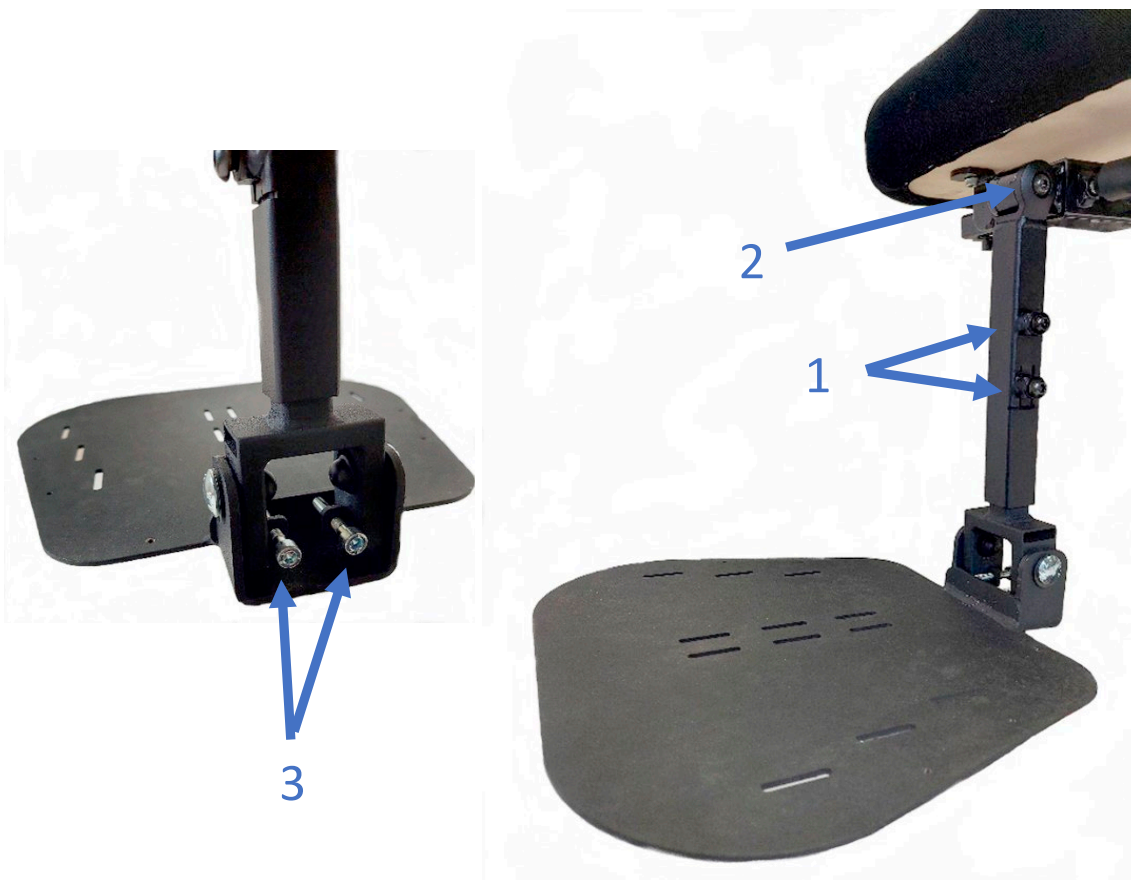

ZITHOOGTE - ELEKTRISCH EN GAS

Elektrisch

1) De zithoogte wordt geregeld met de knop op de schakelkast.



Wees voorzichtig bij het neerlaten van de stoel, zodat er niets bekneld raakt. Wanneer u de zitting met de stoel onder een tafel/bureau omhoog zet, bestaat het risico dat uw benen bekneld raken.




Gas

1) Druk op de bediening en houd deze ingedrukt.

2) Zet de zitting omhoog of omlaag. Als er iemand in de stoel zit, kan het nodig zijn om de handbediening op de rugleuning te gebruiken om de stoel omhoog en omlaag te zetten.



Wees voorzichtig bij het neerlaten van de stoel, zodat er niets bekneld raakt. Wanneer u de zitting met de stoel onder een tafel/bureau omhoog zet, bestaat het risico dat uw benen bekneld raken.

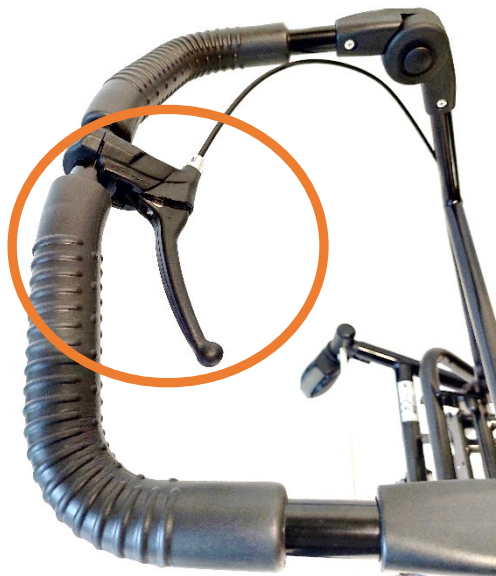

REM

Zet de stoelrem aan door het achterste rubber van het rempedaal in te drukken. Laat de rem los door op het voorste rubber van het pedaal te drukken.



Trek altijd de rem aan voordat u in of uit de stoel stapt.



HANDBEDIENING

De handbediening is in hoogte verstelbaar.

- 1) Houd de knoppen (1) ingedrukt om de handbediening aan te passen.
- 2) Stel in op de gewenste positie en laat de knoppen (1) los



OPLADEN - ALGEMEEN

Om zo lang mogelijk volledige batterijprestaties te garanderen, is het belangrijk dat de batterij regelmatig wordt opgeladen. In een gemiddeld gebruiksscenario is het om de dag opladen van de batterij een goede richtlijn. Laad de batterij indien mogelijk overdag op. De stoelfuncties kunnen niet worden gebruikt terwijl de batterij wordt opgeladen. Als de stoel voor lange tijd moet worden gestald, moet de batterij eens in de 4 weken worden opgeladen om te voorkomen dat deze tot het kritieke niveau ontladst waarbij de oplader niet meer begint op te laden. Plaats de stoel tijdens het opladen zo dat de aangesloten kabel eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeld.



Laat de stoel niet gedurende langere tijd opladen. De maximaal toegestane tijd is 4 weken achter elkaar. Laat de oplaadkabel niet aangesloten op de oplaadpoort van de stoel nadat het opladen is voltooid.



Regelmatig opladen is vooral belangrijk bij stoelen met elektrische remmen, elektrische zitkanteling en elektrische rugleuningkanteling, zodat de gebruiker veilig in en uit de stoel kan stappen.

De stoel moet worden opgeladen wanneer de elektronicabox een geluidssignaal geeft. Sluit de stekker van de oplader aan op de oplaadpoort aan de linkerkant van de handbediening (1). De LED (2) op de lader is eerst groen en wordt oranje wanneer het opladen begint. Zodra het opladen is voltooid, wordt de LED (2) weer groen. Koppel de oplader los van het stopcontact en vervolgens van de handbediening.



TECHNISCHE GEGEVENS - OPLADER

LINAC CH01

Gegevens	Feiten
Ingangsspanning	100-240VAC 50-60Hz
Ingangsstroom	Max 0,5A
Uitgangsstroom	0,5A
Uitgangsspanning	28 +0,3/-0,6V DC
Bedrijfstemperatuur	+5 - +40°C
Beschermingsklasse	Klasse 2
Beschermende behuizing	IP X4

TECHNISCHE GEGEVENS - ELEKTRONICA

Gegevens	Feiten
Ingangsspanning	24 V DC
Normale bedrijfsspanning	24 V DC
Richtlijn	IEC60601-1:2005 editie 3 ANSI/AAMI 60601-1:2005 editie 3
Beschermende behuizing	IP X4
Werkcyclus	10% max of 2 min aan 18 min uit

TECHNISCHE GEGEVENS - BATTERIJ

FGS20121A

Gegevens	Feiten
Batterij	2,9 Ah
Batterijtype	AGM
Bedrijfstemperatuur, opladen	+4 °C tot +40 °C
Bedrijfstemperatuur, ontladen	+4 °C tot +40 °C

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

Zie installatie-instructies voor informatie over de procedure voor het vervangen van de batterij.



Reparaties en andere procedures aan de batterij mogen alleen worden uitgevoerd door een technicus met de relevante expertise.

TECHNISCHE GEGEVENS - ZITTINGSYSTEEM

Gegevens	Feiten
Zitting (breedte x diepte)*	26x31, 29x32, 32x36, 36x40, 36x45, 40x40 cm
Zittingbreedte tussen armsteunen	24 - 34,5 cm
Zitdiepte	18 - 45 cm
Zithoogte, gas (hoogte tot onderkant zitting)*	29 - 62 cm
Zithoogte, elektrisch (hoogte tot onderkant zitting)*	27 - 61 cm
Kanteling zitting	-12 tot +30° in hoogste zithoogte, -12 tot +20° in laagste.
Rugleuning, hoogte verstelbaar*	Zitting: 26x31 & rugleuning: 25x32 29-43 cm Zitting: 29x32 & rugleuning: 27x37 38-48 cm Zitting: 32x36 & rugleuning: 27x37 38-48 cm Zitting: 36x40 & rugleuning: 35x43 43-51 cm Zitting: 36x45 & rugleuning: 35x43 43-51 cm Zitting: 40x40 & rugleuning: 35x43 43-51 cm
Rugleuning LS	Zitting: 26x31 & rugleuning: 14x32 29-43 cm Zitting: 29x32 & rugleuning: 17x37 38-48 cm Zitting: 32x36 & rugleuning: 17x37 38-48 cm Zitting: 36x40 & rugleuning: 24x43 43-51 cm Zitting: 36x45 & rugleuning: 24x43 43-51 cm Zitting: 40x40 & rugleuning: 24x43 43-51 cm
Rugkanteling	-16° tot +45° in de hoogste zithoogte, -16° tot +30° in de laagste.
Armleuning hoogte, verstelbaar	0 – 24 cm
Armsteun platform	25x8x3 & 25x8x5 cm
Bekleding	Black Atlantic

*) Het bereik dat rechts in de kolom wordt vermeld, is het bereik van de achterste hoogteverstelling.

TECHNISCHE GEGEVENS - CHASSIS

Gegevens	Feiten
Chassis, breedte	55 cm
Chassis lengte	77 cm
Rem	Chassis gemonteerd
Diameter wiel	100mm
Gewicht (gas)	18,4 kg
Gewicht (elektrisch)	23,4 kg

TECHNISCHE INFORMATIE

Gegevens	Feiten
Klasse	Werkstoel - ISO 180903
Gewicht (gas)	30 kg
Gewicht (elektrisch)	34 kg
Gewicht gebruiker, max.	70 kg
Batterij	24V 2,9 Ah AGM

OMGEVING

Conditie	Temperatuur	Vochtigheid	Atmosferische druk
Normaal gebruik	5 °C - 40 °C	10% - 93% RV	50kPa – 106kpa
Opslag en transport	-5°C - 40 °C	10% - 93% RV	50kPa – 106kPa

VERNIETIGING

Producten die definitief buiten gebruik worden gesteld, moeten bij de bron worden gedemonteerd en gesorteerd. Montage- en demontage-instructies vindt u op de website onder het kopje *Montage-instructies*. Gedetailleerde diagrammen zijn ook te vinden op de website onder het kopje *Uitvergrootte diagrammen*. Ga in uw browser naar www.eurovema.se

Particulieren kunnen voor meer informatie contact opnemen met Eurovema. Eurovema zal de verantwoordelijkheid voor de vernietiging op zich nemen.

Gedemonteerde componenten moeten worden gesorteerd volgens **onderstaande tabel**.



Het demontageproces is niet zonder risico. Er bestaat een kans dat u verbrijzeling of brandwonden oploopt als u de procedure niet correct. Demontage moet worden uitgevoerd door een geautoriseerd technicus.



Metaal	Elektronica	Brandbaar
Chassis	Besturingselektronica	Zittingen
Zitkruis	Aansluitdozen	Rugleuning
Actuator	Handbediening	Kussens armleuning
Rugleuning-mechanisme	Bediening tuimelschakelaar	Afneembare bekledingshoezen
Armsteunpalen		Neksteunkussens
Beensteun		Rompsteunkussens
Accessoire bevestigingen		Andere vulmaterialen
Stoellift, gas		
Hefkolom, elektrisch		
Voetring		
Kabels		

Batterijen

Afgedankte loodbatterijen moeten naar een recyclingcentrum worden gestuurd.

