


Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Gebruiksaanwijzing

Belangrijk. Voor gebruik lezen!

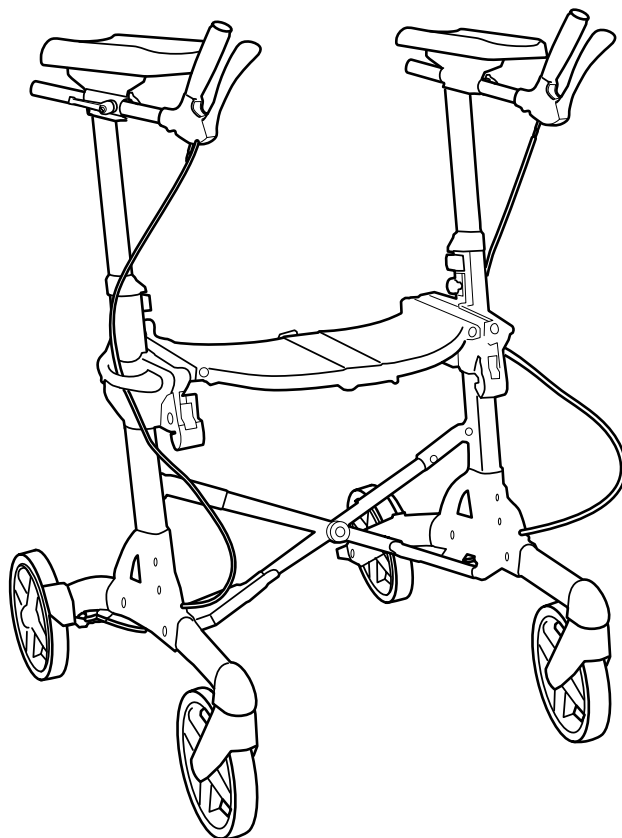

VOLARIS

RA
RA Outdoor

Gefeliciteerd met uw nieuwe RA-rollator!

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen, zodat u uw nieuwe rollator goed leert kennen. Een juist gebruik en onderhoud zorgen voor een verhoogde veiligheid en een langere levensduur van de rollator.

De Volaris is een stabiele en vlot rijdende rollator. Hij kan eenvoudig worden ingeklapt, waardoor hij minder plaats inneemt en makkelijk mee te nemen is onderweg. Het product kan worden voorzien van verschillende toebehoren in functie van de persoonlijke behoefte. Volaris-rollators worden ontwikkeld en geproduceerd in Zweden, waardoor hun optimale werking en hoge kwaliteit verzekerd zijn.

Beoogd gebruik Volaris RA / RA Outdoor

De RA-rollator zorgt voor de nodige steun bij verplaatsing en mag uitsluitend door personen met beperkte of verminderde mobiliteit ter ondersteuning bij het lopen worden gebruikt. Het product kan zowel binnen- als buitenshuis worden gebruikt.

De zitting kunt u gebruiken om even uit te rusten terwijl de rollator stil staat.

De Volaris-modellen RA / RA Outdoor zijn bestemd voor gebruik door volwassenen.

Eigen ingrepen of aanpassingen, naast wat in deze handleiding wordt beschreven, zijn niet toegestaan.

Beperkingen qua gebruik

RA mag niet worden gebruikt door personen die niet over de nodige kracht beschikken om met behulp van de rollator te stappen of recht te staan.

Het product mag niet worden gebruikt door personen die zwaarder zijn dan het maximale gewicht vermeld voor het specifieke model.

Standaarden

Volaris RA/RA Outdoor rollators voldoen aan de Zweedse norm SS-EN 11199-3:2005 (Loophulpmiddelen die met beide armen worden bediend - Eisen en beproevingsmethoden - Deel 3: Looprekken). Volaris is CE-gemarkeerd en voldoet aan de eisen van de Medical Devices Ordinance MDR 2017/745.

Garantie

De garantietermijn bedraagt twee (2) jaar en omvat materiaal- en productiefouten. Voor slijtageonderdelen zoals wielen, remonderdelen en handgrepen bedraagt de garantietermijn een (1) jaar. De garantie veronderstelt dat het product op de daartoe bestemde wijze is gebruikt overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing. De verwachte levensduur is zeven (7) jaar mits gebruik in overeenstemming met de aanwijzingen en regelmatig onderhoudsnazicht.

Contact

Bij vragen over het product en het gebruik ervan neemt u contact op met uw dealer of zorgcentrale.



Eurovema Mobility AB
Baldersvägen 38
332 35 Gislaved
Tel.: 0371 39 01 00
E-mail: info@eurovema.se
Website: www.eurovema.se

Veiligheidsvoorschriften



Waarschuwing! Wees voorzichtig bij gebruik van het product om eventueel lichamelijk letsel te vermijden.



Belangrijk! Lees de instructie om schade aan het product te vermijden.



Symbool dat aangeeft dat de handrem is aangetrokken.



Symbool dat aangeeft dat de handrem is vrijgegeven.



Waarschuwing! De rollator moet in parkeerstand staan (met de handrem) wanneer u erop gaat zitten of terug opstaat.



Waarschuwing! Bestuur de rollator nooit terwijl er iemand opzit.



Belangrijk! De zitting moet vlak zijn, m.a.w. zich op dezelfde hoogte bevinden als de beide zijkanten wanneer de rollator is ingeklapt.


Inhoud

Veiligheidsvoorschriften	pag. 2	Onderhoud	pag. 9
Garantie	pag. 2	De rem afstellen	pag. 9
Gemaakt in Zweden	pag. 2	Schoonmaken	pag. 9
Inhoud	pag. 3	Opknappen	pag. 9
Contact	pag. 3	Profielvulling	pag. 9
Afstelling van de zitting	pag. 4	De kabel smeren	pag. 10
Afstelling van de handgreephoogte	pag. 4	Fouten zoeken	pag. 10
Afstelling van de handgrepen	pag. 4-5	Accessoires voor uw veiligheid	pag. 11-12
De positie en richting van de armleuning	pag. 5	Accessoires voor uw comfort	pag. 13-15
Uitklappen	pag. 6	Technische gegevens	pag. 16
Inklappen, inklapblokkering	pag. 6	Accessoires	pag. 16
Vaste transportband	pag. 6		
Zo remt u	pag. 7		
Stabiliteitsgordel	pag. 8		
Rijtips - "comfortchassis"	pag. 8		
Leer de "schaartechniek"	pag. 8		

Hoogteverstelling


De hoogte van de zitting instellen

Verwijder eventuele profielvullingen (zie pagina 9). Verander één kant tegelijk. Trek de knop onder de zitting uit. Beweeg tegelijkertijd de zitting omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte. Voel of de knop weer vastklikt, zodat de zitting is vergrendeld. Doe hetzelfde aan de andere kant. Controleer zorgvuldig of de zitting recht staat voordat u de rollator gebruikt. Druk de middenplaat van de zitting omlaag. Plaats de profielvullingen in de inkepingen in het profiel, zowel onder als boven de zitting (zie pagina 9).

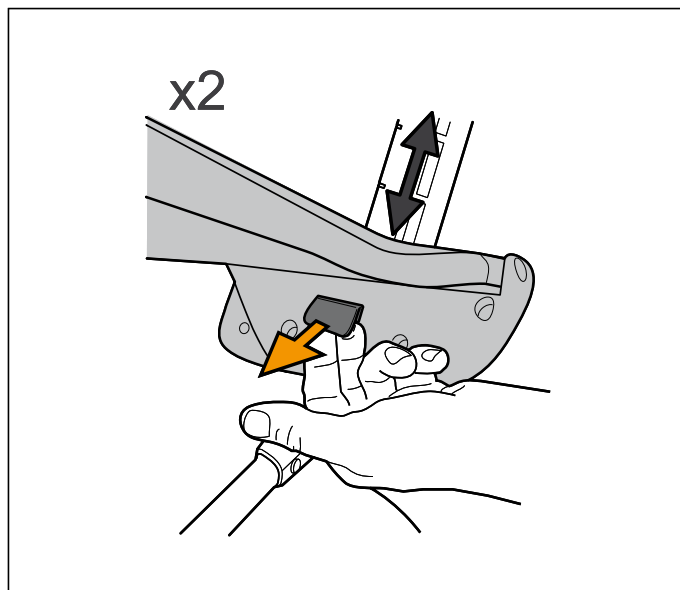


Handgreephoogte

De handgreephoogte is juist als de onderarm comfortabel op het kussen van de armleuning rust, met de onder- en bovenarm in een hoek van ca. 90 graden. Het is niet de bedoeling dat u voorover bukt als u met de rollator loopt. Houd de rollator dicht bij uw lichaam, loop met rechte rug en kijk naar voren.

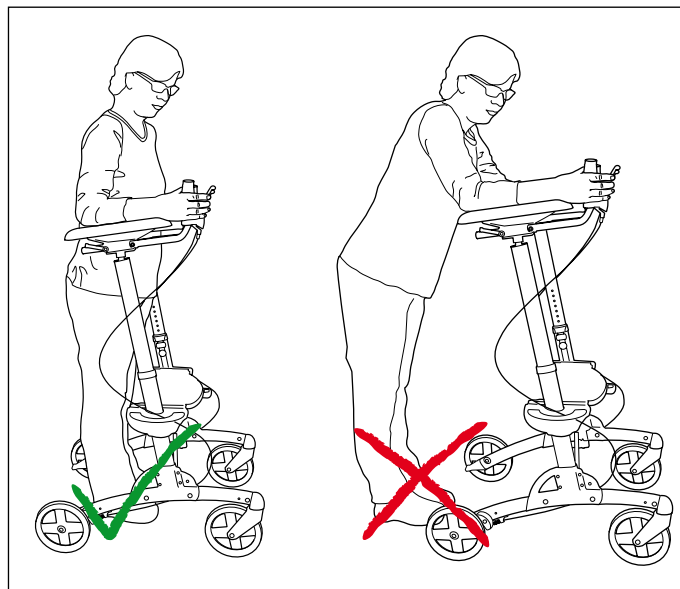

De hoogte van de handgrepen instellen


Draai de draaiknop iets los. Door de knop uit te trekken, kunt u de hoogte van de handgrepen wijzigen, zie de intervallen op pagina 16. Stel vervolgens de hoogte, controleer of de knop "weer vastklikt" en draai dan de draaiknop weer aan. U voelt zelf het beste of u de RA verder wilt bijstellen als u deze een poosje gebruikt hebt. Lopen met uw rollator moet comfortabel voelen. Mechanische stop voor een maximale handgreephoogte. Het aantal zichtbare gaatjes markeert het gekozen hoogte-interval.

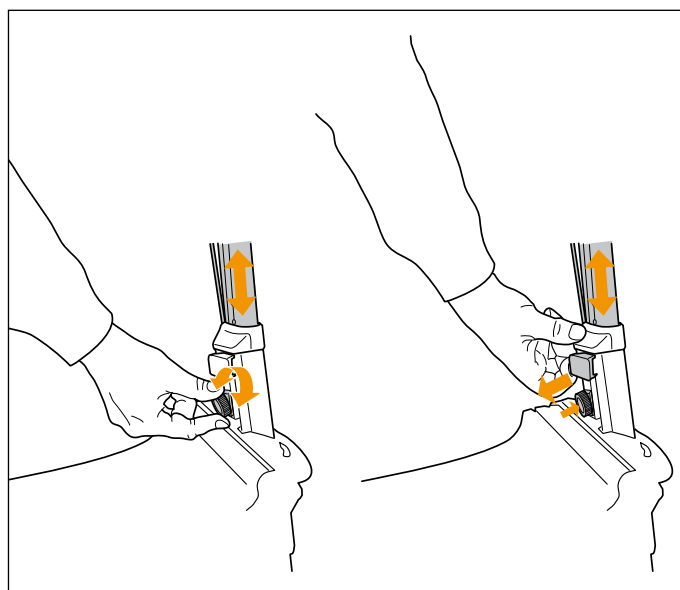

Verstelling


Verstel de diepte en hoek van de handgrepen.

Draai de knop onder het armleuningkussen los. Duw en kantel de remhendel in de gewenste positie.

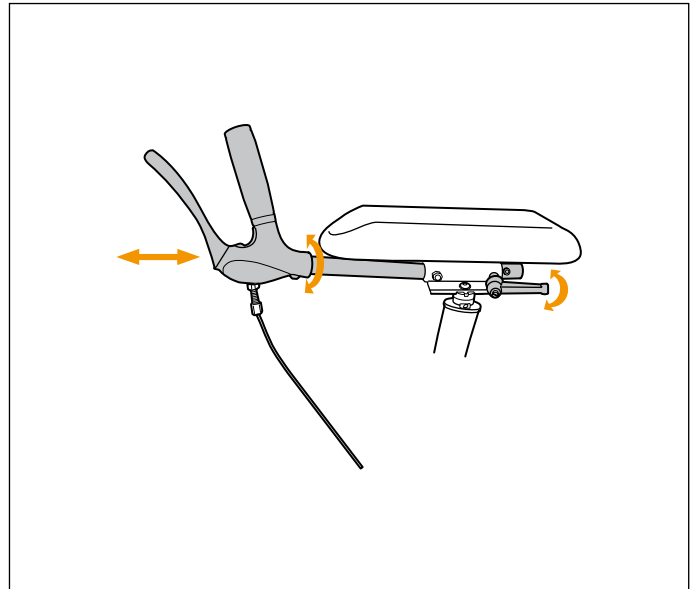


Positie van de armleuning

Door de schroeven onder het kussen van de armleuning los te draaien, kan de armleuning naar voren en naar achteren worden verplaatst. Om het verstellen te vergemakkelijken, kan de handgreep worden verwijderd nadat de knop is losgedraaid. Zet de schroeven weer vast en stel de handgreep af als deze weer op zijn plaats zit.

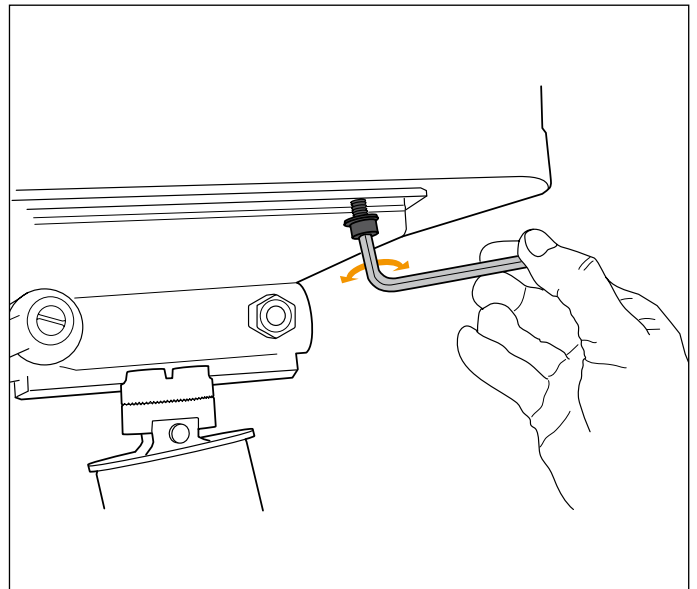

Richting van de armleuning


De armleuning (armleuningkussen inclusief handgreep) kan naar binnen worden gedraaid door het tandwiel los te draaien. De armleuning kan tot 90 graden worden gedraaid.

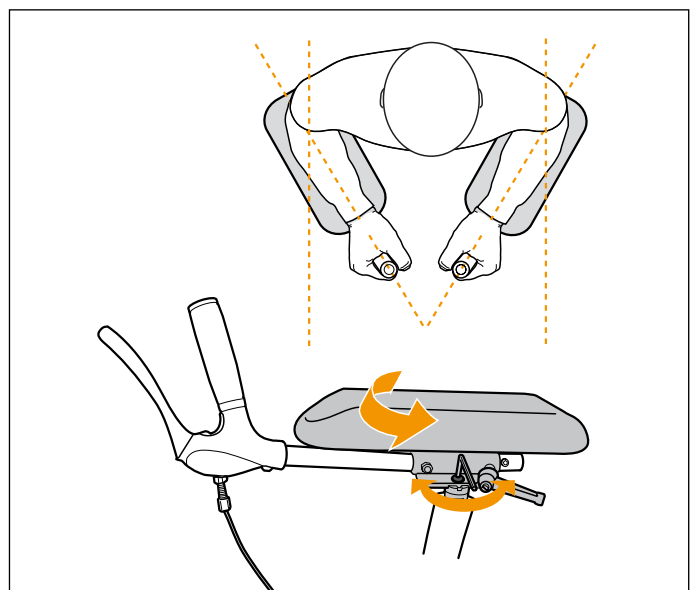

In- en uitklappen

Uw rollator uitklappen


1. Pak met één hand de ene rijhandgreep vast en houd de RA lichtjes naar dezelfde kant schuin, zodat het wiel een paar centimeter omhoog komt.
2. Trek de grijze tilgreep aan de andere kant naar buiten. De rollator klapt uit met behulp van een veer.
3. Druk de middenplaat van de zitting omlaag om de rollator te vergrendelen.

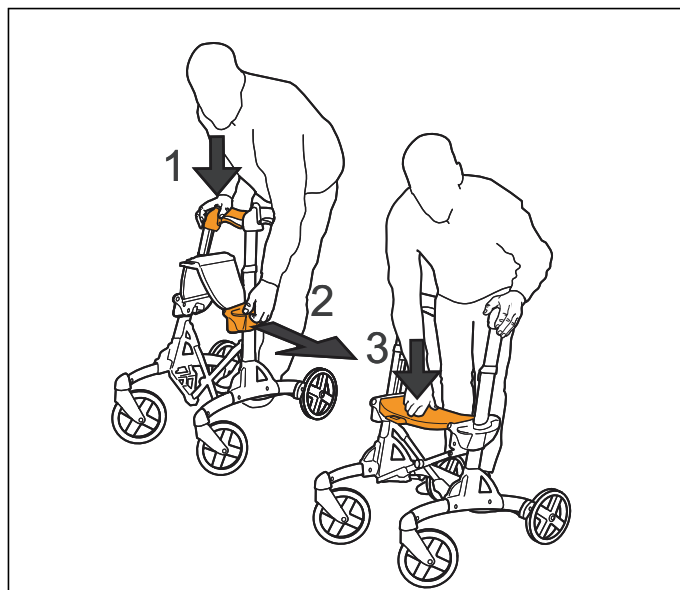

Inklappen


Neem een eventuele mand weg.

1. Trek de band naar u toe.
2. Til de rollator aan de band op.
3. Druk de RA in elkaar met de handgrepen aan de zijkant.

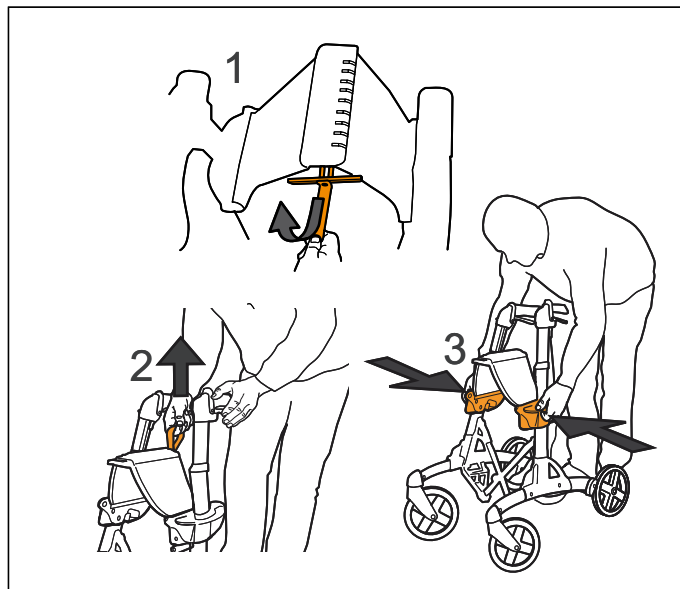

Vaste transportband


Als de rollator is voorzien van een vaste transportband, klapt u de rollator in (zie bovenstaande punten) met behulp van de drukknop. Maak de knop los. De rollator kan nu worden uitgeklapt.

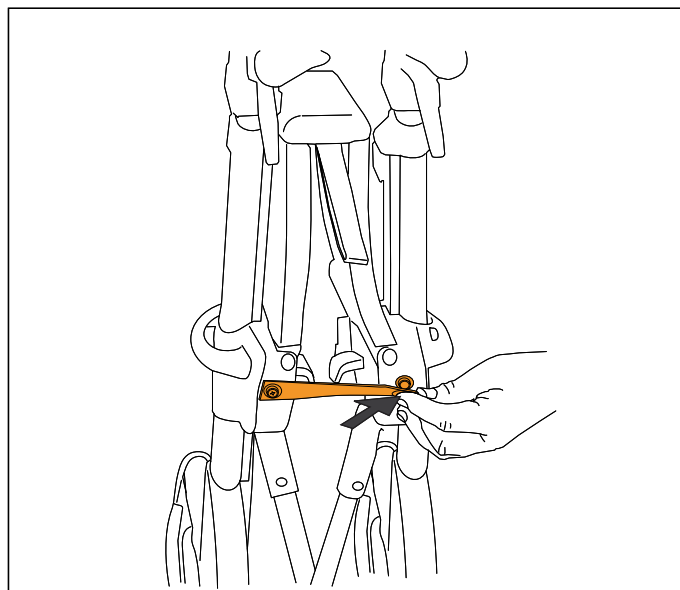

Zo remt u veilig

De rem

De rem wordt geactiveerd door de remhendel vóór de handgreep tegen de handgreep aan in te knijpen.

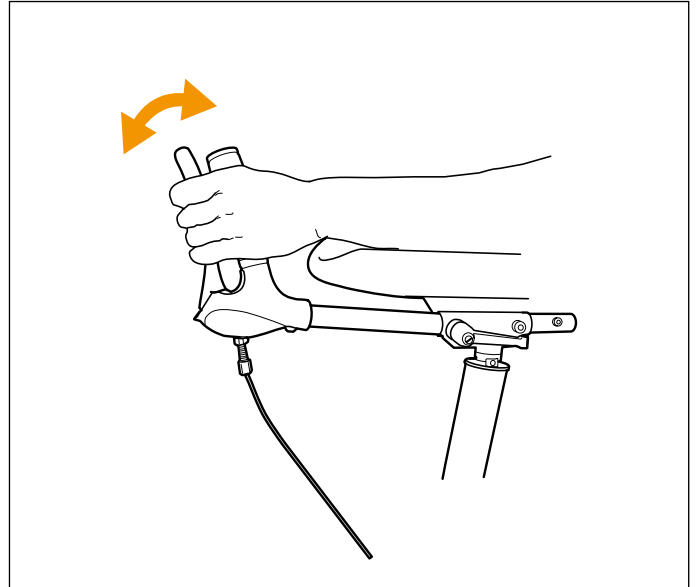


De handrem

De handrem wordt geactiveerd door de remhendel naar buiten te drukken totdat de remhendel automatisch wordt vergrendeld.


De handrem mag niet zijn vergrendeld bij het afstellen van de rem.

De handrem moet geactiveerd zijn bij het gebruiken van de zitting.

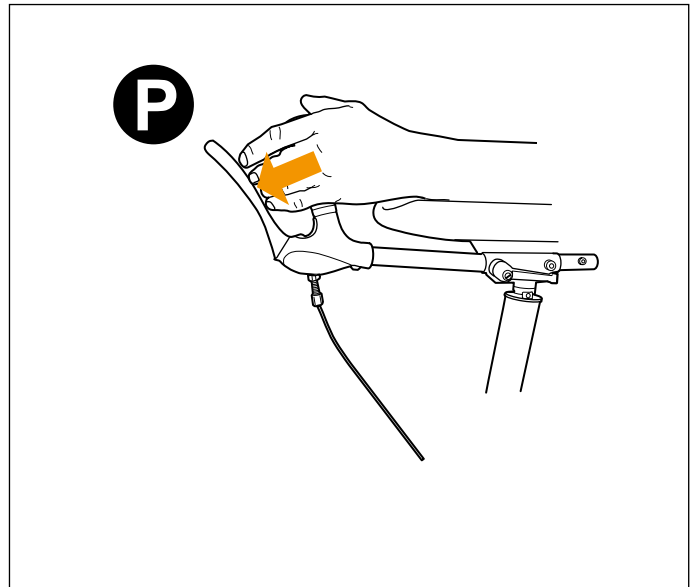

De handrem vrijmaken

U maakt de rem vrij door de remhendel vóór de handgreep in te knijpen totdat u een klik hoort, waarmee tegelijkertijd de vergrendeling wordt opgeheven.

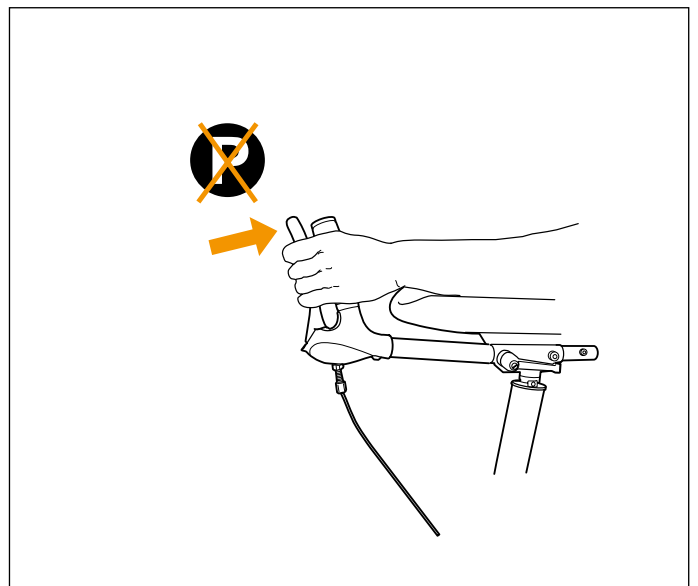


Rijtips

Stabiliteitsgordel

De stabiliteitsgordel zorgt voor een stabiel gebruik, omdat het effect van de flexibiliteit die inherent is aan de dwarsstructuur wordt beperkt. Stabiliteitsgordels worden standaard geleverd bij RA- en RA Outdoor-modellen.

RA-rollators kunnen zonder stabiliteitsgordel gebruikt worden.

Om het bevestigen en verwijderen te vereenvoudigen, is de stabiliteitsgordel met karabijnhaken aan de stoel bevestigd. Om een karabijnhaak los te maken, drukt u op de vergrendelingswig zoals op de afbeelding rechts. Door de armleuningingen iets naar elkaar toe te drukken, wordt de spanning in de gordel verminderd, waardoor de gordel gemakkelijker kan worden bevestigd en verwijderd. Als de gordel tijdelijk moet worden verwijderd, bijvoorbeeld als de stoel moet worden gebruikt, maak dan de karabijnhaak aan de ene kant van de stoel los. De gordel hangt dan aan de andere karabijnhaak.

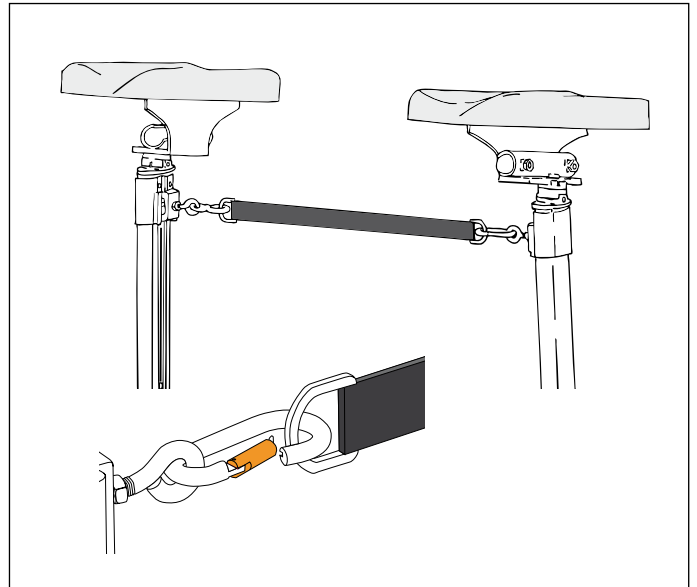


Comfortchassis

De RA heeft een Comfort Frame™, "comfortchassis", wat maakt dat hij oneffenheden in de weg soepel kan passeren. Wanneer u over een grotere hindernis moet of tegen een trottoirband op moet, kunt u gebruik maken van de "kantelhulp", die bij de achterwielen zit. Druk het ene pedaal omlaag, terwijl u de rollator aan de handgrepen optilt.




Niet optillen aan de zitting als u een hindernis wilt passeren. De rollator klapt dan in!

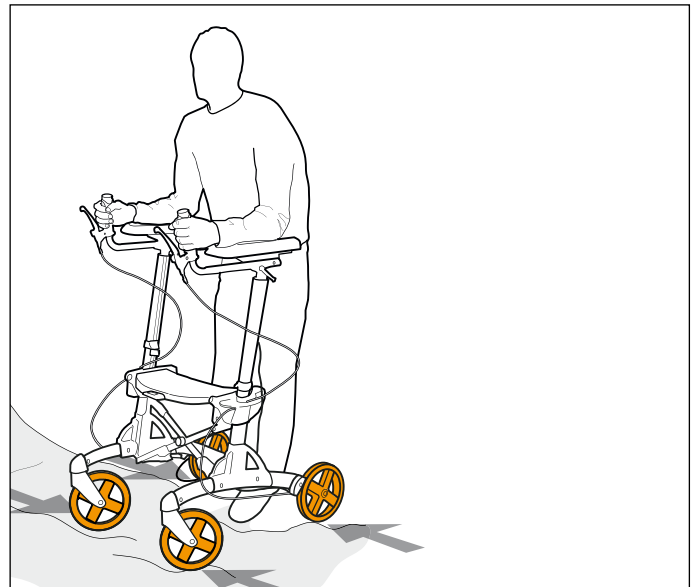

Leer de "schaartechniek"

Rijd schuin op de hindernis af. Rem aan de ene kant. Houd de rollator iets schuin naar achteren, zodat de voorwielen omhoog komen en draai de voorwielen over de hindernis. Het is heel eenvoudig als u het eenmaal kunt!

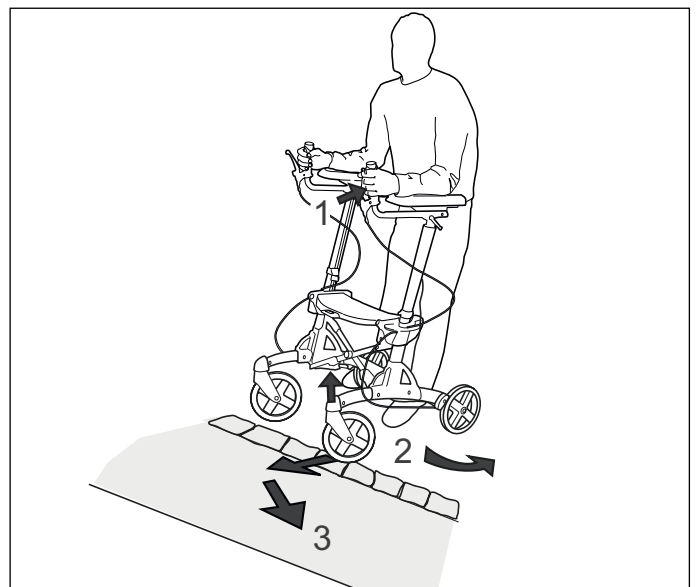


Onderhoud

De rem op de RA stellen voor de juiste werking

Het remeffect kan worden ingesteld door het kabelmechanisme aan de onderkant van het frame en/of bij de remhandgreep af te stellen.


1. Maak de handrem vrij/los.
2. Neem de moer in het midden los met een 8 mm kniesleutel.
3. Draai de van schroefdraad voorziene lange zeskantas naar buiten als u het remeffect wilt vergroten. Draai de van schroefdraad voorziene zeskantas naar binnen als u het remeffect wilt verkleinen.
4. Haal de moer in het midden aan met een 8 mm kniesleutel. U moet de rem zo afstellen dat het remstuk ca. 1-2 mm van het loopvlak zit zonder dat het "het loopvlak raakt". Als u de rem te strak stelt, wordt het activeren van de handrem onnodig lastig.

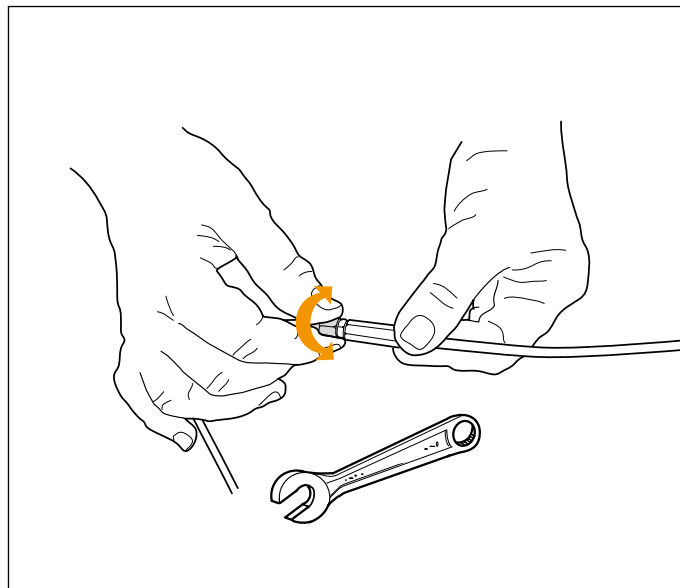

Rollators en accessoires schoonmaken

Het loont om uw rollator goed te onderhouden, omdat deze daardoor langer meegaat.

Neem vuil af met een natte doek en een mild schoonmaakmiddel. Let goed op dat er zich geen vuil ophoopt tussen de wielen en de remschoenen. Het remeffect kan daarmee in gevaar worden gebracht! De rollator kan zonder probleem met een hogedrukreiniger of een tuinslang worden afgespoeld. Droog hem daarna af.

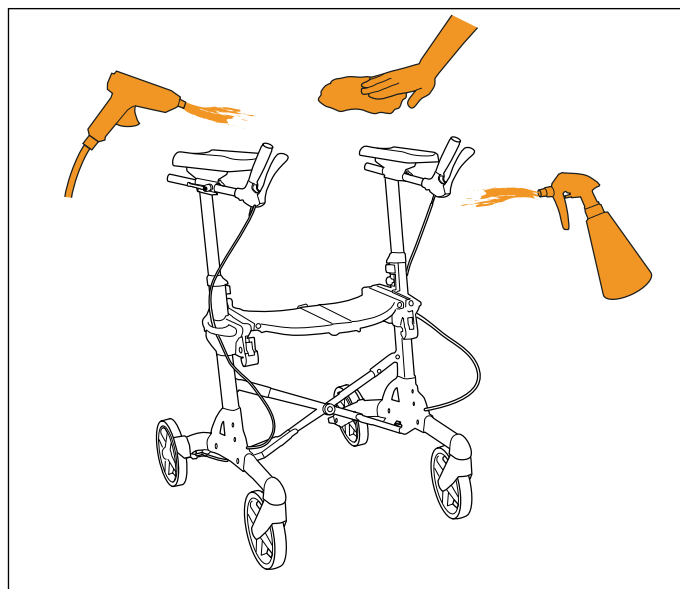


Opknappen

Bij een opknapbeurt in een wasinrichting mag de rollator niet op de rem staan. De rollator moet afkoelen tot kamertemperatuur voordat hij gebruikt en afgesteld wordt.

Profielvulling


De profielvulling wordt gebruikt om te voorkomen dat er iets in een inkeping blijft vastzitten. Wordt met de rollator meegeleverd. Moet in alle zichtbare inkepingen zitten. Zowel boven als onder de zitting.

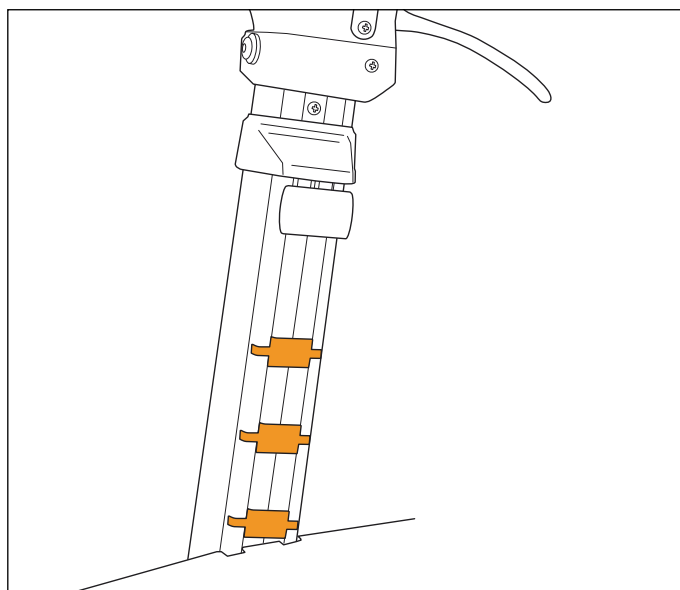

Onderhoud

De kabel smeren


Smeer na een wasbeurt de remkabel door een paar druppels olie aan te brengen bij de handgreep onder het frame.

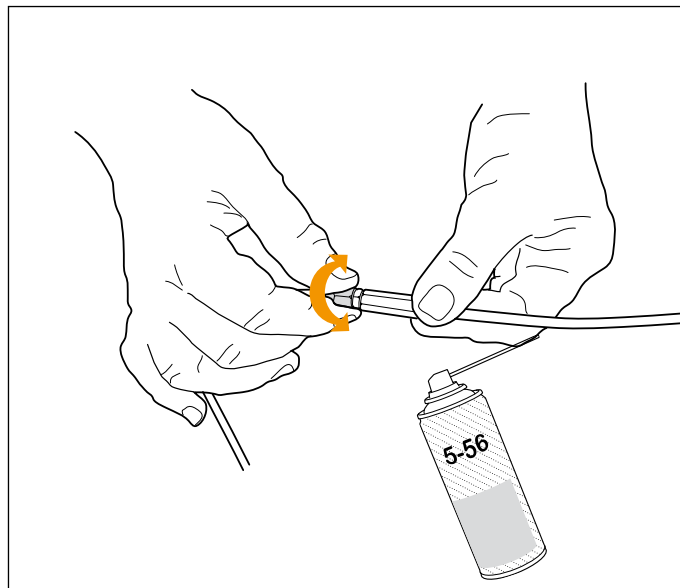

Fouten zoeken

Als de rollator tijdens het lopen naar één kant trekt, controleer dan of de wielen even makkelijk ronddraaien en of de wielvorken goed draaien. Controleer of wielen en vorken goed vastzitten. Let op dat er geen vuil of rommel tussen wielen en remschoenen is blijven steken.


Let op dat de remkabel vastzit aan de remschoen onder het frame. Controleer of de veer bij de remschoen bij het achterwiel heel is. Controleer of de remschoenen bij het remmen aan beide kanten in gelijke mate op de wielen drukken. Stel de kabel af, zie pagina 8.

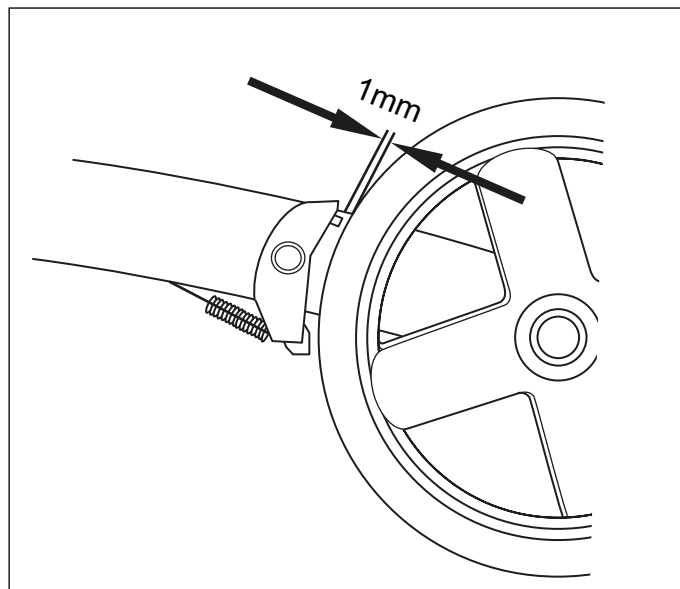

Accessoires voor uw veiligheid


Vertragsingsrem

Een rem met een instelbare, continue wrijving. Draai aan de knop om het effect van de vertragsingsrem in te stellen.

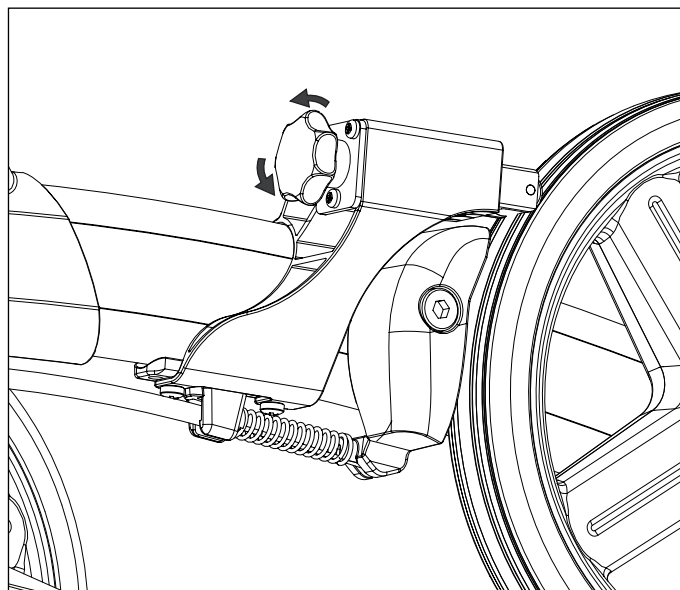

Verlichting


Met klittenband aan de staander bevestigen. Rood licht achter, wit licht vóór. Werkt op batterijen. Eenvoudig weg te nemen, eenvoudig om de batterij te verwisselen.

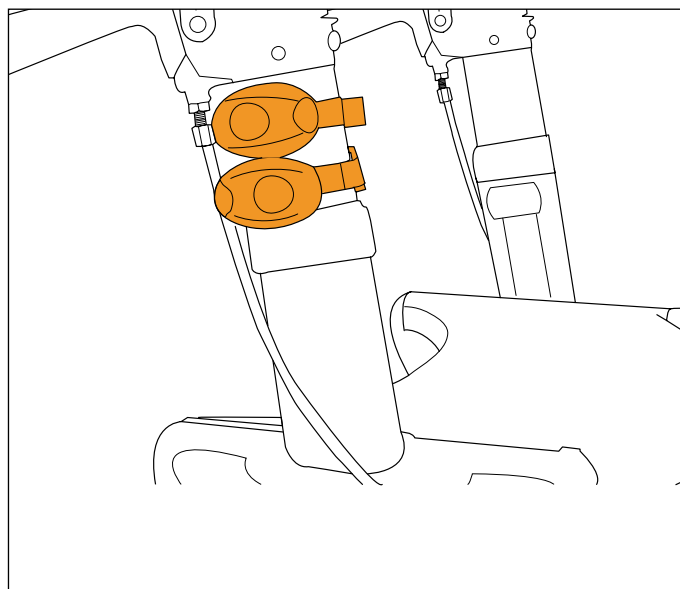

Accessoires voor uw veiligheid


Eenhandsrem

Vergrendelt de beide achterwielen, wordt geactiveerd door de gewone rem of de handrem.

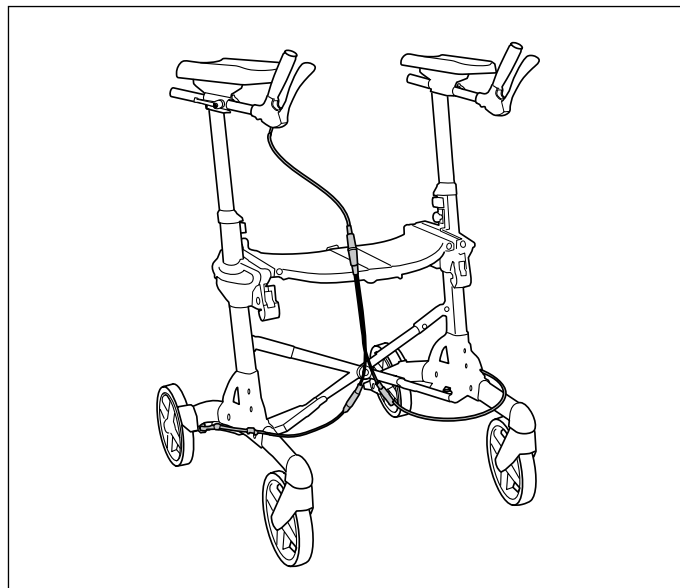


Houder voor zuurstoffles

Sterke stalen mand die aan de zitting wordt gehaakt en een meegeleverde bevestiging.

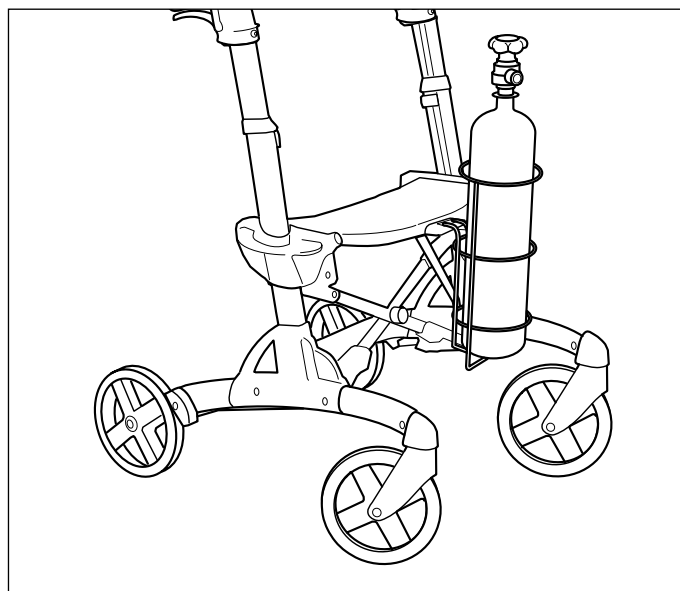

Infuushouder


Hang het infuuszakje in eerste instantie naar het midden van de rollator. Denk eraan dat infuuszakjes effect kunnen hebben op de stabiliteit van de rollator. Maximaal gewicht 2,2 kg.

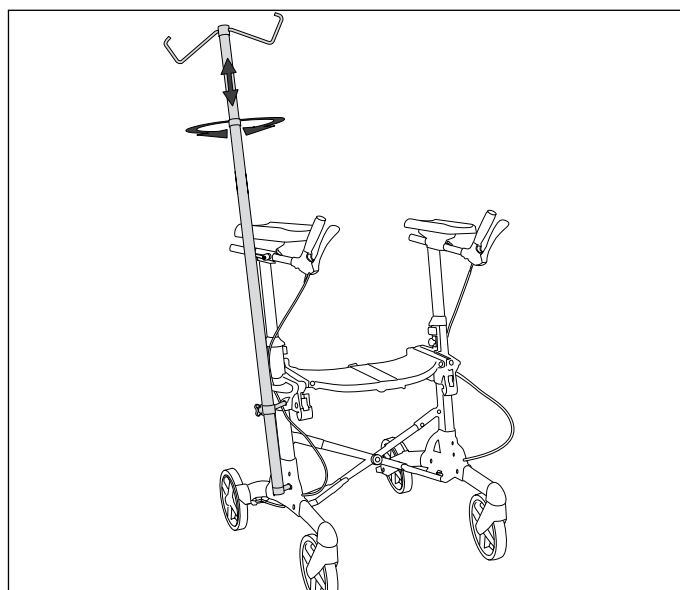

Accessoires voor uw comfort


Stokhouder/krukhouder

Twee onderdelen die moeten worden vastgeschroefd op de daarvoor bestemde plaats. Houdt een stok, kruk of paraplu stevig op hun plaats.

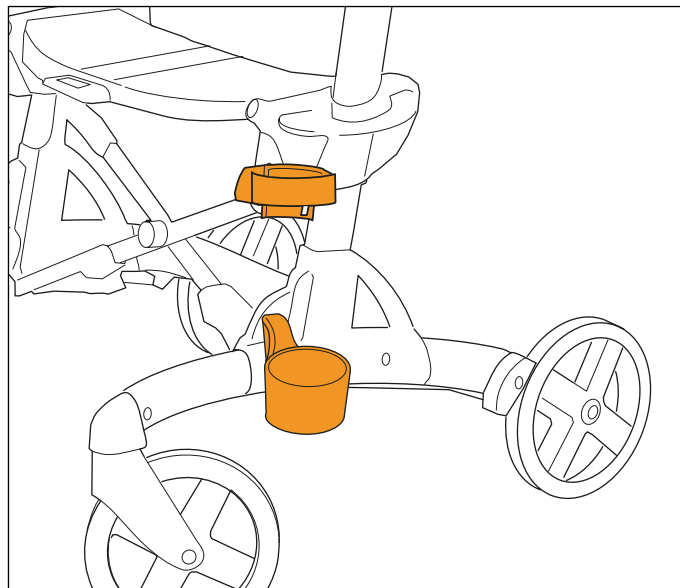

Flessenhouder


Houder van geplastificeerd draad voor flesje/blikje. Biedt plaats aan flesjes van 0,5 liter en blikjes van 33 cl. Om aan een handgreep te hangen. Maximale belasting: 0,6 kg.

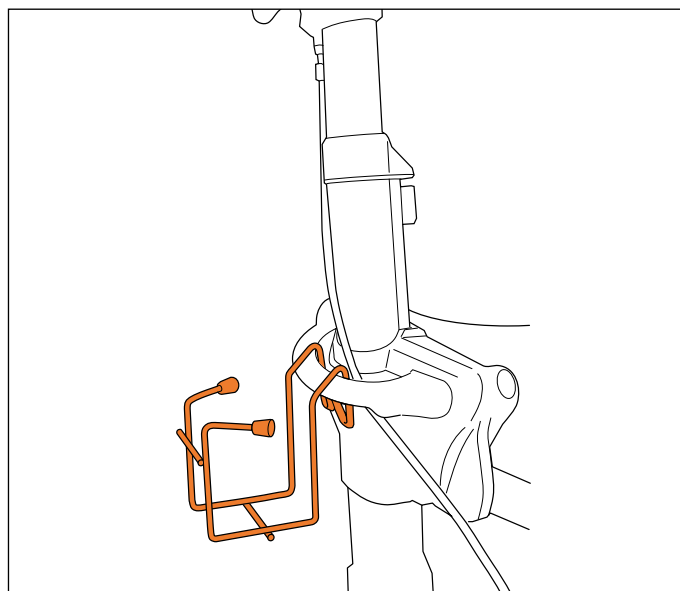

Accessoires voor uw comfort


Transportband

Maak de transportband vast om de handgrepen van de rollator, dan blijft de rollator in ingeklapte stand. Eenvoudig aan te brengen.

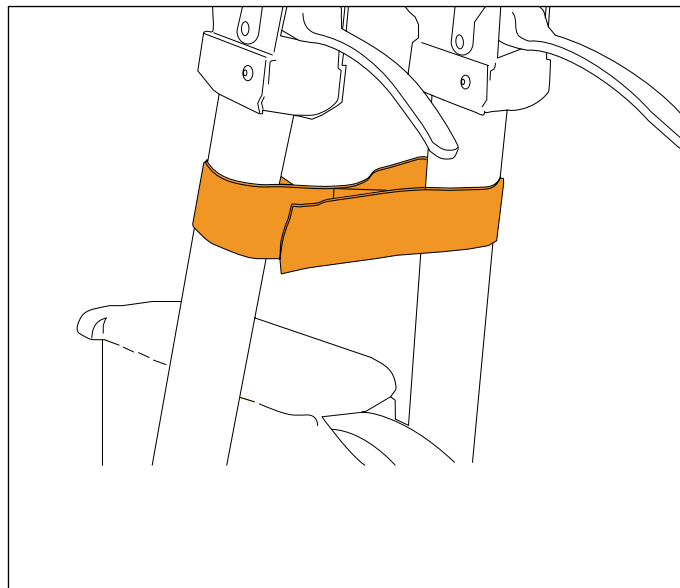


Stoffen tas

Een zachte stoffen tas van geweven nylon, die kan blijven zitten, ook als de rollator wordt ingeklapt. Eenvoudig af te nemen. Kan worden gewassen. Maximale belasting: 5 kg.

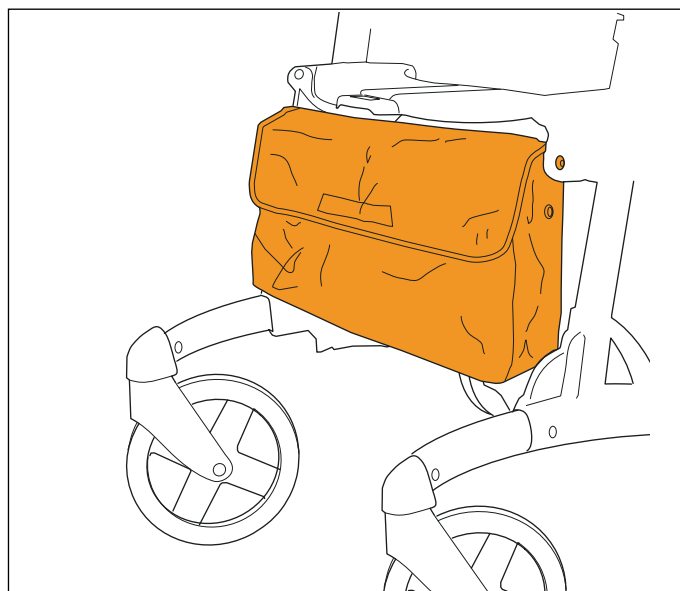

Gaasmand


Een stevige mand van metaalgaas. Eenvoudig aan de rollator te haken. Draaggreep. Maximale belasting: 5 kg.

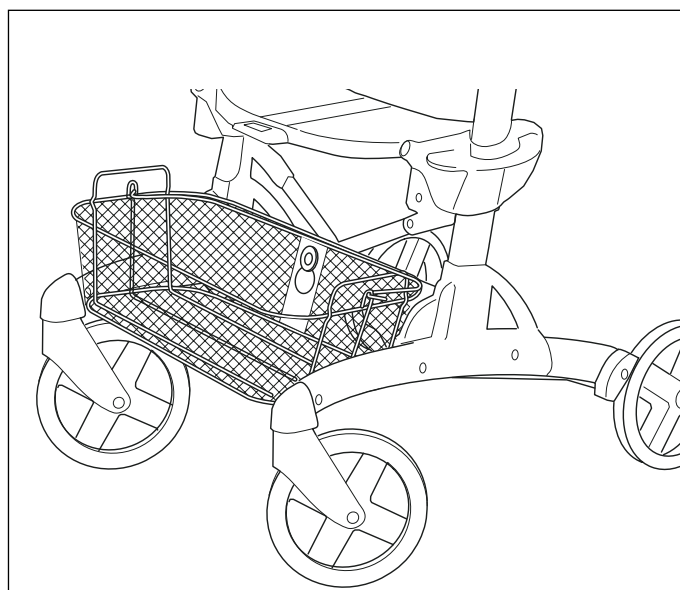

Accessoires voor uw comfort

Plaat


Plaat om over de zitting van de rollator te plaatsen.

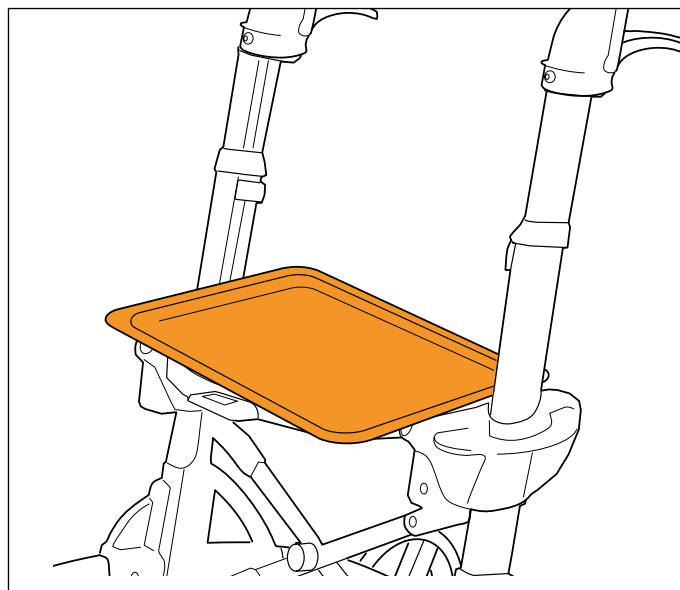

Stoffen mand


Mand gemaakt van kunststof zijstukken en textielgaas van nylon. De mand kan op alle Volaris-modellen worden aangebracht.

De stoffen mand kan blijven zitten, ook als de rollator wordt ingeklapt. Eenvoudig af te nemen. Maximale belasting: 5 kg.

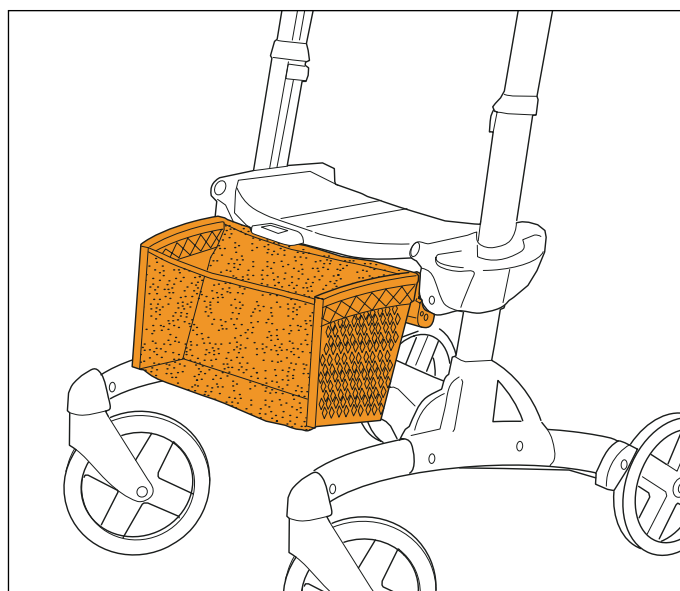


Zachte zitting


Drie delen die de zitting zachter en warmer maken. Kan blijven zitten als u de rollator inklappt.

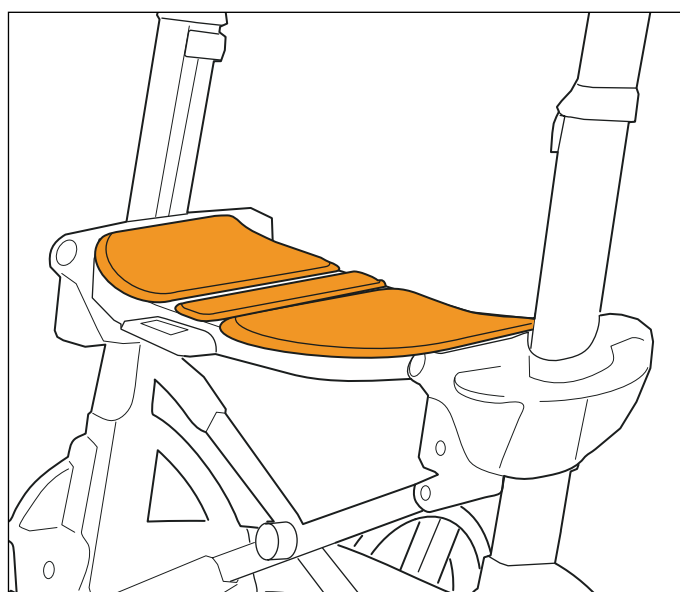

Technische gegevens

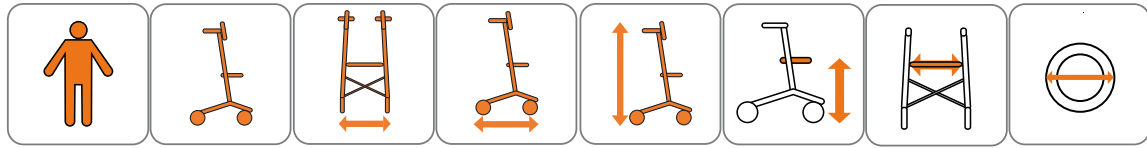

RA	125 kg	12 kg	65 cm	80 cm	100-125 cm	46-57 cm	47 cm	200x32 mm
RA low	125 kg	11,9 kg	65 cm	80 cm	88-114 cm	46-57 cm	47 cm	200x32 mm
RA Outdoor	135 kg	12,5 kg	65 cm	84 cm	88-116 cm	52-66 cm	47 cm	260x32 mm

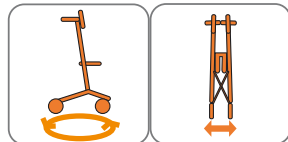

RA	92 cm	29 cm
RA low	92 cm	29 cm
RA Outdoor	99 cm	29 cm

Accessoires voor uw behoeften, veiligheid en comfort

	RA	RA low	RA Outdoor
Vertragsingsrem	x	x	x
Verlichting	x	x	x
Rugband			
Verstelbare rugband			
Houder voor zuurstoffles	x	x	x
Stokhouder	x	x	x
Flessenhouder	x	x	x
Paraplu/ parasol			
Transportband	x	x	x
Stoffen tas	x	x	x
Gaasmand	x	x	x
Plaat	x	x	x
Stoffen mand	x	x	x
Zachte zitting	x	x	x
Eenhandsrem	x	x	x
Infuushouder	x	x	x

Eurovema