


Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Käyttöohje

Tärkeää, lue hyvin ennen käyttöä!

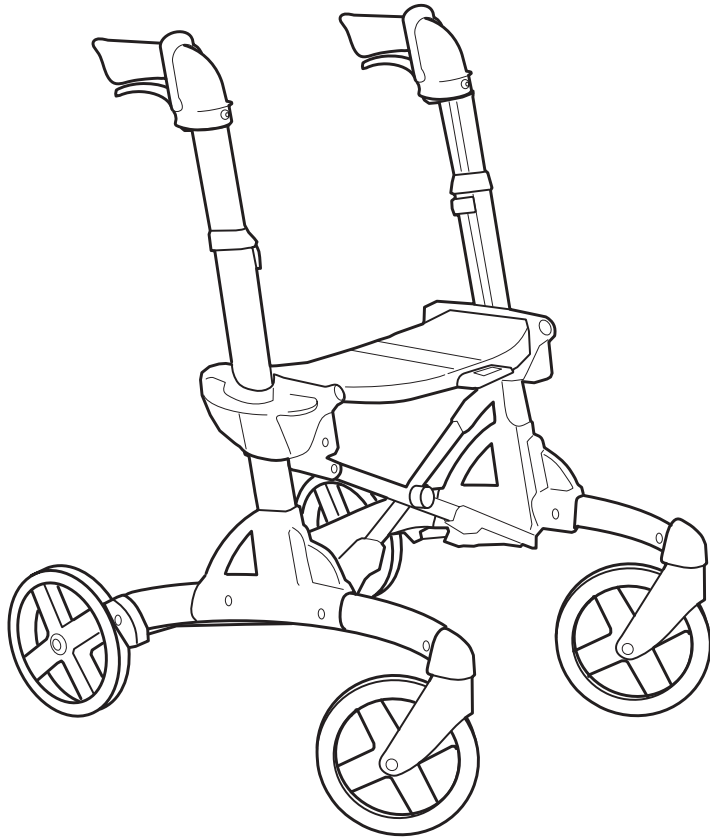

VOLARIS

COMPACT

Onnittelumme uuden rollaattorisi johdosta!

Jotta oppisit tuntemaan uuden rollaattorisi mahdollisimman hyvin, pyydämme sinua lukemaan huolellisesti tämän käyttöohjeen. Oikea käyttö ja hoito parantavat turvallisuutta ja pidentävät rollaattorin käyttöikä.

Volaris on vakaa ja helposti ohjattava rollaattori. Se on helppo taittaa kokoon, jolloin se vie vähemmän tilaa ja on helpompi kuljettaa. Tuote voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla henkilön tarpeiden mukaan.

Volaris-rollaattorit on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa, mikä takaa tuotteen toiminnan ja korkean laadun.

Käyttötarkoitus

Rollaattori tukee siirtymisiä ja sitä tulee käyttää vain kävelemisen tukena henkilöille, joiden liikkuminen on rajallista tai heikentynyttä. Tuotetta voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona.

Istuinta voidaan käyttää lepäämiseen, kun rollaattori on pysäytetyssä tilassa.

Volaris (mallit SMART, Discover ja Patrol) on tarkoitettu aikuisille henkilöille.

Muut kuin tässä käyttöoppaassa kuvatut toimenpiteet tai säädöt eivät ole sallittuja.

Käytön rajoitukset

Rollaattoria ei saa käyttää, jos henkilöllä ei ole voimia kävellä tai seistä rollaattorin tukemana.

Tuotetta ei saa käyttää, jos henkilön paino ylittää tuotteelle sallitun enimmäispainon.

Standardit

Volaris-rollaattorit (mallit SMART, Discover ja Patrol) täyttävät ruotsalaisen standardin SS-EN 11199-2:2021 (Kävelyn apuvälineet, joita käytetään molemmilla käsillä).

Volaris on CE-merkitty ja täyttää lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen MDR 2017/745 vaatimukset.

Takuu

Takuuaika on kaksi (2) vuotta ja takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Pyörien, jarrupalojen ja kahvojen kaltaisten kulutusosien takuu-aika on yksi (1) vuosi. Takuu edellyttää, että tuotetta on käytetty tarkoitetulla tavalla tämän käyttöohjeen mukaisesti. Odotettu käyttöikä on seitsemän (7) vuotta, kun ohjeitamme ja säännöllisiä huoltovälejä noudatetaan.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai apuvälinekeskukseen.



Eurovema Mobility AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved

Puhelin: 0371 39 01 00

Sähköposti: info@eurovema.se Webb: www.eurovema.se

Turvallisuusohjeet



Varoitus! Ole varovainen käsittelyssä, jotta vältät mahdolliset henkilövahingot.



Tärkeää! Lue ohjeet tuotteen vaurioitumisen välttämiseksi.



Symboli, joka ilmaisee seisontajarrun olevan lukittu.



Symboli, joka ilmaisee seisontajarrun olevan vapautettu.



Varoitus! Rollaattorin täytyy olla pysäköidyssä tilassa (seisontajarru päällä), kun laskeudut istumaan tai nouset ylös istumasta.



Varoitus! Älä koskaan työnnä rollaattoria niin, että joku toinen istuu istuimella.



Tärkeää! Istuimen on oltava vaakasuorassa eli kummankin sivun samalla korkeudella, kun rollaattori taitetaan kokoon.


Sisällysluettelo


Käyttötarkoitus	s. 2	Ajovinkejä – ”mukavuusrunko”	s. 8
Takuu	s. 2	Opettele ”saksaustekniikka”	s. 8
Standardit	s. 2	Huolto:	
Yhteystiedot	s. 2	Puhdistus	s. 9
Turvallisuusohjeet	s. 2	Kunnostus	s. 9
Sisältö	s. 3	Vaijerin voiteleminen	s. 9
Merkinnät	s. 3	Vianetsintä	s. 9
Istuimen korkeuden säätäminen	s. 4	Lisävarusteet	s. 10–13
Kahvojen korkeuden säätäminen	s. 4	Tekniset tiedot	s. 16
Rollaattorin avaaminen ja taittaminen kokoon	s. 5		
Kiinteä kuljetushihna	s. 5		
Jarruttaminen	s. 6		
Jarrujen säätäminen	s. 6		
Laahausjarrun säätäminen	s. 7		


Merkintä


XXX = Tuotenimi


XXXX-XX-X = Tuotenumero


 = Sarjanumero

 = Valmistaja/valmistuspäivä

 = CE-merkintä

 = Lääkinnällinen laite

 = Lue käyttöohje

 = Käyttäjän enimmäispaino

Tyypikilpi



Rollaattorin säätäminen


Istuimen korkeuden säätäminen

Säädä yksi puoli kerrallaan. Vedä istuimen alla oleva nappi ulos. Nosta tai laske istuin samalla halutulle korkeudelle. Varmista, että nappi lukittuu nakshtaen osoittaen, että istuin on lukittu. Tee samalla tavoin toisella puolella. Tarkasta ennen rollaattorin käyttöä, että istuin on suorassa. Paina istuimen keskilevyä alas.




Varoitus!

Älä koskaan työnnä rollaattoria niin, että joku toinen istuu istuimella.

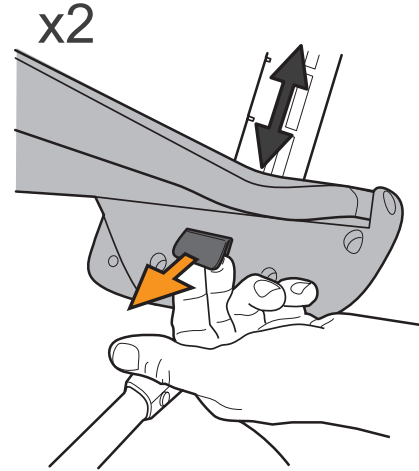

Kahvojen korkeuden säätäminen

Irrota mahdolliset peitelistat (katso sivu 9). Voit säätää kahvan korkeutta vetämällä nupin ulos, katso säätövälit sivulla 16. Varmista, että jarrusanka on pystyasennossa, säädä kahvan korkeus ja varmista, että nappi nakshtaakaan takaisin. Tarkasta jarrujen toiminta säätämisen jälkeen ennen rollaattorin käyttöä. Asetu pystyasentoon rollaattorin lähelle. Kahvat ovat oikealla korkeudella, kun ne ovat käsien korkeudella. Käytettyäsi rollaattoria hetken ajan huomaat itse haluatko säätää niitä enemmän. Rollaattorin käytön on tunnettava mukavalta. Kahvan maksimikorkeus on rajoitettu rajoittimella. Näkyvät reiät muodostavat merkityn korkeusvälin.

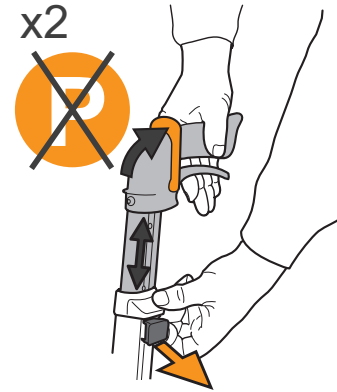

Kahvan korkeus

Älä kumarru eteenpäin rollaattoria käytettäessä, vaan pidä rollaattori vartalon lähellä, pidä selkä suorassa ja katse suunnattuna eteenpäin.

Ajovinkkejä


Mukavuusrunko

Volaris-rollaattori on varustettu Comfort Frame™ -mukavuusrungolla, jonka ansiosta se kulkee pehmeästi epätasaisuuksien yli. Kun sinun on ylitettävä suurempi este tai noustava jalkakäytävälle, voit käyttää apuna takapyörien "kallistuspäjä". Paina toista tappia samalla kun nostat kahvasta.



Varoitus!

Älä koskaan nosta istuimesta, kun haluat ylittää esteen, silloin rollaattori saattaa taittua kokoon!

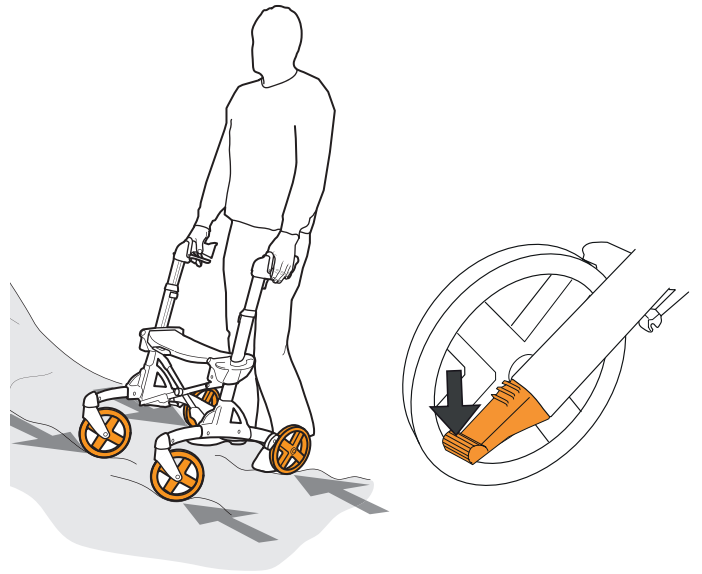

Opettele saksaustekniikka

Aja vinosti estettä kohti. Jarruta toista puolta. Kallista rollaattoria hieman taaksepäin niin, että etupyörät nousevat ja käännä etupyörät esteen päälle. Se sujuu helposti kun olet oppinut sen!




Varoitus!

Rollaattorin täytyy olla pysäköidyssä tilassa (seisontajarru päällä), kun laskeudut istumaan tai nouset ylös istumasta.



Varoitus!


Älä koskaan työnnä rollaattoria niin, että joku toinen istuu istuimella.

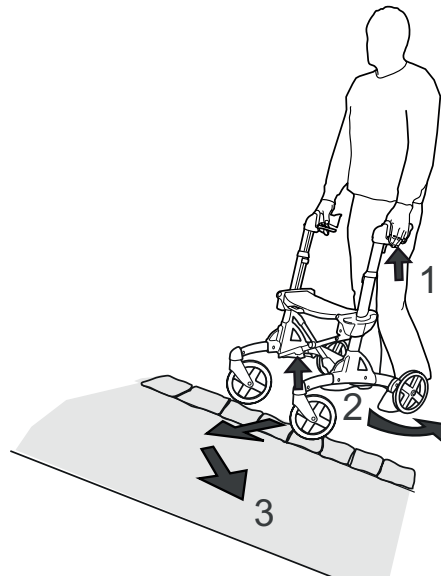

Rollaattorin avaaminen ja kokoontaittaminen

Rollaattorin avaaminen

1. Tartu yhdellä kädellä toiseen kahvaan ja kallista rollaattoria hieman samaan suuntaan niin, että pyörät nousevat muutamia senttejä.
2. Vedä ulospäin toisen puolen harmaasta nostokahvas- ta. Jousi auttaa rollaattorin avaamisessa.
3. Lukitse rollaattori painamalla istuimen keskilevyä alas.
4. Jos rollaattori on varustettu kaatumissuojalla, vedä nauhasta ja paina istuimen keskilevyä rollaattorin lukitsemiseksi.

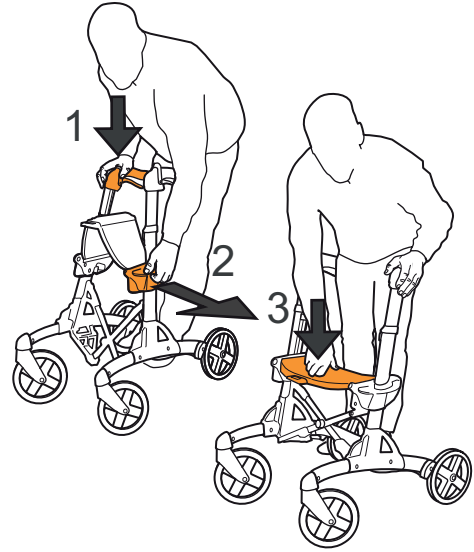

Rollaattorin kokoontaittaminen

Poista mahdollinen kori.


Jos rollaattori on varustettu kaatumissuojalla, vedä nauhasta ja nosta.

1. Vedä nauhasta.
2. Nosta nauhasta.
3. Paina Smart kokoon sivulla olevasta kahvasta.




Tärkeää!

Istuimen on oltava vaakasuorassa eli kummankin sivun samalla korkeudella, kun rollaattori taitetaan kokoon. Katso kuva nro 3

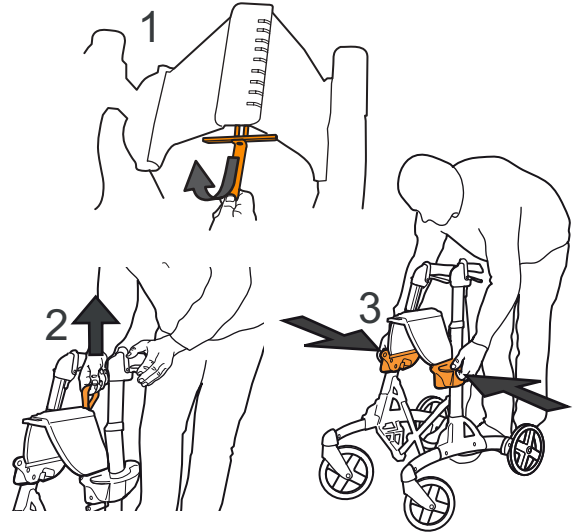

Kiinnitettävä kuljetushihna


Jos rollaattori on varustettu kiinnitettävällä kuljetushihnalla, laita kuljetushihna kiinni napilla rungon kokoontaittamisen jälkeen, silloin rollaattori voi pysyä kokoontaitettuna. Vapauta painonappi, ja rollaattorin voi levittää.

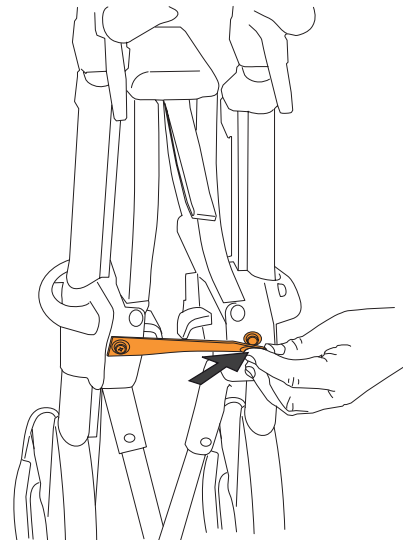

Jarruttaminen

Ajojarru

Ajojarru aktivoidaan nostamalla kahvan alla olevaa jarrukahvaa.

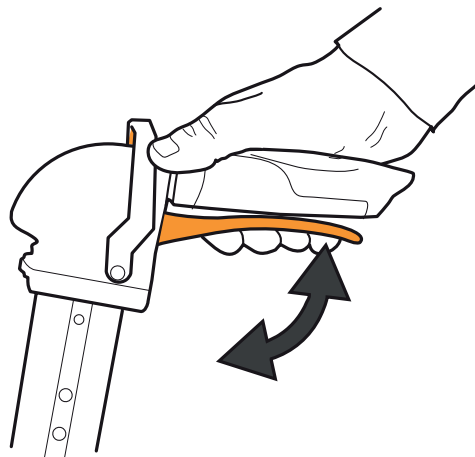


Seisontajarru

Seisontajarru aktivoidaan työntämällä jarrusankaa vaakasuuntaan, kunnes se osoittaa eteenpäin.


Seisontajarru ei saa olla kiristettynä jarrujen ja kahvan säädön aikana.

Jarrun on oltava päällä, kun istuimella istutaan.

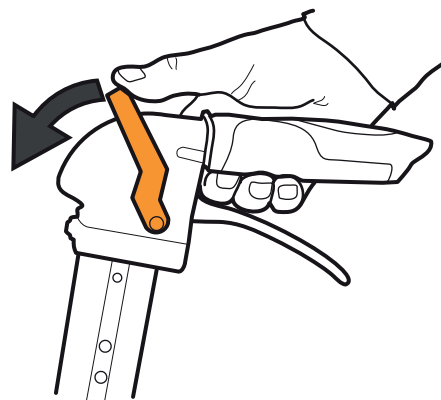

Seisontajarrun vapauttaminen


Seisontajarru vapautetaan nostamalla jarrusankaa ylös, kunnes kuuluu naksahdus.

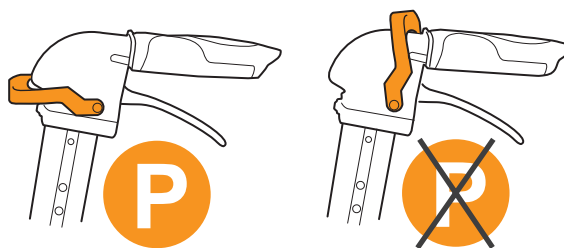

Säädä jarrut toimimaan oikein


Jarrutustehoa säädetään rungon alaosalla olevia vaijereita säätämällä.

1. Vapauta seisontajarru.
2. Löysää mutteria 8 mm kiintoavaimella ja kierrä kierretankoa.
3. Kierrä tankoa sisään, jos haluat suurentaa jarrutustehoa. Kierrä tankoa ulos, jos haluat pienentää jarrutustehoa.
4. Kiristä mutteri kiintoavaimella.
Säädä jarru niin, että jarrupala on mahdollisimman lähellä renkaan pintaa osumatta siihen. Jos kiristät jarrua liikaa, seisontajarrun kiristäminen on tarpeettoman raskasta.

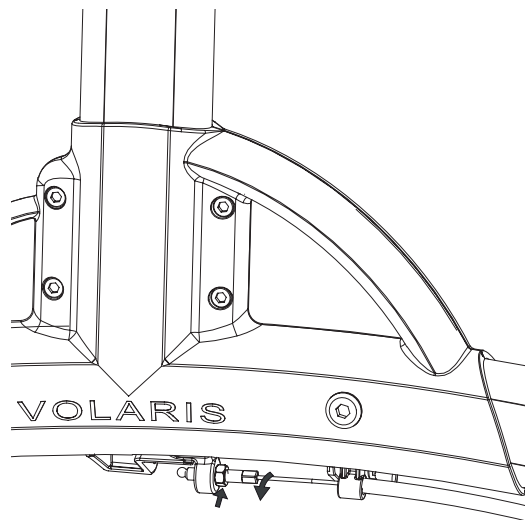

Laahausjarru

Laahausjarru säädetään nuppia kiertämällä.

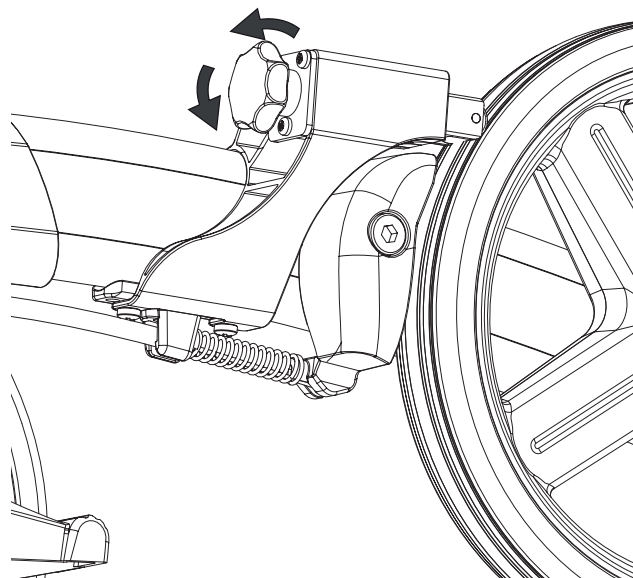


Huolto

Rollaattorien puhdistaminen

Hoida rollaattoriasi hyvin, niin se kestää kauemmin.

Pyyhi lika kostealla rievulla ja miedolla pesuaineella. Varmista, ettei lika keräänny pyörien ja jarrupalojen väliin. Rollaattorin voi pestä painepesurilla tai puutarhaletkulla. Pyyhi kuivaksi puhdistamisen jälkeen. Puhalla jäljelle jäänyt vesi pois paineilmalla.

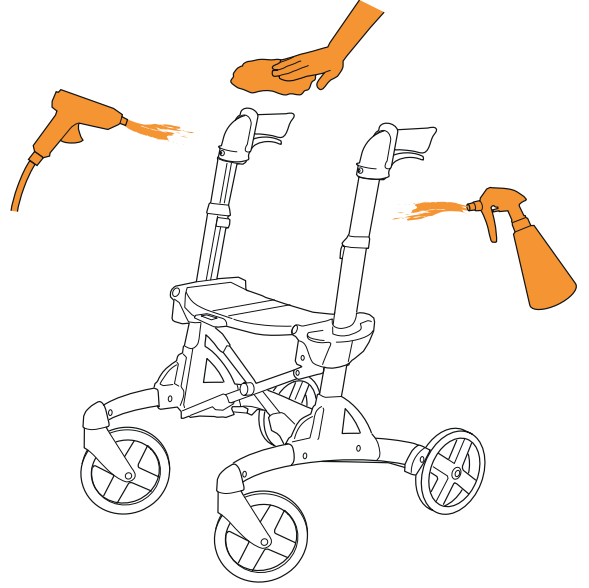


Kunnostus

Rollaattorin jarru ei saa olla päällä pesukoneella pestäessä. Anna rollaattorin jäähtyä huoneenlämpöön ennen kuin säädät rollaattoria ja otat sen käyttöön.

Vaijerin voiteleminen


Voitele jarruvaijeri rungon alta puhdistuksen jälkeen tiputtamalla muutama pisara öljyä vaijerille.

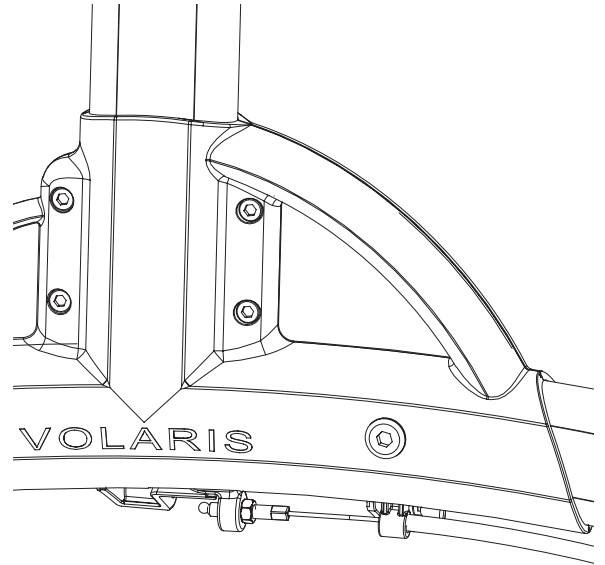

Vianetsintä

Jos rollaattori vetää toiselle puolelle käytön aikana, tarkasta, että renkaat pyörivät yhtä helposti ja että etuhaarukat pyörivät sujuvasti. Tarkista, että renkaat ja etuhaarukat on kunnolla kiinnitetty, ja tarkista, ettei renkaiden ja jarrupalojen välissä ole likaa tai roskia.


Jos jarrut eivät pidä lainkaan tai jarrut pitävät epätasaisesti, tarkista, että jarrupalan ja renkaan välissä on 1 mm välys molemmilla puolilla. Tarkista, että jarruvaijeri on kiinnitetty jarrupaloihin rungon alla ja takapyörän jarrupalan jousi on ehjä ja jarrutettaessa jarrupalat painavat pyörää yhtä paljon molemmilla puolilla. Säädä vaijeri.

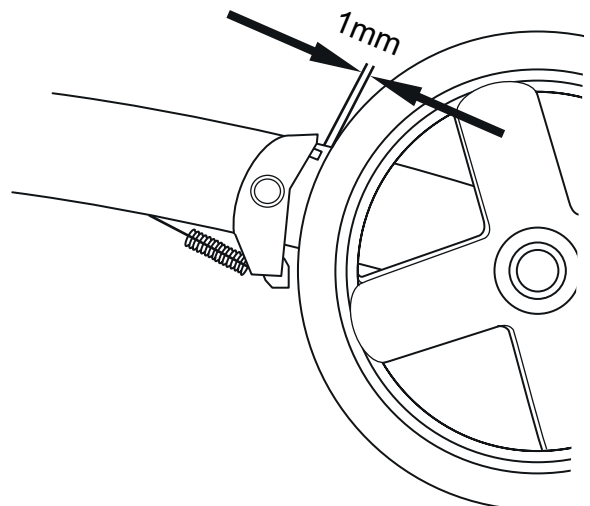

Lisävarusteet


Laahausjarru

Jarru säädettävällä jatkuvalla kitkalla.

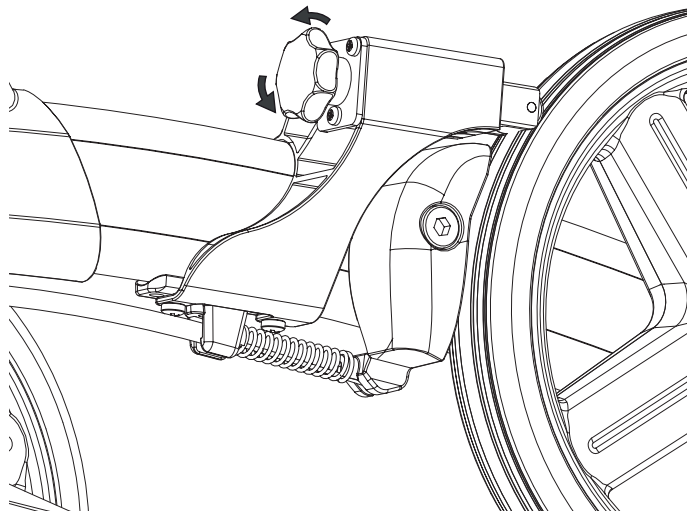


Peitelistat

Peitelistat varmistavat, ettei mitään tartu kiinni aukkoihin. Tulevat mukana ja asetetaan kaikkiin näkyviin reikiin. Sekä istuimen ylä- että alapuolelle.

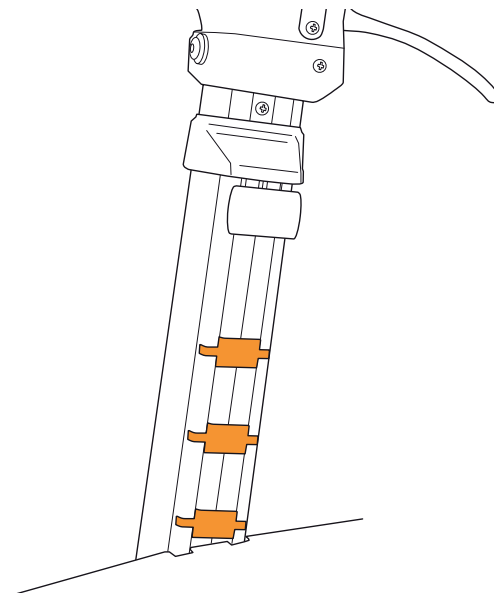

Selkänoja/Säädettävä selkänoja


Tukeva selkänoja, joka lisää turvallisuuden tuntua. Kiinnitetään kahdella ruuvilla valmiisiin kiinnikkeisiin.

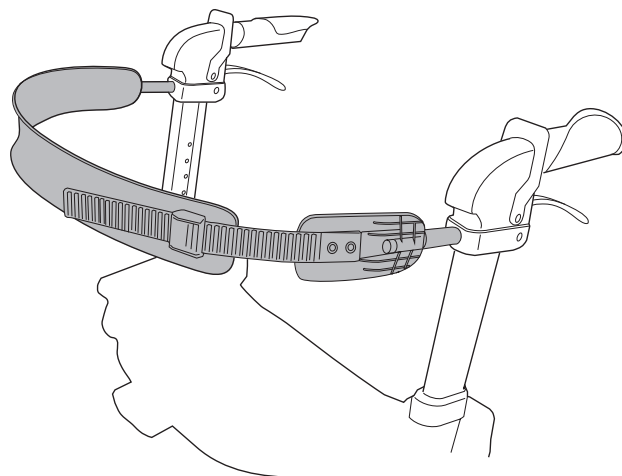

Lisävarusteet


Yhden käden jarru

Lukitsee molemmat takapyörät aktivoimalla joko ajo- tai seisontajarrun.

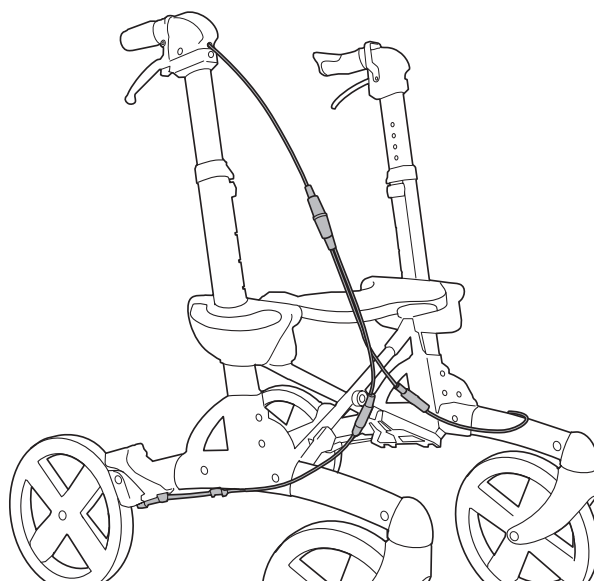


Happipulloteline

Tukeva teräskori, joka ripustetaan istuimeen, sekä kiinnike. Yksinkertainen irrottaa.

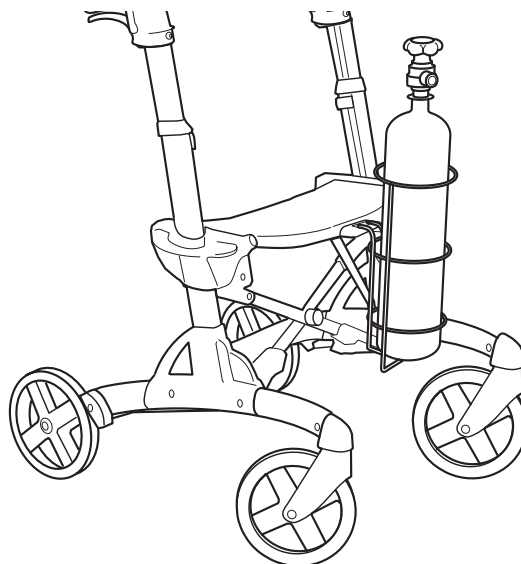

Keppiteline


Kaksi osaa, jotka kiinnitetään paikoilleen. Pitävät kepin, kyynärsauvan tai sateenvarjon paikallaan.

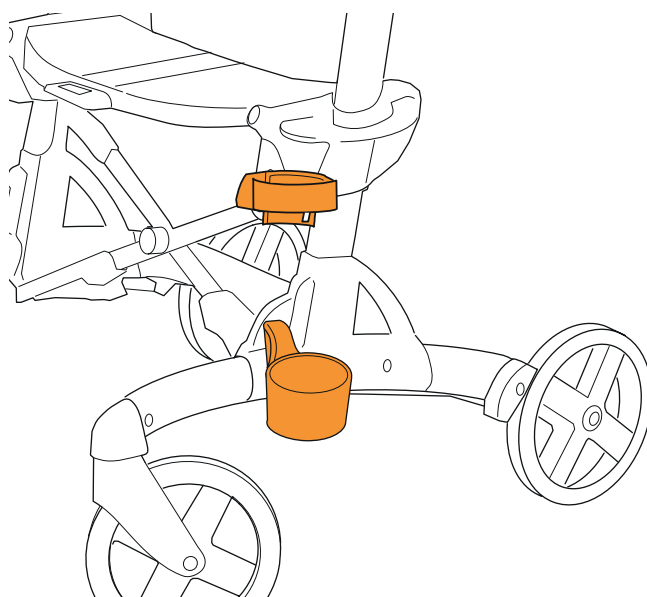

Lisävarusteet


Pulloteline

Muovitetusta teräslangasta valmistettu tölkki/purkkiteline.
0,5 l pulloille ja 33 cl tölkeille. Ripustetaan kahvaan.
Kantavuus: 0,6 kg.

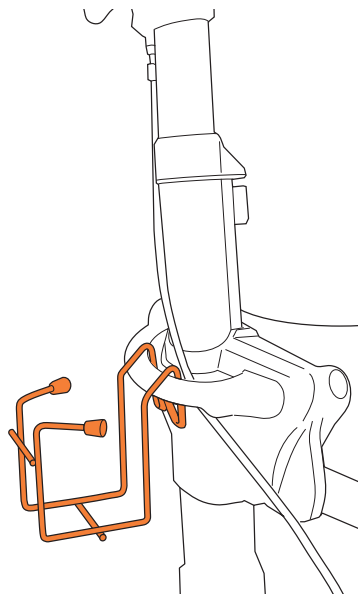


Kuljetushihna

Kuljetushihna kiinnitetään rollaattorin kahvojen ympärille,
jotta rollaattori pysyy kokoontaitettuna.
Helppo asentaa.

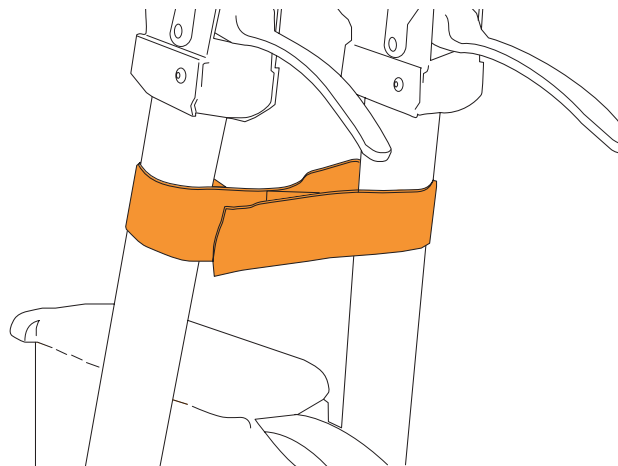

Tarjotin


Tarjotin asetetaan rollaattorin istuimen päälle.

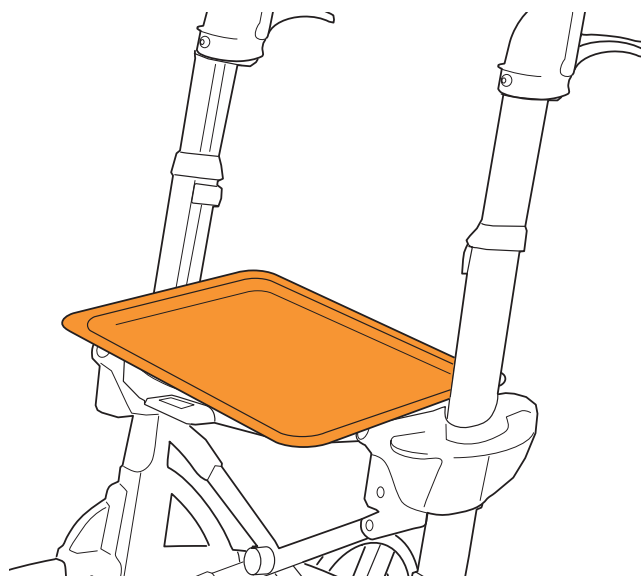

Lisävarusteet


Kangaskori

Muovipäädyistä ja tekstiiliverkosta valmistettu kori. Voidaan asentaa kaikkiin Volaris-malleihin. Kangaskorin voi jättää paikalleen, vaikka rollaattori taiteaan kokoon. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Kantavuus: 5 kg.

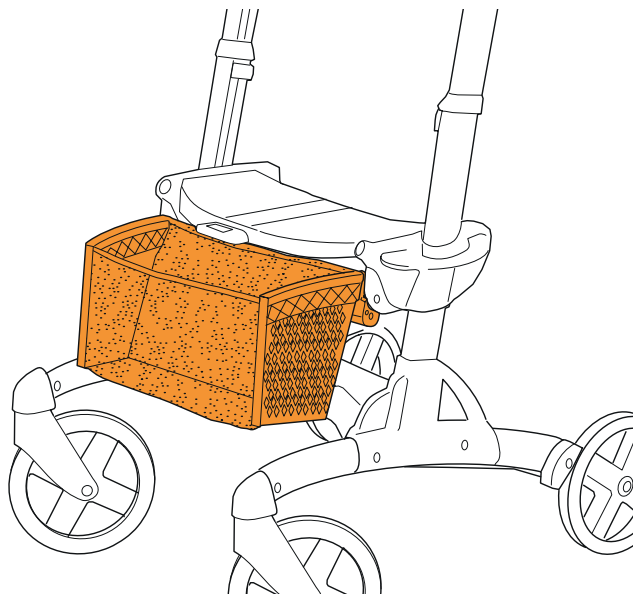


Istuinpehmuste

Kolmiosainen istuinpehmuste, joka tekee istuimesta pehmeämmän ja lämpimämmän. Voidaan jättää paikalleen, kun rollaattori taitetaan kokoon.

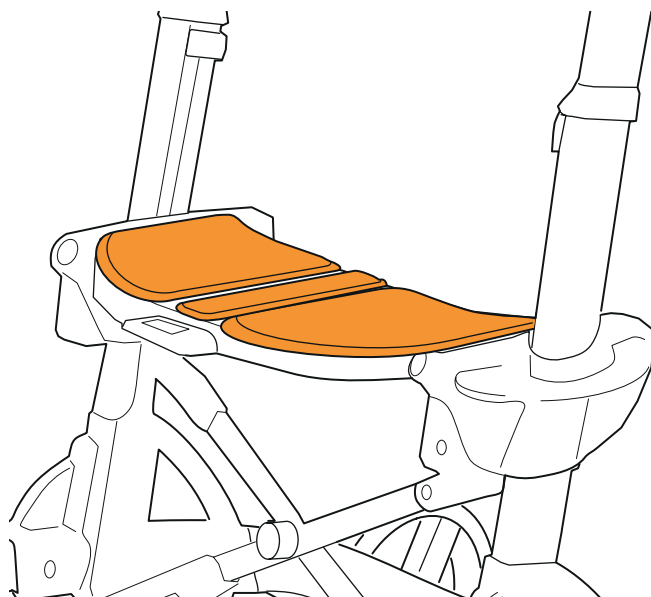


Valaistus

Kiinnitetään runkoon tarranauhalla. Punainen valo taaksepäin, valkoinen valo eteenpäin. Paristokäyttöinen laite on helppo asentaa ja helppo vaihtaa paristo.

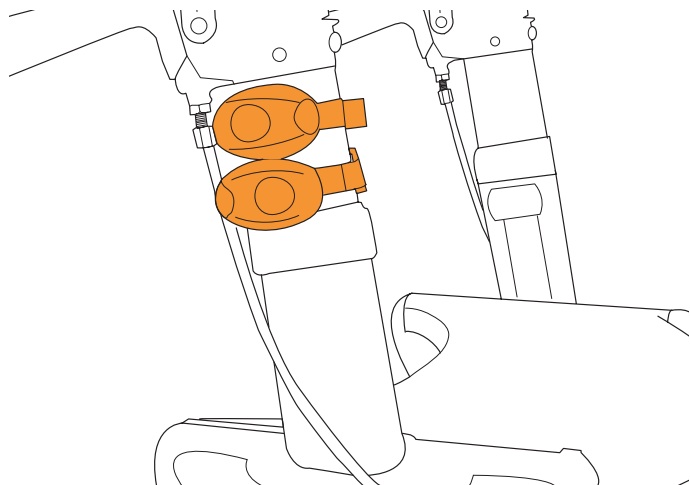

Tekniset tiedot

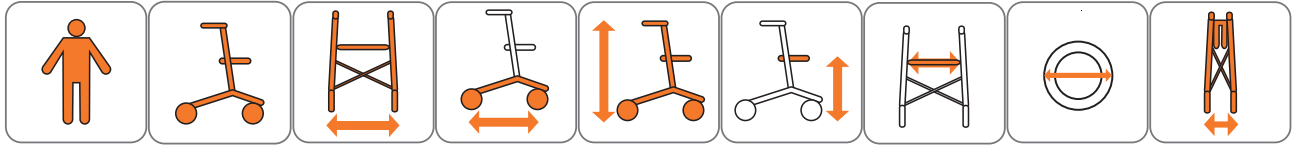

Compact	140 kg	6,8 kg	53 cm	62 cm	73-88 cm	43-57 cm	36 cm	150x32 mm	27 cm
Compact Low	140 kg	6,8 kg	53 cm	62 cm	63-79 cm	43-47 cm	36 cm	150x32 mm	27 cm

Lisävarusteet

	Compact
Laahausjarrut	x
Valot	x
Selkänoja	x
Säädettävä selkänoja	x
Teline	
happipullolle	x
Keppiteline	x
Pulloteline	x
Kuljetushihna	x
Kangaskori	x
Tarjotin	x
Kangaskori	x
Istuinpehmuste	x
Yhden käden jarrut	x

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Baldersvägen 38 | SE-332 35 Gislaved | Ruotsi
Tel. +46 (0)371 390 100 | www.eurovema.se | info@eurovema.se