

# Mode d'emploi Français

---

## **EUROFLEX<sup>®</sup>**

### Chaise de travail



**Euro**vema

Table des matières	
INTRODUCTION .....	4
COORDONNÉES .....	4
INFORMATIONS SUR L' UTILISATION .....	4
SERVICE ET GARANTIE .....	4
ASSEMBLAGE À LA LIVRAISON .....	5
CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....	5
LISTE DES SYMBOLES .....	6
ATTENTION ! .....	7
DÉCLARATION D' UN ACCIDENT OU D' UN INCIDENT .....	8
NETTOYAGE .....	8
STOCKAGE .....	8
ÉTIQUETTE PRINCIPALE .....	9
ÉTIQUETTE SECONDAIRE .....	9
MARQUAGE CE .....	9
MARQUAGE DES PRODUITS .....	10
APERÇU DE LA CHAISE .....	11
APERÇU DU CHÂSSIS .....	12
HAUTEUR DU DOSSIER .....	13
Soutiens latéraux LS Dos .....	13
INCLINAISON DU DOSSIER - DOSSIER MANUEL .....	14
INCLINAISON DU DOSSIER - DOSSIER ÉLECTRIQUE .....	15
DOSSIER - PROFONDEUR DE L' ASSISE .....	16
INCLINAISON DE L' ASSISE .....	17
INCLINAISON DE L' ASSISE .....	18
ACCOUDOIRS - RÉGLAGES .....	19
FIXATION D' INCLINAISON D' ACCOUDOIR .....	19
ACCOUDOIRS RABATTABLES - RÉGLAGE .....	20
HAUTEUR DE L' ASSISE MANUELLE .....	21
Hauteur d' assise combinée avec une rotation de l' assise .....	21
HAUTEUR D' ASSISE ÉLECTRIQUE .....	22
ROTATION D' ASSISE .....	23
HAUTEUR DE REPOSE-PIEDS .....	23
REPOSE-JAMBES - INCLINAISON MAX. DU REPOSE-PIEDS .....	25
INCLINAISON DU REPOSE-PIEDS .....	26
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS DOUBLE .....	27

INCLINAISON DU REPOSE-JAMBES DOUBLE.....	28
REPOSE-PIEDS DOUBLE INCLINAISON DES PIEDS.....	29
ARCEAU DE PIEDS.....	30
FREIN MONTÉ SUR LE CHÂSSIS.....	31
CHARGE - GÉNÉRALITÉS .....	32
CHARGEUR.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
EMPLACEMENT DE LA BATTERIE .....	33
FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE.....	34
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE.....	34
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLECTRONIQUE.....	35
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES.....	36
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHÂSSIS.....	36
INFORMATIONS TECHNIQUES ÉLECTRONIQUE.....	36
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ASSISE, DOSSIER ET ACCOUDOIRS .....	37
LISTE DES ACCESSOIRES.....	38
ÉLIMINATION.....	39

## INTRODUCTION

Votre choix s'est porté sur la chaise de travail. Félicitations ! Nous espérons que ce produit Euroflex d'Eurovema, conçu et fabriqué à Gislaved, en Suède, vous donnera entière satisfaction. La chaise de travail est conçue pour répondre à des exigences très strictes en matière d'ergonomie, de confort d'assise et de fonction. Elle dispose d'une foule d'options de réglage pour être adaptée à chaque besoin. Lisez attentivement le mode d'emploi pour profiter pleinement de toutes les possibilités qu'offre le siège. Eurovema se réserve le droit d'apporter des modifications au présent manuel et à son contenu.

## COORDONNÉES

### Fabricant



Eurovema Mobility AB  
Baldersvägen 38  
SE-332 35 Gislaved, Suède  
Téléphone +46 371 390 100  
<http://www.eurovema.se>  
[info@eurovema.se](mailto:info@eurovema.se)

## INFORMATIONS SUR L'UTILISATION

- La chaise de travail est répertoriée comme un dispositif médical de classe 1.
- Le produit est destiné aux personnes qui ont besoin d'une aide pour se déplacer et effectuer des travaux en position assise, et qui ont besoin de soutien pour se lever de la chaise.
- Le produit est uniquement destiné à un usage en intérieur.
- Il n'y a pas de contre-indications connues.
- Poids de l'utilisateur : 80-160 kg en fonction du système d'assise
- En cas d'adaptation pour des utilisateurs d'un poids supérieur, contactez Eurovema.
- Durée de vie escomptée de dix ans si le produit est utilisé conformément à son mode d'emploi.
- Le produit est développé et testé par Eurovema, et testé par des organismes de test indépendants. Eurovema est responsable de la sécurité d'utilisation du produit.



***Ce symbole met en garde contre des situations qui peuvent être dangereuses.***



***Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.***


## SERVICE ET GARANTIE

Si la chaise de travail est utilisée au quotidien, elle doit faire l'objet d'une inspection une fois par an afin de vérifier si le fonctionnement et la sécurité en sont garantis tout au long de sa durée de vie. La durée de vie escomptée est de 10 ans si le produit est utilisé conformément à nos instructions et à nos intervalles de maintenance, et s'il est utilisé correctement. Si vous avez besoin d'un entretien, prenez tout d'abord contact avec votre centre d'équipements local.

Nous fournissons une garantie de quatre ans sur les structures métalliques de nos produits, de 2 ans sur les autres pièces, à l'exception des housses, et de 1 an sur les roulettes et les batteries, sauf accord contraire. Une usure normale n'est pas prise en charge par la garantie. Nous recommandons à nos clients d'utiliser le produit conformément à son mode d'emploi. Pour les instructions relatives à la maintenance et à la remise en état, **voir le manuel de maintenance.**

## ASSEMBLAGE À LA LIVRAISON

- Ouvrez l’emballage et vérifiez qu’aucun dommage n’est survenu durant le transport. La chaise de travail est livrée avec le dossier et les accoudoirs rabattables non montés.
- Les accoudoirs fixes sont équipés de vis de blocage. Le dossier est équipé d’une boule de blocage qui doit être enfoncée durant l’assemblage et le démontage pour l’empêcher de se desserrer lors du réglage de la position finale.
- Assemblez le dossier et les accoudoirs conformément aux illustrations et serrez le bouton de verrouillage (1).
- Serrez les vis d’arrêt (2) à l’aide d’un tournevis cruciforme.

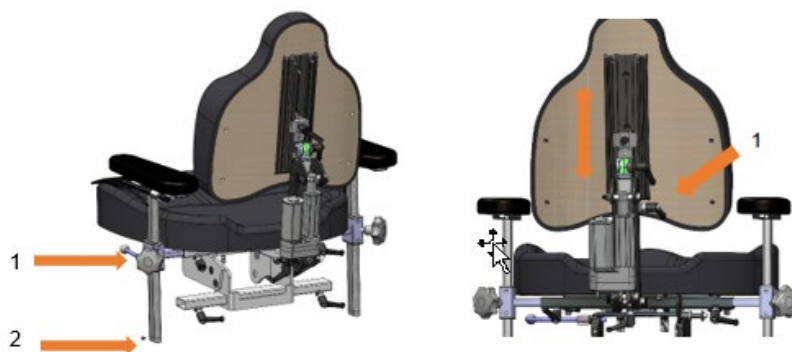

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la chaise.
- Inspectez la chaise visuellement tous les jours avant de l’utiliser.
- La chaise de travail est destinée à être utilisée sur une surface plane dans un climat intérieur normal.
- Soyez vigilant(e) au réglage de l’inclinaison d’assise manuelle si vous êtes assis(e) sur la chaise. Cela peut en effet induire un risque de chute de la chaise.
- Si des dommages ou des changements dans le fonctionnement de la chaise sont constatés, il convient de contacter le service de maintenance (fournisseur d’équipements) sans délai.
- Si la chaise est fréquemment utilisée, elle doit faire l’objet d’une inspection régulière par le service de maintenance.
- Veillez à bien serrer les boutons de verrouillage et les vis une fois l’ajustement effectué.
- Vérifiez si des vis ou des pièces présentent du jeu ou se desserrent, car cela pourrait compromettre la sécurité. Contactez le service de maintenance sans délai.
- L’entretien et la maintenance ne peuvent être effectués que par du personnel agréé d’Eurovema.
- Seules des pièces d’origine d’Eurovema doivent être utilisées.
- La chaise ne peut être équipée d’accessoires ou de composants autres que ceux approuvés par Eurovema.
- Ne pas dépasser le poids de l’utilisateur maximal spécifié.
- Vérifiez si les vis de blocage sont fixées aux accoudoirs et à la boule d’arrêt de la fixation du dossier, afin d’éviter qu’elles ne se détachent lors du réglage de la position finale.
- Les utilisateurs peuvent utiliser les fonctions mentionnées ci-dessous dans le présent manuel. L’utilisateur ne doit pas utiliser des fonctions qui ne figurent pas dans le présent manuel.
- Les utilisateurs ne doivent en aucun cas s’asseoir dans la chaise pendant la maintenance, sauf pour le remplacement des accoudoirs et des repose-jambes si l’on peut garantir que l’utilisateur ne tombera pas de la chaise.



**La chaise à inclinaison d’assise réglable doit être en position fixe et le frein doit être enclenché quand l’utilisateur s’assied ou se lève.**

## LISTE DES SYMBOLES

 Avertissement	 Veuillez lire le mode d'emploi.
 Attention : risque d'écrasement	 Inclinaison de l'assise
 Ne pas repasser	 Inclinaison de dossier
 Ne résiste pas à des liquides chimiques plus puissants que le perchloroéthylène.	 Hauteur du dossier
 Ne pas utiliser d'eau de Javel.	 Profondeur de l'assise
 Ne pas sécher au sèche-linge.	 Hauteur d'accoudoir
 Lavage en machine à 60°	 Bouton de commande de la fonction électrique
 Protégé contre l'humidité	 Prise de charge
 Manipuler avec précaution	 Entrée de commande
 Cette page au-dessus	 Safe Working Load
 Température autorisée	 Pièce appliquée de type B
 Humidité relative autorisée	
 Hauteur autorisée au-dessus du niveau de la mer	
 Date de fabrication	
 Fabricant	
 Uniquement destiné à un usage en intérieur	
 Poids maximal de l'utilisateur	
 Numéro de série	
 Le marquage CE indique la conformité à la réglementation européenne.	
 Les composants électriques sont destinés à un recyclage spécifique	
 Le produit fait partie intégrante d'un système de recyclage	
 Le poids des composants est supérieur à 10 kg	
 Cycle de fonctionnement	

## ATTENTION !



Tout produit présentant une détérioration ou des performances altérées doit être immédiatement mis hors service. Contactez le centre de maintenance (centre d'équipements) ou Eurovema Mobility AB sans délai. Ne pas mettre le produit en service avant de l'avoir fait examiner par un technicien agréé.



Le produit ne peut être chargé d'un poids supérieur au poids de l'utilisateur maximal spécifié, car cela pourrait endommager les composants et induire des accidents.



Veillez à ce que le frein de stationnement du produit soit activé lorsque vous vous asseyez et vous levez, car le produit risque de se mettre à rouler inopinément et de vous faire tomber.



Les modifications du dispositif ne peuvent être effectuées que par un technicien agréé, d'un commun accord avec le prescripteur. Si une adaptation individuelle est nécessaire, contactez le centre d'assistance ou Eurovema Mobility AB. Si le produit est modifié, le marquage CE n'est plus valable et Eurovema se décharge de toute responsabilité pour le produit. Les modifications effectuées par un technicien agréé en accord avec Eurovema peuvent maintenir le marquage CE.



Les réparations et le service technique ne peuvent être effectués que par du personnel agréé par Eurovema Mobility AB pour maintenir le marquage CE. Les réparations et l'entretien technique ne peuvent en aucun cas être réalisés avec l'utilisateur dans la chaise. Pour des instructions plus détaillées concernant l'entretien et la maintenance, voir les instructions de maintenance.



Le produit est destiné à être utilisé par la personne et dans le but pour lesquels il a été prescrit. Le produit est réglé pour cette personne et ces réglages ne peuvent en aucun cas être modifiés par une personne autre que le prescripteur du produit. Si un autre utilisateur doit le reprendre, le dispositif doit faire l'objet d'un nouveau test.



Dans certains cas, les produits équipés d'un élévateur d'assise électrique peuvent atteindre une hauteur d'assise supérieure à la hauteur à laquelle l'utilisateur peut atteindre le sol avec ses pieds, ce qui peut induire un risque de chute si l'utilisateur se lève de cette position. Veillez à ce que du personnel ou une autre personne se trouve à proximité si la hauteur de levage maximale est appliquée.



Les composants et les pièces doivent être assemblés conformément aux instructions d'installation afin de veiller à ce qu'ils ne se détachent pas. Tous les câbles doivent être fixés à l'aide de colliers de serrage.



Le produit ne peut être équipé de composants ou d'accessoires autres que ceux agréés par Eurovema Mobility AB pour maintenir le marquage CE.



Seuls les composants électriques prévus pour le produit peuvent être raccordés au système de commande du produit. Le raccordement des composants du système de commande doit être effectué par un technicien agréé.



Seuls les chargeurs et les batteries conçus pour le produit et fournis par Eurovema Mobility AB peuvent être utilisés pour conserver le marquage CE et la garantie.



Les téléphones portables et autres équipements de communication RF peuvent perturber tout produit à fonctions électriques.



Le produit est équipé de nombreuses petites pièces et vis qui, si elles sont desserrées, peuvent provoquer un étouffement chez les enfants et les animaux domestiques.



Dans certaines configurations, le produit est équipé de câbles et de fils qui ne peuvent pas être entièrement sécurisés en raison de leur fonction, ce qui peut présenter un risque d'étranglement.



Sur les produits équipés d'un frein électrique, il est important de ne pas décharger la batterie complètement : le frein électrique ne fonctionnerait pas. Et si le frein n'est pas enclenché, le produit peut se mettre à rouler au moment où vous vous asseyez ou vous levez, induisant ainsi un risque de chute.

## DÉCLARATION D'UN ACCIDENT OU D'UN INCIDENT

Les fabricants de dispositifs médicaux au sein de l'UE sont tenus de contrôler systématiquement les performances des dispositifs dans leur utilisation pratique. Le marquage CE a été précédé d'analyses de risques et des tests ont été réalisés pour réduire à un minimum et autant que possible les risques constatés. Toutefois, si des accidents et des incidents devaient survenir, ils doivent être déclarés à Eurovema Mobility AB et à l'autorité nationale compétente.

## NETTOYAGE

Essuyez les surfaces de la chaise de travail à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, comme du liquide vaisselle. Positionnez la chaise de façon à ce qu'elle soit stable et enclenchez le frein. La housse de l'assise peut être nettoyée avec les moyens disponibles sur le marché pour le lavage des tissus. Elle peut être lavée en machine à 60°.



**Veuillez noter que le nettoyage doit être effectué sur une surface ouverte et pas à proximité de flammes nues.**

## STOCKAGE


La chaise de travail doit être stockée dans un endroit sec et à température ambiante. Évitez d'exposer la chaise à une chaleur élevée, à un froid intense ou aux rayons directs du soleil. Les surfaces métalliques peuvent devenir très chaudes quand elles sont exposées au soleil. En cas de froid intense, la chaise doit atteindre la température ambiante avant utilisation. La chaise ne doit pas non plus être exposée à l'eau, à d'autres liquides ni à des produits chimiques.



## ÉTIQUETTE PRINCIPALE


L'étiquette du produit contient des informations importantes.

- 1) Nom du produit
- 2) Référence
- 3) Numéro de série et UDI-PI
- 4) Code-barres
- 5) Poids max. de l'utilisateur
- 6) Dispositif médical
- 7) Marquage CE
- 8) Lire le manuel avant utilisation.
- 9) Date de fabrication
- 10) Nom du fabricant
- 11) Pièce appliquée de type B

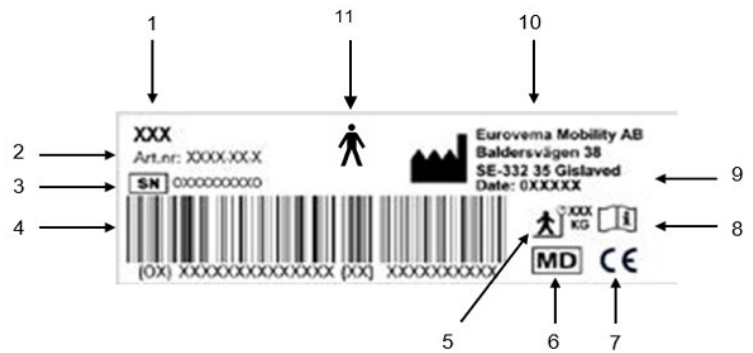

## ÉTIQUETTE SECONDAIRE

- 1) Pièce appliquée de type B
- 2) Fonction intermittente 2/18 min.
- 3) Température ambiante autorisée
- 4) Humidité relative autorisée
- 5) Uniquement destiné à un usage en intérieur
- 6) Hauteur autorisée au-dessus du niveau de la mer
- 7) Safe Working Load

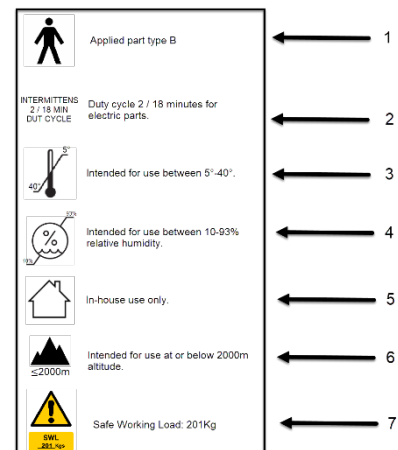

## MARQUAGE CE

Le produit porte le marquage CE conformément au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux. La marque CE se trouve sur l'étiquette. Le produit répond aux exigences conformément à la norme.

**EN1335-2:2018** Exigences de sécurité pour les chaises de travail

**EN 60601-1:2006** Appareils électromédicaux - Partie 1 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles.

**60601-1-2:2014** Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : perturbations électromagnétiques - Exigences et essais.

**EN 1021-2:2014** Ameublement. Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés. Source d'allumage : flamme équivalente à celle d'une allumette.

**SS-EN 1021-1:2014** Ameublement. Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés. Source d'allumage : cigarette en combustion

**SS-EN ISO 21856:2022** Produits d'assistance - Exigences générales et méthodes d'essai (ISO21856-2022)

**SS-EN ISO 14971:2020** Gestion des risques pour les dispositifs médicaux



## MARQUAGE DES PRODUITS



Les risques d'écrasement sont signalés dans les instructions relatives à chaque fonction si celle-ci peut induire un risque d'écrasement. Le marquage se trouve sur la chaise, là où il y a un risque d'écrasement.


## APERÇU DE LA CHAISE

- 1) Assise
  - a) SitRite
  - b) Forma
- 2) Dossier
  - a) SitRite
  - b) SitRite LS
  - c) Forma
- 3) Accoudoir
- 4) Châssis
- 5) Levier de frein
- 6) Élévateur d'assise gaz
- 7) Élévateur d'assise électrique
- 8) Arceau de pied

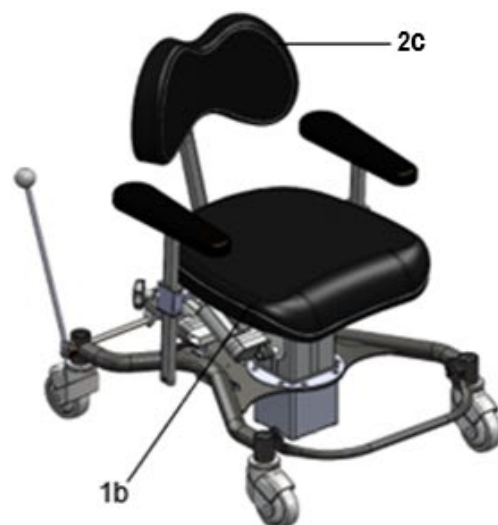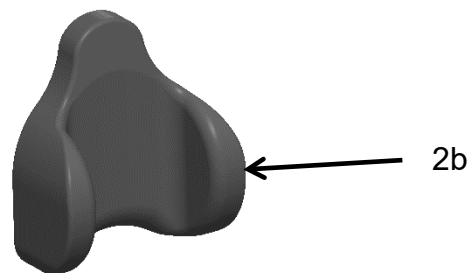

## APERÇU DU CHÂSSIS

- 1) Roulette avant
- 2) Arceau de pied
- 3) Levier de frein de stationnement
- 4) Châssis
- 5) Barre de frein
- 6) Roulette arrière
- 7) Fixation de la colonne de levage électrique
- 8) Fixation de l'élévateur d'assise gaz

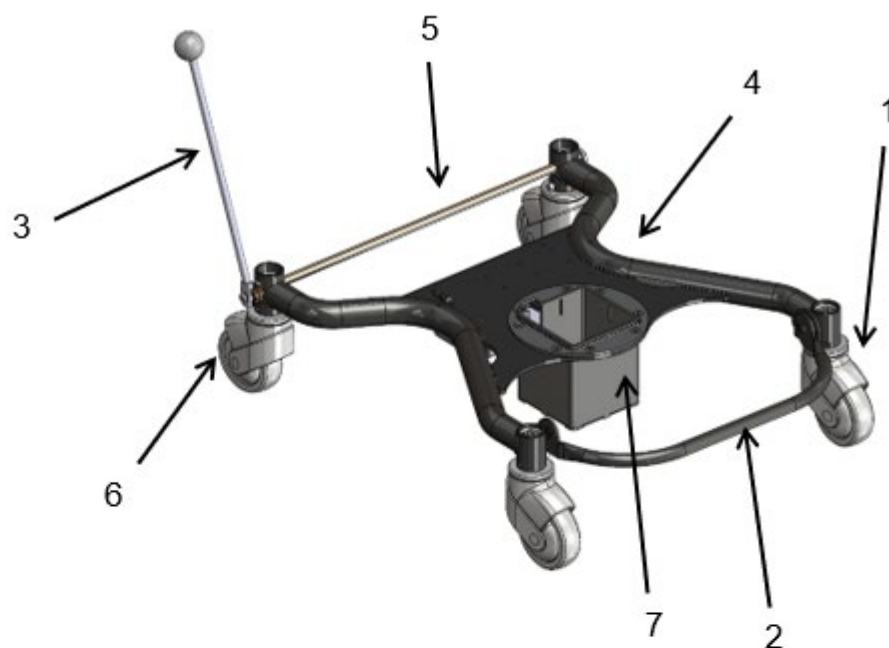


## HAUTEUR DU DOSSIER

Le dossier est réglable en hauteur à l'aide d'une vis et d'un levier.

- 1) Desserrez le levier en le tournant d' $\frac{1}{2}$  tour dans le sens antihoraire.
- 2) Réglez la hauteur souhaitée.
- 3) Serrez le dossier en le tournant d' $\frac{1}{2}$  tour dans le sens horaire.
- 4) Pour poursuivre le réglage de la hauteur, desserrez légèrement la vis de réglage.
- 5) Réglez la hauteur souhaitée.
- 6) Serrez la vis de réglage.


*La vis peut être remplacée par un bouton de verrouillage.*

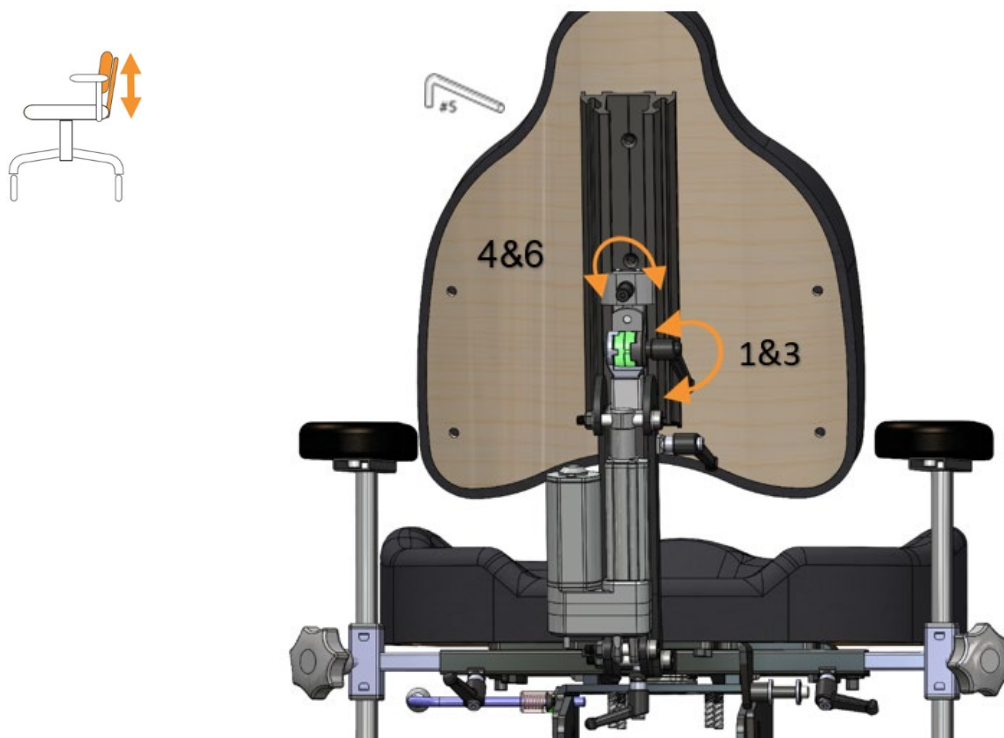

## Soutiens latéraux LS Dos

Les soutiens latéraux sont réglables horizontalement.

- 1) Desserrez les vis (1) de quelques tours à l'aide d'une clé Allen de 4 mm.
- 2) Ajustez à la largeur souhaitée.
- 3) Serrez les vis.

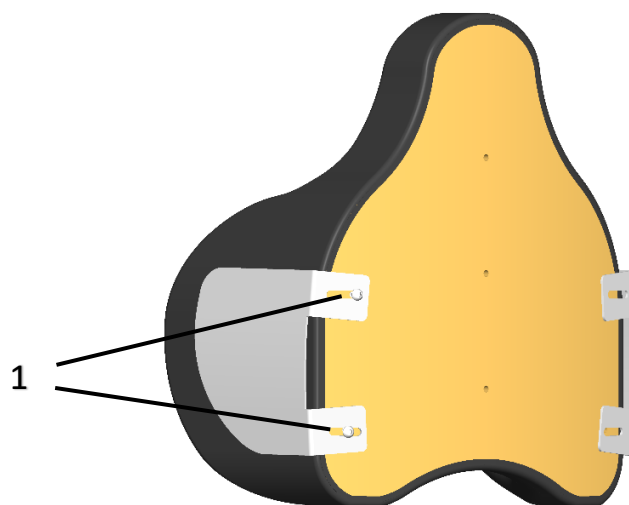

## INCLINAISON DU DOSSIER - DOSSIER MANUEL

### Inclinaison du dossier

L'inclinaison du dossier et le coussin du dossier sont réglables individuellement.

1) Desserrez la vis de sécurité et le levier permettant d'incliner l'ensemble du mécanisme du dossier vers l'avant ou vers l'arrière.

2) Réglez l'inclinaison du dossier souhaitée.

3) Serrez la vis de sécurité et le levier.

### Coussin du dossier


4) Desserrez le levier en le tournant d' $\frac{1}{2}$  tour dans le sens antihoraire.

5) Réglez l'inclinaison du coussin du dossier souhaitée.

6) Serrez le levier en le tournant d' $\frac{1}{2}$  tour dans le sens horaire.



*Le réglage peut induire un risque d'écrasement.*

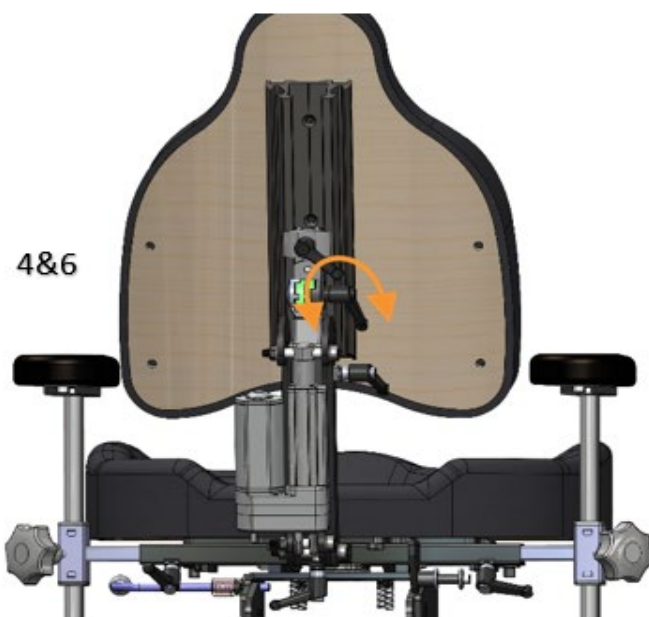

## INCLINAISON DU DOSSIER - DOSSIER ÉLECTRIQUE

Le mécanisme du dossier est réglable en inclinaison de façon électrique.




- 1) Pour une inclinaison vers l'arrière, déplacez la commande à bascule vers le haut.
- 2) Pour une inclinaison vers l'avant, déplacez la commande à bascule vers le bas.

Une commande manuelle, fonctionnant comme indiqué ci-dessous, est disponible en option.

L'inclinaison du dossier peut être limitée de façon électronique.



***Ne pas régler l'inclinaison du dossier à proximité immédiate d'une autre personne.***

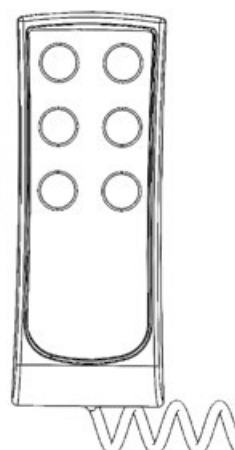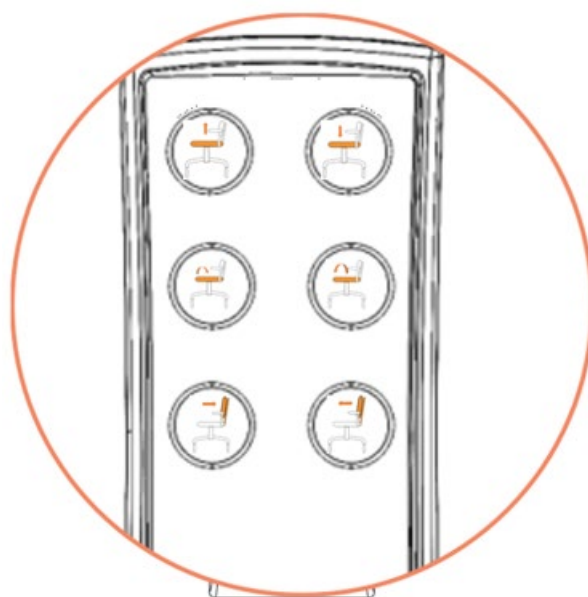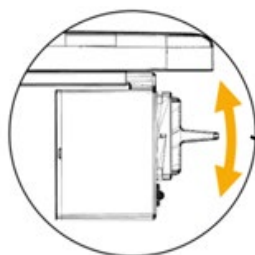



## DOSSIER - PROFONDEUR DE L'ASSISE

La profondeur de l'assise est réglable à l'aide du dossier. Réglez la profondeur d'assise souhaitée en déplaçant le dossier vers l'avant ou vers l'arrière. L'ajustement précis peut également être effectué à l'aide de l'inclinaison du dossier.

- 1)** Desserrez le levier de verrouillage ou la vis sous l'assise à l'arrière.
- 2)** Faites glisser le mécanisme de dossier vers l'intérieur ou l'extérieur jusqu'à la profondeur d'assise souhaitée.
- 3)** Serrer le levier de verrouillage/la vis.
- 4)** Pour un réglage précis à l'aide de l'inclinaison du dossier, voir le chapitre précédent Inclinaison du dossier.





## INCLINAISON DE L'ASSISE

L'inclinaison de l'assise est réglable, d'autres mécanismes d'inclinaison sont disponibles :


1. Ridoir
2. Bielle
3. Vérin à gaz
4. Inclinaison électrique.

1) Le **ridoir** se règle à l'aide d'une clé de 17 mm.

2) L'**inclinaison à bielle** se règle en tournant le bouton.



*Le réglage de l'inclinaison de l'assise peut induire un risque d'écrasement. Ne procédez donc pas à ce réglage à proximité immédiate d'enfants ou d'animaux domestiques.*

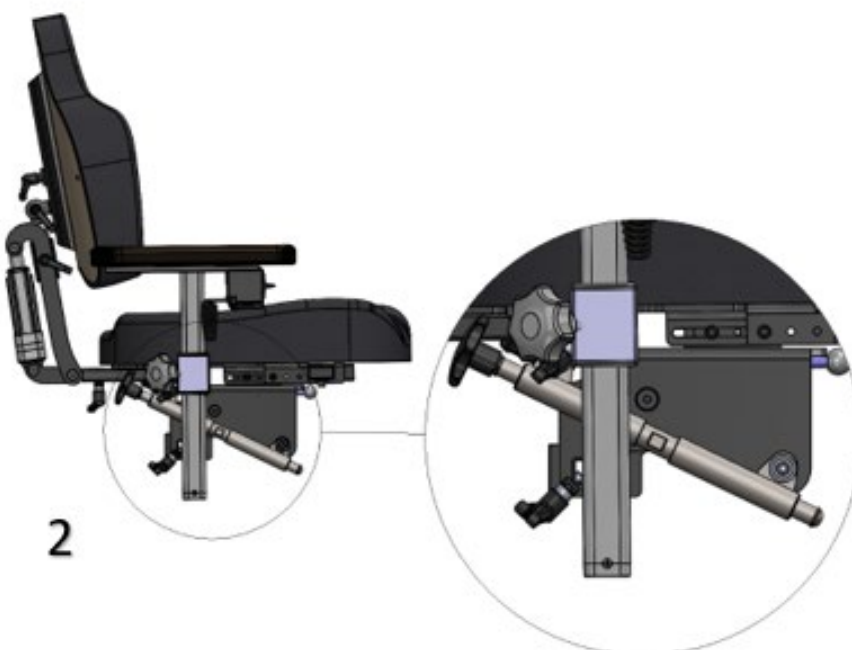

## INCLINAISON DE L'ASSISE

**3) L'inclinaison de l'assise au gaz** se règle par des commandes situées sous le coussin de l'accoudoir. La commande peut être déplacée de droite à gauche. Pour régler l'inclinaison de l'assise, poussez la commande vers le haut contre le coussin de l'accoudoir et relâchez-la quand l'inclinaison souhaitée est atteinte.

**4) L'inclinaison de l'assise électrique** se règle à l'aide d'une commande à bascule située sous l'accoudoir ou à l'aide d'une commande manuelle, voir les chapitres Inclinaison du dossier - Dossier électrique et Hauteur de l'assise électrique. L'inclinaison de l'assise électrique peut être limitée de façon électronique.



***Le réglage de l'inclinaison de l'assise peut induire un risque d'écrasement. Ne procédez donc pas à ce réglage à proximité immédiate d'enfants ou d'animaux domestiques.***




## ACCOUDOIRS - RÉGLAGES

- 1) Pour le réglage de la hauteur, desserrez le bouton **1** de quelques tours dans le sens horaire et réglez la hauteur souhaitée.
- 2) Serrez le bouton.
- 3) Desserrez le levier **2** d'un ½ tour dans le sens horaire pour ajuster la largeur souhaitée.
- 4) Serrez le levier.



## FIXATION D'INCLINAISON D'ACCOUDOIR

Les accoudoirs peuvent être montés dans une position qui ne suit pas à l'inclinaison de l'assise si l'assise est complétée par un support pour accoudoirs à inclinaison fixe. Pour ajuster la largeur et la hauteur, voir l'illustration ci-dessus.

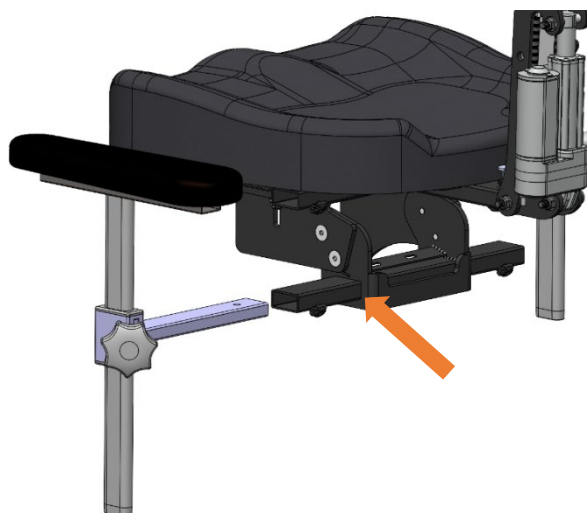


## ACCOUDOIRS RABATTABLES - RÉGLAGE

L'accoudoir peut être rabattu vers l'arrière en tirant la commande à ressort 1 vers le haut et en rabattant simultanément l'accoudoir vers l'arrière.

- 1) Le réglage en hauteur de l'accoudoir se fait en desserrant le levier ou la vis d'½ tour. Si l'accoudoir est équipé d'une vis, utilisez une clé Allen n° 5.
- 2) Serrez le levier ou la vis une fois la hauteur souhaitée atteinte.
- 3) Pour un réglage de précision, voir le chapitre précédent.



***Veillez à ce que personne ne soit coincé une fois l'accoudoir rabattu.***

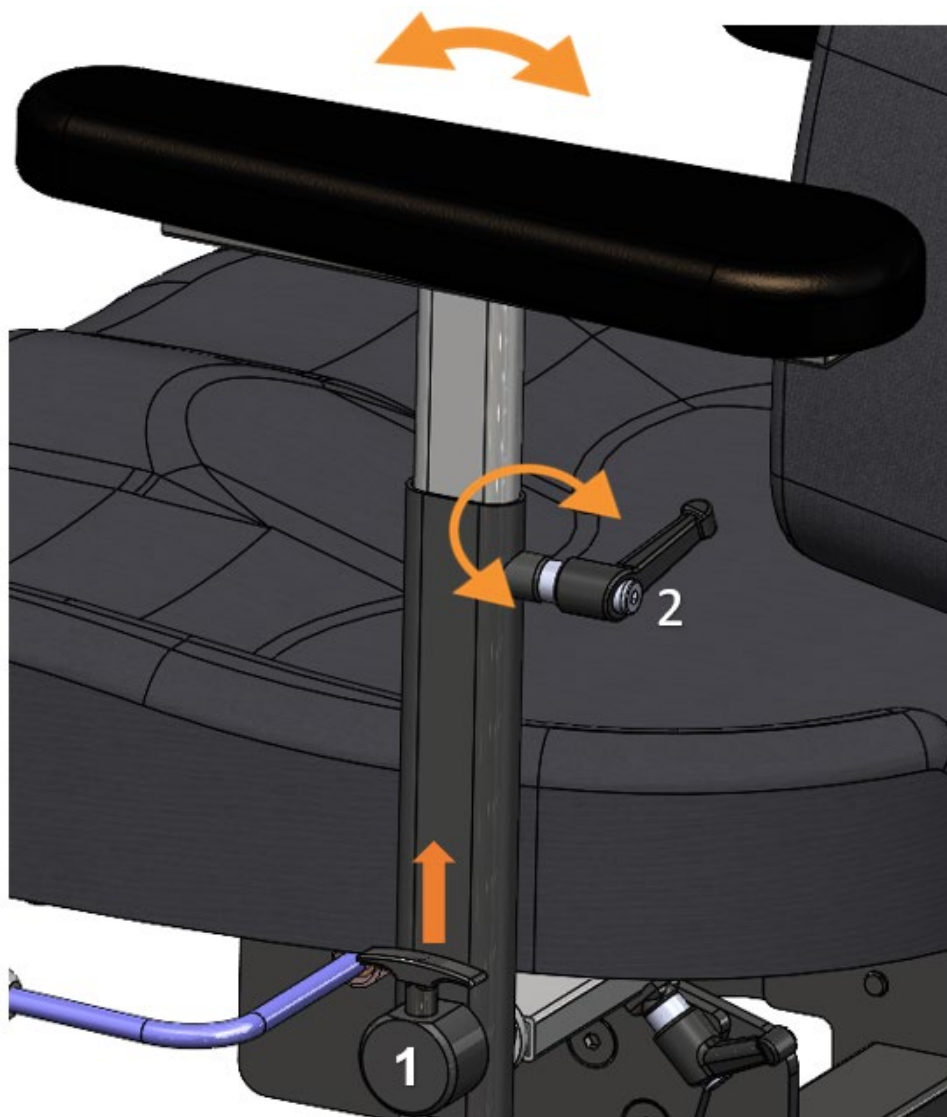

## HAUTEUR DE L'ASSISE MANUELLE

- 1) Le levage ou l'abaissement de l'assise se fait en déplaçant la commande située sous l'accoudoir (2) vers le haut ; pour l'abaisser, alourdissez l'assise par le poids du corps tout en maintenant la commande en position haute.
- 2) Une fois la hauteur souhaitée atteinte, relâchez la commande.




***À l'abaissement, veillez à ce que personne ne soit coincé. Dans le cas où la chaise se trouve sous une table, le levage peut induire l'écrasement des mains et des jambes.***



## Hauteur d'assise combinée avec une rotation de l'assise

Sur les chaises équipées d'une rotation de l'assise, la commande de la hauteur d'assise est située sous l'assise (1).

- 1) Tournez le levier vers le haut pour activer l'élèveur d'assise.
- 2) Relâchez le levier quand l'assise est à la hauteur souhaitée.

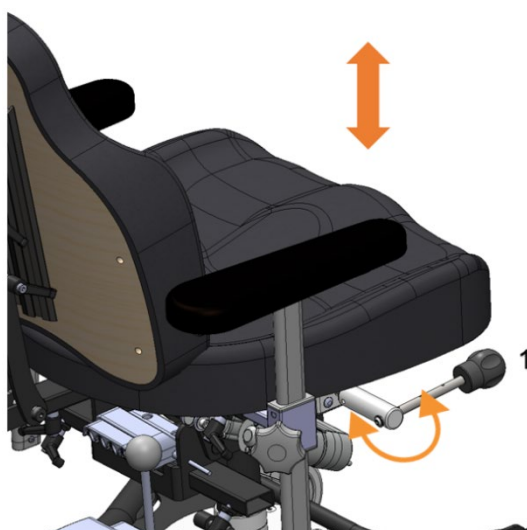


## HAUTEUR D'ASSISE ÉLECTRIQUE

La hauteur d'assise est réglée de façon électrique à l'aide de l'interrupteur à bascule situé sous l'accoudoir. Tirez l'interrupteur à bascule vers le haut pour élever l'assise et poussez-le vers le bas pour l'abaisser.

Une commande manuelle est également disponible en option, dont les fonctions sont illustrées ci-dessous.



***À l'abaissement, veillez à ce que personne ne soit coincé. Dans le cas où la chaise se trouve sous une table, le levage peut induire l'écrasement des mains et des jambes.***

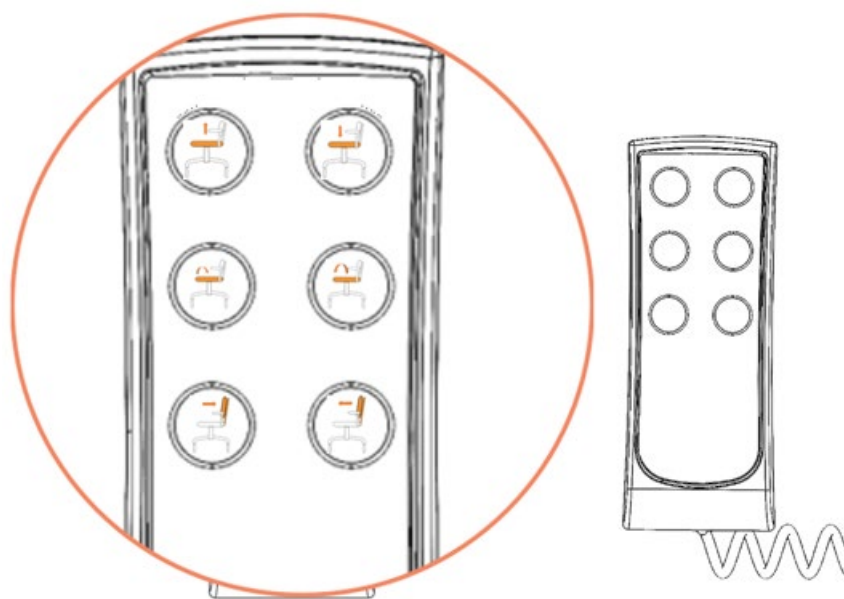

## ROTATION D'ASSISE

La rotation d'assise est disponible en option. Elle permet de faire pivoter l'assise sur 90° dans les deux sens. Pour faire pivoter la chaise, enclenchez le frein de la chaise et déplacez la commande vers le haut tout en tournant l'assise. Vous pouvez lâcher la commande dès que vous commencez à tourner. Elle revient à sa position initiale une fois que l'assise atteint 90°.






## HAUTEUR DE REPOSE-PIEDS

- 1) Desserrez la vis de sécurité 1 de quelques tours avec une clé Allen n°5
- 2) Desserrez la vis 2 de quelques tours et réglez à la hauteur désirée.
- 3) Serrer la vis 2 et la vis de sécurité 1.



***Ne pas monter sur le repose-pieds : la chaise basculerait vers l'avant..***

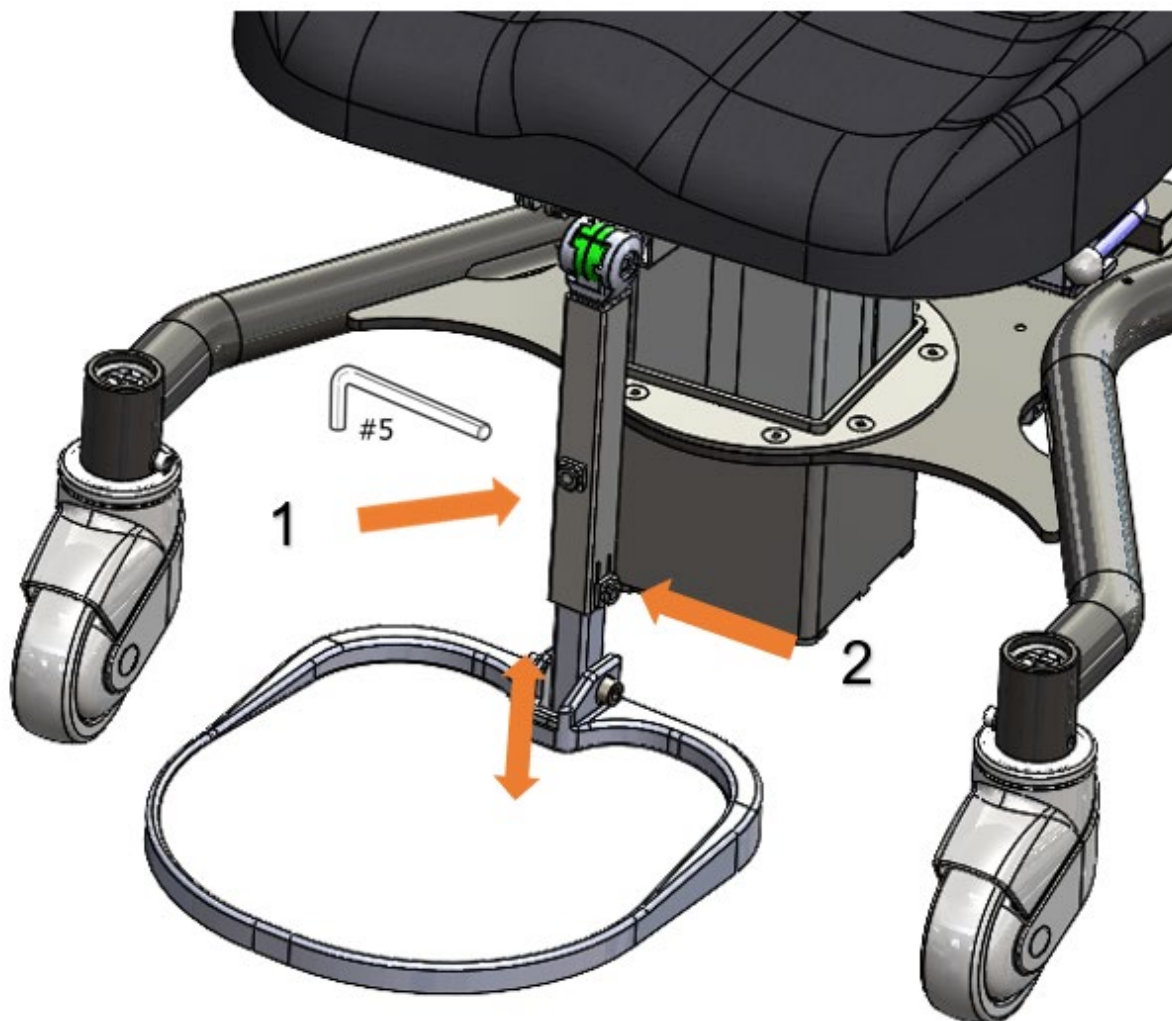




## REPOSE-JAMBES - INCLINAISON MAX. DU REPOSE-PIEDS

- 1) Desserrez la vis **1** de quelques tours à l'aide d'une clé Allen n°5.
- 2) Réglez l'inclinaison souhaitée.
- 3) Serrez la vis.



***Ne pas monter sur le repose-pieds : la chaise basculerait vers l'avant***

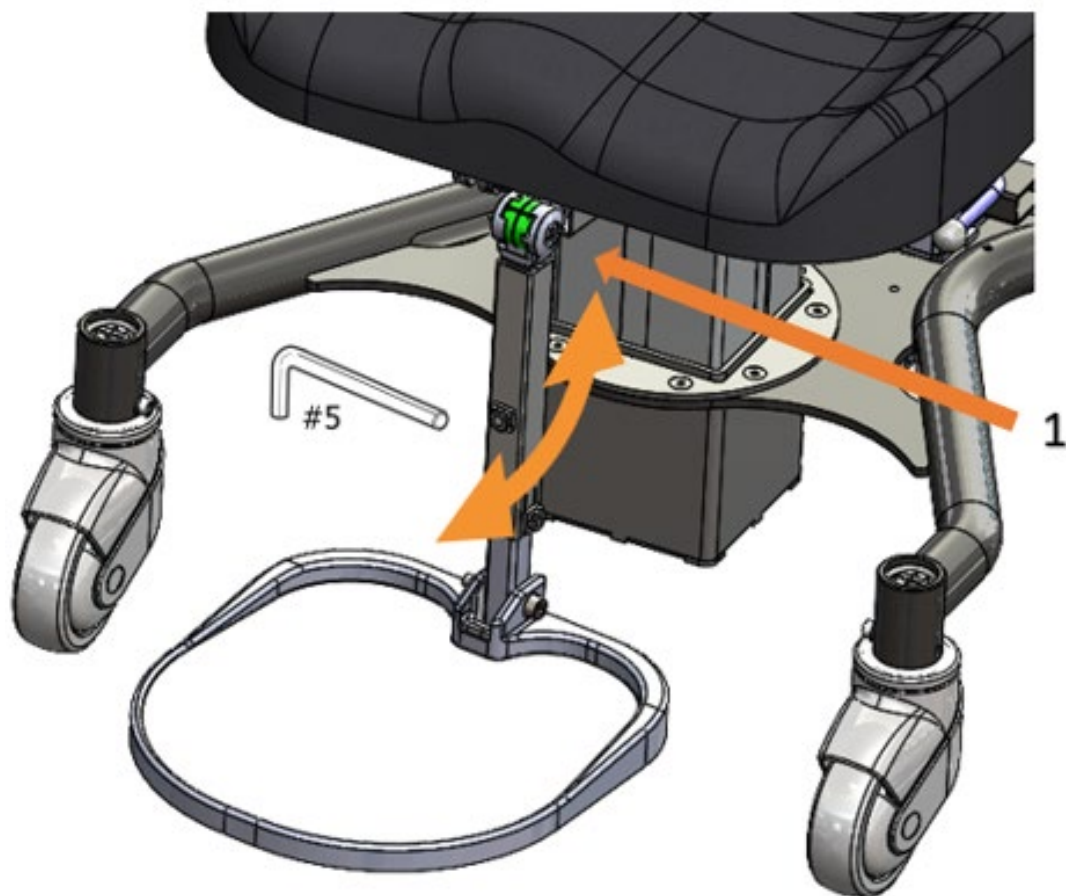


## INCLINAISON DU REPOSE-PIEDS

Le repose-pieds est réglable dans un angle horizontal. Pour l'incliner vers le bas, serrez les deux vis à l'aide d'une clé Allen n° 5 dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée soit atteinte et bloquez les vis avec les écrous. Pour l'incliner vers le haut, desserrez les écrous et dévissez-les dans le sens antihoraire.



***Ne pas monter sur le repose-pieds : la chaise basculerait vers l'avant.***

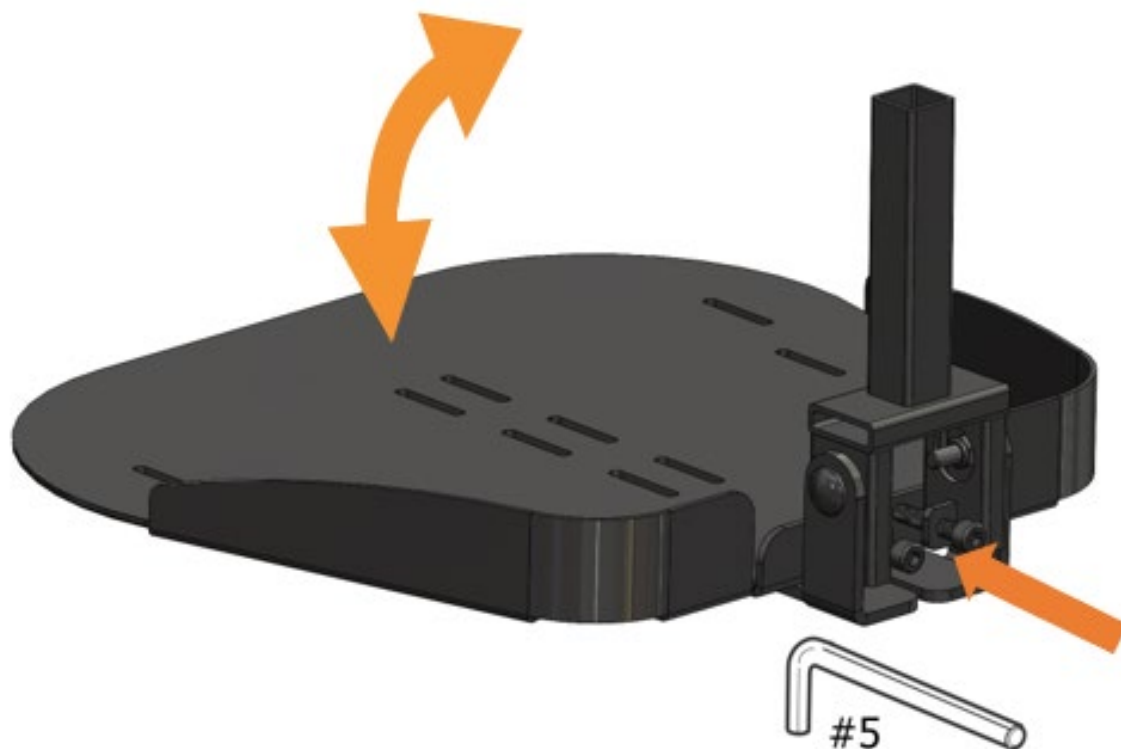

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS DOUBLE

- 1) Desserrez la vis de sécurité **1** et la vis **2** de quelques tours pour permettre d'élever ou d'abaisser le repose-pieds.
- 2) Une fois la hauteur souhaitée atteinte, serrez les vis **1** et **2**.



***Ne pas monter sur le repose-pieds : la chaise basculerait vers l'avant.***




## INCLINAISON DU REPOSE-JAMBES DOUBLE

L'inclinaison du repose-jambes est réglable. Desserrez la vis de quelques tours à l'aide d'une clé Allen n°5, réglez l'inclinaison souhaitée et resserrez la vis.



***Ne pas monter sur le repose-pieds : la chaise basculerait vers l'avant.***

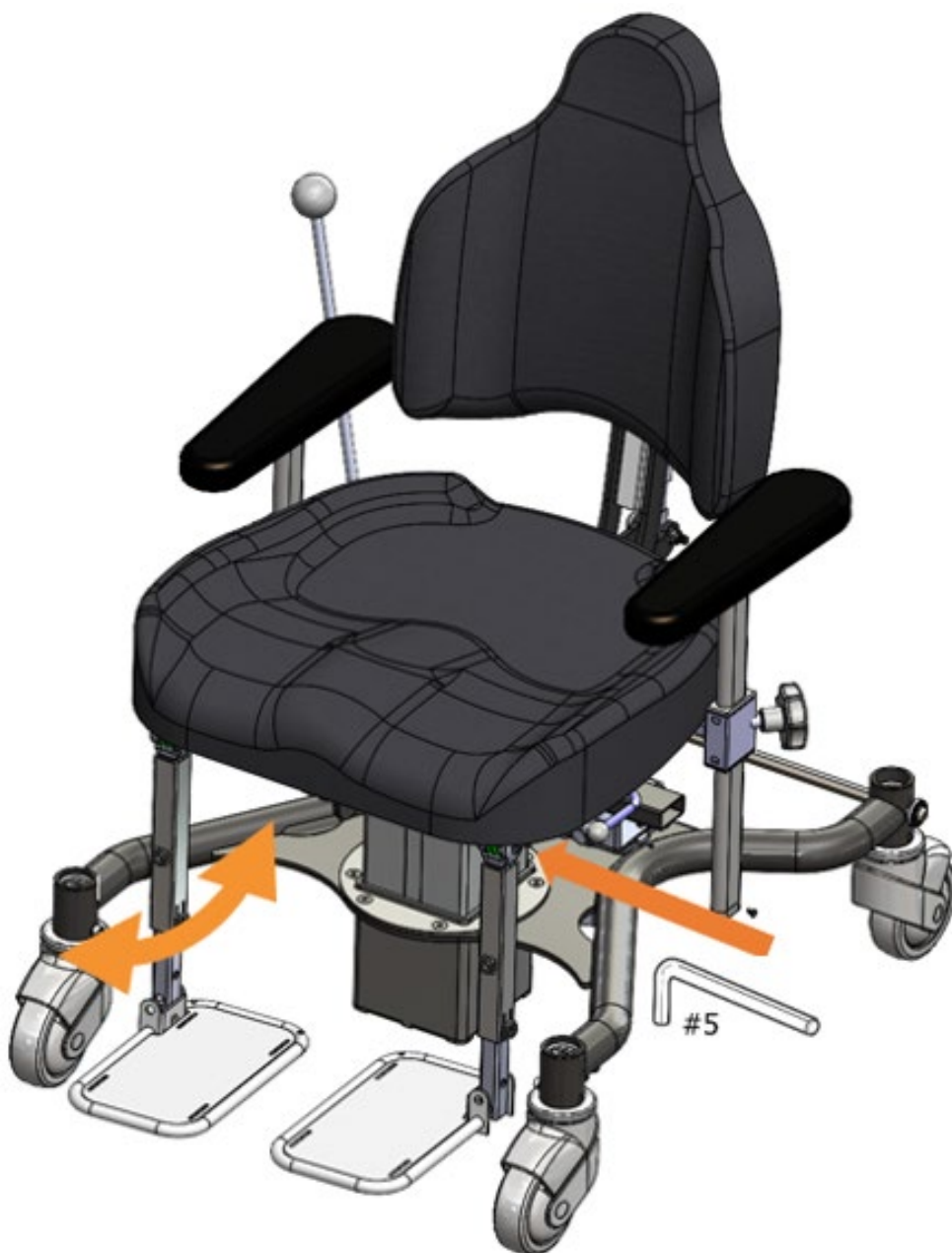


## REPOSE-PIEDS DOUBLE INCLINAISON DES PIEDS

L'inclinaison du repose-pieds est réglable pour trouver un angle confortable pour les pieds. Desserrez la vis de quelques tours à l'aide d'une clé Allen n°5 et réglez l'inclinaison **1**. Serrez la vis. Le repose-pieds est rétractable sans outils **2** pour faciliter l'entrée et la sortie.



***Ne pas monter sur le repose-pieds : la chaise basculerait vers l'avant.***

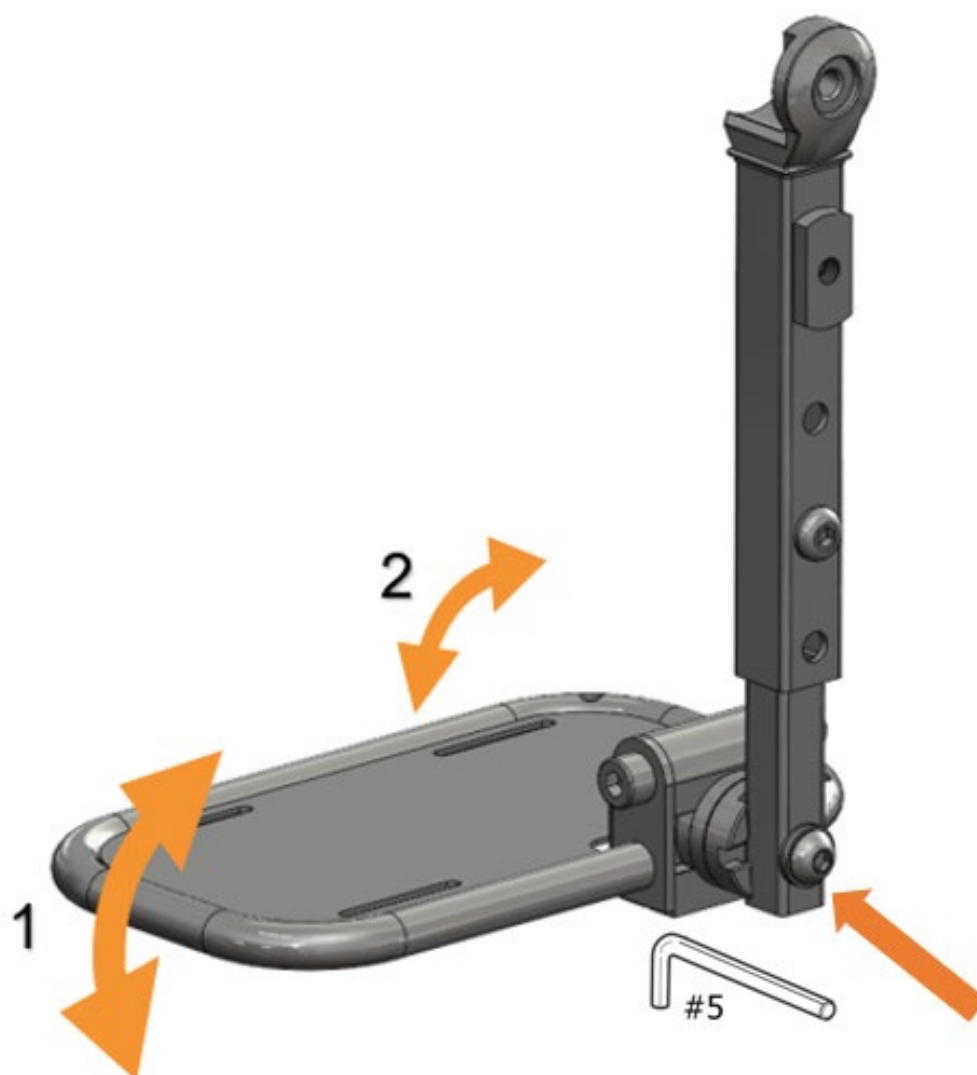

## ARCEAU DE PIEDS

L'arceau de pied peut être rabattu vers l'arrière et repose contre le châssis en position rabattue.



***Rabattez l'arceau de pied avant de vous lever de la chaise pour éviter les chutes.***



## FREIN MONTÉ SUR LE CHÂSSIS

Pour serrer le frein de la chaise, déplacez le levier de frein vers l'avant. Pour relâcher le frein, déplacez à nouveau le levier vers l'arrière.



***Activez toujours le frein de la chaise avant de vous asseoir ou de vous lever.***





## CHARGE - GÉNÉRALITÉS

Pour atteindre les pleines performances de la batterie le plus longtemps possible, il est important de la charger régulièrement. Habituellement, il suffit de charger la batterie 1 à 2 fois par semaine, si possible en journée quand la chaise n'est pas utilisée. Ne pas interrompre la charge avant qu'elle ne soit terminée, soit quand le voyant du boîtier à bascule s'allume en orange en continu. En cas de stockage sur le long terme, la batterie doit être rechargée environ toutes les quatre semaines. Pendant la charge, placez la chaise de façon à ce que la prise de charge puisse être facilement branchée et retirée.

Quand la chaise est en charge, seul le frein électrique fonctionne, pouvant être serré/desserré afin de permettre le déplacement de la chaise sans débrancher le chargeur. Aucune autre fonction n'est utilisable.



***Ne pas laisser la batterie charger pendant de longues périodes sans interruption. De même, ne pas laisser le chargeur branché au secteur une fois la charge terminée..***




***Il est particulièrement important de charger régulièrement la batterie des chaises disposant de fonctions électriques afin de veiller à pouvoir enclencher le frein électrique et à régler la position de l'assise pour vous déplacer et vous asseoir dans la chaise en toute sécurité.***

## CHARGEUR

### TP7M

La batterie doit être chargée quand elle émet un signal sonore et que le voyant 4 du boîtier à bascule clignote à l'activation de l'une des fonctions électriques de la chaise. Pour préserver la batterie, il convient de la recharger dès que ce signal est émis et que ce voyant clignote.

- 1) Branchez la fiche de charge 2 à la prise de charge 1 du boîtier à bascule.
- 2) Branchez la fiche secteur du chargeur à une prise secteur 220 V. Le voyant 3 du chargeur s'allume en vert. Le voyant 4 clignote pendant quelques secondes puis s'éteint.
- 3) La charge est terminée dès que le voyant orange 4 du boîtier à bascule s'allume en orange en continu.
- 4) Débranchez tout d'abord le chargeur de la prise secteur, puis la fiche de chargement de la chaise.

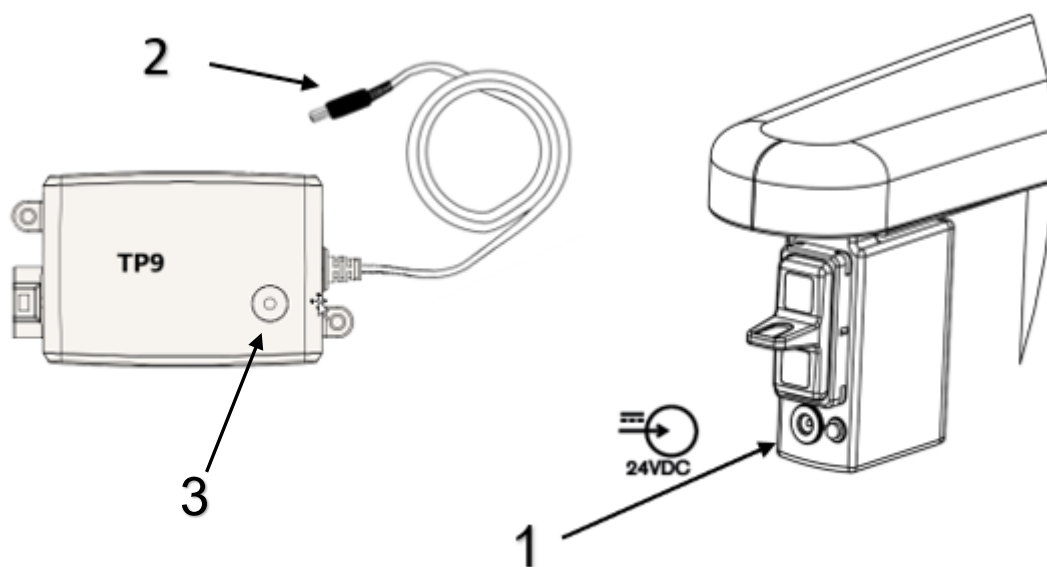



## EMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Les boutons **Marche/Arrêt** de la batterie et les **LED** sont situés sur le dessus du logement de la batterie, voir l'illustration.




## FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE

Quand le chargeur n'est pas branché

Bouton	Fonctionnement	Activité
Marche	Appuyez plus d'1 seconde.	Batterie active
Arrêt	Appuyez plus de 3 secondes.	Batterie éteinte

Statut	Capacité	LED	
Chargeur	>80 %	Vert	S'allume en continu
Chargement en cours.	< 80 %	Vert	Clignotement rapide 1/1 seconde
Besoin d'être rechargée	>25 %	Vert	Clignotement rapide 0,5/4 secondes
Faible capacité	< 25 %	Orange	Clignotement rapide 0,5/4 secondes
Mode de sécurité	< 20 %	-	Arrêt
Avertissement d'erreurs	-	Orange	S'allume en continu

Pour éteindre les fonctions électriques, appuyez sur le bouton MARCHÉ de la batterie. Pour redémarrer les fonctions, branchez la prise de charge dans la chaise jusqu'à ce qu'un signal sonore soit émis. Pour davantage d'instructions, voir la page 32.

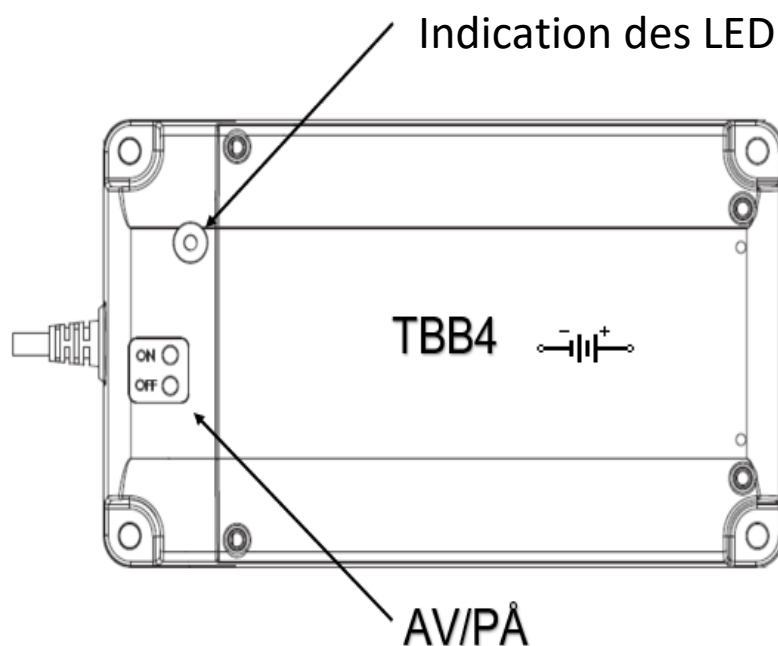

INTERMITTENS  
2/18 MIN  
DUTY CYCLE



Voir les caractéristiques techniques.

## REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Lors du remplacement de la batterie, le bloc batterie est remplacé entièrement. Voir les Instructions relatives au remplacement de la batterie pour savoir comment procéder.



**Les réparations et autres interventions sur la batterie ne peuvent être effectuées qu'après autorisation d'Eurovema. Ne pas ouvrir le bloc batterie. Seule une batterie approuvée par Eurovema peut être utilisée dans le produit.**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLECTRONIQUE

Classe	Chaise de travail - ISO 180903
Poids du modèle électrique	42kg
Poids du modèle manuel	34kg
Poids SWL poids total poids max. de l'utilisateur + chaise	175kg
Poids maximal de l'utilisateur	160kg
Version électrique à batterie	TBB4 24 V 2 Ah surveillance intégrée pour plus d'informations. Voir données TBB4

Hauteur de l'assise EL avec roulettes unique	Sans rotation	Avec rotation
Hauteur de l'assise électrique 100 mm espace libre 50 mm	383-483mm	393-493mm
Hauteur de l'assise électrique 100 mm espace libre 70 mm	403-503mm	413-513mm
Hauteur de l'assise électrique 180 mm espace libre 50 mm	463-643mm	473-643mm
Hauteur de l'assise électrique 180 mm espace libre 70 mm	483-663mm	493-673mm
Hauteur de l'assise électrique 250 mm espace libre 50 mm	533-783mm	543-783mm
Hauteur de l'assise électrique 250 mm espace libre 70 mm	553-803mm	563-813mm

Hauteur de l'assise EL avec roulettes uniques	Sans rotation	Avec rotation
Hauteur de l'assise électrique 100 mm espace libre 50 mm	363-463mm	373-473mm
Hauteur de l'assise électrique 100 mm espace libre 70 mm	383-483mm	384-493mm
Hauteur de l'assise électrique 180 mm espace libre 50 mm	443-623mm	453-633mm
Hauteur de l'assise électrique 180 mm espace libre 70 mm	463-643mm	473-653mm
Hauteur de l'assise électrique 250 mm espace libre 50 mm	513-763mm	523-773mm
Hauteur de l'assise électrique 250 mm espace libre 70 mm	533-783mm	543-793mm

Hauteur de l'assise au gaz indépendante des roulettes	Sans rotation	Avec rotation
Hauteur d'assise au gaz 95 mm espace libre 30 mm	311,5-406,5mm	321,5-407,5mm
Hauteur d'assise au gaz 155 mm espace libre 30 mm	408,5-563,5mm	418,5-573,5mm
Hauteur d'assise au gaz 200 mm espace libre 30 mm	468,5-668,5mm	478,5-678,5mm

Inclinaison de l'assise	Avant	Arrière
Inclinaison de l'assise électrique, bielle, ridoir et gaz	-14°	+16°

Angle de dossier	Avant	Arrière
Inclinaison de l'assise électrique, manuelle et gaz	-23°	+7°

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Conditions	Température	Humidité de l'air	Pression atmosphérique
Utilisation normale	5 °C-40 °C	10 % - 93% HR	50 kPa-106 kPa
Entreposage et transport	-5 °C-40 °C	10 % - 93% HR	50 kPa-106 kPa

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHÂSSIS

Données	Faits
Largeur du châssis avec roulettes uniques	582 mm
Largeur du châssis avec roulettes doubles	603 mm
Largeur du châssis avec roulettes uniques	592 mm
Largeur du châssis avec roulettes doubles	603 mm
Poids du châssis	9,9kg
Frein manuel	Frein à levier monté sur le châssis
Frein électrique	TiMotion TL165 000N course 50 mm
Diamètre de roulette	100 mm

## INFORMATIONS TECHNIQUES ÉLECTRONIQUE

Données	Faits
Tension d'entrée	30 VCC max. 6A
Tension effective	30 VCC 6A
Cycle de travail	10 % max. 2 min ON/18 min. OFF
Tension	24 VCC
CEM	Classe 2
Boîtier de protection	IP66
Classe de protection électrique	Classe 2
Batterie TBB4	24 V 2A h AGM



***Les chaises équipées de composants électroniques peuvent être perturbées par des ondes radio, notamment des téléphones portables.***



***Les chaises équipées de composants électroniques sont classées Parties appliquées de type B, classe de protection II avec source d'alimentation interne.***

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ASSISE, DOSSIER ET ACCOUDOIRS

Données	Faits
Assise (largeur*profondeur)	40*40, 40*46, 45*46, 45*50, 50*46, 50*50 cm
Largeur de l'assise (entre les accoudoirs)	38-56 cm
Profondeur d'assise	40-59 cm
Dossier SitRite (hauteur*largeur)	29*32, 36*40, 42*45, 47*47 cm
Dossier SitRite LS	17*37, 24*43, 28*45, 33*47 cm
Dossier Forma	37*23, 37*46, 37*48 cm
Dossier Classic	35*30, 35*44, 40*30, 40*44 cm
Inclinaison de dossier	30°
Accoudoirs réglables en hauteur (suivent l'inclinaison)	0-26 cm
Accoudoirs réglables en hauteur (ne suivent pas l'inclinaison)	<sup>a</sup> 0-26 cm (théoriquement -15,5-26 cm)
Plaques d'accoudoir	25*8*3, 30*8*3, 40*8*3, 25*8*5, 30*8*5, 40*8*5 cm
Assise Coxit (largeur*profondeur)	45*45, 50*50 cm
Rotation de l'assise	Verrouillable à 180° en cinq positions
Housse	Atlantic noir

a) Nécessite un long montant d'accoudoir.

## LISTE DES ACCESSOIRES

Les accessoires suivants peuvent être utilisés pour modifier la fonctionnalité du produit :

1. Interrupteur à bascule de commande, disponible en format de commande manuelle, câblé et sans fil.
2. Roulettes, disponibles en modèle unique ou double.
3. Frein disponible sous forme manuelle ou électronique.
4. Colonne de levage, disponible en 3 hauteurs différentes.

Veuillez contacter Eurovema pour obtenir une liste complète des pièces réparables/remplaçables, réservée au personnel agréé.

## ÉLIMINATION

S'ils sont définitivement mis hors service, les produits doivent être démontés et leurs éléments triés. Les instructions de montage et de démontage sont disponibles sur le site web dans le chapitre Instructions d'installation. Des vues éclatées sont également disponibles dans le chapitre Vues éclatées sur le site web [www.eurovema.se](http://www.eurovema.se)

Les particuliers doivent contacter Eurovema pour obtenir de plus amples informations. Eurovema endosse alors la responsabilité de l'élimination.

Les composants démontés sont classés conformément au **tableau ci-dessous**.



**Le démontage du produit n'est pas sans risque : il induit un risque d'écrasement et de brûlure en cas de mauvaise manipulation. Le démontage doit être effectué par un technicien agréé. P**



Métal	Électronique	Combustible
Châssis	Électronique de commande	Assises
Croix de l'assise	Boîtes de jonction	Dossier
Mécanisme de dossier	Commande de l'inclinaison	Coussins d'accoudoirs
Montants d'accoudoir	Logement de batterie (les batteries doivent être séparées)	Coussins d'appui-tête
Repose-jambes	Actionneur électrique	Housses
Fixation des accessoires	Colonne de levage électrique	Coussins de soutien du tronc
Élévateur d'assise gaz	Câbles	Autres pièces d'arrêt
Anneau de pied		

### Batteries

**Les batteries au plomb mises au rebut doivent être éliminées dans un centre de recyclage.**

