

MONTERINGSANVISNING

Bålstöd SitRite





Ta bort profilskyddet. För ner
bålstödets fixeringsplatta i
ryggprofilen. Ställ in önskad
höjd och dra åt skruvarna med
insexnyckel 5 mm. Sätt tillbaka
profilskyddet.



Justera bålstödet i sidled lossa
skruven se bild med insexnyckel
5 mm. Dra åt skruven ordentligt.



Justera bålstödet i djupled genom att
lossa skruvarna med insexnyckel
4 mm. Dra åt skruvarna ordentligt.



Justera in bålstödets vinkel genom
att lossa på ratten. Dra åt ratten
ordentligt.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se