

Sittsystemet SitRite

Sittsystemet SitRite är designat för att ge extra stöd och god komfort åt användarna. Sittsystemet har tagits fram tillsammans med sittergonomer och är uppskattat sedan många år. I sortimentet idag finns även ryggmodellen SitRite LS (Lateral Support), med en mer omslutande rygg. SitRite LS är bland annat framtagen för personer med muskelsvaghet i bålen och korrigerbar scolios. De omslutande sidorna på SitRite LS är uppbyggda kring polsterbeklädda plåtar, vilka kan justeras med användaren i sittande läge.

Både SitRite och SitRite LS har möjlighet att monteras med svankblåsa för extra stöd. Svankstödet monteras mellan dyna och ryggplatta. Stödet fylls med luft med hjälp av en handpump.

SitRite-sitsen består av två skikt skummaterial med olika densitet och funktion. Det undre, hårdare skiktet hjälper till att hålla bäckenet i god position. Den övre, mjukare skumdelen medger en tryckfördelning genom dess uppbyggnad där skummet är tjockare under sittbenen och mindre tjockt under låren.

SitRite och SitRite LS kan användas för hela sortimentet av arbets- och eldrivna rullstolar; dvs Junior, Sigma, Flexbase, Hi/low, Miniflex och Flexmobil. Ryggen SitRite LS kan ersätta befintlig SitRite rygg.

I sortimentet finns sits- och ryggöverdrag för alla modeller och storlekar.



SITRITE-SITSAR



Sits-modell	Art-nr	Innermått (B x D cm)	Avsedd för
SitRite 26x31	624570-2631	26x31	Junior
SitRite 29x32	624570-2732	27x33	Junior
SitRite 32x36	624570-3236	31x37	Junior
SitRite 36x40 Junior	624570-3640	34x41	Junior
SitRite 40x40 Junior	624570-4040	38x41	Junior/vuxen
SitRite 36x45	624570-3645	34x46	Junior/vuxen
SitRite 36x40	624520-3640	34x41	Vuxen
SitRite 40x40	624520-4040	38x41	Vuxen/Junior
SitRite 40x45	624520-4045	38x46	Vuxen/Junior
SitRite 45x45	624520-4545	43x46	Vuxen
SitRite 45x50	624520-4550	43x50	Vuxen
SitRite 50x50	624520-5050	48x50	Vuxen

Sitsarnas innermått är mätt i förhållande till var sitsen är formad dvs den skålade sittgropan. Se markering på sitsen för "innermått".

SITRITE-RYGGAR



Rygg-modell*	Art-nr	Innermått (B x D cm)	Avsedd för
SitRite 25x32	224576-2532	25x32	Junior
SitRite 27x37	224576-2732	27x37	Junior
SitRite 35x43	224526-3640	35x43	Junior/Vuxen
SitRite 40x45	224526-4245	40x45	Vuxen
SitRite 45x47	224526-4550	45x47	Vuxen
SitRite LS 14x32	224536-2532	14x32	Junior
SitRite LS 17x37	224536-2732	17x37	Junior
SitRite LS 24x43	224536-3640	24x43	Junior
SitRite LS 28x45	224536-4245	28x45	Junior/Vuxen
SitRite LS 33x47	224536-4550	33x47	Vuxen

* Alla modeller är inklusive ryggprofil.

Ryggarnas innermått på SitRite LS mäts på den smalaste delen mellan vingarna. Se markering i bilden.

Sidoplåtarna på SitRite LS kan justeras i bredd så att den angivna bredden kan bli ett par centimeter smalare eller ett par cm djupare.