

Sprängskiss

Flexbase

Junior 52


Basic



Innehåll



Sprängskiss	1
Ryggstolpe	3
ABC-profil	4
Ryggstolpe för Multiryggmekanism	5
Ryggstolpe Forma Komfort och Aktiv för Multirygg	6
Multiryggmekanism	7
Forma ryggmekanism.....	8
Ryggdyna Classic	9
Ryggdyna SitRite, SitRite LS.....	10
Ryggdyna ABC	11
Ryggstommar Forma Basic, Komfort och Active.....	12
Armstöd.....	13
Armstödsplattor	14
Sittdynor.....	15
Sittkryss Forma.....	16
Sittkryss Euroflex.....	17
Kombifäste	18
Sittkryss ABC	19
Ställdon sitstilt/rygg	20
Chassi Flexbase	21
Bromsspak Flexbase.....	22
Chassi Junior 52.....	23
Chassi Basic	24
Bromssystem sitsmonterad	25
Elektrisk broms.....	26
Sitslyft manuell.....	27
Sitslyft elektrisk.....	28
Styreelektronik.....	29
Anteckningar	30

Ryggstolpe

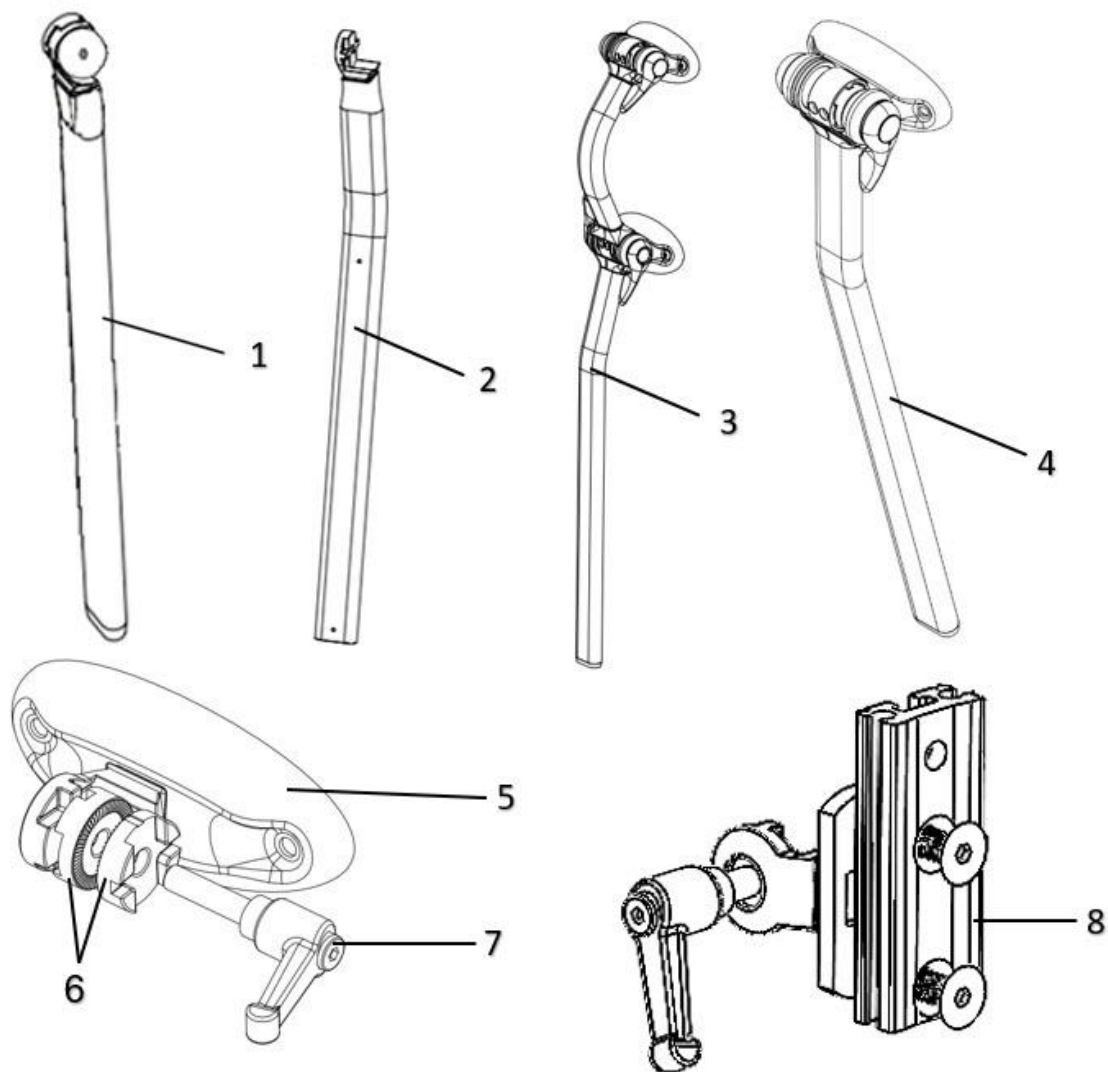


- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | 274001-6150 | Ryggstolpe SitRite rak stolpe utan dyna |
| 2. | SW-01517 | Ryggstolpe SitRite böjd stolpe utan dyna |
| 3. | 232030-3050 | Ryggstolpe Forma Bas/komfort utan dyna |
| | 232035-3050 | Ryggstolpe Forma Aktiv/komfort ML för Multirygg utan dyna |
| 4. | 231030-3050 | Ryggstolpe Forma bas utan dyna |
| 5. | SW01181 | Ryggfäste Forma/Classic |
| 6. | 624001-9000 | Kugglås |
| 7. | 7MRP-63-8x30 | Låsspak M8x30 |
| 8. | 274001-6006 | Profilinfästning |

ABC-profil

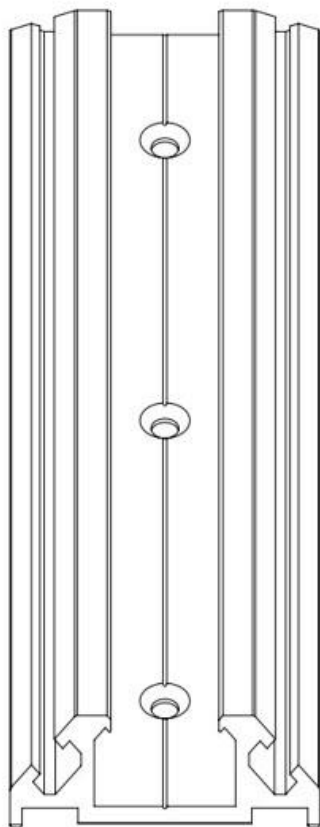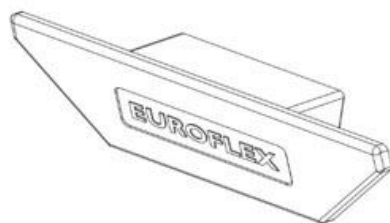

- | | | |
|----|-------------|--------------------------------------|
| 1. | 674001-6002 | Ryggprofil ABC låg rygg 160 mm |
| | 674001-6001 | Ryggprofil ABC hög rygg 280 mm |
| | 674201-6001 | Ryggprofil ABC extra hög rygg 380 mm |
| 2. | SW-01502 | Profilavslutning plast |

Ryggstolpe för Multiryggmekanism

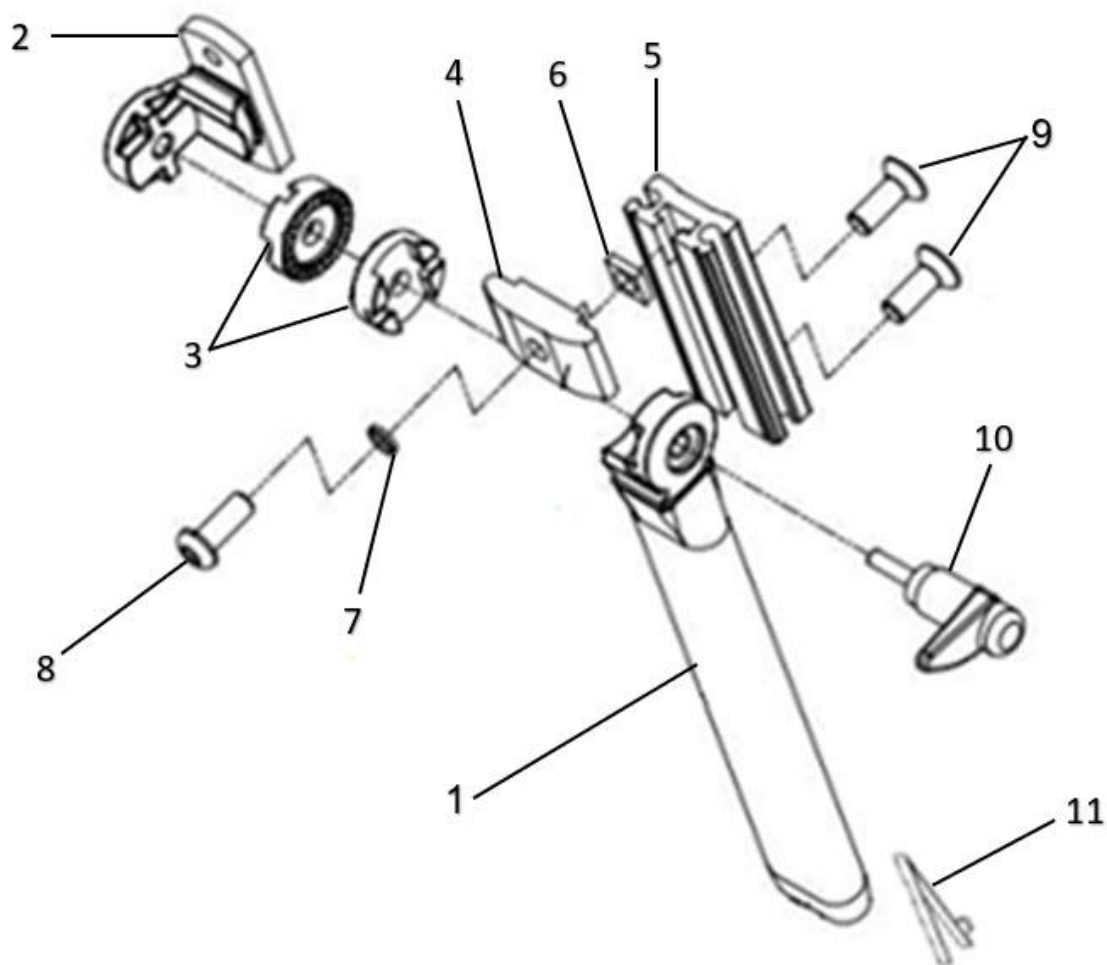


227004–6000 Ryggstolpe komplett för Multiryggmekanism SitRite/Bas

1.	SW-02034	Ryggstolpe
2.	274001–6005	Profilinfästning
3.	624001–9000	Kugglås
4.	675002–4400	AI-Profil låsklack ABC
5.	674001–6004	Profil ryggstolpe ABC
6.	7ML4M-8	Fyrkantsmutter M8 fzb DIN562
7.	7BRB-8,4x16 SK	Planbricka 8,4x16x1,5 svartkrom
8.	7K6S-8x25 SK	Skruv kullrig M8x25 svartkrom
9.	7F6S-8x22	Skruv försänkt M8*22 FZB
10.	7MRP-63-8x30	Låsspak MRX 63p-M8x30
11.	2FJL-6x80E	Fjäderlås 6x80 Enkel nitad


2, 3, 4, 5, 8, 9 bildar 274001–6006 Profilinfästning förmonterad kort

Ryggstolpe Forma Komfort och Aktiv för Multirygg

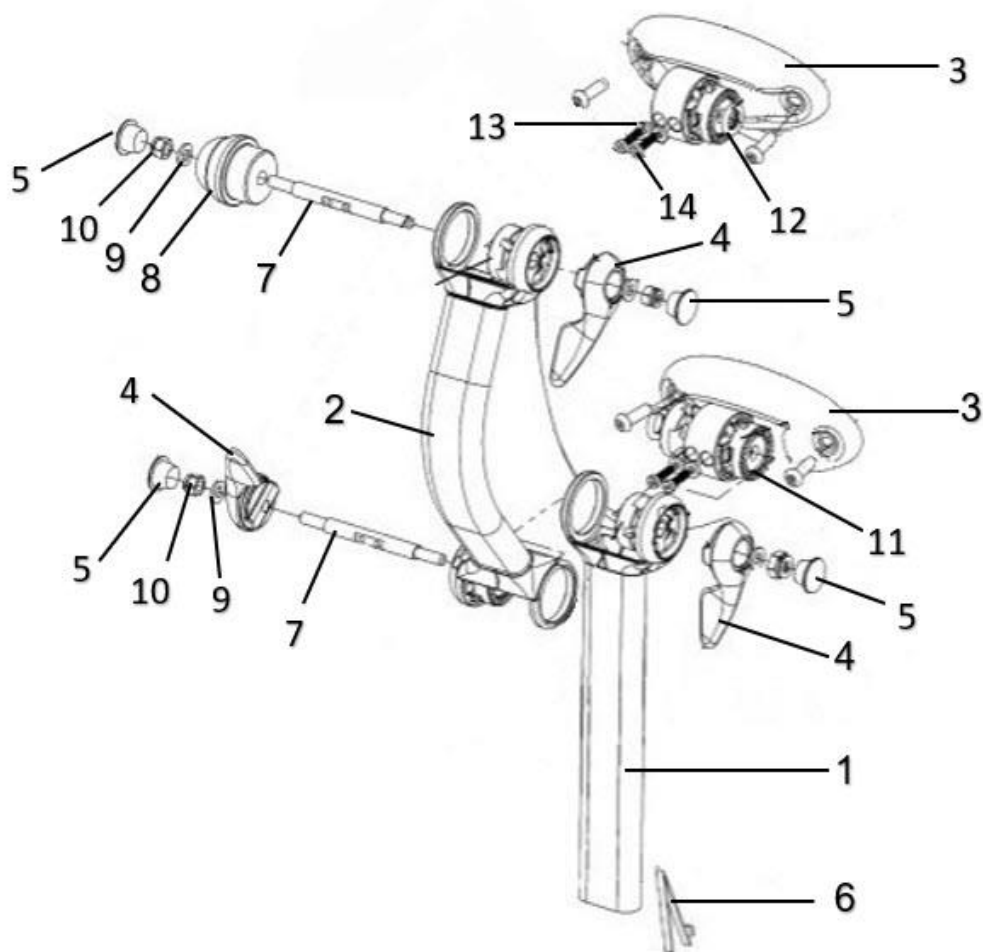


1.	SW-02087	Ryggstolpe Forma för Multiryggmekanism
2.	SW-00441	Stolpe aktiv/komfort ryggstomme Forma
3.	SW-00435	Basplatta Forma
4.	SW-00436	Plastspak ryggglåsning Forma
5.	SWED-319154	Täckpropp rygg led Forma
6.	2FJL-6x80E	Fjäderlås 6x80
7.	SW-00438	Axel
8.	SW-00437	Blindplugg
9.	7NORDLOCK-6	Nordlock bricka NL6
10.	7LOCKING-M6H	Låsmutter M6
11.	624001-9000	Kugglås
12.	7O-RING-11x3,5	O-ring
13.	7FBB-4,1x7,6	Fjäderbricka 4,1x7,6x0,9
14.	7MC6S-4x16R	Skruv M4x16 A2 rostfri

Multiryggmekanism

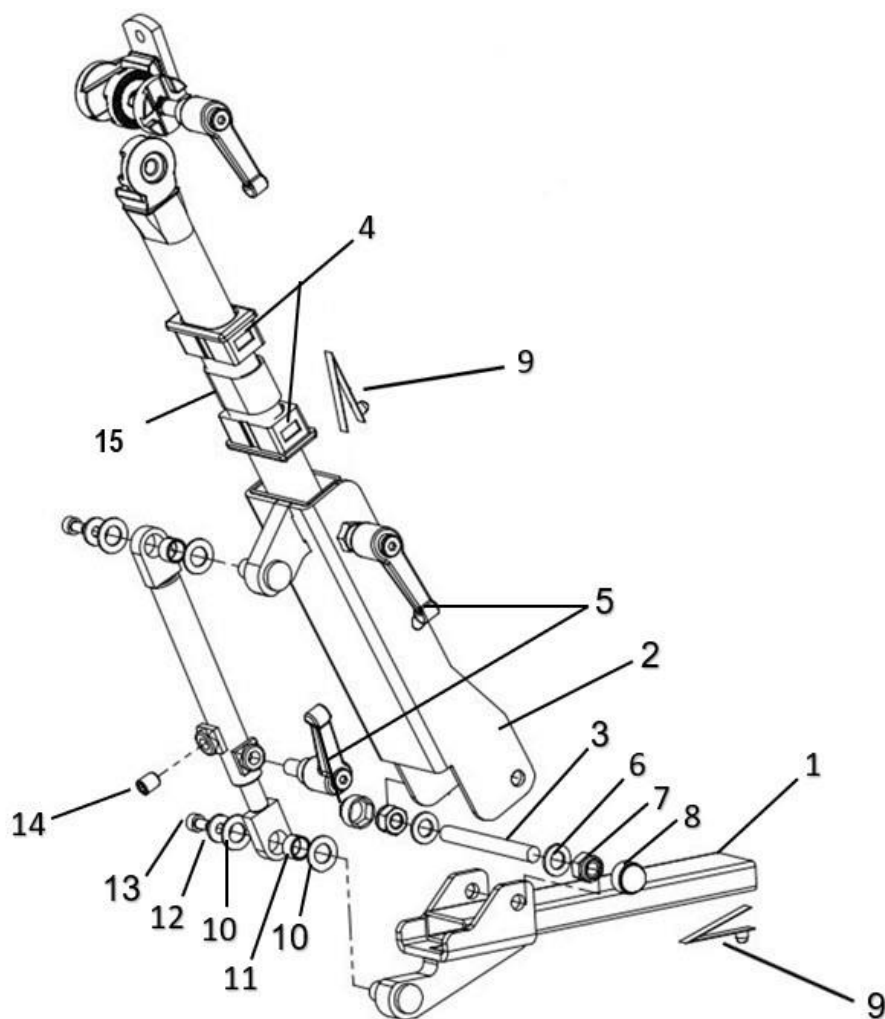

1.	SW-01985	Ryggstolpe nedre del
2.	SW-020269	Ryggstolpe övre del
3.	SW-01999	Pinnbult M8
4.	324101-4300	Plastplugg
5.	7WN5000-8*16	Låsspak M8x16
6.	7BRB-8,4x16 SK	Planbricka 8,4x16x1,5 svartkrom
7.	7LOCKING-M8L	Låsmutter M8 DIN 985 FZB
8.	7KH-13-8	Mutterskydd M8
9.	2FJL-6x80E	Fjäderlås 6x80 enkel nitad
10.	7PLASB-10,5x18	Plastbricka 10,5x18x1,0
11.	7BM-1008-FB	Smörjfri bussning 10x12x8
12.	7BRB-5,3x10	Bricka 5,3x10x1,0 FZB
13.	7MC6S-5x10LOCK	Skruv insex M5x10 FZB med Lock-Tite
14.	7K6S-8x12	Skruv kullrig M8x12 svartkrom


Forma ryggmekanism

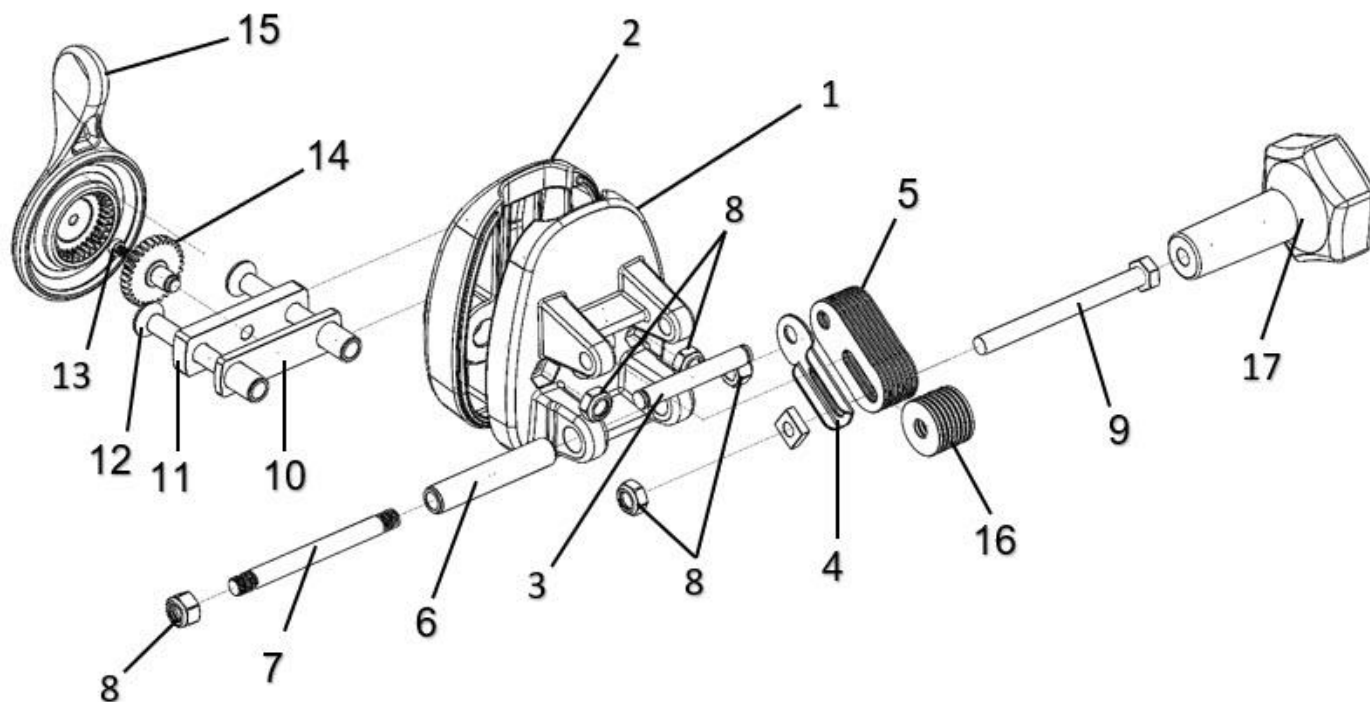

800010–1050 Ryggfäste Forma komplett


1.	SW-00873	Ryggfäste innerdel Forma
2.	SW-00874	Ryggfäste ytterdel Forma
3.	300166	Lamellaxel rygginfästning
4.	300163	Lamell bockad rygginfästning
5.	300161	Lamell rak rygginfästning
6.	SW-00878	Distanshylsa ryggfäste Forma
7.	300127	Axel rygginfästning
8.	7LOCKING-M8L	Låsmutter M8 DIN 985 FZB
9.	7M6S-8x100	Skruv M8x100 FZB
10.	SW-00878	Inre plattjärn
11.	SW-00877	Yttre plattjärn
12.	F6S-8x45	Skruv försänkt M8x45 FZB
13.	7K6S-4x16	Skruv kullrig M4x16 svartkrom
14.	SW-00875	Kuggskruv
15.	SW-00880	Plastspak
16.	7NB-8x25	Bricka NB 8x25x1,5 FZB
17.	7T-RATT-8x90	Trattratt sitsvinkling/ryggvinkling

Ryggdyna Classic

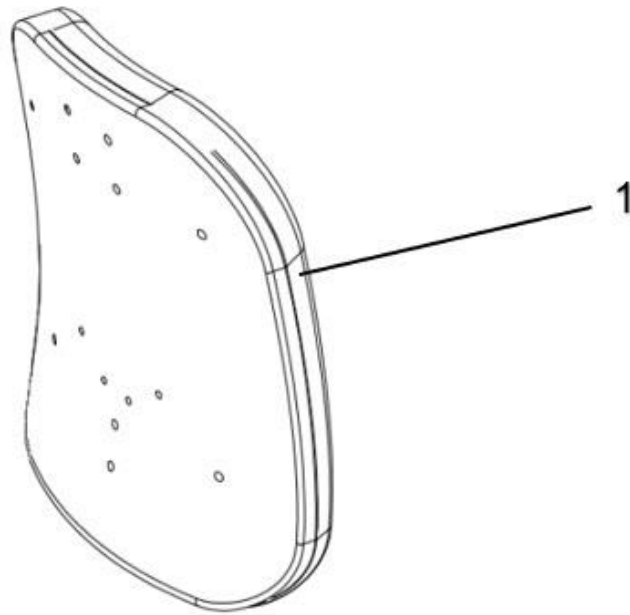

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1. | 284244-3530 | Rygg Classic för Multirygg 35x30 cm svart Atlantic |
| | 284144-3530 | Rygg Classic rak stolpe 35x30 cm svart Atlantic |
| | 284244-3544 | Rygg Classic för Multirygg 35x44 cm svart Atlantic |
| | 284144-3544 | Rygg Classic rak stolpe 35x44 cm svart Atlantic |
| | 284244-4030 | Rygg Classic för Multirygg 40x30 cm svart Atlantic |
| | 284144-4030 | Rygg Classic rak stolpe 40x30 cm svart Atlantic |
| | 284244-4044 | Rygg Classic för Multirygg 40x44 cm svart Atlantic |
| | 284144-4044 | Rygg Classic rak stolpe 40x44 cm svart Atlantic |
| | 684144-6100 | Ryggstomme Classic 35x30 cm svart Atlantic |
| | 624244-6100 | Ryggstomme Classic 35x44 cm svart Atlantic |
| | 624144-6000 | Ryggstomme Classic 40x30 cm svart Atlantic |
| | 684244-6000 | Ryggstomme Classic 40x44 cm svart Atlantic |


Ryggdyna SitRite, SitRite LS

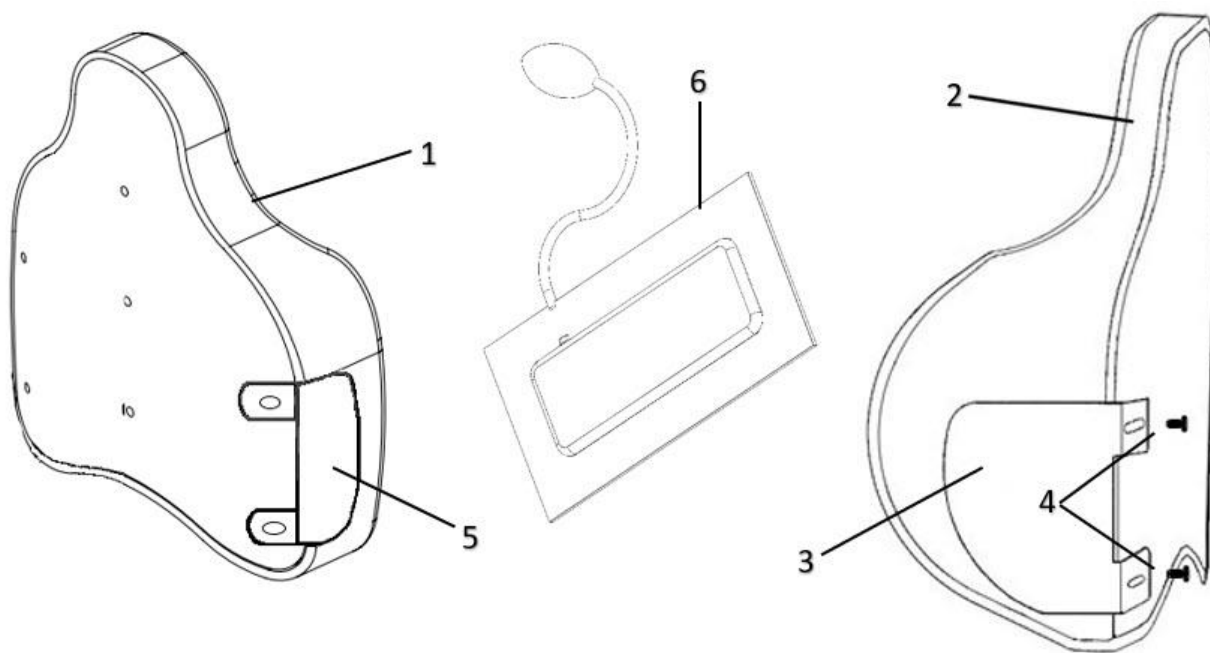

* Angivna mått är faktiskt sittmått.


1.	224576-2732	Rygg SitRite 27x37 cm inklusive profil
	224526-3640	Rygg SitRite 35x43 cm inklusive profil
	224526-4245	Rygg SitRite 40x45 cm inklusive profil
	224526-4550	Rygg SitRite 45x47 cm inklusive profil
2.	224536-2732	Rygg SitRite LS 17x37 cm inklusive profil och bålstödsförstärkning
	224536-3640	Rygg SitRite LS 24x43 cm inklusive profil och bålstödsförstärkning
	224536-4245	Rygg SitRite LS 28x45 cm inklusive profil och bålstödsförstärkning
	224536-4550	Rygg SitRite LS 33x47 cm inklusive profil och bålstödsförstärkning
3.	624002-4700	Bålstödsförstärkning par SitRite LS rygg
4.	K6S-6x12 SK	Skruv kullrig M6x12 svartkrom
5.	624001-4700	Bålstödsförstärkning par SitRite rygg
6.	7SVANKSTÖD	Svankstöd luft stor
	60102630	Svankstöd luft liten

Ryggdyna ABC

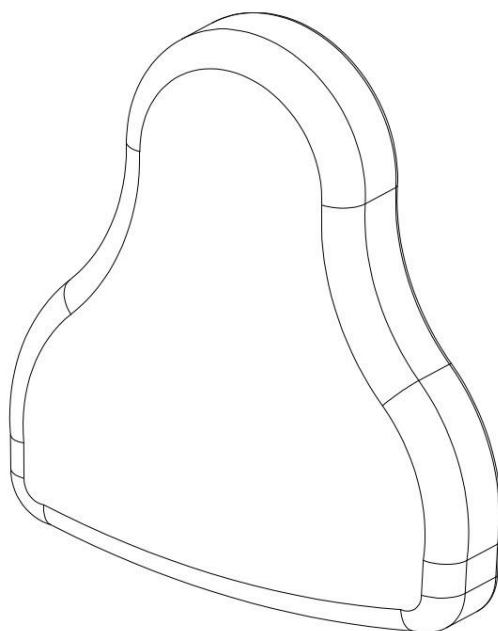


- | | | |
|----|-------------|--|
| 1. | 374244-6100 | Ryggstomme 28x32 cm svart Atlantic |
| | 374244-6000 | Ryggstomme 32x35 cm svart Atlantic |
| | 374244-6200 | Ryggstomme 32x42 cm svart Atlantic |
| 2. | 374244.6105 | Rygg ABC 28x32 cm inklusive profil, svart Atlantic |
| | 374244-6005 | Rygg ABC 32x35 cm inklusive profil, svart Atlantic |
| | 374244-6205 | Rygg ABC 32x42 cm inklusive profil, svart Atlantic |

Ryggstommar Forma Basic, Comfort och Active

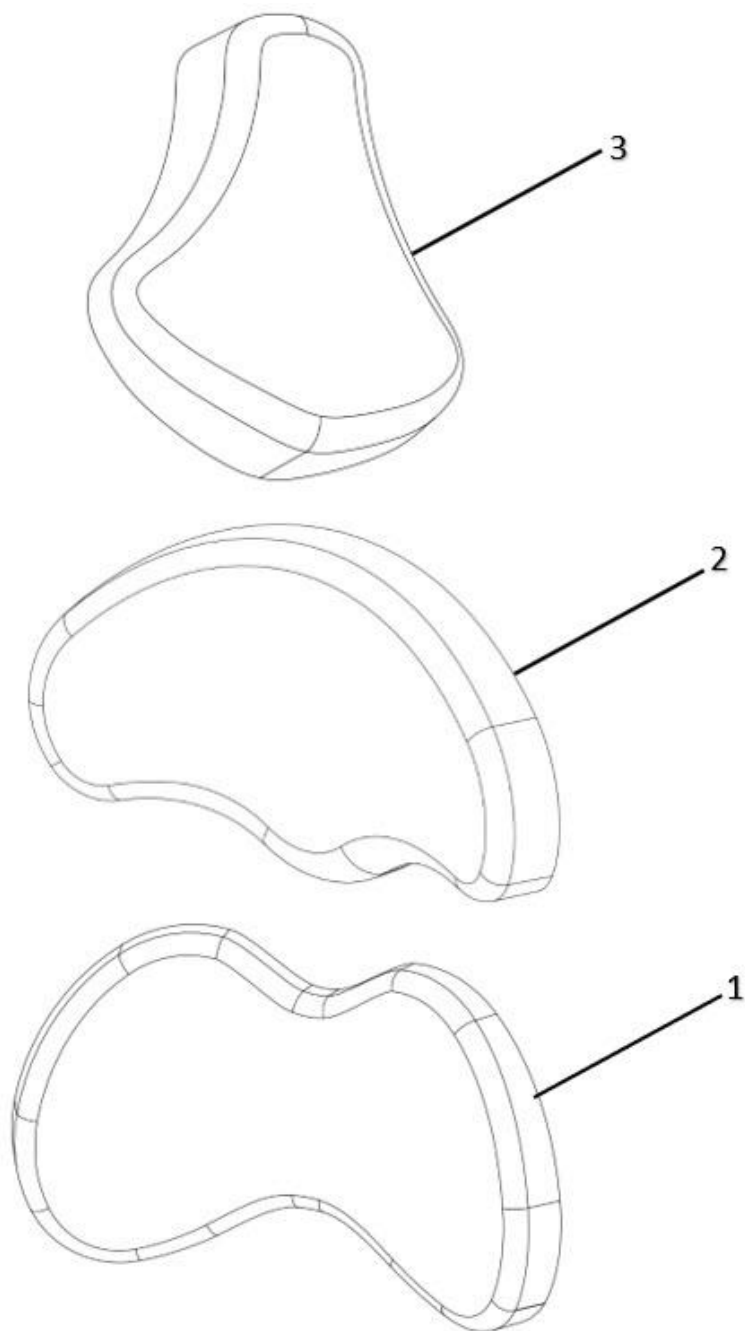


- | | | |
|----|-------------|---|
| 1. | 801000-1003 | Ryggstomme Forma Bas/Basic svart Atlantic |
| 2. | 803000-1001 | Ryggstomme Forma Komfort svart Atlantic |
| 3. | 802000-1001 | Ryggstomme Forma Aktiv svart Atlantic |

Armstöd

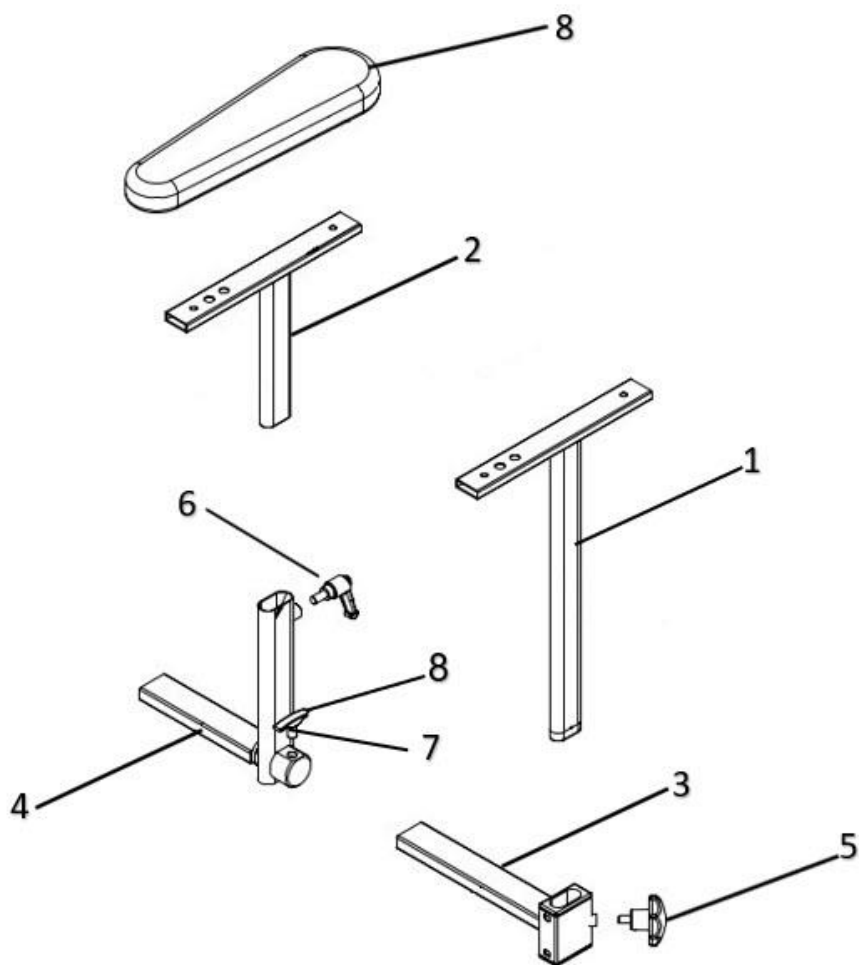


1.	624001-4010K 623401-4010 624101-4140 624001-4030	Armstöd höjdjustering Classic Armstöd höjdjustering Junior Armstöd höjdjustering extra lång Armstöd höjdjustering Slingback
2.	669101-4002	Armstöd höjdjustering fällbara armstöd
3.	634001-4012 6240014012K	Breddjustering Kort standard Breddjustering Lång för sittbredd \geq 50 cm
4.	269102-4000H 269102-40x0V	Armsödsmekanism fällbar höger Armsödsmekanism fällbar vänster
5.	7S-RATT-8x16	Skruvratt
6.	7WN500-8x16 K6S-8x16	Låsspak M8x16 Skruv kullrig M8x16
7.	7GN617-10	Inställningsbult M10x1 inklusive mutter
8.	7WN651-5	T-handtag WN561E 50-M5

Armstödsplattor

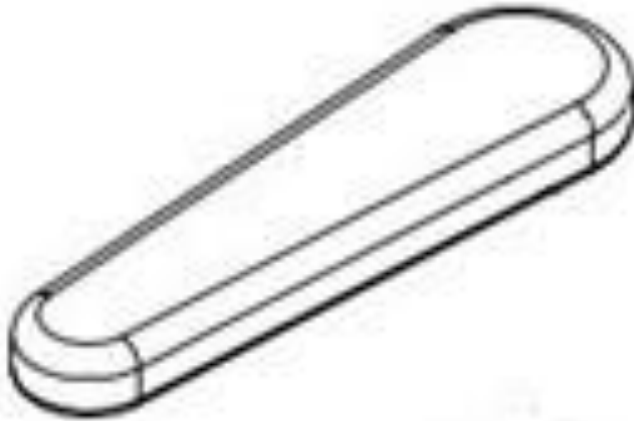


8.	624002-4004	Armstödsplatta mjuk 30x3 cm
	624002-4005	Armstödsplatta mjuk 30x3 cm förstärkt
	624001-4004S	Armstödsplatta mjuk 30x5 cm
	624001-4005-S	Armstödsplatta mjuk 30x5 cm förstärkt
	624002-4009	Armstödsplatta mjuk 35x3 cm
	624001-4009	Armstödsplatta mjuk 35x5 cm
	624002-4007	Armstödsplatta mjuk 40x3 cm
	624002-4018	Armstödsplatta mjuk 40x3 cm förstärkt
	624001-4007	Armstödsplatta mjuk 40x5 cm
	624001-4008	Armstödsplatta mjuk 40x5 cm förstärkt35

Sittdynor

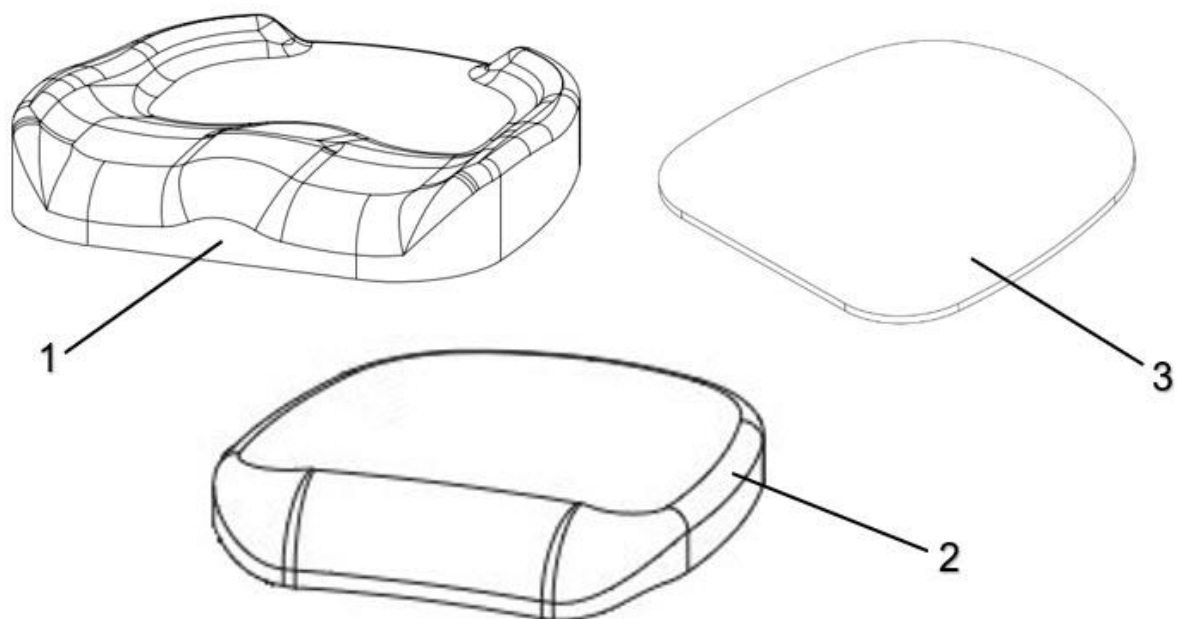

1. 624570–2732 Sits SitRite 27x32 cm svart Atlantic
624570–3236 Sits SitRite 32x36 cm svart Atlantic
624520–3640 Sits SitRite 36x40 cm svart Atlantic
624520–4040 Sits SitRite 40x40 cm svart Atlantic
624520–4045 Sits SitRite 40x45 cm svart Atlantic
624520–4545 Sits SitRite 45x45 cm svart Atlantic
624520–4550 Sits SitRite 45x50 cm svart Atlantic
624520–5050 Sits SitRite 50x50 cm svart Atlantic
Sits SitRite med trögskum, lägg till SR efter artikelnummer (exempel 624570-2732SR)
2. 800100–4040 Sits Forma 40x40x6 cm svart Atlantic
800100–4045 Sits Forma 40x45x6 cm svart Atlantic
800100–4545 Sits Forma 45x45x6 cm svart Atlantic
800100–4550 Sits Forma 45x50x6 cm svart Atlantic
800100–5045 Sits Forma 50x45x6 cm svart Atlantic
800100–5050 Sits Forma 50x50x6 cm svart Atlantic
3. Plansits SitRite med svart skai, avsluta artikelnummer med P (exempel 624570-2732P)


Sittkryss Forma

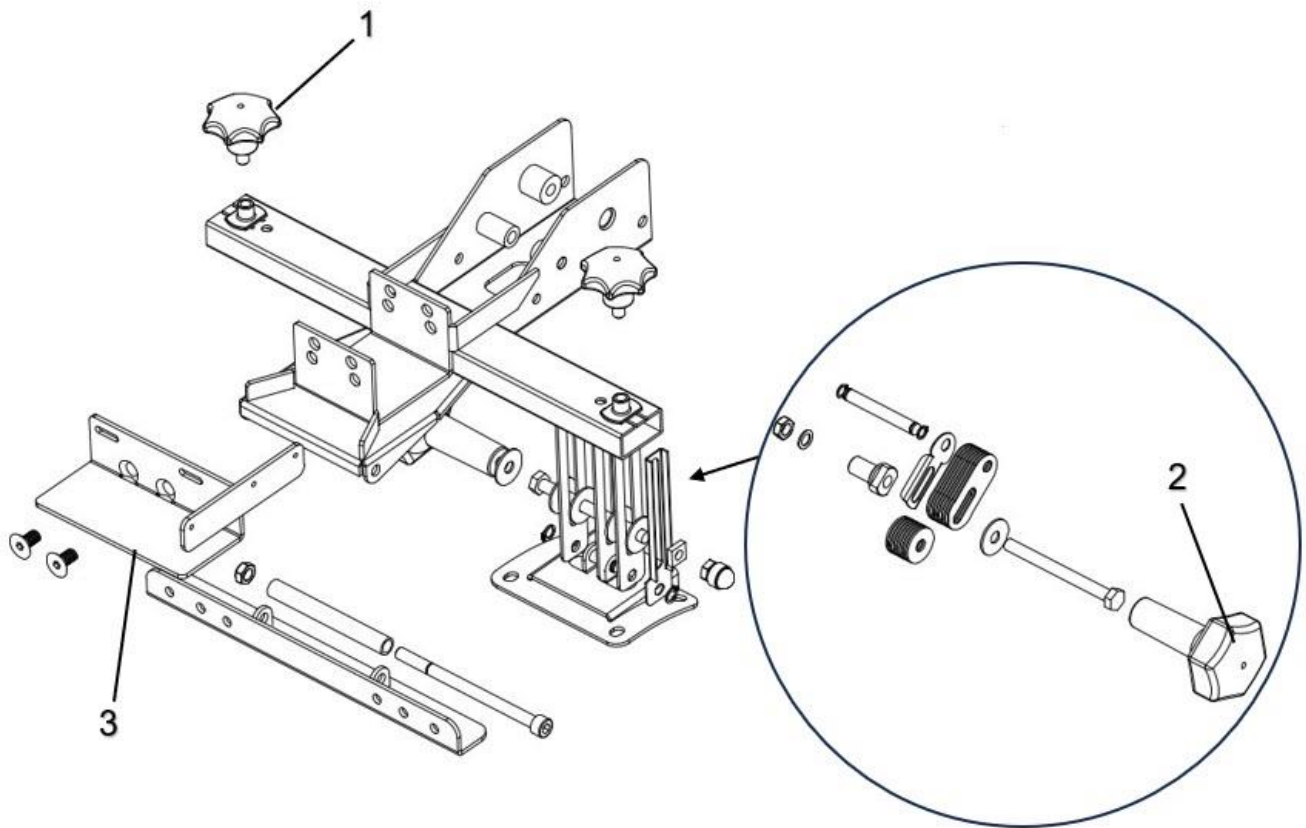

800010-1000 Sittkryss Forma komplett

- | | | |
|----|--------------|-----------------------------|
| 1. | 7S-RATT-8x20 | Stjärnratt diameter 60mm |
| 2. | 7T-RATT-8x90 | Trattratt s-vink/r-vink |
| 3. | SW-1433 | Fästplåt Batteri/elektronik |

Sittkryss Euroflex

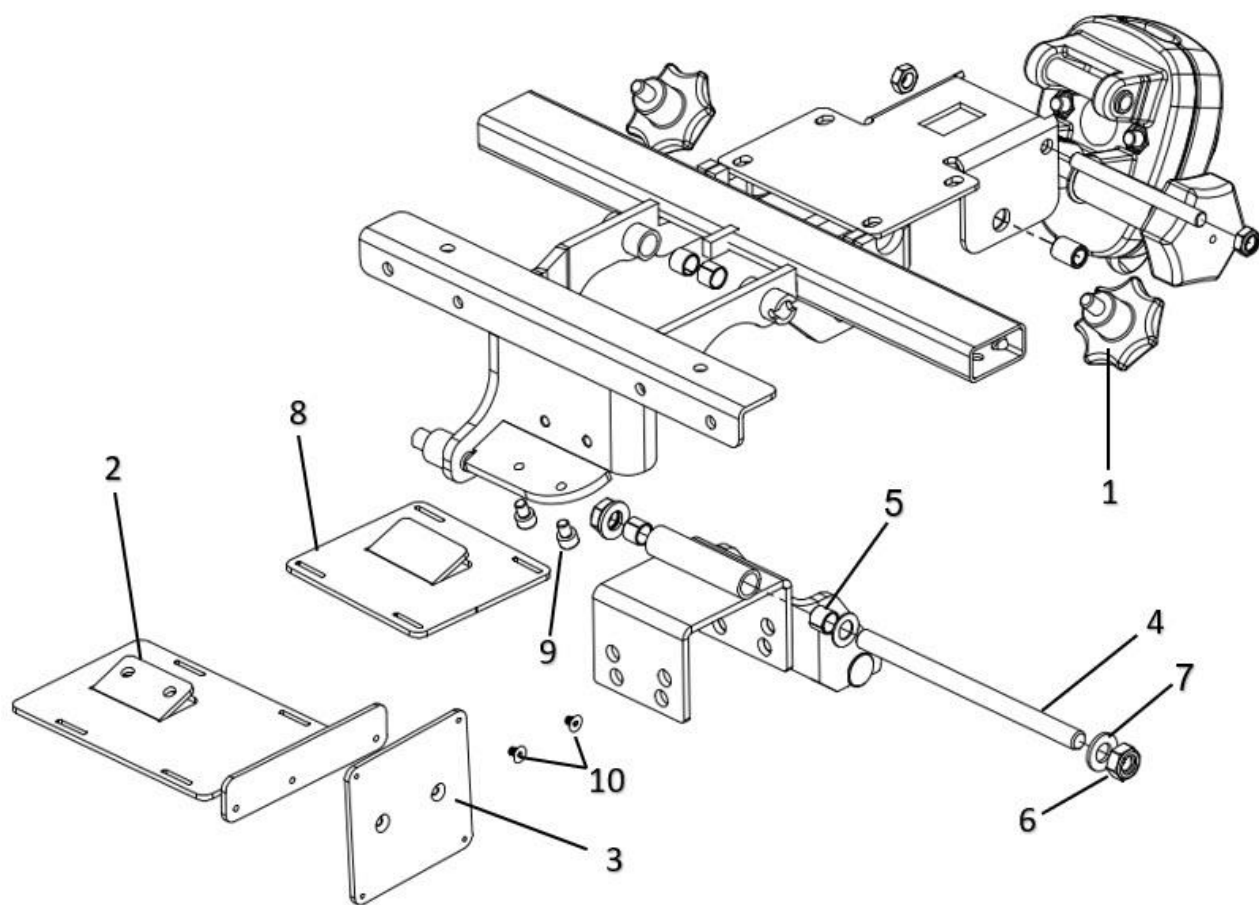


800010-1950

Sittkryss Euroflex komplett

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 1. | 7S-RATT-8*20 | Stjärnratt diameter 60mm |
| 2. | SW-01635 | Batteri och elektronikfäste ny |
| 3. | 10021085 | Fästplåt tidigare elektronikhölje |
| 4. | SW-01732 | Tiltaxel |
| 5. | 7 SI-10/14x8 | Sinterbronsbussning 7 SI-10/14x8 |
| 6. | 7LOCKING-M8L | Låsmutter Nylock M12 |
| 7. | 7BRB-12x | Planbricka M12 |
| 8. | 800010-1951 | Batteri plåt ersätts med SW-01635 och *10021085 |
| 9. | MC6S-6* | Skruv insex M6* |
| 10. | F6S-3* | Skruv försänkt M3* |

* Fästplåt för kvadratisk elektronikbox 249101-2440

Kombifäste

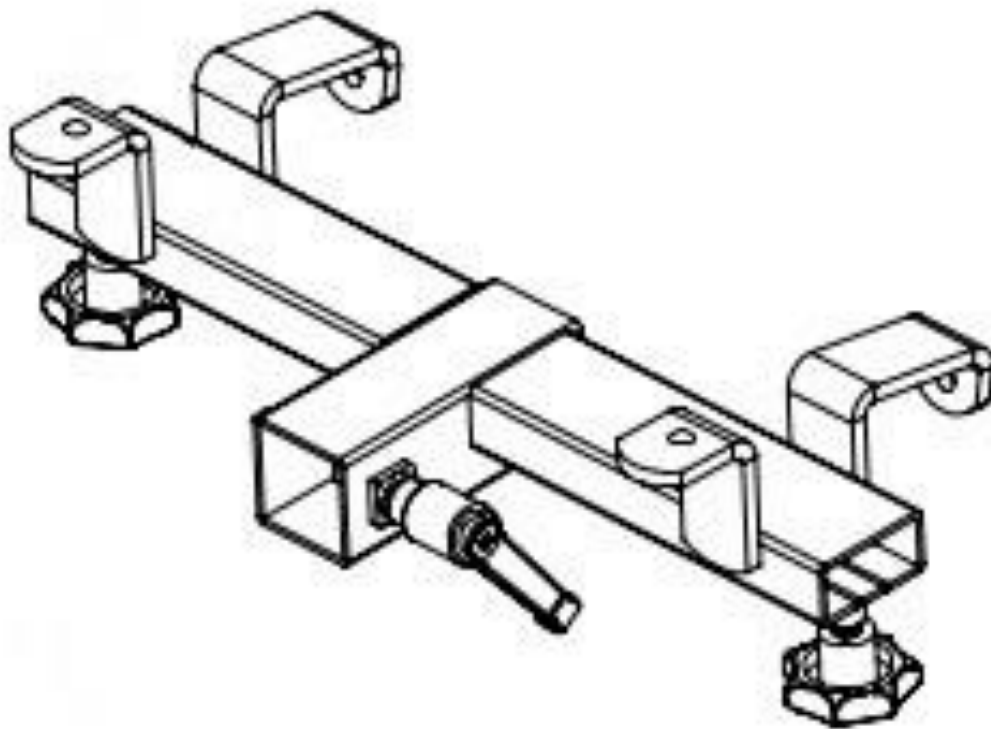

224001-2002

Kombifäste standard med Stjärnratt


224001-2002XL

Kombifäste Classic sitsdjup ≥ 46 cm

224001-2010


Kombifäste sits 40*40 cm komplett

Sittkryss ABC

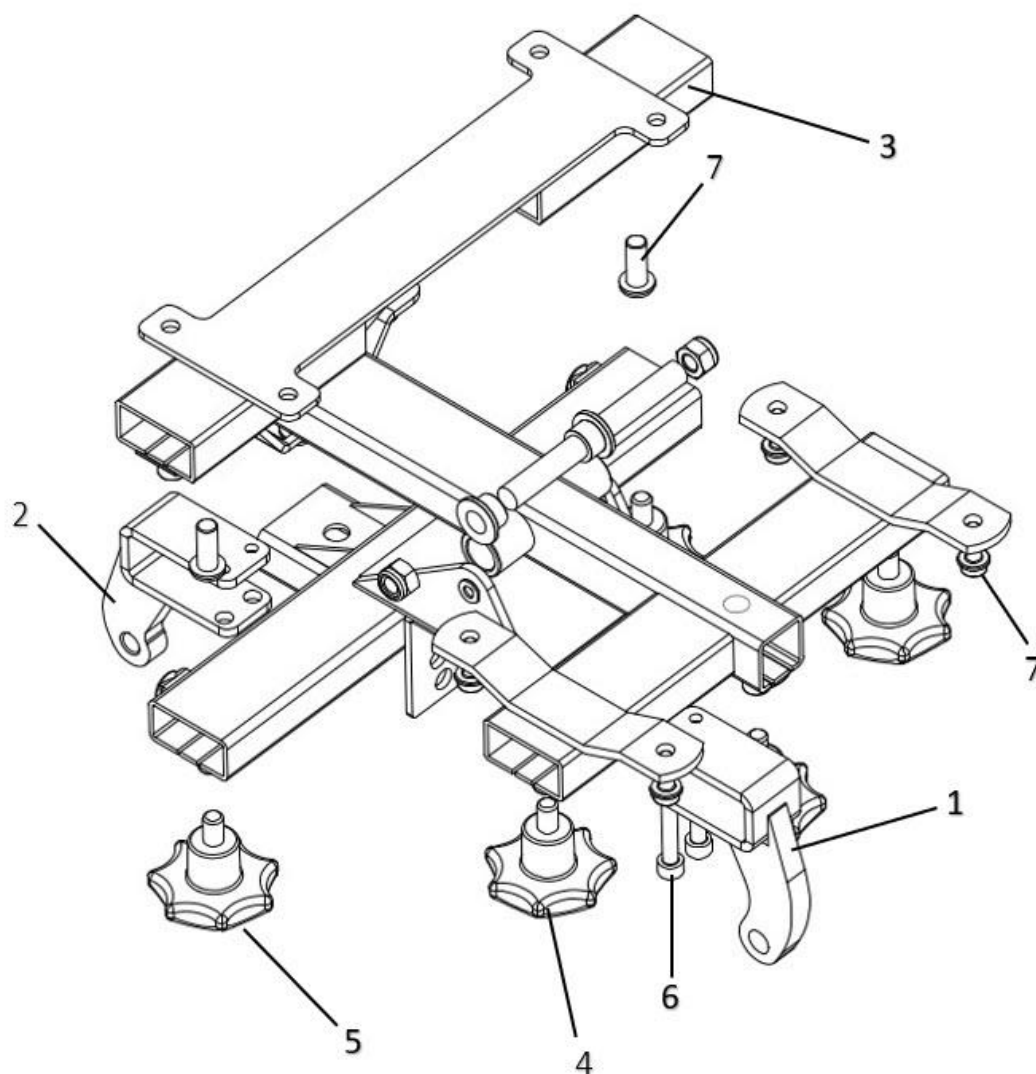


- | | | |
|----|------------------|--------------------------------|
| 1. | SW-01924 | Ställdonsfäste ABC-kryss, fram |
| 2. | SW-01925 | Ställdonsfäste ABC-kryss, bak |
| 3. | SW-01564 | Breddjustering tiltarmstöd |
| 4. | 7RATT- 8x12 | Ratt M8x12 |
| 5. | 7RATT- 8x16 | Ratt M8x16 |
| 6. | 7MC6S- 6x35 FZB | Skruv insex M6x35 FZB |
| 7. | 7MC6SF-6x16 LOCK | Skruv insex M6x16 LOCKING |

Ställdon sitstilt/rygg

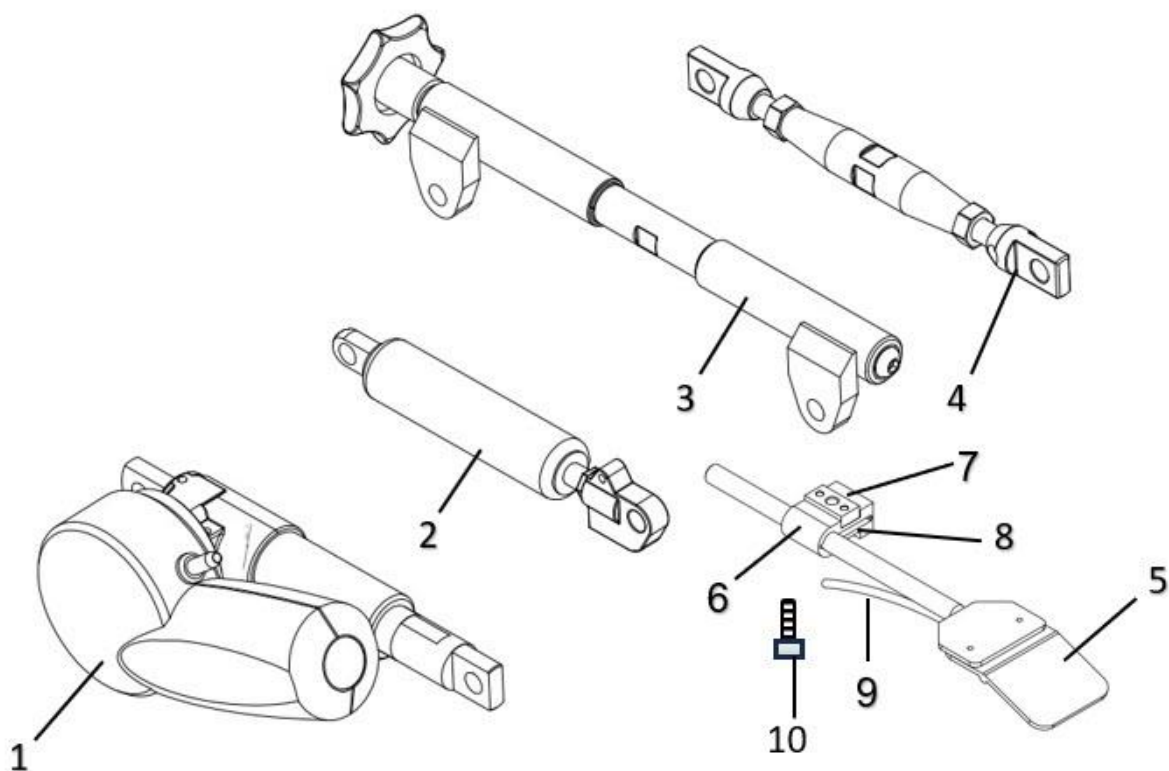


- | | | |
|-----|--------------|--------------------------------------|
| 1. | 299102-8000 | Ställdon 24V 50mm slag tilt/rygg |
| | 299102-8010 | Ställdon 24V 40mm slag tilt/rygg |
| 2. | 624001-9300 | Gaskolv blockerbar tilt/rygg |
| 3. | 800010-1953 | Vev tilt/rygg |
| | 800010-1941 | Vev tilt barn |
| 4. | SW-01832 | Vantskruv tilt/rygg |
| 5. | SW-01903 | Gasreglage armstödsmontering gastilt |
| 6. | 624001-2012 | Klämfäste 30 mm rak |
| 7. | 358001-6700 | Gängat fäste |
| 8. | 368001-6600 | Fyrkantsplatta |
| 9. | 624001-9500 | Wire Gastilt |
| 10. | K6S-M8x20 SV | Skruv insex kullrig M8x20 svartkrom |

Chassi Flexbase

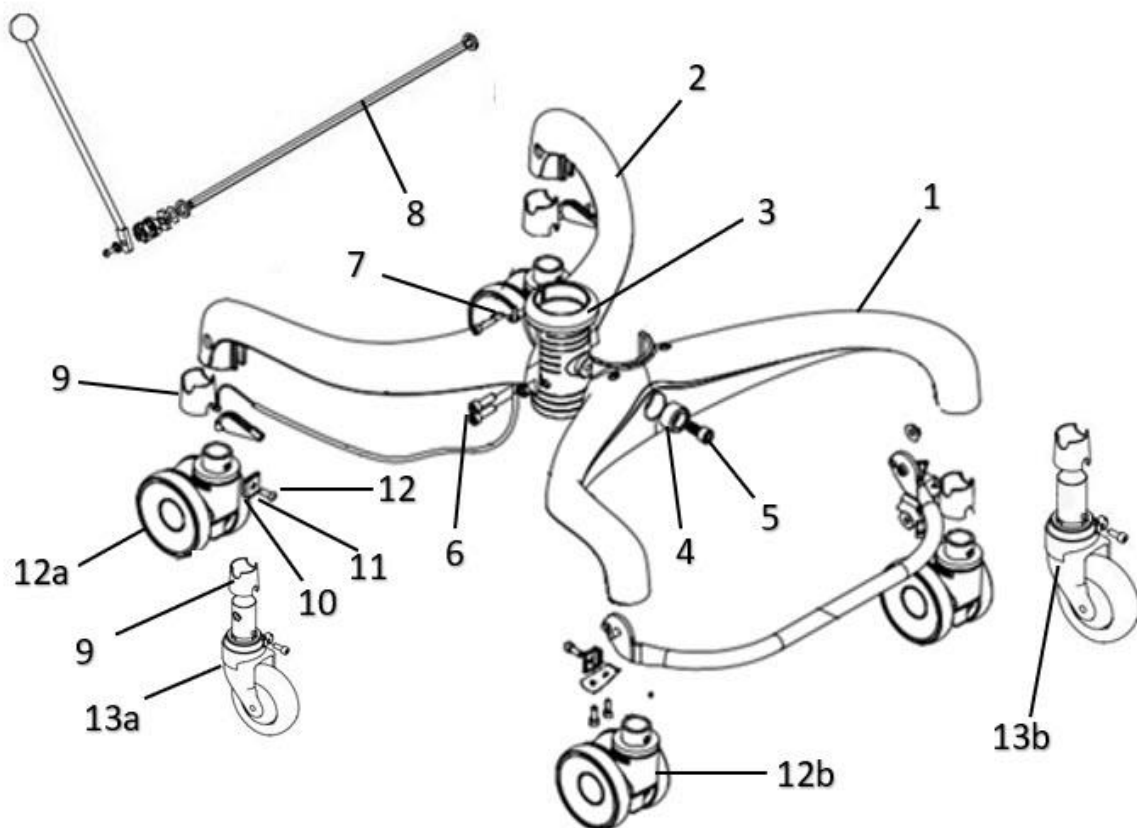


1.	SW-00405	Benhalva Forma chassi
2.	SW-00405-B	Benhalva Forma chassi bearbetad
3.	SW-00404	Klämhylsa Forma chassi
4.	SW00403	Bricka Forma chassi
5.	7MC6S-10*22	Skruv MC6S M10*22 FZB
6.	7MC6S-8*25	Skruv MC6S M8*25
7.	7MC6S-6*20R	Skruv MC6S M6*20 A2 rostfri
8.	SW-01542	Sexkantstång
9.	SW-01543	Styrhylsa hjul Forma chassi
10.	SW-01544	Låsbricka FZB Hjul Forma
11.	7BRB 6,4*12*1,5	Bricka M6*12*1,5
12.	7MC6S-6*20	Skruv MC6S M6*20
12a.	7DUBBELHJUL WIRE	Dubbelhjul bromsat
12b.	7DUBBELHJUL	Dubbelhjul obromsat
13a.	SW00346T	Enkelhjul 100mm bromsat
13b.	SW00329T	Enkelhjul 100mm obromsat
14.	SW-00884	Fotring Forma

Bromsspak Flexbase

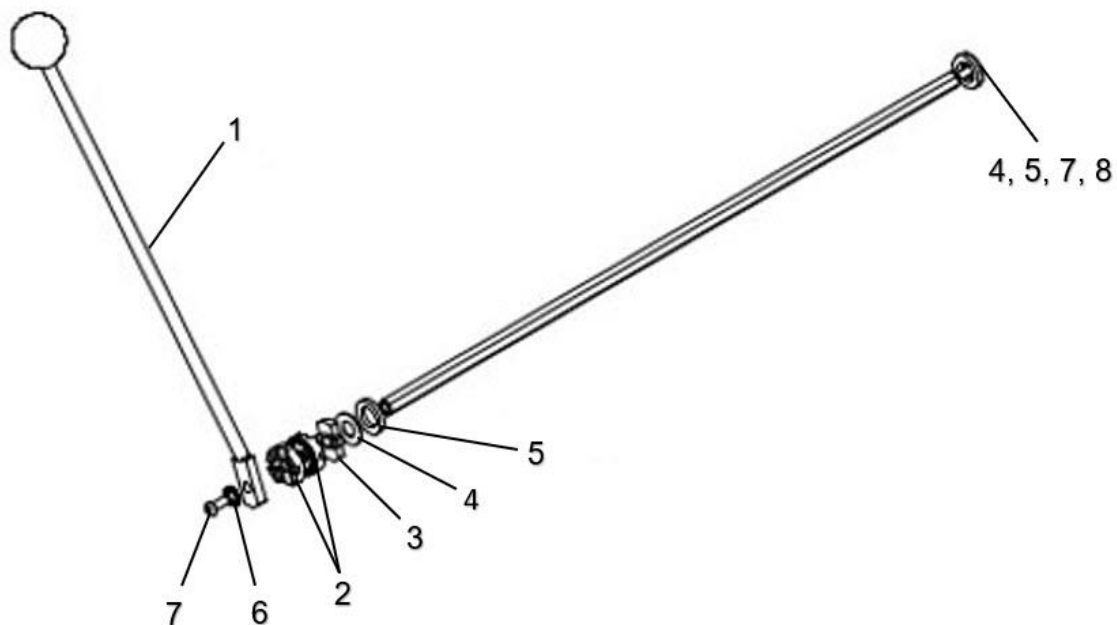


1.	684001-1030K	Bromsspak Basic 2
	224101-1220	Bromsspak lång komplett
2.	624001-9000	Kugglås
3.	SW-020109	Ändfäste bromsstång
4.	7PLASB-25x12x1,5	Plastbricka 25x12x1,5
5.	7PACKNING	Gummipackning 26x16x4
6.	7IZ-8	Låsbricka M8
7.	7K6S-8x35	Skruv kullrig M8x35 svartkrom
8.	7BRB-8,4x16 SK	Bricka 8,4x16 svartkrom

Chassi Junior 52

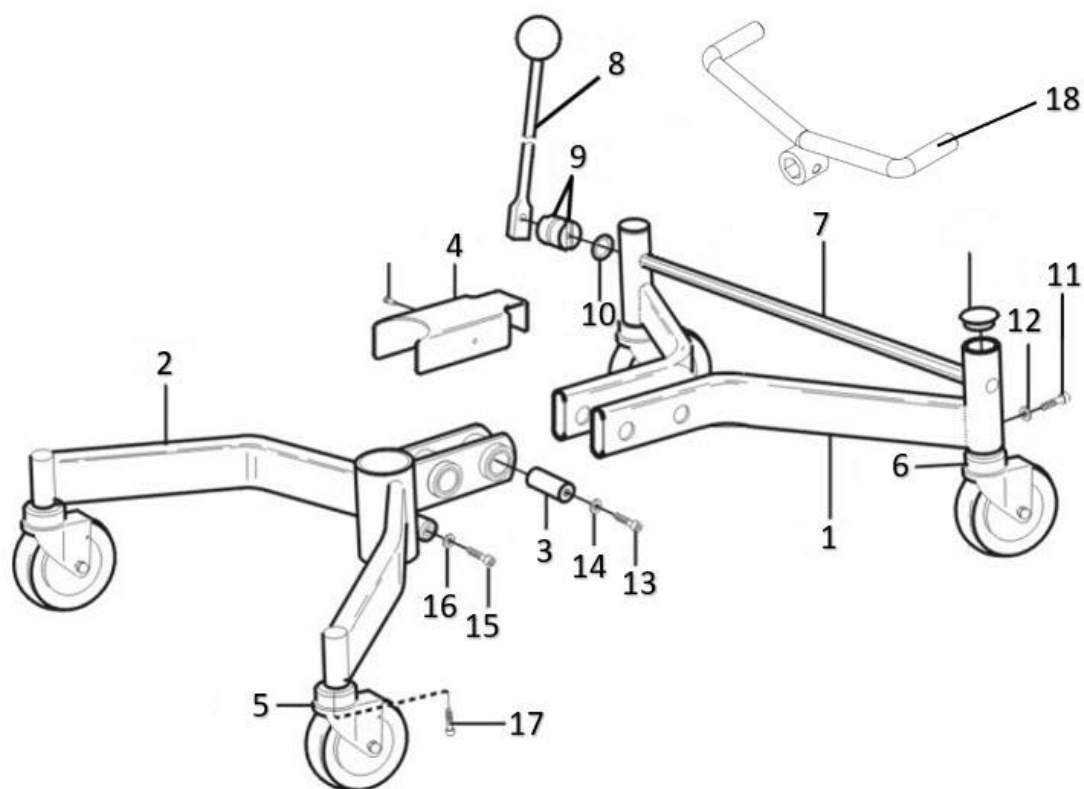


1.	689001–1000	Ramdel bakre
2.	689001-	Ramdel främre
3.	684001–1100	Bussning
4.	684001–9000	Plastkåpa
5.	724005–2000-s	Länkbygel svart med mörkgrått hjul 100 mm
6.	724005–2100-s	Centralbromsat svart länkbygel mörkgrått hjul 100 mm
7.	sw-00844	Sextkantstång
8.	684001–1030K	Bromsspak Basic 2
9.	624001–9000	Kugglås
10.	7PACKN.26*16	Plastbricka 26*16*4
11.	7MC6S-6*10	Skruv insex M6*10
12.	7FBB-6,1	Fjäderbricka M6
13.	7MC6S-8*16	Skruv insex M8*16
14.	7FBB-8,1	Fjäderbricka M8
15.	7MC6S-8*35	Skruv insex M8*35
16.	7BRB-8,4*16	Planbricka M8
17.	7MC6S-10*40	Skruv insex M10*40
18.	234001–1100	Fotbromspedal komplett

Chassi Basic

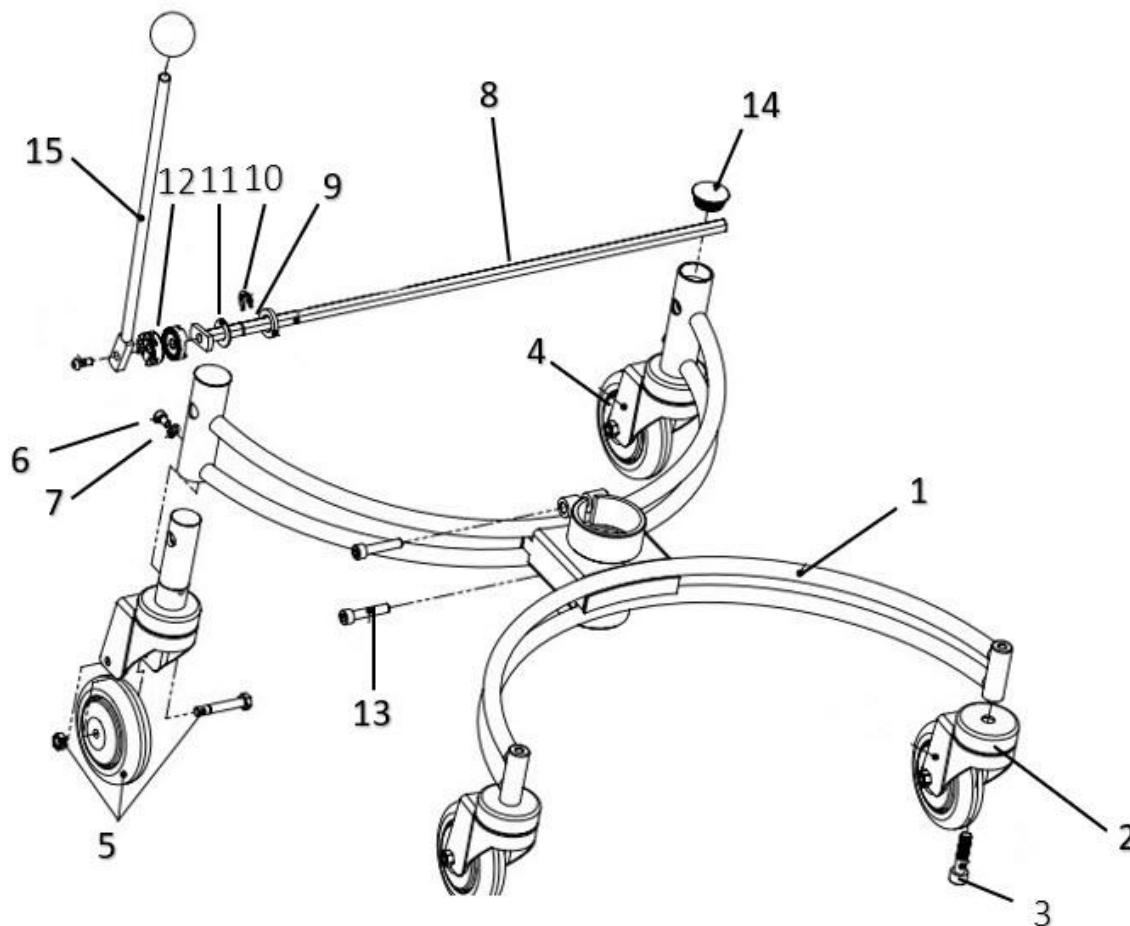


1.	684001-1004K	Chassi Basic
2.	724005-200-SK	Länkbygel svart med mörkgrått hjul 100 mm
3.	7MC6S-10x40	Skruv M10x40 FZB
4.	224006-2100	Hjul bromsat 100 mm Tente komplett
5.	224003-2001	Hjul mörkgrå 100 mm komplett
6.	7MC6S.6x10	Skruv M6x10 FZB
7.	7BRB-6,4x12	Bricka 6,4x12,5 FZB
8.	684001-1035-XLK	Sexkantstång
9.	7PACKN-26x16x4	Gummipackning EPDM 26x16x4
10.	7RS10-STÅL	Spårryttare 10 mm FZB
11.	7PLASTBRICKA	Plastbricka 25x1,5x12 svart nylon
12.	624001-9000	Kugglås
13.	7MC6S-8x40	Skruv insex M8x40 FZB
14.	7SFL-32	Ändavslutare 32x28
15.	684001-1030K	Bromsspak Basic 2

Bromssystem sitsmonterad

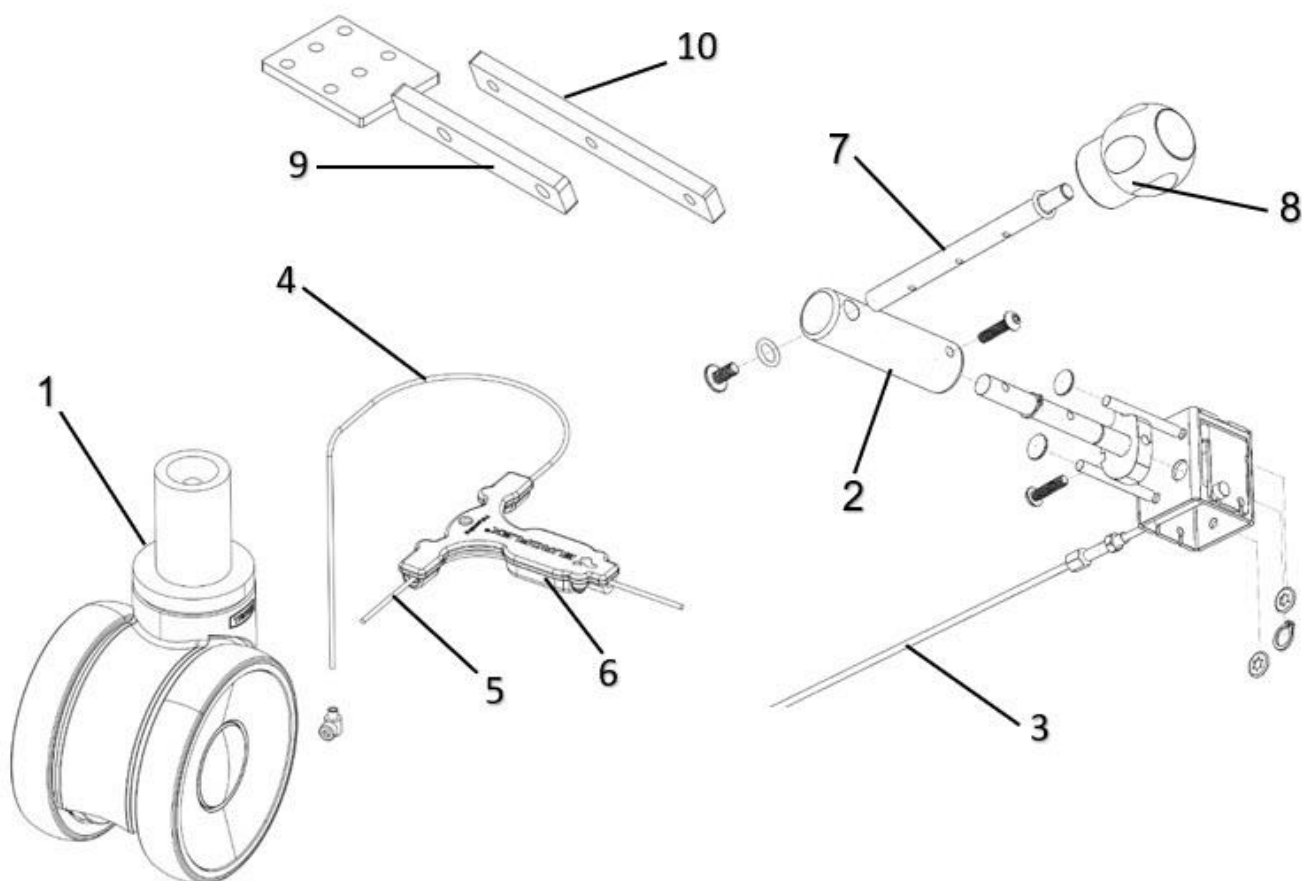


	800002-2000	Bromssystem komplett för 2 bromsade dubbelhjul inklusive wire
	800002-2001	Bromssystem komplett för 4 bromsade dubbelhjul inklusive wire
1.	7DUBBELHJUL WIRE	Dubbelhjul bromsat
2.	61101-0308	Broms förlängare kort
	61101-0306	Broms förlängare
3.	61101-0253-02	Bromsvajer övre
4.	61101-0252-02	Bromsvajer lång
5.	61101-251-02	Bromsvajer kort
6.	261101-0200	Y-split Wire broms
7.	61101-0304	Spakstift
8.	7-245103-C1	Kula bromsspak
9.	10018983	Fäste bromshus
10.	10018986	Breddning fäste bromshus för sits \geq 50 cm bredd

Elektrisk broms

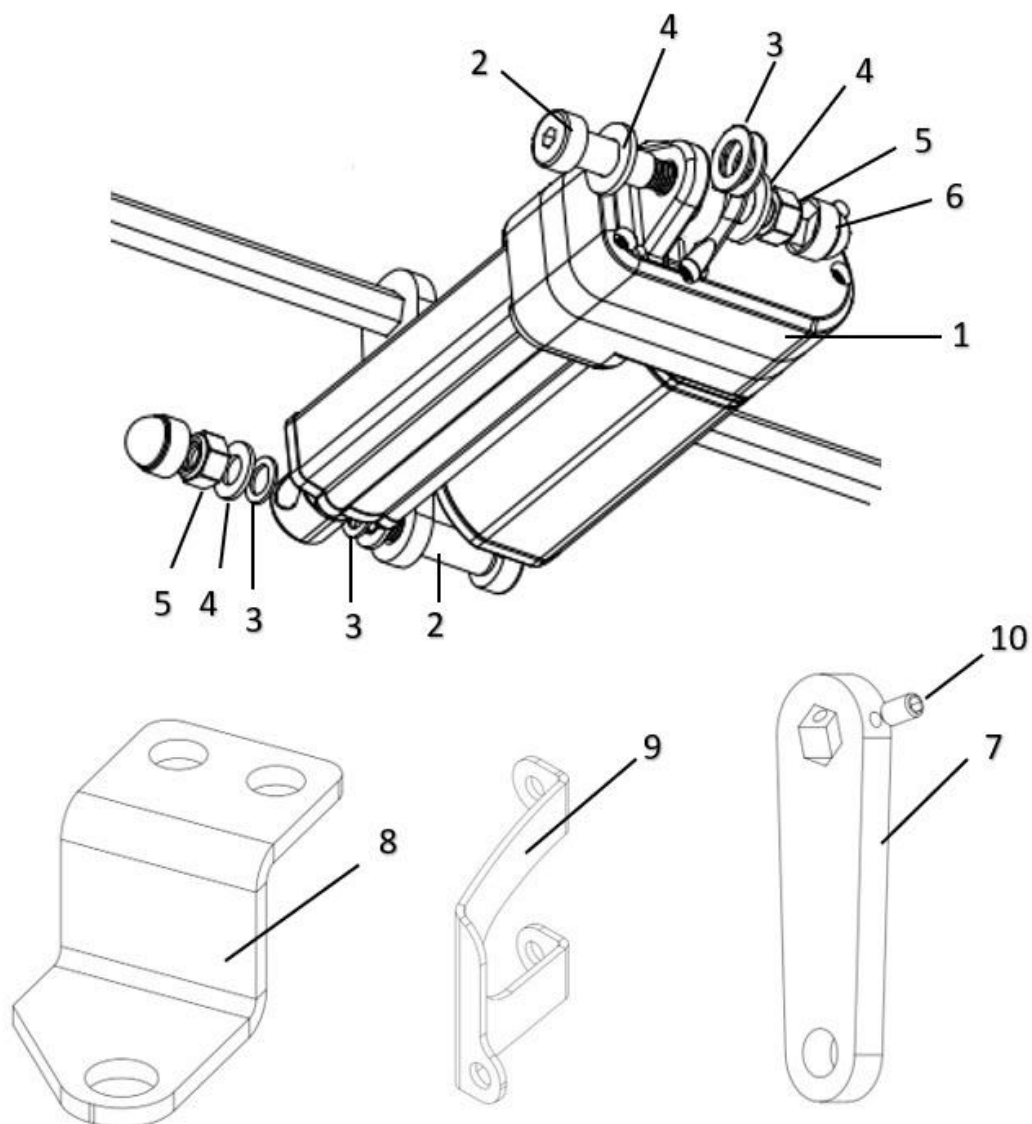


1.	491459	Ställdon TA16-2022-021
2.	7Passbult 10x30	Passbult D10x30 M8
3.	7PLASTB-10,5x18x1	Plastbricka 10,5x18x1
4.	7BRB-10,5x22x2	Planbricka 10,5x22x2
5.	7LOCKING-M8L FZB	Låsmutter M8
6.	7KH-13-8	Mutterskydd M8
7.	7SCHALHBEL-EVM-A	Länkarm sexkantstång
8.	689001-1052	Fäste ställdon elektrisk broms Flexbase chassi
9.	10021059	Fäste ställdon elektrisk broms Basic chassi
10.	7K6SS-4x6	Stoppskruv M4

Sitslyft manuell

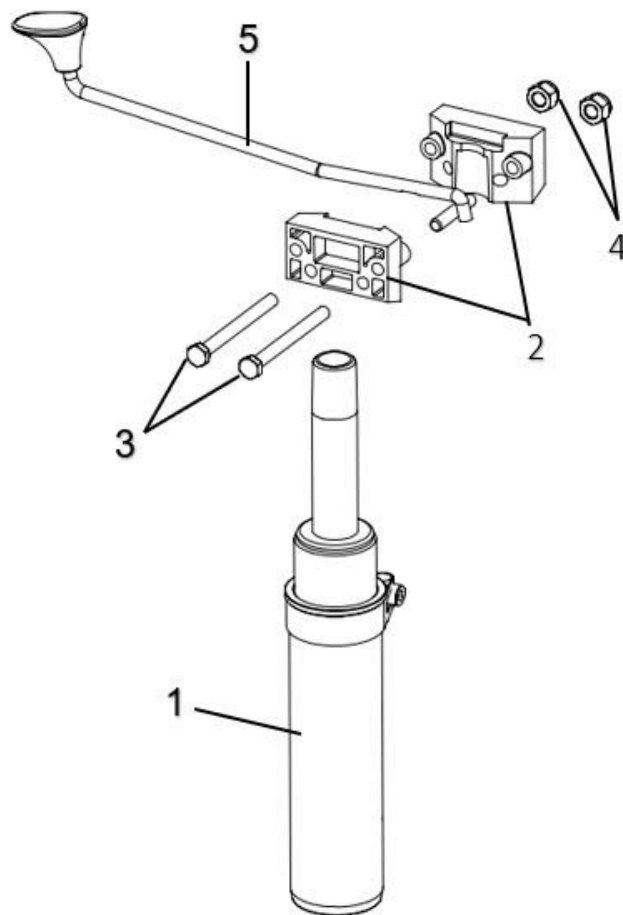


1.	221200-0095	Gaskolv 200 N slag 95 mm komplett
	221400-0095	Gaskolv 400 N slag 95 mm komplett
	221500-0095	Gaskolv 500 N slag 95 mm komplett
	221320-0155	Gaskolv 320 N slag 155 mm komplett
	221400-0155	Gaskolv 400 N slag 155 mm komplett
	221500-0155	Gaskolv 500 N slag 155 mm komplett
	221320-0200	Gaskolv 320 N slag 200 mm komplett
	221400-0200	Gaskolv 400 N slag 200 mm komplett
	221500-0200	Gaskolv 500 N slag 200 mm komplett
2.	SW-01546	Klämback för gaskolv
3.	M6S-8x90FZB	Skruv M8x90 FZB för Forma sittkryss
	M6S-8x100FZB	Skruv M8x100 FZB för tiltkryss
4.	7LOCKING-M8L	Låsmutter M8 DIN 985 FZB
5.	SW-01530	Gashöjningsspak SitRite längd 216 mm till sitslyft
	SW-01529	Gashöjningsspak SitRite längd 191 mm till sitslyft
	SW-00592	Gashöjningsspak Forma längd 176 mm till sitslyft

Sitslyft elektrisk

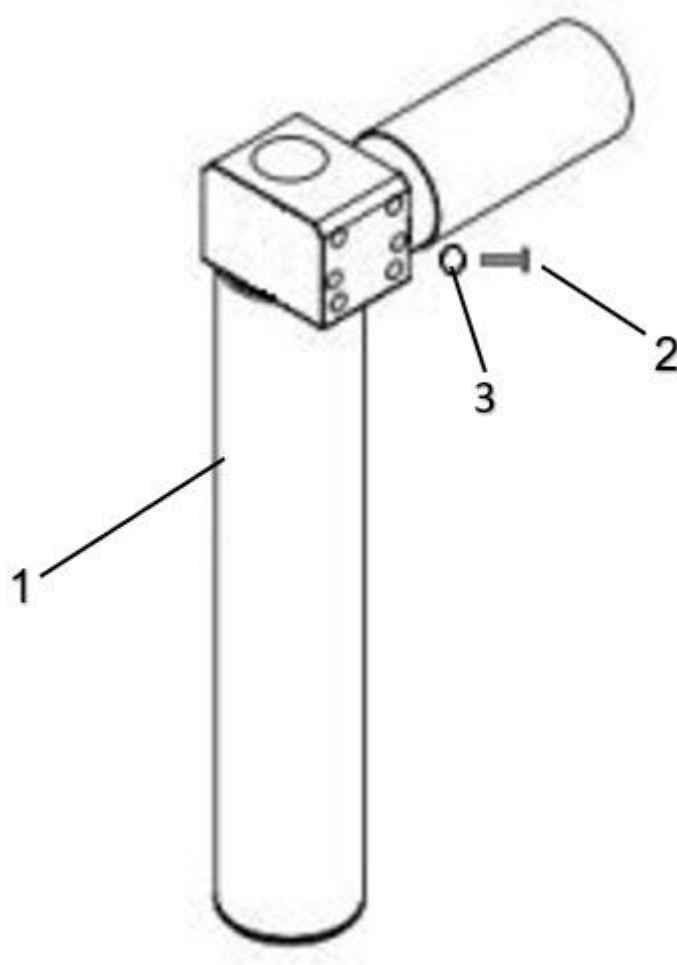

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1. | 249102-8000 | Ställdon sitslyft slag 180 mm |
| | 249101-8000 | Ställdon sitslyft slag 250 mm |
| 2. | SW-01840 | Specialbult M8x26 FZB Tiltkryss bakre infästning |
| | 7M6S-8x19 | Specialbult M8x19 FZB |
| 3. | 7SRB-9x16 | Planbricka SRB 9x18x1,5 FXB |

Styreelektronik

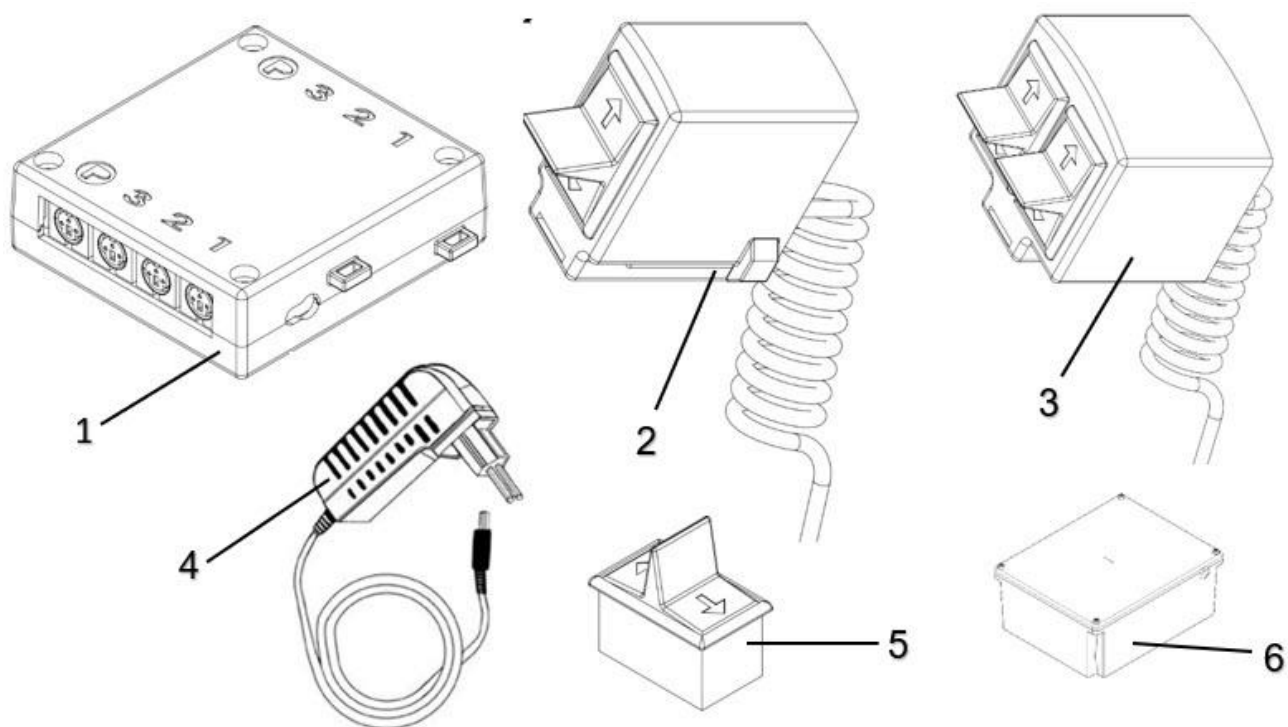

- | | | |
|----|------------------|--|
| 1. | 249101-2440 | Elektronikbox 24 V 4-funktioner komplett |
| 2. | 249101-2452 | Manöverdosa Vipp-modell 1-funktion |
| | 249101-2451 | Manöverdosa Vipp-modell 1-funktion med laddning |
| 3. | 249103-2452 | Manöverdosa Vipp-modell 2-funktion |
| | 249103-2451 | Manöverdosa Vipp-modell 2-funktion med laddning |
| 4. | 7LADDARE-2402SRM | Batteriladdare 24 V 0,56 A |
| 5. | 649101-2450 | Vipp-strömbrytare 1-funktion paddel |
| | 649101-2451 | Vipp-strömbrytare 1-funktion utan paddel |
| 6. | 7RT-24V/1,2 | Batteripack 24 V 1,2 Ah (2st batteri 12 V 1,2 Ah med termosäkring) |

*Euro*vema

