

Monteringsanvisning

Elbroms arbetsstol Basic



Montering av elbroms



1. Ställdon
2. Spiralkabel
3. Skruv MC6S 10x40
4. Skruv MC6S 8x40
5. Planbricka 8x18x1,6
6. Planbricka 10,5x20x2
7. Plastbricka 8,2x14x1
8. Plastbricka 10,5x18x1
9. Distanshylsa 10x1x4,5
10. Nylockmutter M10
11. Nylockmutter
12. Mutterkåpa M8
13. Mutterkåpa M10
14. Schalhbel
15. Ställdonsfäste chassi.



Montera ställdonsfästet på chassit med befintliga skruvar och drag åt ordentligt.



Montera ställdonet på fästet med M10x40 skruven, 2st planbrickor, 2st plastbrickor och nylockmutter. **Skraven får ej dras hårt, det ska gå att rotera den med fingrarna.**

Montera mutterkåpa på muttern.



Demontera bromsspaken, lossa bromsstångens låsning med en skruvmejsel och flytta plastbrickan in mot mitten några decimeter och dra stången ur gaffelhuset.



Montera medbringaren (schalhbel), stolen måste vara obromsad och ställdonet i indraget läge. Hållställdonet i läge och skjut på medbringaren i rätt läge, om den ej träffar rätt mot ställdonet så måste den vändas. Montera tillbaka bromsstången i gaffelhuset och lås den med säkringen.

Om bromsstången är av senaste version ersätts bromsspaken och kuggleden med 1st gummibricka, 1st plastbricka, 1st planbricka och M8x16 kullrig.



Montera ihop ställdonet med medbringaren (Schalhbel) med M8x40 skruv, 2st planbrickor, 2st plastbrickor, 4st distanser och nylockmutter med mutterkåpa på muttern och skruvskallen.

Skraven ska ej dras åt hårdare än att den går att vrida med fingrarna.

Rikta in ställdonet så att det sitter vinkelrätt mot bromsstången. Dra åt stoppskraven på medbringaren för att förhindra att den glider på bromsstången.






Koppla ihop ställdonet med spiralkabeln.



Spänn fast kontakten under ställdonet med 2st buntband.



Led kabeln genom fästet och säkra spiralkabeln i chassit med buntband.

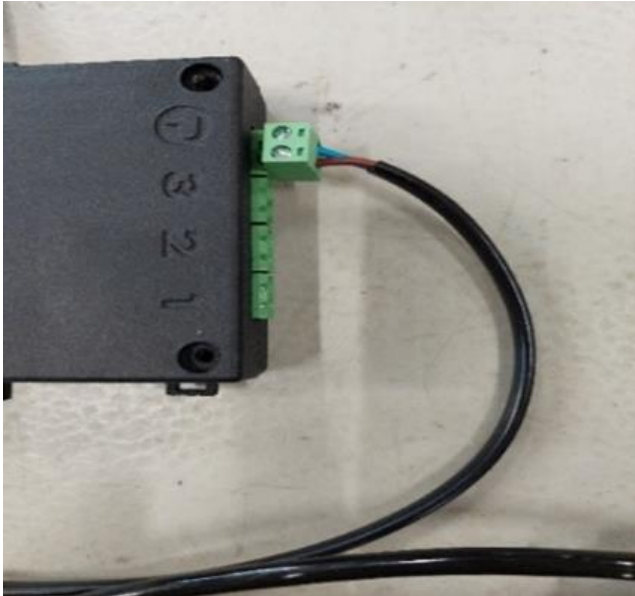

Kontakten till ställdonet kopplas in på utgången märkt med **P**.



Montera vippbrytarens mini Din kontakt i ingång märkt med **P**

Säkra alla kablar med buntband och säkerställ att dom inte kan komma i kläm.