


Monteringsanvisning

Bord fällbart vuxen

Art.nr 224002-4900

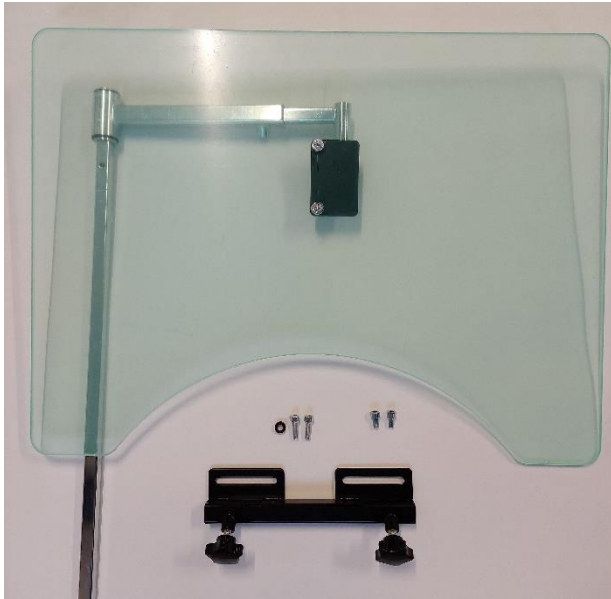




Bordet levereras med skruvar som är 5 mm längre än befintliga på armstödet. Extra skruvar 25 och 20 mm långa och plastdistans som är avsedda att användas i kombination med armstödsdyna 40cm och armstödsförstärkning.





Demontera armstödsdynan med insexnyckel 5 mm.

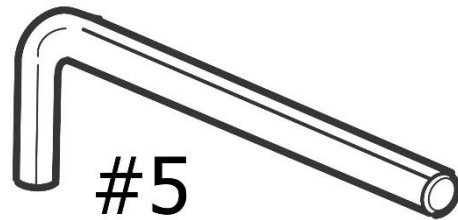

Bordsfästet är liksidigt för att möjliggöra höger eller vänster montage. Fästet monteras mellan armstödsdynan och armstödsstolpen med skruvar som följer med bordet.




Använd medföljande skruvar MC6S-6x16

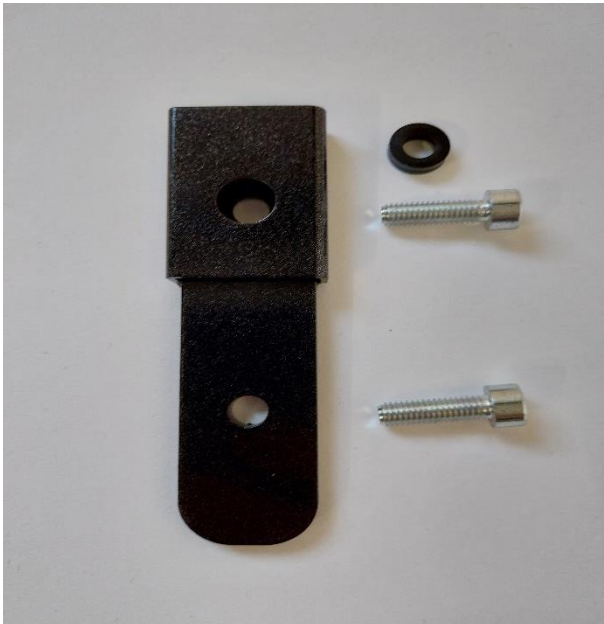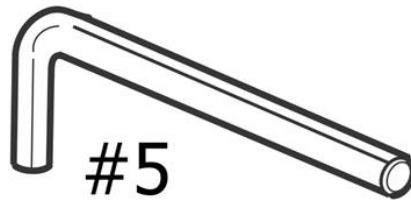


Armstödsdyna 40 cm lång kräver armstödsförstärkning. Montera förstärkningsdelen med MC6S-6x25. Montera den främre skruven MC6S-6x20 och plastbricka 7PLASTB-6,5x12 mellan förstärkningsdelen och armstödsdynan.



Montera tillbaka armstödet på stolen. Montera bordet i bordsfästet.

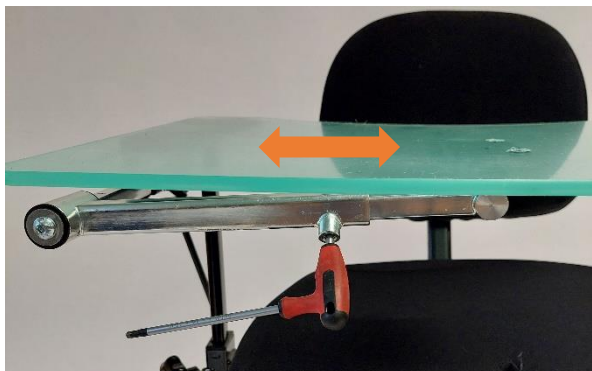

Justera Bordets placering i sidled genom att lossa skruven insexnyckel 4 mm så att det vilar på armstödsdynan på båda sidor, dra åt skruven ordentligt.

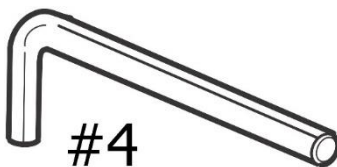

Justera bordet i djupled genom att lossa låsrattarna och skjut in alternativt dra ut bordet, dra åt låsrattarna, *låsringarna kan ersättas med skruvar.*



Prova att fälla bordet åt sidan. *Bordet kan vid låg sitthöjd ta i golvet vilket är viktigt att upplysa användaren om, extra viktigt att ej sänka sitsen med bordet undan fällt.*



Byte av sida



Ta loss bordet.




Lossa fästet och flytta det till armstödet på andra sidan, ta med skruvarna, dom är 5 mm längre än skruvarna som används utan bordsfäste.

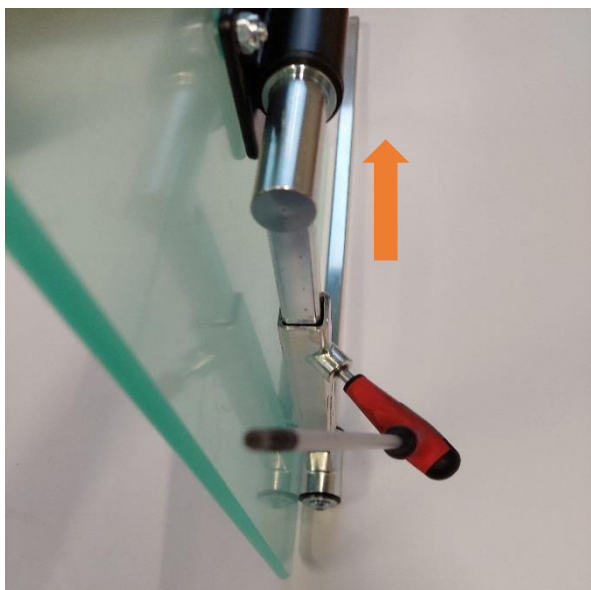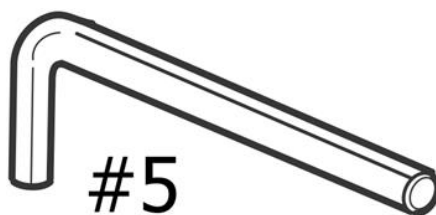


Bordet går att montera på andra sidan utan att ändra något men då kommer skruven för breddjustering att vara vinklad upp mot bordsskivan vilket försvårar justering. För att vända fästet lossa skruven och dra ur bordet.




Lossa skruven helt med insexnyckel 5 mm.

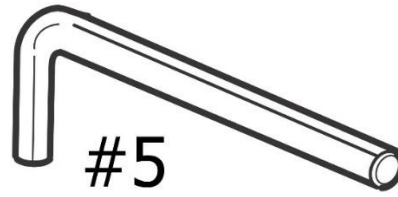


Dra loss bordets bom och ta ur plastbussningen. Roter bordets bom 180°

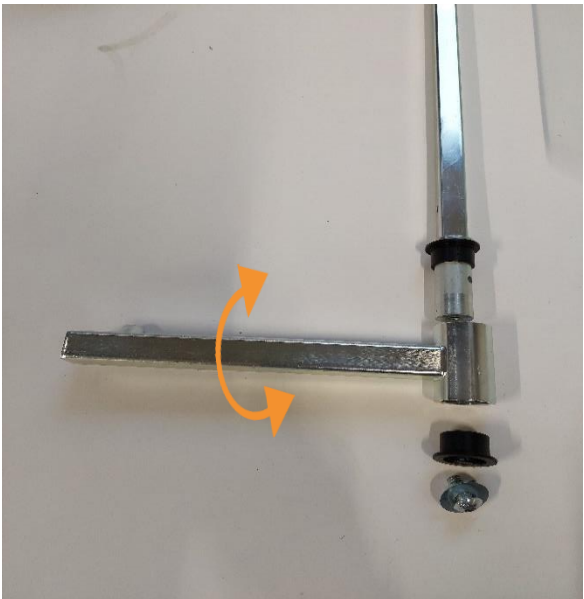

Roter bordets bom 180°

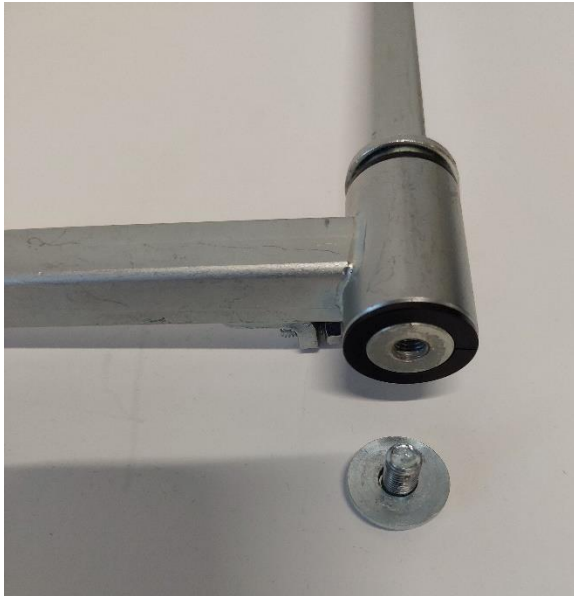

Montera plastbussning, montera bricka och skruv, använd blått gänglim på skruvens gänga.

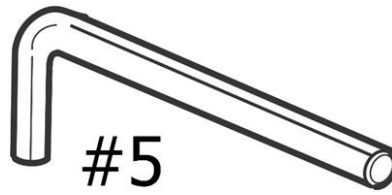

Montera tillbaka bordsskivan, Montera bordet på stolen och justera in det i djup och sidled.





Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se