


Monteringsanvisning

Elbroms EXL



Montering av elbroms

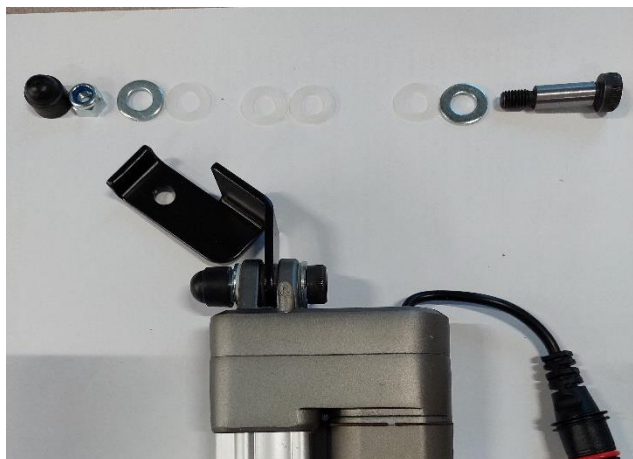

Bakre fästet som monteras i chassit, bilden visar på ingående detaljer. Ställdon och fäste levereras monterat.




Montera ställdonsfästet på chassit med 1st Insexskruv M8x20, 1st Planbricka och 1st nylockmutter, drag åt ordentligt.






Stolen ska vara i obromsat läge när detta moment utförs. Lossa låsningen på bromsstången med insexnyckel 5mm. Dra ur bromsstången så långt att det går att föra den genom medbringaren på ställdonet kolvstång

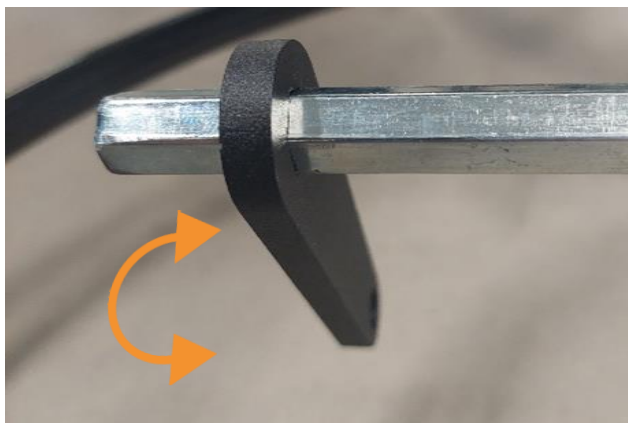



Montera på medbringaren (schalhbel) på bromsstången, stolen ska vara obromsad och ställdonet i sitt indragna läge, ställdonets axelhål ska nu överensstämja med hålet i medbringaren avstånd mellan centrum på hålen ska vara 170mm i obromsat läge. Om avståndet ej stämmer måste medbringaren vridas 180°

Montera tillbaka bromsstången i gaffelhuset. Demontera bromsspaken och ersätt den med Gummibricka, plastbricka, Planbricka och M8x16 kullrig, lika som andra sidan.

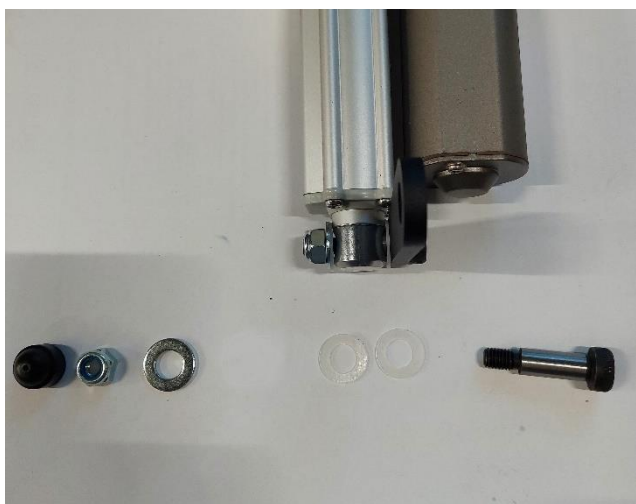

montera ihop ställdonet med medbringaren (Schalhbel) med Passbult, 1st planbrickor, 2st plastbrickor, M8 nylockmutter, drag åt ordentligt men kontrollera att passbulten går att rotera med fingrarna den får inte klämma hårt mot ställdonets kolv. Montera mutterkåpa på muttern.

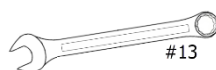

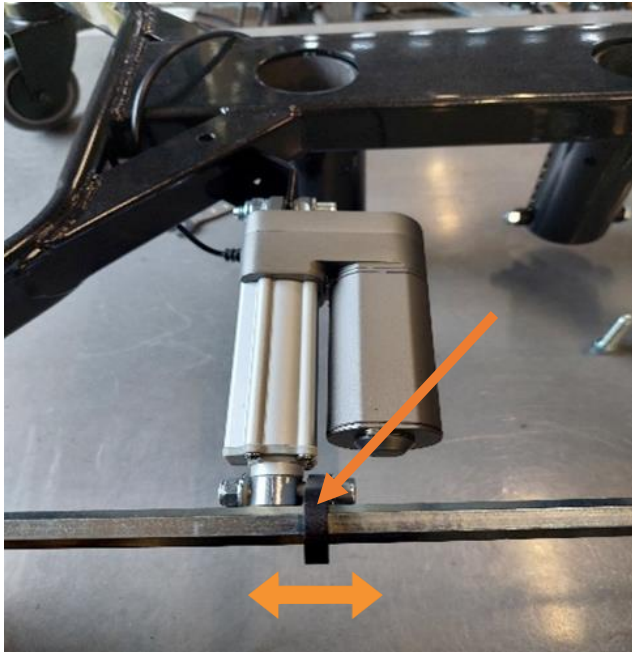


Rikta in medbringaren på bromsstången så att ställdonet sitter rakt (vinkelrätt mot bromsstången) Dra åt stoppskruven på medbringaren för att förhindra ställdonet kan komma att sitta snett.



Koppla ihop ställdonet med spirakabeln.



Spänn fast kontakten under ställdonet mellan motor och axelhuset med 2st buntband.

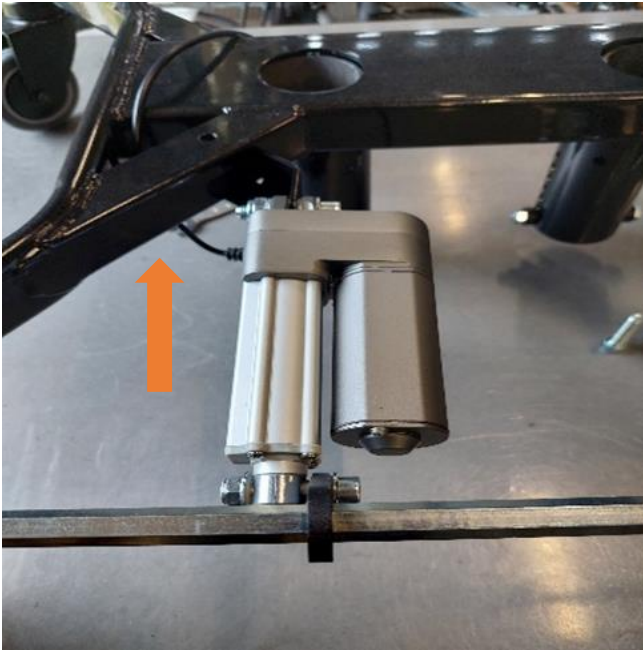

Dra kabeln genom chassit och fixera spiralkabeln med buntband i chassit.



Montera kontakten i elektronikens utgång märkt med **P**. Montera vippbrytarens mini Din kontakt i ingång märkt med **P**

Säkra alla kablar med buntband och säkerställ att dom inte kan komma i kläm.



Anslut vippströmbrytarens Mini Din kontakt till ingång märkt **P**

Säkra kablarna med buntband och kontrollera så att dom inte kan klämmas.