



Monteringsanvisning

Byte av sitslyftdon gas EXL

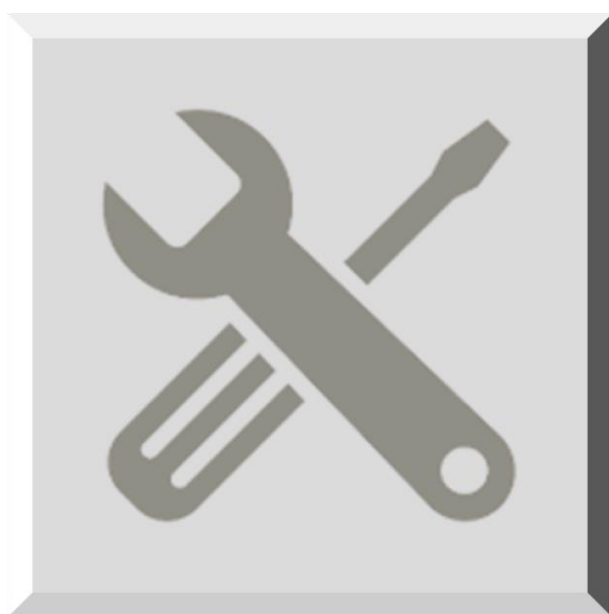

Byte av Gaslyftdon

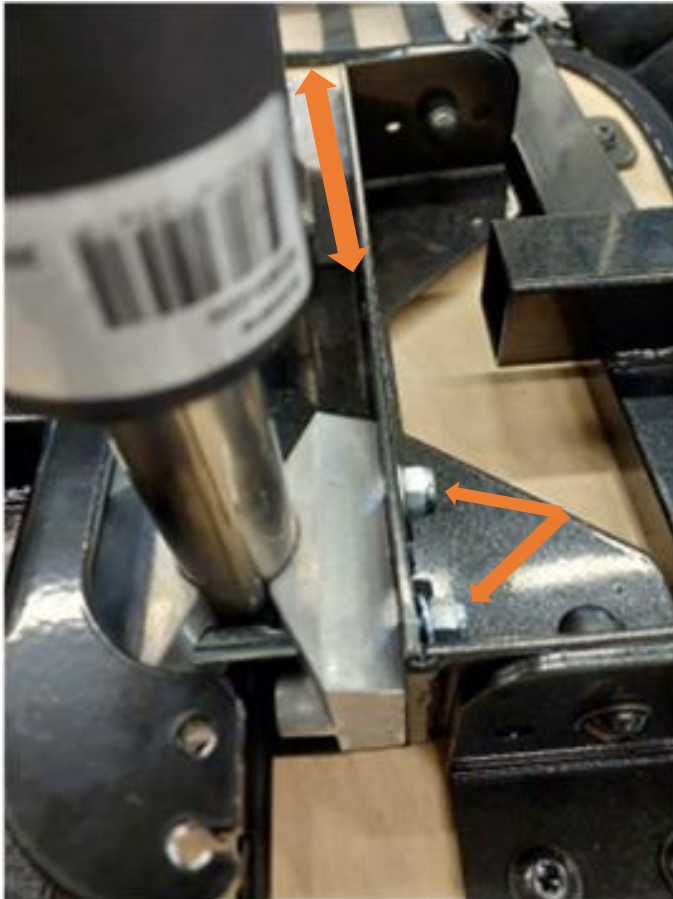

Sänk armstöden maximalt och vänd stolen upp och ner, placera den på ett arbetsbord.

Lossa Skruvarna som håller gaskolven några varv med två fasta nycklar 13mm

Lyft gaskolven rakt upp ur klämbäckarna. Montera den nya gaskolven i klämbäckarna, observera att den måste tryckas ner till stoppet i klämbäckarna.

Vrid gas kolven så att båda kolvarna sitter lika. Dra åt skruvarna ordentligt när gaskolven är rätt placerad.



Prova att aktivera gaslyften, om den ej reagerar när reglaget aktiveras behöver vajern justeras med vajerspännaren. Lossa låsmuttern och vrid vajerspännaren moturs för att spänna vajern. Observera att det ska finnas ett litet glapp mellan armen och gaskolven, om den är för hårt spänd kommer gaskolven att vara aktiverad hela tiden.