


Monteringsanvisning

Lyftdon i chassi EXL



Montering av lyftdon i chassi

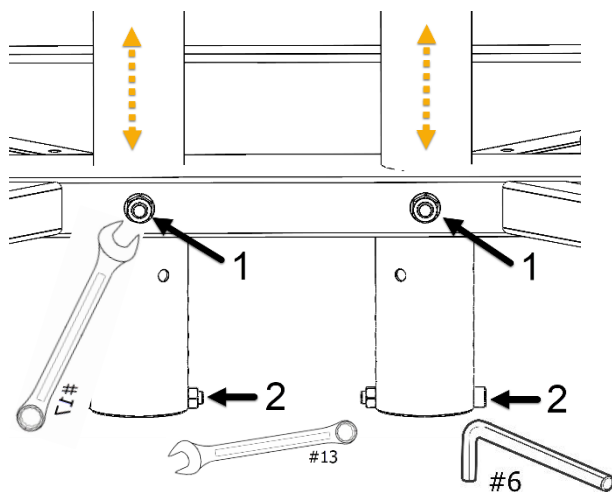

Vid montering av lyftdonen är det nödvändigt att rikta in låsringarna inuti chassit och att lossa skruvarna som fäster lyftdonet i sittkrysset något varv så att det kan röra sig en aning för att få ner lyftdonen.

Skruvarna **(2)** Måste vara monterade innan då dessa är ändlägesstopp, Om lägsta sitthöjden ska höjas måste skruvarna flyttas innan lyftdonen sänks ner i chassit.

Dra åt muttrarna **(1)** när lyftdonen är helt nedsänkta mot skruvarna **(2)**.

Höjden på lyftdonen är justerbar i steg om en centimeter.

