


Monteringsanvisning

Sittenhet i chassi EXL

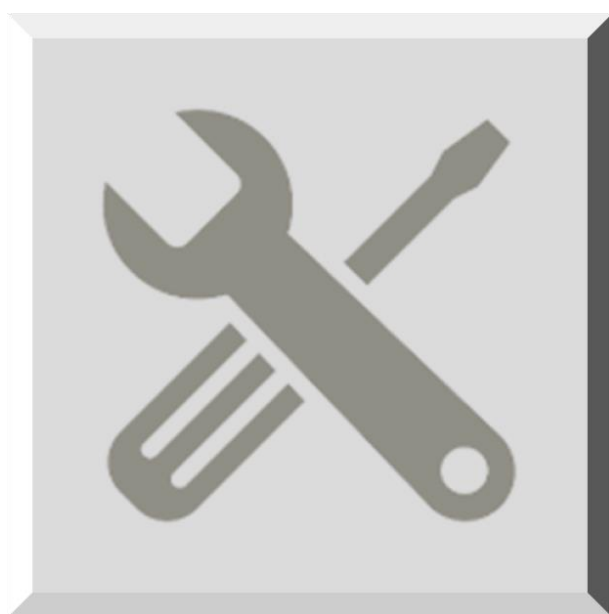

Demontering/montering sittenhet



Ta bort mutterskydden med skruvmejsel.

Lossa muttrarna som låser lyftdonen i chassit några varv med fast nyckel 17mm.

Lyft sittenheten rakt upp.



Vid montering underlättar det att lossa en av gaskolvarna något upp i sittkrysset för att få ner båda kolvarna i chassit.

Rikta in båda låsringarna så att dom ligger rätt i chassit.

Sänk ner sittenheten rakt och kontrollera att den är nere och vilar mot stoppskruvarna (höjdinställningsskruvarana).

Dra åt låsmuttrarna ordentligt och sätt tillbaka mutterskydden.