


Monteringsanvisning

Sittkryss arbetsstol EXL



Montering och justering sittkryss

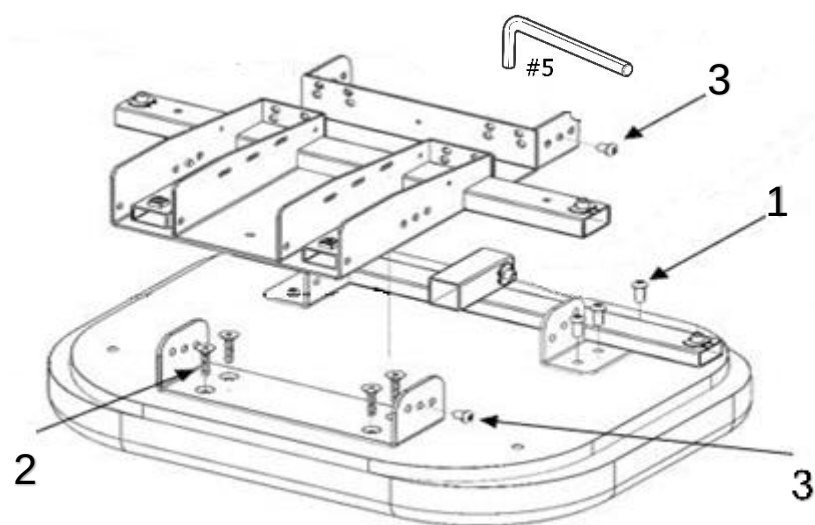

Montera sitskryssets främre fäste i sitsplattan med Kullrig insexskruv M8*30 **(1)** plus fjäderbricka.

Montera bakre fästet med försänkt insexskruv M8*30 **(2)**

Sitskrysset placeras på plats och vinkeln på sitsens justeras in med hjälp av hålbilderna **(3)** Skruv Insex M8*20, Planbricka och låsmutter M8.

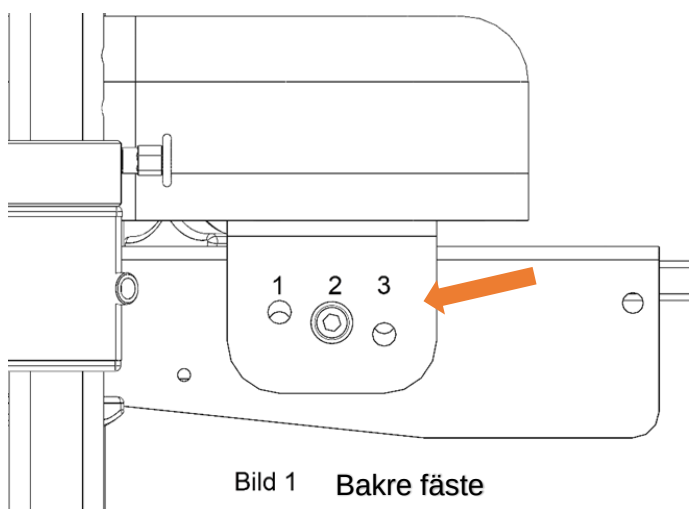


Bild 1 Bakre fäste

Justera sitsvinkel enligt: Plan sits använd hål 2 både främre och bakre Fästet **se bild1&2.**

För sitsvinkel bakåt, placera den bakre och skruven i hål **1**. Och den främre i hål **3**

För sitsvinkel framåt Placera den bakre skruven i hål **3** och den främre i hål **1**.

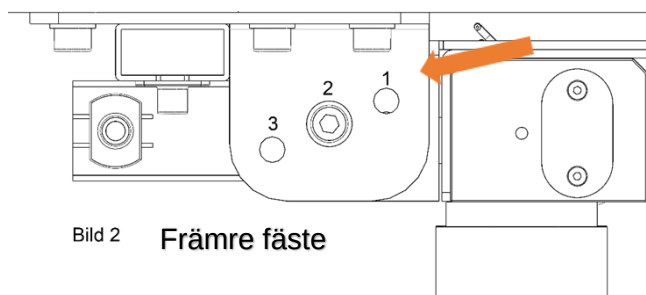


Bild 2 Främre fäste