


Monteringsanvisning
Halvbord vuxen fällbart
Art.nr 224002-4910



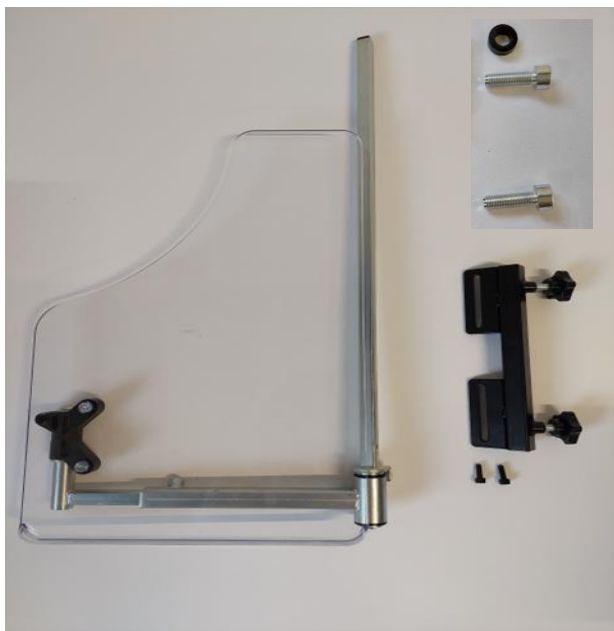


Halvbord vuxen artikelnummer 224002-4910

Bordet levereras med skruvar som är 5 mm längre än befintliga på armstödet. Extra skruvar 25 mm långa och plastdistans som är avsedda att användas i kombination med armstödsdyna 40cm och armstödsförstärkning.




Demontera armstödsdynan med insexnyckel 5 mm.

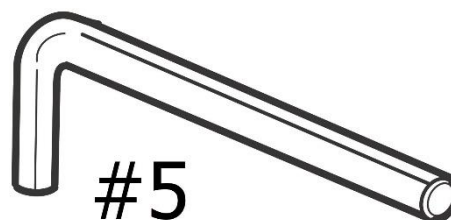

Bordsfästet är liksidigt för att möjliggöra höger eller vänster montage. Fästet monteras mellan armstödsdynan och armstödsstolpen med skruvar som följer med bordet.




Använd medföljande skruvar MC6S-6x16

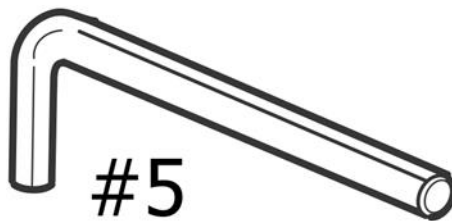



Armstödsdyna 40 cm lång kräver armstödsförstärkning. Montera förstärkningsdelen med MC6S-6x25. Montera den främre skruven MC6S-6x20 och plastbricka 7PLASTB-6,5x12 mellan förstärkningsdelen och armstödsdynan.




Montera tillbaka armstödet på stolen. Montera bordet i bordsfästet.

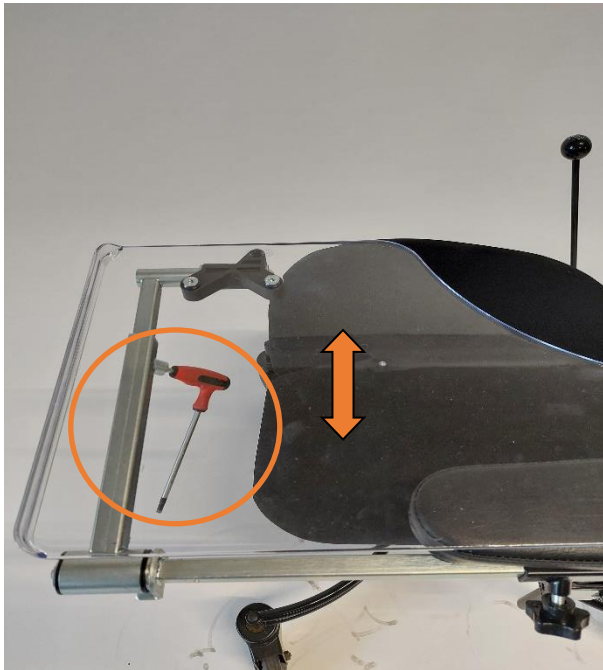

Justera Bordets placering i sidled genom att lossa skruven med insexnyckel 4 mm så att det vilar på hela armstödsdynan.

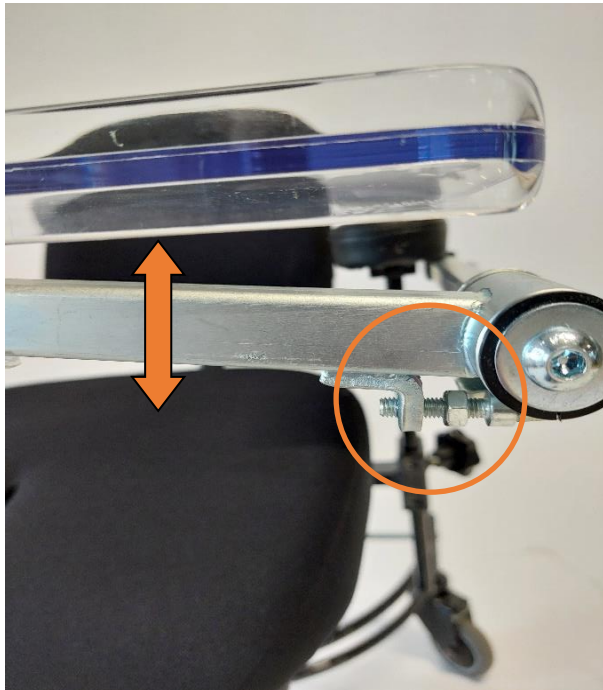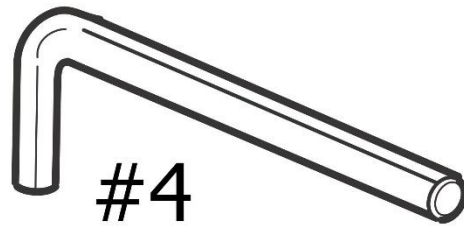

Justera bordet i horisontalplanet så att det är plant när det vilar mot armstödsdynan, lossa låsmuttern på justerskruven med blocknyckel 10 mm, vinkla upp bordet en bit så att justerskruven går att skruva in/ut. Om bordet lutar nedåt mot mitten av stolen skruvas den moturs så mycket som behövs för att det ska ligga plant, skruva in skruven medurs om bordet lutar utåt mot armstödet.

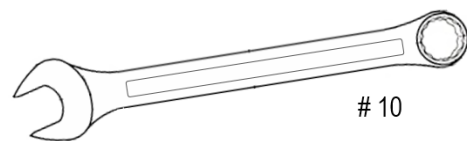



Justera bordet i djupled genom att lossa låsrattarna och skjut in alternativt dra ut bordet, dra åt låsrattarna.

Prova att fälla bordet åt sidan.

Byte av sida





Lossa skruvarna som fäster bordsskivan i fästet med insexnyckel 4 mm och ta loss den.

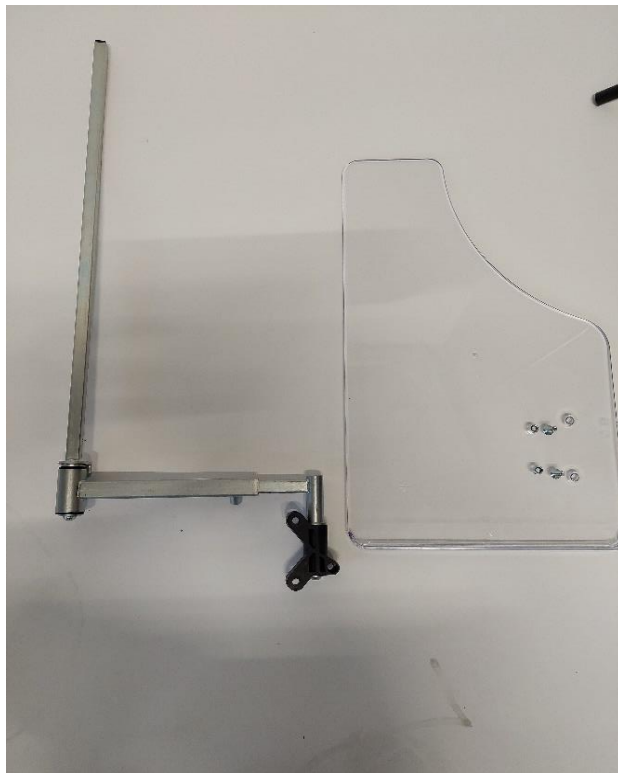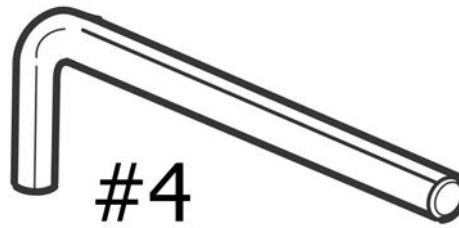





Lossa skruven helt med insexnyckel 5 mm.

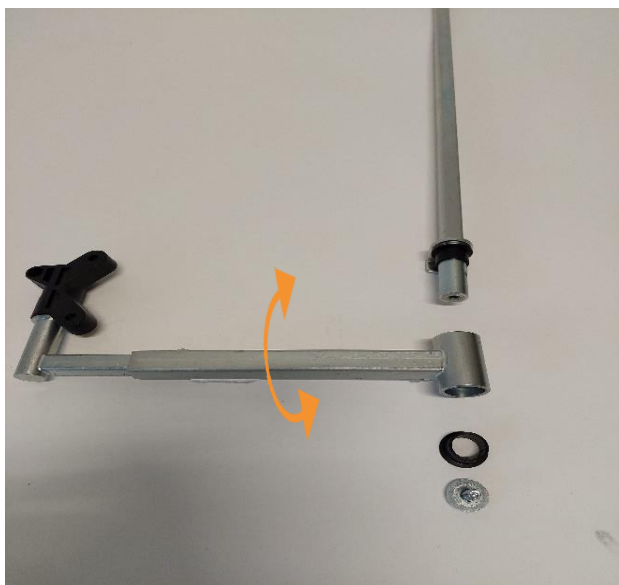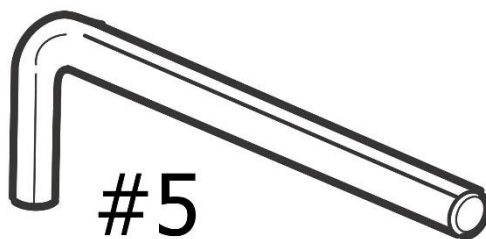



Dra loss bordets bom och ta ur plastbussningen. Roter bordets bom 180°

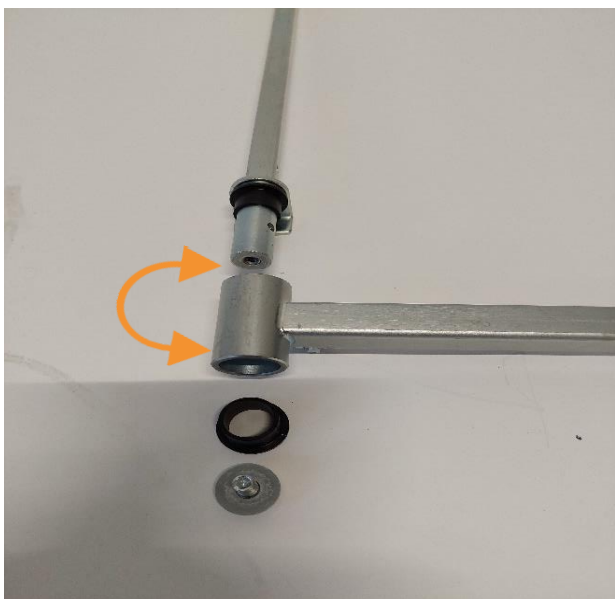


Fäll över bommen från ena sidan till motstående sida.

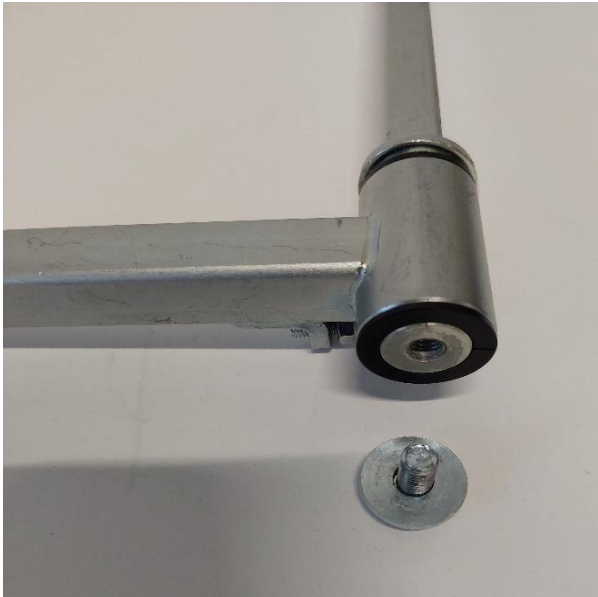


Montera plastbussning, montera bricka pus skruv, använd blått gänglim på skruvens gänga.

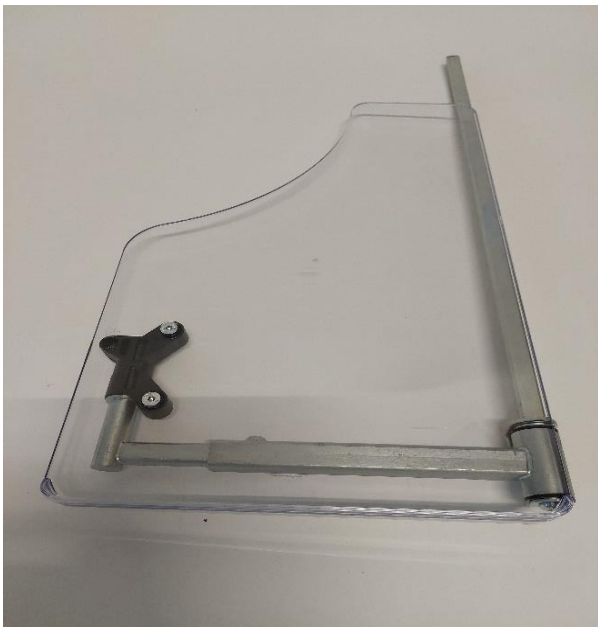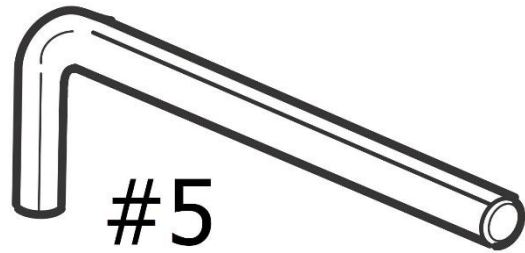

Montera tillbaka bordsskivan.

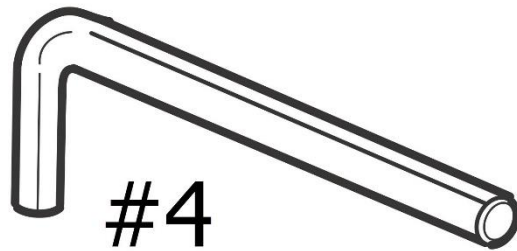

Om fästet är monterat på fel sida lossa och flytta det enligt

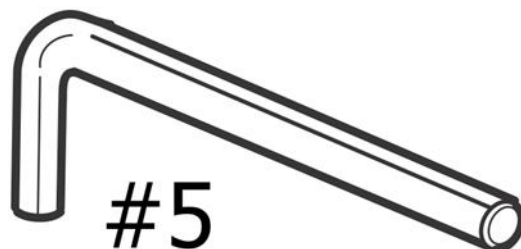

Eurovema

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se