

MONTERINGSANVISNING


Bricka ABC fällbar




Montering bricka



Ta loss armstödet från sittkrysset genom att lossa skruven med insexnyckel 4 mm några varv. Dra ut armstödet ur sittkrysset.

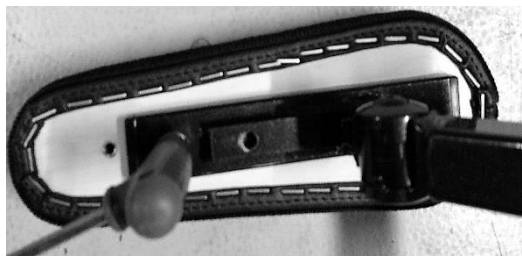

Lossa båda skruvarna som fäster armstödsplattan med insexnyckel 5 mm.

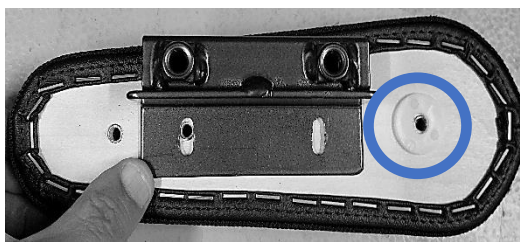

Montera fästet med medföljande skruvar och distansbricka enligt bild med insexnyckel 5 mm.




Fästet vänds så att brickan monteras på armstödet utsida



Montera tillbaka armstödet på sittkrysset.



Montera brickan i fästet.

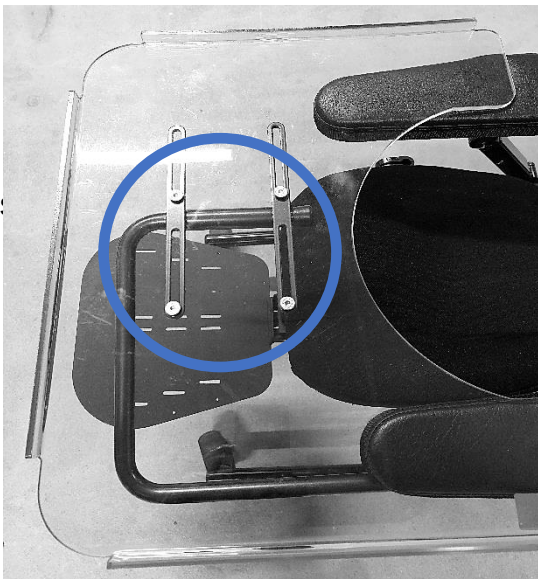

Ställ in brickans placering i sidled genom att skruvarna som håller brickan med insexnyckel 4 mm och blocknyckel 10 mm.

lo:



Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se