

MONTERINGSANVISNING

Byte av centralbromsat hjul



Byte centralbromsade hjul



Demontera skruv och brickor som låser bromsstången med insexnyckel 5 mm



Dra ur bromsstången ur hjul gaffeln.



Lossa skruvarna som håller hjul gaffeln i chassit med insexnyckel 5 mm. Dra ur hjulet ur chassit.



Vid montering av nya hjulet ska märkningen med bromsriktning vara vända mot chassits vänstra sida för att bromsaktiveringen ska fungera åt rätt håll.

Montera tillbaka skruvarna som låser hjulet i chassit.
Montera tillbaka bromsstången.

Prova bromsarna och rotationsspärren.

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se