


MONTERINGSANVISNING


Byte av vajer sitslyft HiLo



Byte av vajer sitslyft

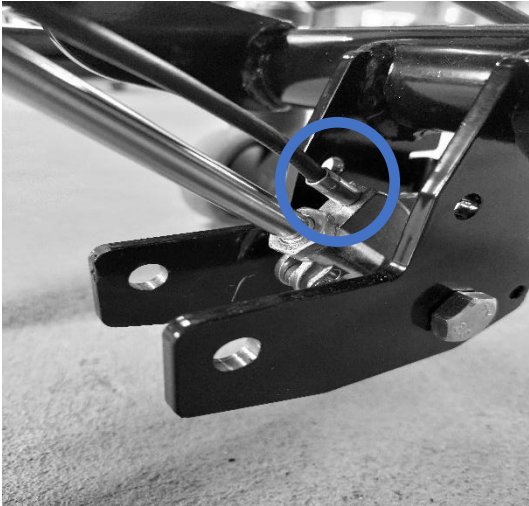


Haka ur vajerhöljet ur mothållet.

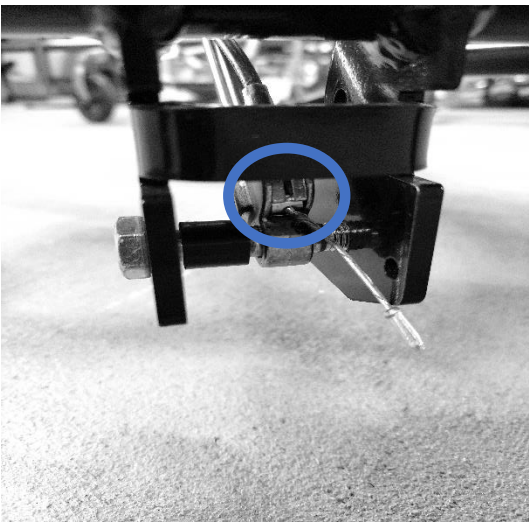


Lossa vjern från gaskolvens utlösarmekanism. Ta bort vajernippel alternativt klipp av vjern.




För vjern mot handtaget så att vajernippeln kommer ut ur hålnippeln i handtaget.

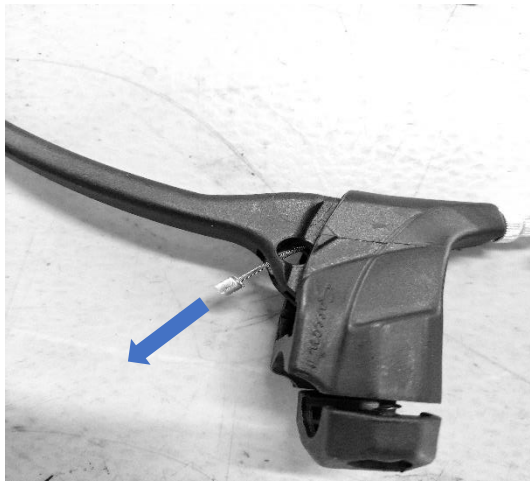

Ta bort hålnippeln och dra ur vajern.

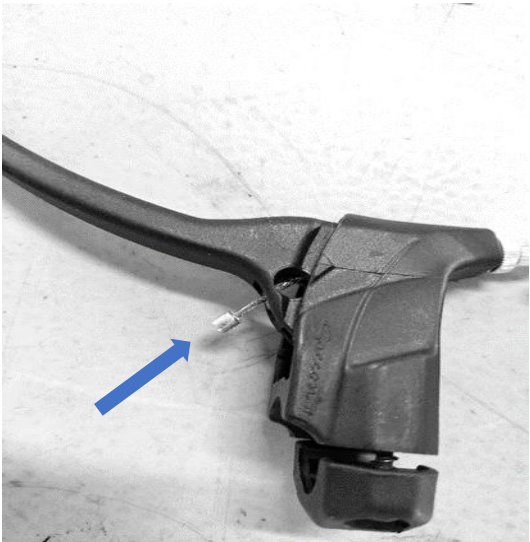


Montera ny vajer i omvänd ordning och lås den med hålnippeln, glöm inte vajerspännaren mellan vajerhöljet och handtaget.

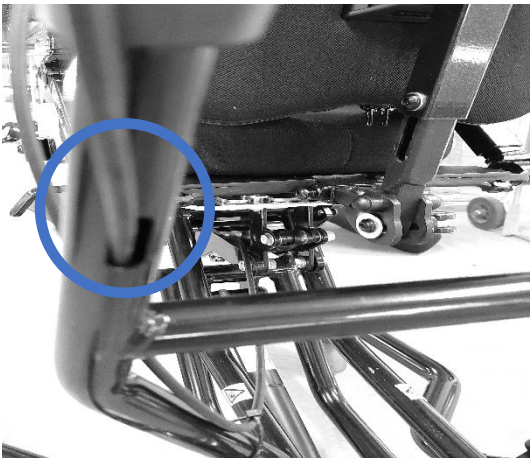


För vajern genom det övre uttaget i körbågen och ut längst ner.



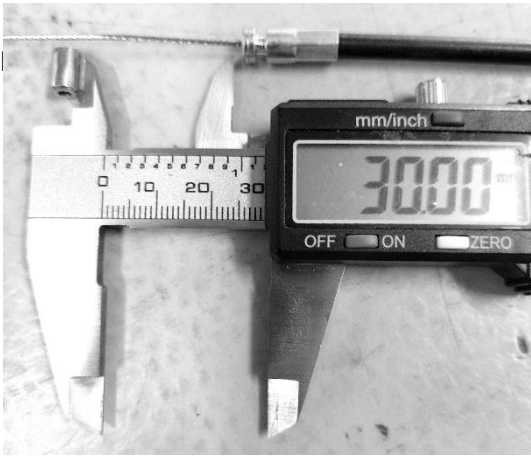

Dra ut vajern maximalt, sätt dit låsnippeln 30 mm ut från dra åt låsskruven ordentligt.

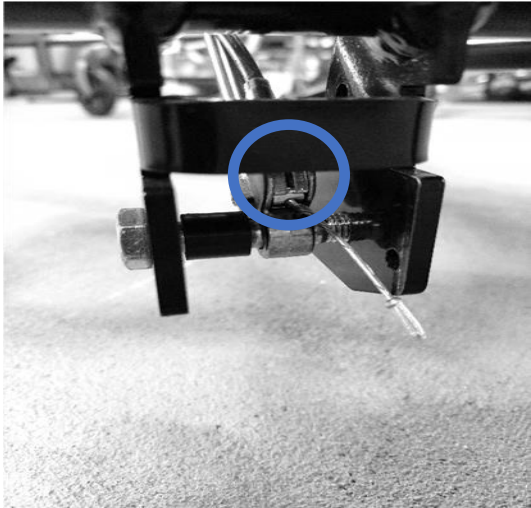

Fäst vajern i armen på utlösarmekanismen.



Haka i vajerhöljet och tryck fast det ordentligt. Prova att sitslyften lyfter och att den inte sjunker vid belastning, om den inte lyfter måste vajern spännas, om den rör sig utan att handtaget trycks måste vajern släckas, detta utförs med spännskruven vid handtaget.

Eurovema

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se