


MONTERINGSANVISNING

Byte gasfjäder sitstilt HiLo



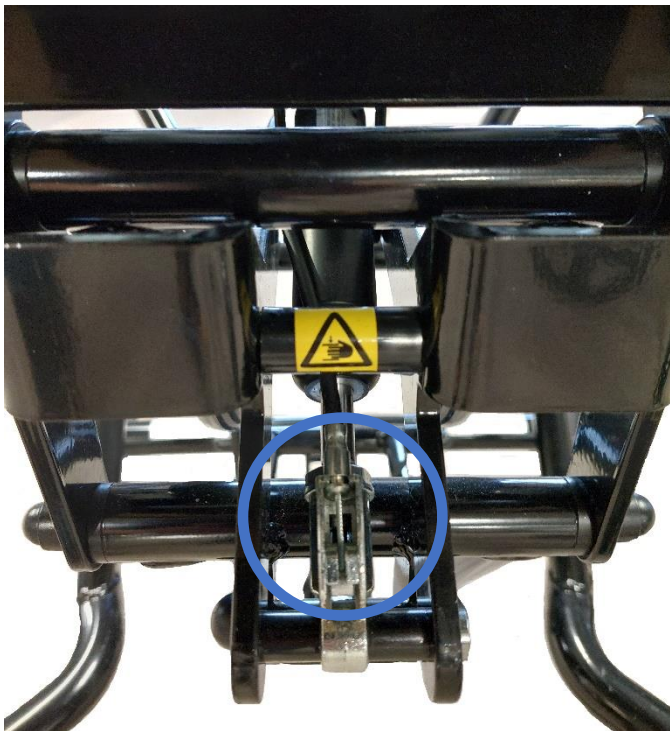


Varning! Klämrisk

Lägg stolen på sida alternativt blockera tilt leden så den ej kan fällas ihop.


Lossa vajern från gasfjädern.




Lossa skruven i främre fästet.

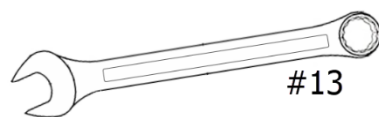

#13

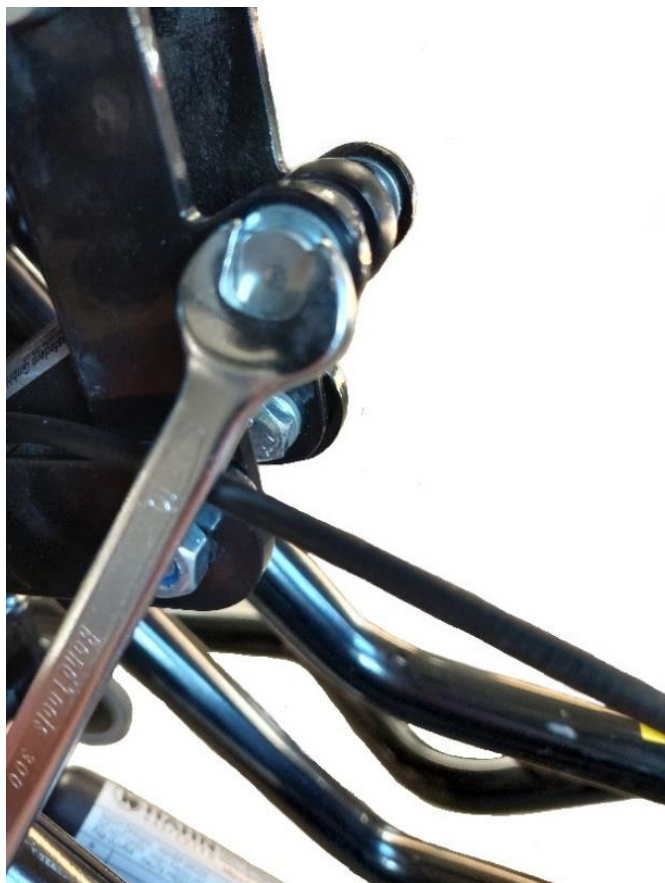

Lossa skruven i gasfjädersns bakre infästning.

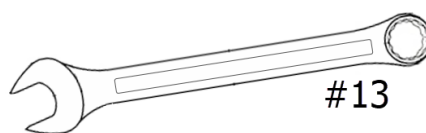

Montera ny gasfjäder i omvänd ordning. Prova sitstilen fungerar och att den låser under belastning

[illegible]

Eurovema AB
Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se