


# Inställning Multijusterbart nackstöd



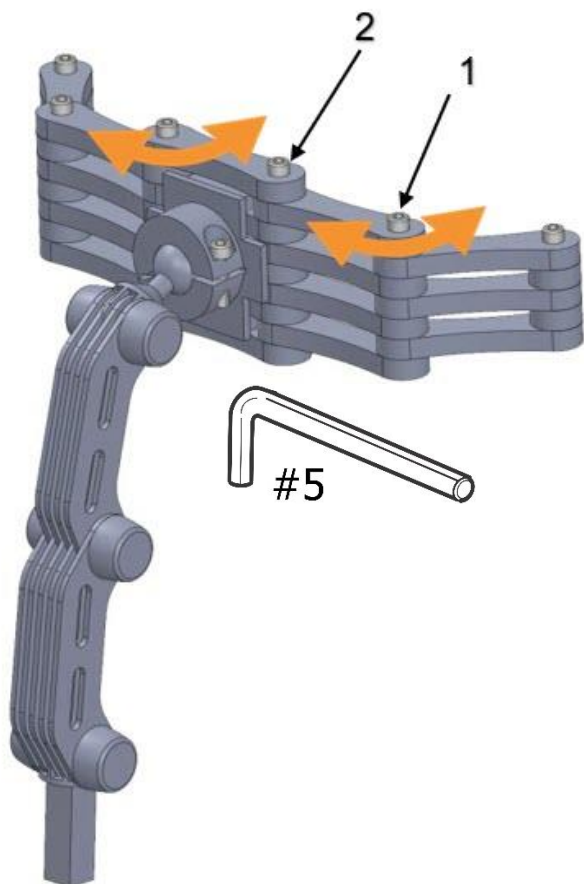


Tag av klädseln.

För justering av yttre klaffarna lossas skruv **1** något varv, justera och drag åt skruven ordentligt.


För justering av hela klaffen lossas skruv **2**.

Lossa båda skruvarna för optimal justeringsmöjlighet.

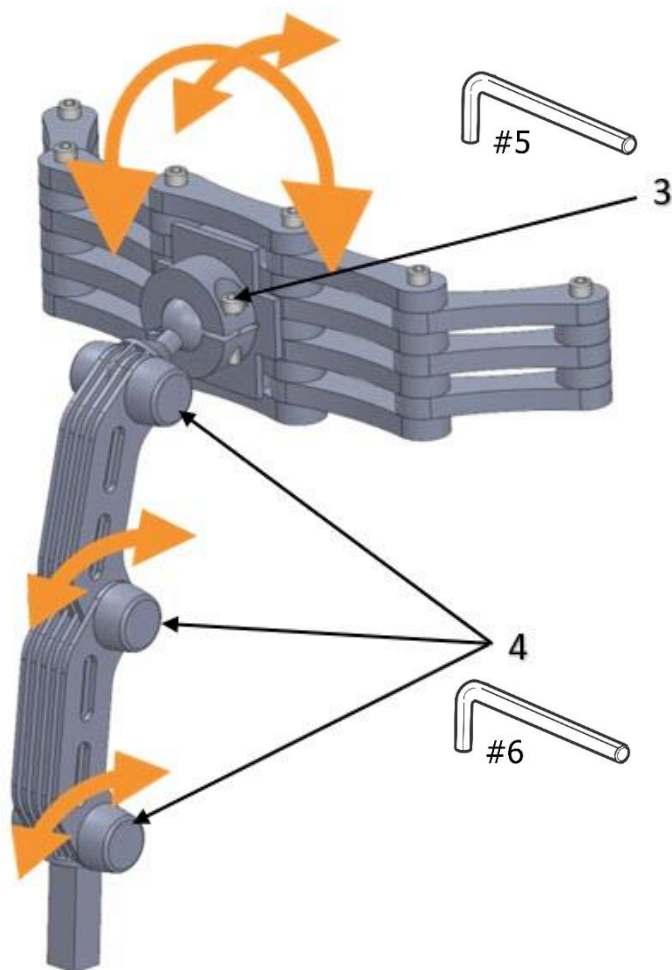

Nackstödet är roterbart runt kullleden genom att låsa skruv **3**, drag åt skruven ordentligt efter avslutad justering.

Justering av djup och höjd, ta bort täcklocken som täcker skruvarna **4** med hjälp av en liten spårskruvmejsel. För maximal justerbarhet lossas alla tre lederna, när alla är lossade kan både djup och höjd justeras, lossa endast skruvarna så mycket att det med visst motstånd går att justera för att underlätta justeringen.

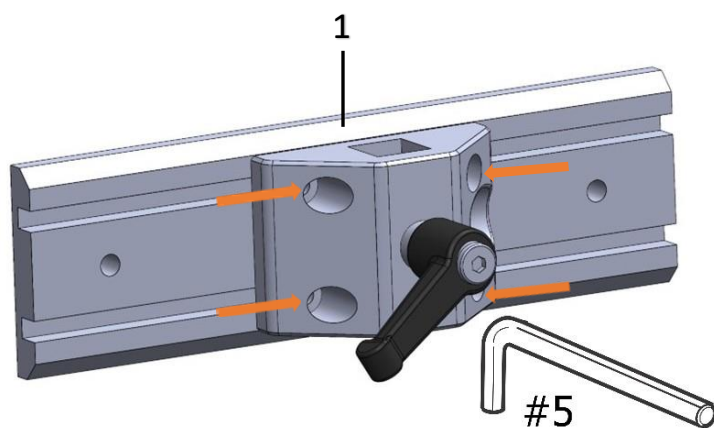


## Fäste 1 Comfortsäte

Fäste för multijusterbart nackstöd med Justerbarhet i sidled På Comfort2 ryggstöd.

Justering i sidled.

Lossa alla fyra skruvar något varv och justera till önskat läge. Dra åt skruvarna ordentligt.

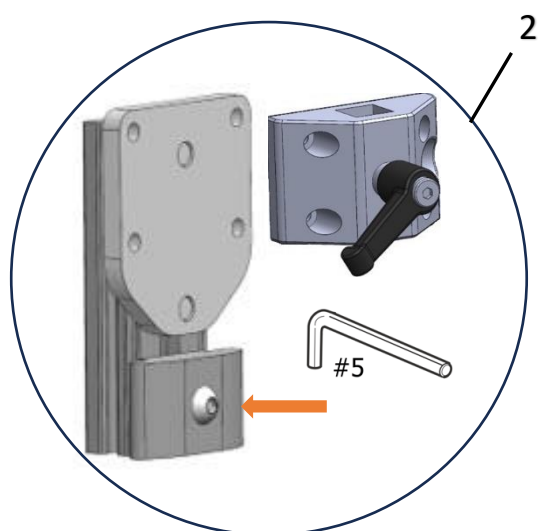

## Fäste 2 SitRite

Fäste för Multijusterbart nackstöd på SitRite ryggstöd.

Demontera den övre plastkåpan på aluminiumskenan, lossa skruven något varv så att fästet går att föra ner i aluminiumskenan. Dra åt skruven ordentligt.