

Monteringsanvisning


Batteri TBB4

Sigma



Montering, demontering av batteri

Vid behov av batteribyte byts batteriboxen ut mot ersättnings box.

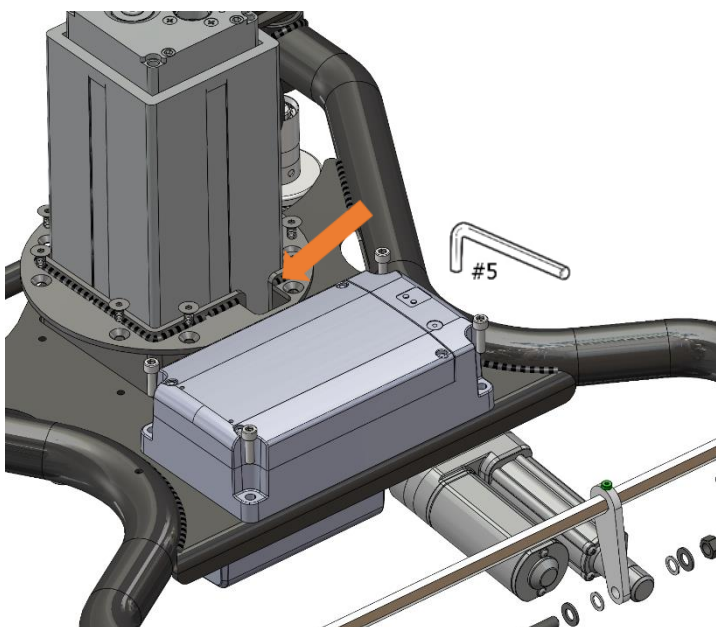

Montering av batteri.

Kontakten ska dras ned till undersidan av chassit genom urtaget i chassit intill lyftpelaren. Montera batteriet med insex skruvarna i batteriboxens hörn.

Kontakten kopplas ihop med Y-kabels kontakt. På chassits undersida vid styrelektroniken. Se blockschema nedan.

Demontering.

Koppla isär batteriets anslutningskabel, kontakten återfinns på chassits undersida.

Lossa insex skruvarna i vardera hörn av boxen med insexnyckel nr. 5

Dra upp kabeln genom urtaget i chassit.

