

Monteringsanvisning

Bromsspak

Sigma



Montering/justering av bromsspak



Montera delarna i den ordning som bilden visar.

Justera bromsspakens läge och drag åt skruven med Insexnyckel 5 mm

För justering av spakens vinkel lossas skruven några varv så att kuggleden frigörs och spakens vinkel går att justera.

För montering av spaken på andra sidan, lossa alla delar till spaken samt skruv och brickor på andra sidan. Flytta över spakens delar till andra sidan, lås bromsstången med skruv och brickor på den sida spaken ej ska sitta på. Montera spaken och justera vinkeln innan