

Monteringsanvisning

Byte gaskolv sitslyft


Sigma




Byte av gaskolv sitslyft



1. Bromsa stolen
2. Håll fast chassit med fötterna eller med hjälp av medhjälpare.
3. Vrid sitsen fram och tillbaka samtidigt som den dras uppåt upprepade gånger till sitsen lossar från gaskolven.

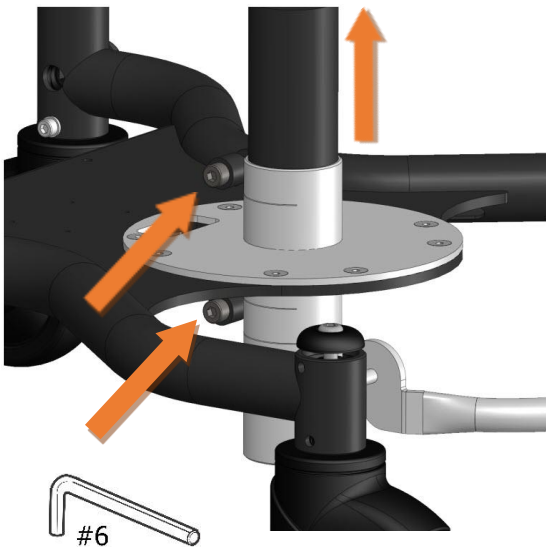

4. Lossa skruvarna med insexnyckel 6mm.
5. Lyft ur gaskolven ur chassit.
6. Montera ny gaskolv i chassit.
7. Drag åt skruvarna med 24 N

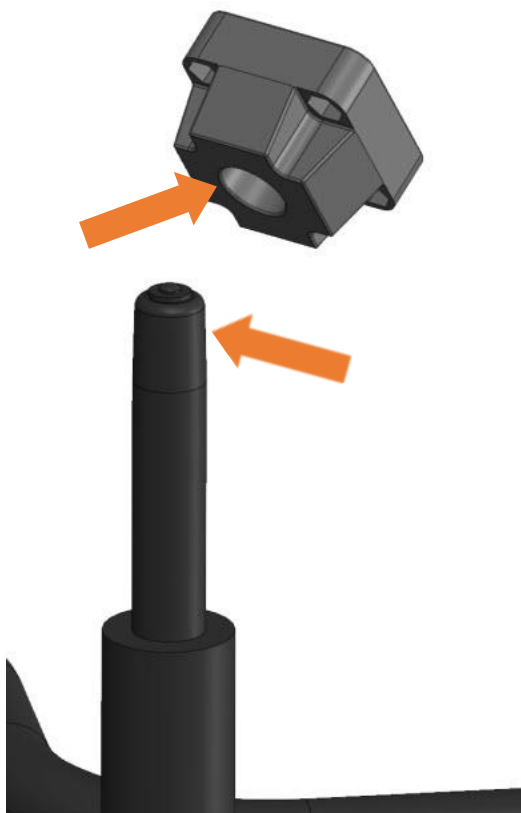

9. Tvätta rent gaskolvens kona och ytan i gaskolven hus med avfettande medel till exempel Brake Clean
10. Sätt tillbaka sitsen på gaskolven.
11. Rikta sitsen så att den sitter rakt.
12. Sänk gaskolen till sitt nedersta läge och sätt dig hårt ner i sitsen några gånger för att konan ska fästa ordentligt.
13. Prova att sitslyften fungerar korrekt.

[illegible]