


Monteringsanvisning

Elektronik TC14

Sigma



Montering av Elektronik TC14

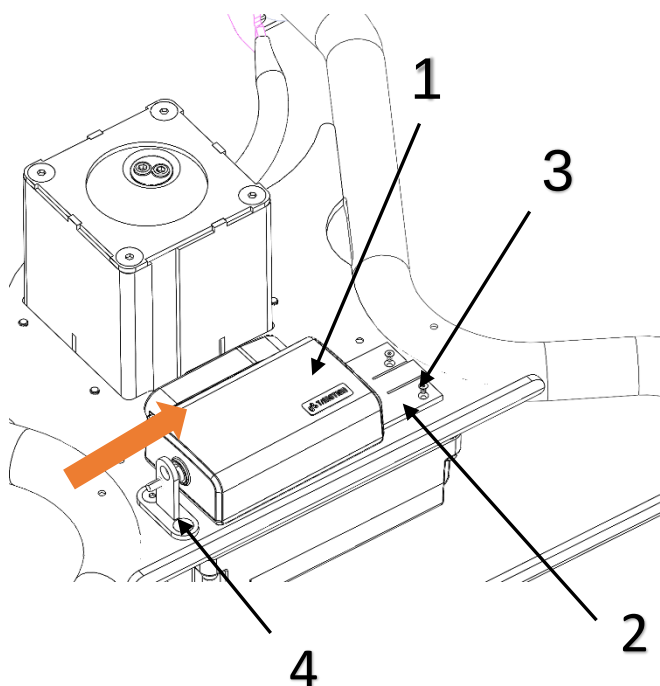

Elektroniken **1** monteras på fästplatta **2** som har en låshake för att enkelt kunna montera och demontera den.

Fästplattan monteras med fyra försänkta M3x6 skruvar **3**.

Elektroniken skjuts på fäst plattan tills den klickar fast på haken. **TC14 är felvänd på bilden den ska monteras med kontakterna vända bakåt.**

Om fäste för elektrisk broms **4** är monterat måste detta demonteras före elektroniken går att skjuta på fästet.

För Inkoppling se Blockschema.

