


Monteringsanvisning

Fördelningsbox

Sigma



Montering av fördelningsbox TJB5

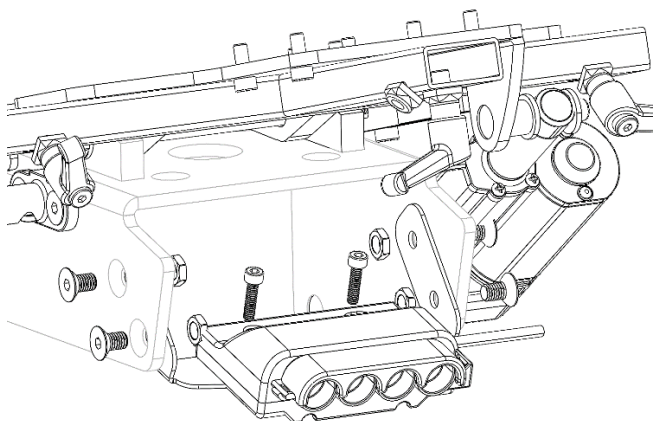

Fördelningsbox TJB5 monterad med fäste.

Fästet monteras med försänkta insex M8*20 skruvar och låsmuttrar, fördelningsboxen hakas i fästet och skruvas fast med insexskruv M5*16

Fördelningsbox monterad i armstödsfäste.

Fördelningsboxen monteras enligt samma förfarande om stolen är utrustad med fäste för vinkelfasta armstöd med undantag för fäste, se bild nedan.

