


Monteringsanvisning

Gaskolvens hus
Sigma



Montering av gaskolvens hus Sigma med sitsrotation

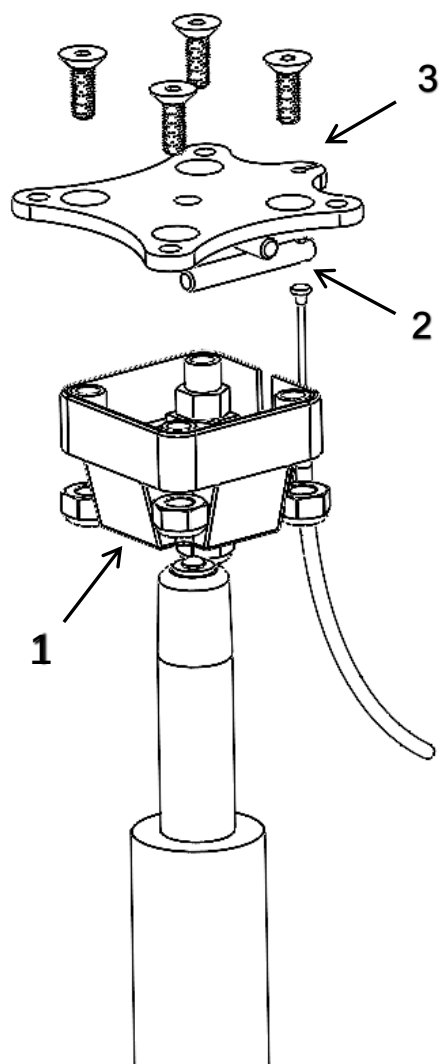

Vid montering av gaskolvens hus **1** på gaskolven är det viktigt att rengöra gaskolvens konade yta och husets väggar i hålet med avfettning tex, Brake clean.

Montera huset på kolven, vänd kolv och hus upp och ner, ställ den på bänk eller golvet och slå fast det med en plast klubba, slå på gaskolvens botten.

Montera utlösarmen **2** i huset observera att det är ett hål i den ände som ska riktas utåt. Montera adapterplattan **3** med försänkt M8 skruv och låsmutter.

Efter montering av sits på stolen kontrolleras att sitsen ej vrider sig vid belastning i sidled.