


# Monteringsanvisning

Gaskolv

Sigma



## Montering av gaskolv

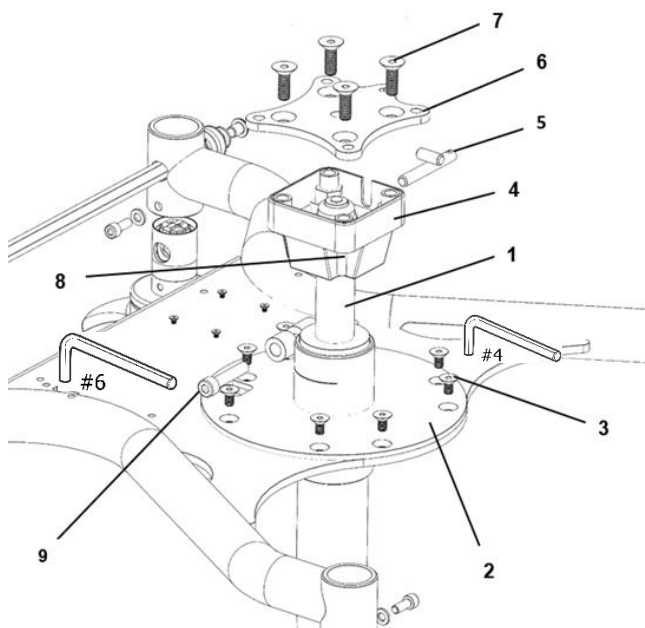

Montera gaskolvens fäste nr. 2 på bilden i chassit med försänkt M6\*12 skruv, skruvförbandet för gaskolven vänds bakåt.

**Om fästet finns sedan tidigare gå direkt till nästa steg.**

Montera gaskolven i fästet och drag åt skruvförbanden nr. 9 det är ett skruvförband på ovansidan och ett på undersidan av chassit, drag inte åt skruvförbanden hårdare än att det senare går att justera sitsen till rakt läge.

När sitsen är justerad rakt, dra åt skruvförbanden ordentligt och kontrollera att det inte går att vrida sitsen.

**Se separat monteringsanvisning för gaskolvens hus med adapterplatta nr. 4. 5. 6. 7. 8**