


Monteringsanvisning

Multirygg

Sigma



Montering Multirygg

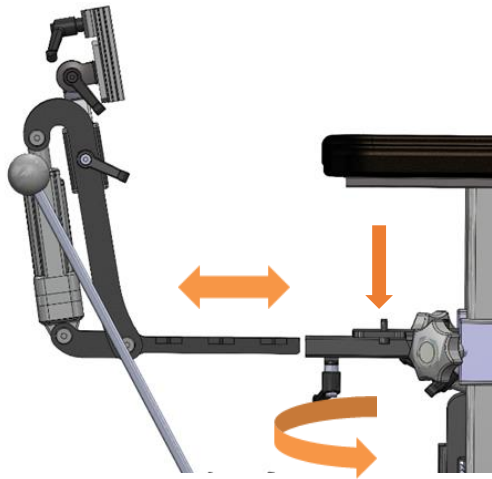

Lossa låsspaken alternativt skruv så många varv som behövs för att göra det möjligt att skjuta in multiryggens nedre horisontella stolpe i fästet på sittkrysset, drag låssnäppet på rygginfästningen uppåt samtidigt som multiryggen skjuts in. *Spakvredet kan vara ersatt med M8 skruv, använd då fast nyckel nr.13*

Drag åt låsspaken/skruven när multiryggen är i önskat läge.