


Monteringsanvisning

Sittkryss

Sigma



Montering av sittkryss

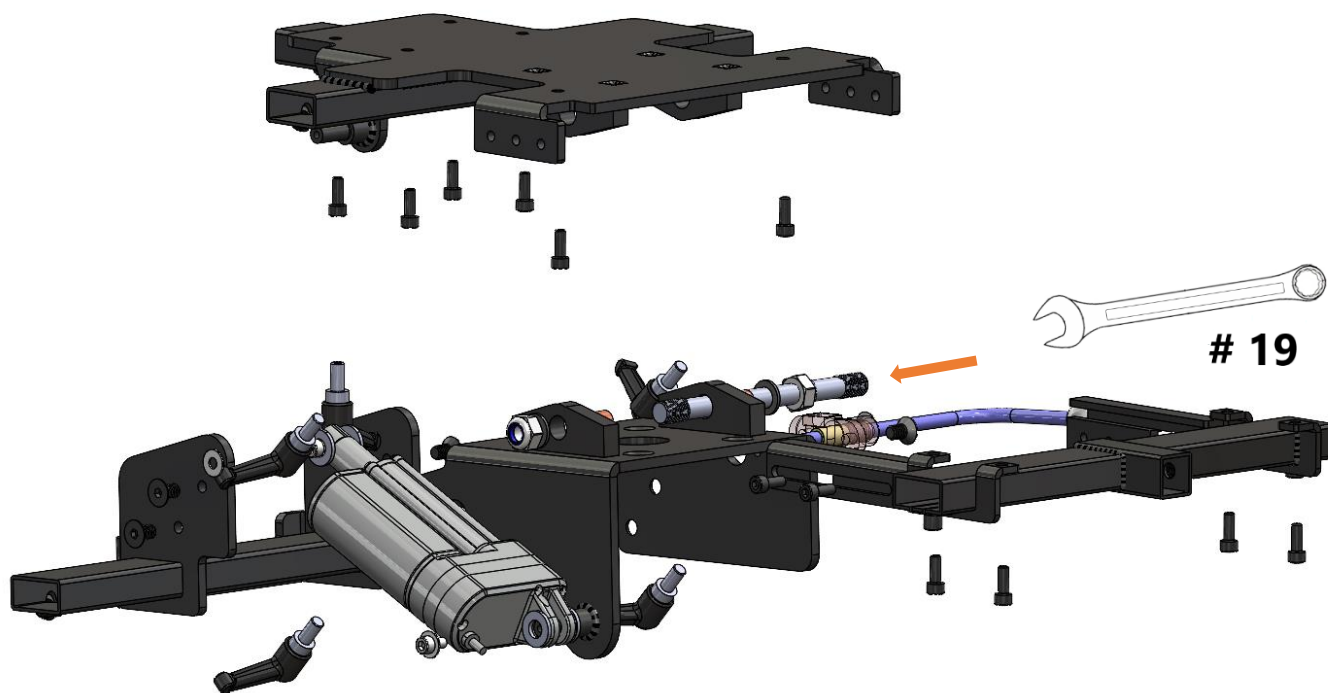

Sitskryssets övre del monteras ihop med undre delen med M12 axel, två stycken planbrickor och två stycken nylockmuttrar M12. Kontrollera att bussningar finns i hålen för tiltaxeln, det ska finnas bussning i både övre och undre delen för att minska friktionen. Om det finns ett glapp i sidled mellan övre och undre kryss delen så kan det behövas en plastbricka på axeln mellan över och underdelen. Skruva in låsmuttrarna lika mycket på båda sidor så att nylonlåsningen går minst en gänga in på axeln.