

MONTERINGSANVISNING

Ställdon Sigma


Inkoppling elektronik



INKOPPLING AV VIPPOR

Elektroniken är byggd för att styra fyra ställdon som är utrustade med hallsensor vilket medför att ändlägen är programmerbara på alla utom elektriska bromsen, programmering av ändlägen utförs men en handkontroll avsedd för programmering.


Vippströmbrytarna ansluts till dom första två portarna i fördelningsboxen TJB5 under sitsen. Dom två högra portarna används ej. Portarna klarar upp till fyra funktioner per port, ordningen kontakterna kopplas in har ingen betydelse, det är kablarna ifrån vippströmbrytarna som styr vilken funktion som aktiveras.

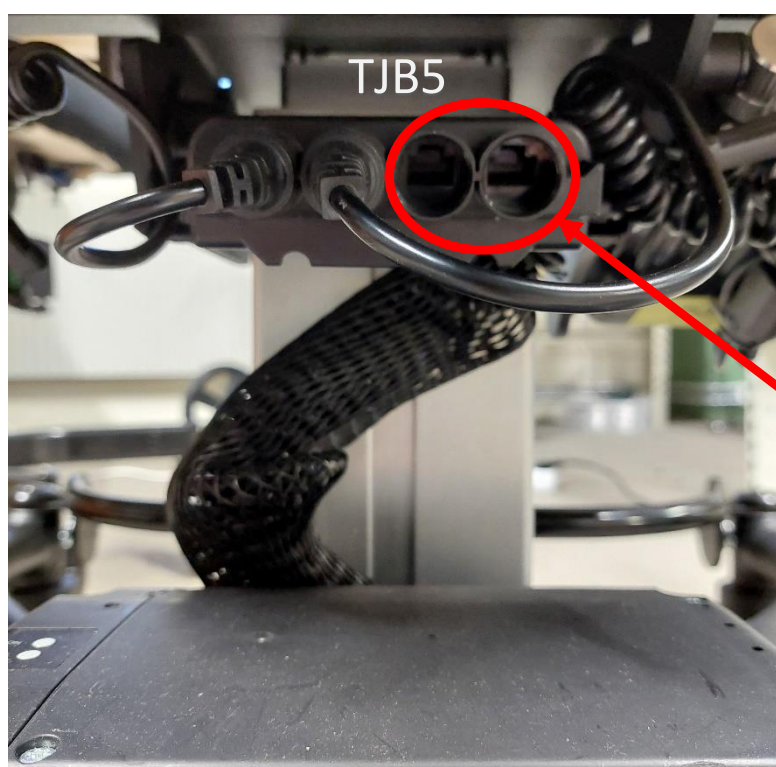


Används ej

INKOPPLING AV STÄLLDON

Ställdonen kopplas in på port 2-5, i elektroniken TC14 på chassits undersida port 2 är sitslyft, port 3 sitstilt, port 4 elektrisk ryggvinkel, port 5 elbroms. Port 1 är anslutning för fördelningsbox TJB5

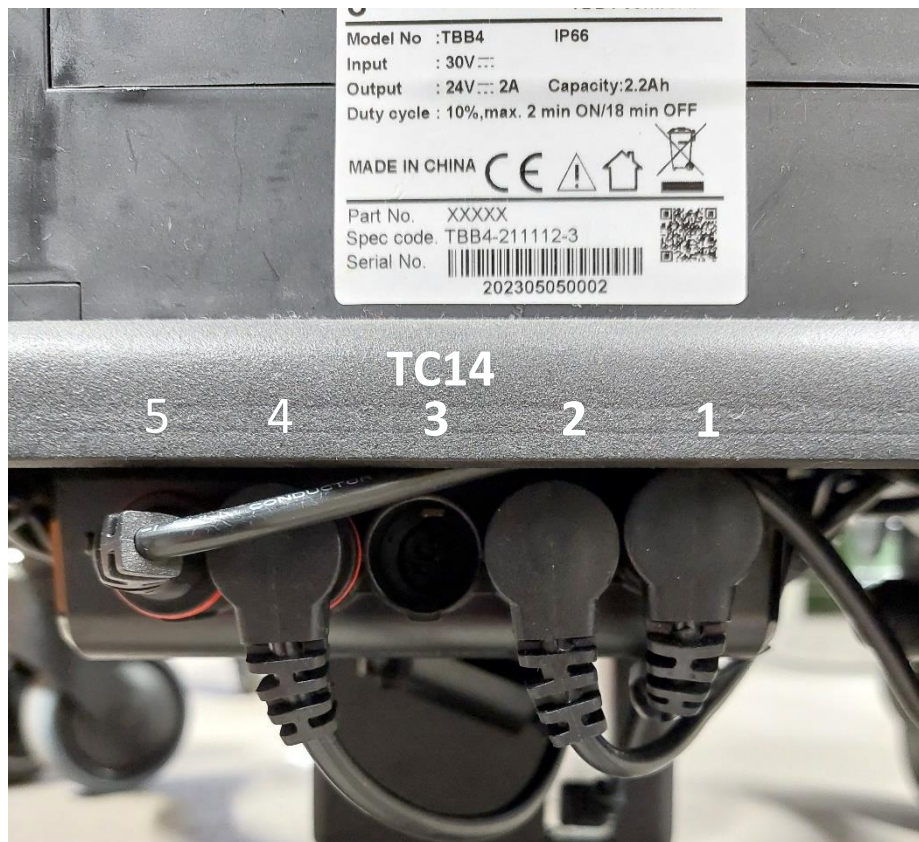

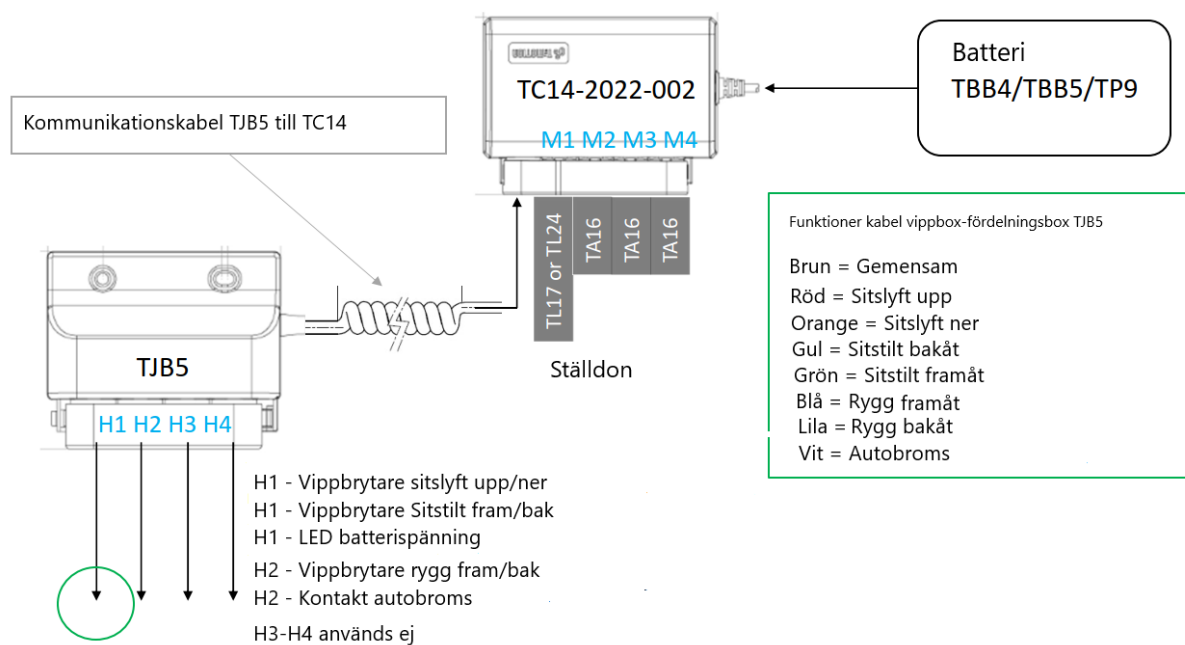

Eurovema

Eurovema AB

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sweden
Tel./Phone +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se