


Monteringsanvisning

Tiltställdon

Sigma



Montering av tiltställdon

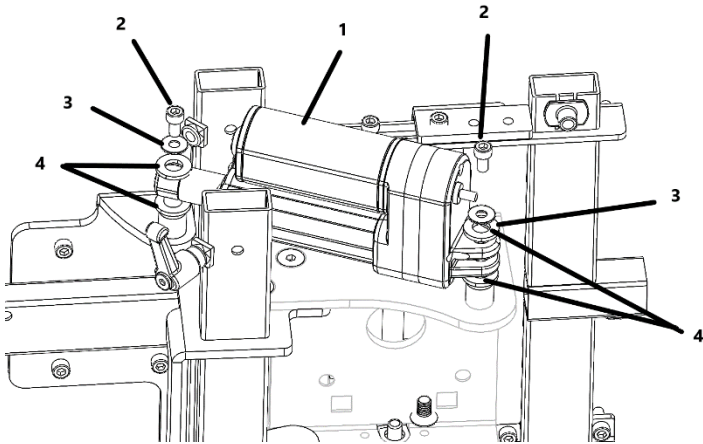

Montera en plastbricka **4** på vardera axeltapp.

Montera ställdonet **1** på axeltapparna.

Montera en plastbricka **4** på vardera axeltapp.

Skruva fast ställdonet med en nitbricka **3** och en förlimmad M5 skruv **2** på vardera axeltapp.

Ställdonet kopplas ihop med spiralkabel som ansluts till M2 på elektroniken TC14 placerad på chassits undersida bakom lyftpelare. Se blockschema Sigma

