




Monteringsanvisning Vajersplit Sigma



Byte av vajer Från bromsspak

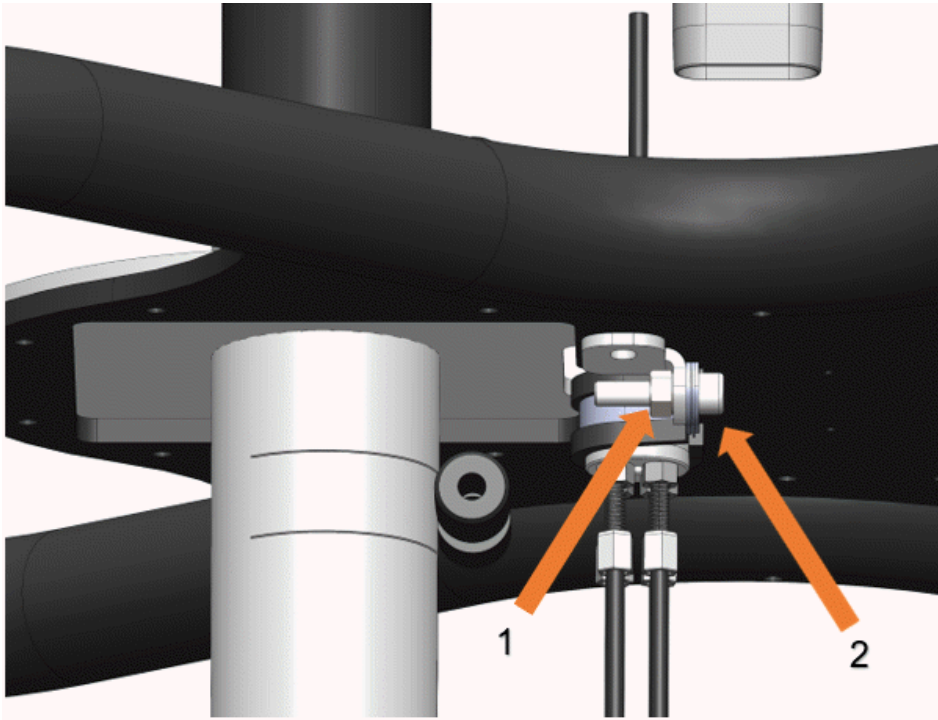


1. Lägg stolen med ryggstödet mot golvet för att underlätta åtkomst av vajerplittens fäste på chassits undersida.
2. Lossa klämman som håller vajerplitten med insexnyckel 5 mm **(2)** och blocknyckel 10 mm **(1)**
3. Dra ner vajerplitten ur klämman.

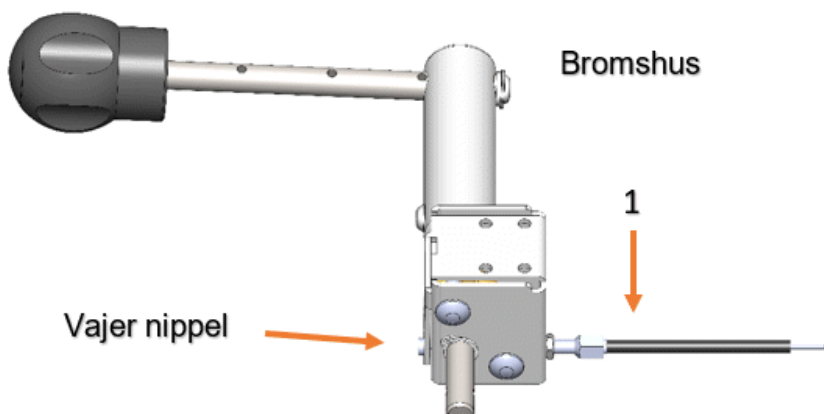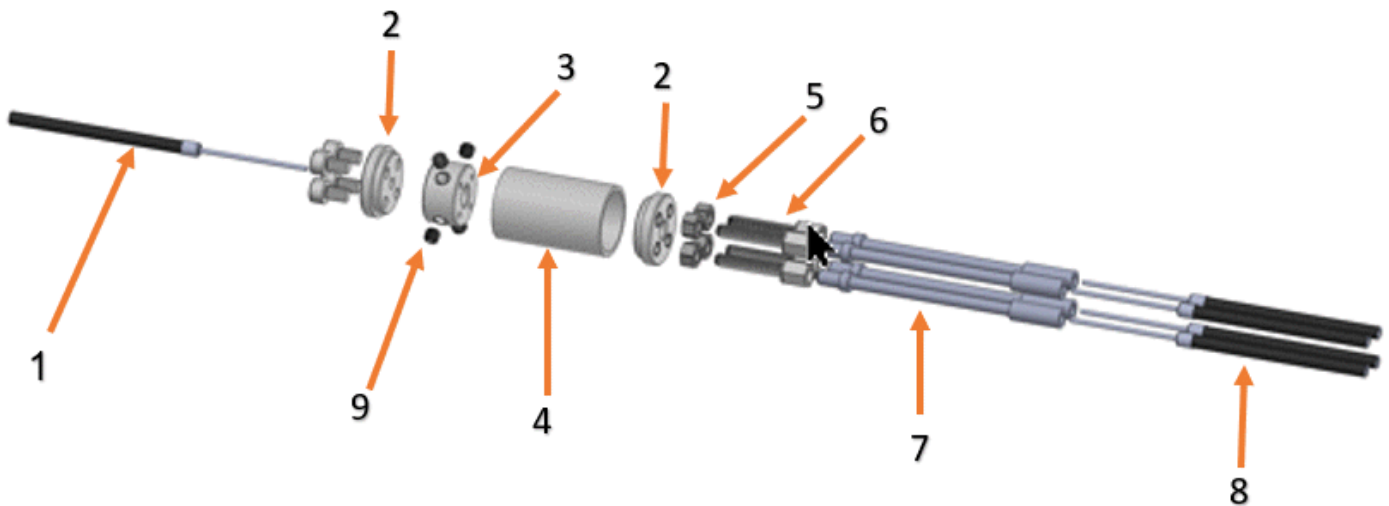


4. Lossa vajern **(1)** från bromshuset vid sitsen genom att lossa vajernippeln. se *bild bromshus*.
5. Dra av vajerhöljet så att locket **(2)** och röret **(4)** går att dra upp på vajern för att komma åt vajermedbringaren **(3)**.
6. Vajern går nu att dra ur medbringaren i riktning mot vajrarna som går till hjulen, *vajern är ej låst utan glider fritt i medbringaren*.
7. Montera ny vajer i omvänd ordning.
8. Montera vajern i bromsreglaget se *bild bromshus*.
9. Justera vajerspännaren vid bromshuset så att det går att låsa upp bromsarna och minsta möjliga spel kvarstår i bromsspaken.

Byte av vajer mellan vajersplit och hjul

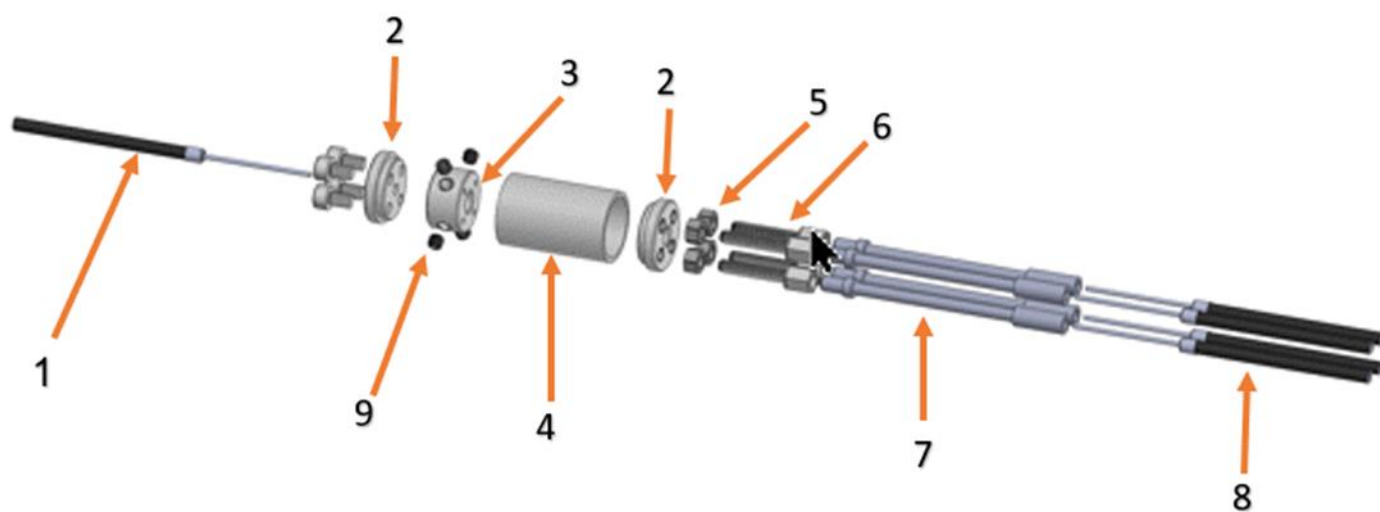

10. Lossa vajern **1** vid bromshuset så att det går att skjuta locket **2** och röret **4** upp på vajern för att frilägga medbringaren **3**.
11. Lokalisera vajern som ska bytas och lossa stoppskruven **9** för den vajern med insexnyckel 4 mm.
12. Dra ur vajern **8** ur vajerledaren **7** som återanvänds med nya vajern.

Obs. Vajern mellan bromshuset och vajersplitten kan behöva bytas när den lossats från bromshuset om skruvnippeln lossats.

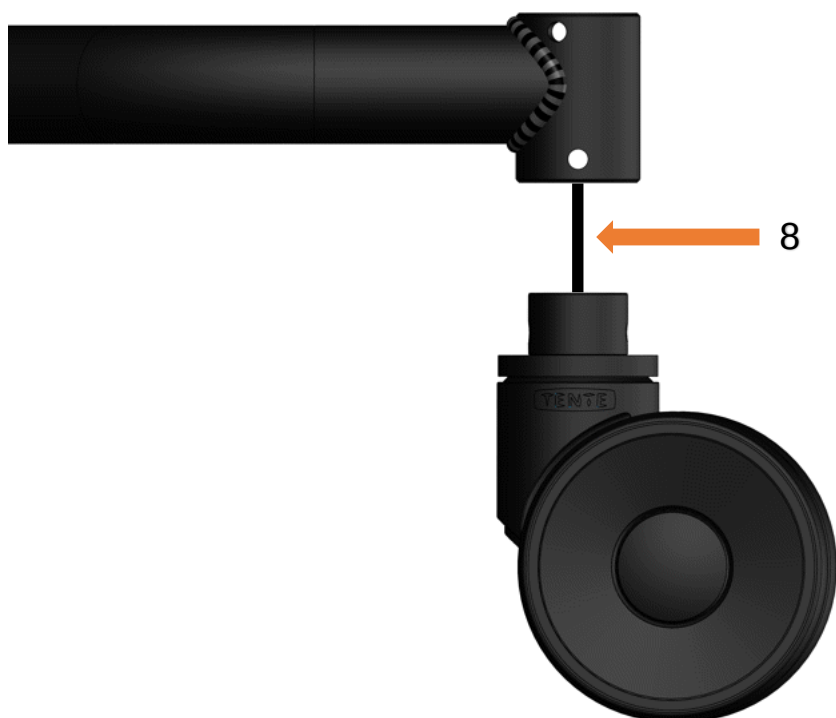

13. Lossa skruven som håller hjulet i chassit med insexnyckel 5 mm för det hjul som vajern ska bytas på och dra ur vajern **(8)** från hjulets undersida, om vajerhöljet är intakt så lämna det kvar i chassit och mata igenom ny innervajer.
14. för vajern genom vajerledaren **(7)** och spännskruven, vajern monteras i medbringaren så att den slutar i jämnhöjd med medbringarens **(3)** överkant.
15. Drag åt stoppskruven **(9)** hårt med insexnyckel 4 mm.
16. Montera ihop vayersplitten.
7. Montera tillbaka vajern i bromshuset enligt tidigare avsnitt.
8. Prova att hjulet låser/låser upp, om ej justeras det med spännskruv **6**.

Obs. Vajern mellan bromshuset och vayersplitten kan behöva bytas när den lossats från bromshuset om skruvnippeln lossats.